

medi

Produktkatalog
Phlebologie



medi. ich fühl mich besser.

KOMPRESSION bei chronischer Venenerkrankung und pAVK / Diabetes?

Merino-Plüsch im gesamten Fußbereich

Feste Rippenstruktur

Einzigartige Polsterung – von über den Knöcheln bis in die Zehenspitzen

Ja, aber sicher!*

mediven® angio – Sicherheit bis in die Fußspitze



Extralange, flache Naht

mediven® angio

Sicher versorgt bei besonderen Ansprüchen.

* Sicherheit des Produktes in klinischer Studie belegt: Der Einsatz des medizinischen Kompressionsstrumpfes mediven angio ist bei Patient:innen mit Venenerkrankungen und gleichzeitig leichter bis mittelschwerer peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) und / oder Diabetes mellitus sicher.¹

¹ Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001316.

Die medi Versorgungsampel

Für eine einfache, sichere und indikationsgerechte Versorgung

Schritt 1: Feststellen der Indikation und
Abklärung von Begleiterkrankungen

Schritt 2: Berücksichtigung von patientenindividuellen
Kriterien und Begleiterkrankungen



Chronische Venenerkrankung (CEAP C0s – C5)

ca. 98 % der über 60-Jährigen¹

Klinischer Befund

- Venöser Reflux
- Venöse Hypertonie



Kompressionstherapie mit
mediven® Rundstrick
(z. B. mediven® plus) –
**patientenindividuell
versorgen**



Chronische Venenerkrankung (CEAP C0s – C5) und leichte bis mittelschwere pAVK

ca. 21 % der über 65-Jährigen²

Weiterer klinischer Befund^{2,3}

- Schmerzen in den Waden beim Gehen längerer Strecken (sogenannte Schaufensterkrankheit)

Chronische Venenerkrankung (CEAP C0s – C5) und Diabetes mellitus Typ 2 / diabetische PNP

ca. 20,5 % der über 60-Jährigen⁴

Weiterer klinischer Befund

- Fehlendes Druckempfinden
- Fehlendes Schmerzempfinden



Kompressionstherapie
mit **mediven® angio** –
sicher versorgen

✓ Einzigartiges Produkt

- Merino-Plüsch im gesamten Fußbereich
- Feste Rippenstruktur
- Extralange, flache Naht

✓ Klinische Studie

- Stabile Durchblutung bis in die kleinsten Blutgefäße
- Keine Schädigung der Haut
- Keine Schnürfurchen
- Keine Druckstellen
- Hoher Tragekomfort

Bestätigt für CCL 1 und 2



Chronische Venenerkrankung und fortgeschrittene pAVK



Kontraindikation für
Kompressionstherapie³

Chronische Venenerkrankung und diabetisches Fußsyndrom (DFS)



Keine Versorgung
mit medizinischen
Kompressionsstrümpfen




¹ Rabe E et al. Bonner Venenstudie der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie. Phlebologie 2003;32:1-14.

² Lawall H et al. S3-Leitlinie zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit. Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/065-003.html> (Letzter Zugriff 12.06.2024).

³ Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 12.06.2024).

⁴ Nationale Diabetes-Surveillance am Robert Koch-Institut (2019). Diabetes in Deutschland – Bericht der Nationalen Diabetes-Surveillance 2019. Robert Koch-Institut, Berlin

⁵ Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001316.

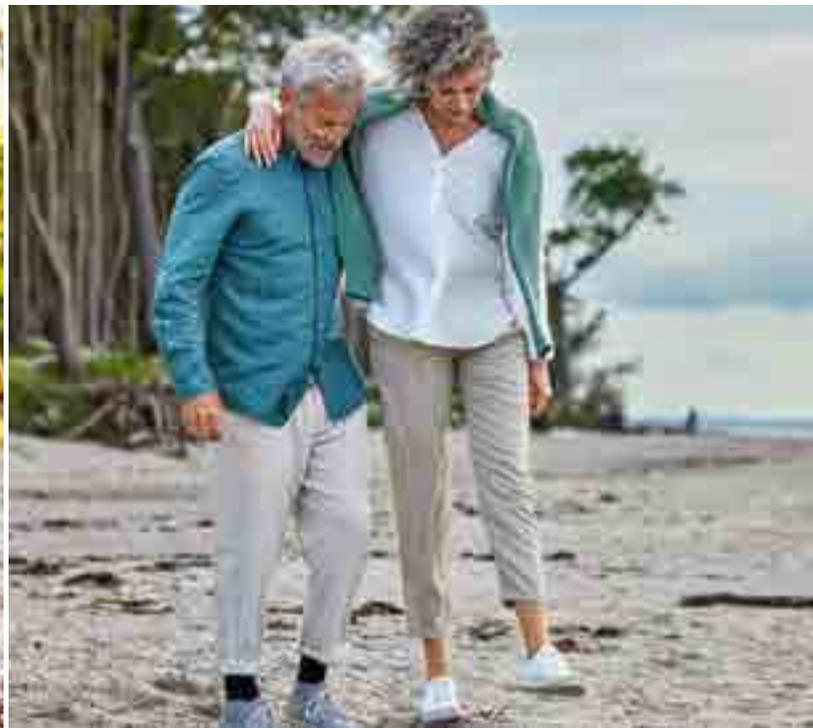



medi World of Compression

**Starke Marke. Umfassendes Produkt-
sortiment. Ganzheitliche Konzepte.**

Die medi World of Compression: Wegweiser für die Zukunft mit über 70 Jahren Kompetenz im Bereich Kompression. Ihr Partner für höchste Ansprüche an Qualität, Innovation und Design. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten und positive Markenerlebnisse schaffen – für Sie und Ihre Kund:innen.

Zufriedene Kund:innen und neue Potenziale

**Phasengerechte Therapie und zahlreiche
Kombinationsmöglichkeiten für mehr
Therapieerfolg**

medi bietet für nahezu jede Indikation die passende Kompressionsversorgung – für jedes Stadium der Therapie. Das breite Zusatzsortiment trägt dazu bei, dass Kund:innen ihre Kompression gerne tragen. Profitieren Sie mit medi von hoher partnerschaftlicher Kulanz und hilfreichen Services.

medi World of Compression

medi überzeugt beim Thema Kompression mit einem ganzheitlichen Konzept. Aus diesem Grund können Sie auf medi Produkte vertrauen. Sie sind bis ins kleinste Detail auf die Bedürfnisse Ihrer Kund:innen abgestimmt.

Lernen Sie die medi World of Compression näher kennen! Dafür haben wir Kataloge entwickelt, die sich in Themenbereiche unterteilen. So finden Sie schnell und einfach alle Informationen, die Sie benötigen.

Diese Kataloge gibt es:



Phlebologie

Kompressionstherapie mit mediven Kompressionsstrümpfen oder circaid medizinischen adaptiven Kompressionssystemen ist ein wichtiger Baustein für die Therapie venöser Erkrankungen.

Art.-Nr.: 0020965



Lymphologie

Patientenindividuell von der Entstauung bis zur Erhaltung.

Mit den circaid medizinischen adaptiven Kompressionssystemen in der Entstauungsphase und flachgestrickten mediven Kompressionsstrümpfen in der Erhaltungsphase bietet medi das passende Produkt für nahezu jede:n Patient:in in der Therapie von Lymph- und Lipödemen.

Art.-Nr.: 0025090



medi Therapiekonzept Ulcus cruris

Das medi Therapiekonzept Ulcus cruris verbindet die Akutphase mit der Rezidivprophylaxe und begleitet somit die Patient:innen während der gesamten Therapie des „offenen Beins“.

Art.-Nr.: 0050515

6

Patientenindividuelle
und phasengerechte
Versorgung

16

Übersichten circaid®
und mediven®



30

circaid® juxtalite®

Medizinisches adaptives
Kompressionssystem für die
Entstauung



38

mediven elegance®

Man sieht Schönheit.



42

mediven® for men

Der stilsichere Kompressions-
strumpf für den modischen
Business-Look



46

mediven comfort®

Man spürt Weichheit.



50

mediven® cotton

Natürlich gut versorgt.



54

mediven® plus

Man erlebt Zuverlässigkeit.



58

mediven® active

Der robuste Kompressions-
strumpf für den aktiven Mann.



62

mediven® forte

Man fühlt Schutz.



66

mediven® angio

Sicherheit bis in die Fußspitze

72

Sonderausführungen
Rundstrick
Zwickel-Varianten

Übersicht der lieferbaren
Ergänzungen je nach Qualität



92

mediven ulcer kit®

Zur Versorgung bei
Ulcus cruris venosum

98

Basisversorgung

100 duomed® basic
102 Maxis® MICRO



104

mediven harmony®

Rundgestrickter Armstrumpf
in sieben Seriengrößen.



108

medi travel®

Freiverkäufliche Reise-
strümpfe für Menschen mit
gesundem Venensystem



112

medi Zubehör

124

medi Service

Patientenindividuelle und phasengerechte Versorgung mit medi

„medi. ich fühl mich besser.“

Mit diesem Anspruch entwickeln wir indikationsgerechte Produkte. Passende Hilfsmittel, die bis ins Detail auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und individuellen Kriterien von Venenpatient:innen abgestimmt sind – von der initialen Entstauung bis zur Langzeittherapie.





Effektiv versorgen, ganzheitlich profitieren

1

Entstauung

circaid® medizinische adaptive Kompressionssysteme in der Entstauungsphase

Kompression ist ein Grundbaustein der leitliniengerechten¹ Therapie bei lymphologischen und phlebologischen Indikationen. circaid medizinische adaptive Kompressionssysteme (MAK) sind die Alternative zum herkömmlichen Wickelverband. Sie kommen bei der Entstauung von Lymphödemen, ausgeprägten venösen Ödemen und in der Therapie des Ulcus cruris venosum zum Einsatz. Mit circaid MAK bietet medi eine effektive Option, um das Ödem in der initialen Behandlung zu entstauen.

Effektive Entstauung – einstellen, kontrollieren, nachjustieren

Die erste Phase der Therapie, die Entstauungsphase, hat zum Ziel, angestaute Flüssigkeit im Gewebe zu verringern. In dieser volumeninstabilen Phase kommt es zu deutlichen Umfangsschwankungen. Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Therapie ist ein Hilfsmittel, das definierte und konsequente Kompression ermöglicht, auch bei sich schnell reduzierenden Umfängen:

- Medizinische adaptive Kompressionssysteme (MAK) sind jederzeit anpassbar und sorgen so für eine kontinuierliche Kompression.
- Nach Einweisung durch Fachpersonal ermöglicht die einfache Handhabung den Patient:innen Selbstmanagement und erleichtert die Hygiene.
- Durch das integrierte Built-In-Pressure System (BPS) lässt sich der individuelle Kompressionsdruck exakt einstellen, kontrollieren und nachjustieren – auch von den Patient:innen selbst.

¹ Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 12.06.2024).



2 Erhaltung

Erhaltung des Therapieerfolgs und Rezidivprophylaxe mit mediven® Kompressionsstrümpfen

Ist ein ausgeprägtes venöses Ödem entstaut beziehungsweise ist das offene Bein abgeheilt, besteht die Grunderkrankung dennoch fort. Es ist deshalb essenziell, die zugrunde liegende chronisch venöse Insuffizienz (CVI) weiter zu therapieren.

Effektive Erhaltung – optimal versorgt mit mediven® Kompressionsstrümpfen

Bei der Auswahl der Kompressionstherapie ist neben der Indikation auch die individuelle Ödemneigung und Konstitution der Patient:innen zu berücksichtigen: Je nach Situation kann ein rundgestrickter Kompressionsstrumpf oder ein Ulkus-Strumpfsystem im Anschluss an die Entstauung verordnet werden.



In wenigen Schritten zur patientenindividuellen Versorgung

mediven® Rundstrick – individuelle Patientenversorgung

Schrittweise Versorgung bei chronischer Veneninsuffizienz

Die mediven® Beobachtungsstudie belegt: Hohe Akzeptanz und Tragekomfort der mediven® MKS^{*,1,2}

Zahlen, Daten, Fakten zu mediven® Kompressionsstrümpfen^{1,2}

Hohe Akzeptanz

Bis zu **98 %**
der Patient:innen

hatten keine Beschwerden beim
Tragen des MKS*

Tragekomfort

Über **70 %**
der Patient:innen

beurteilten den MKS* als angenehm

Besserung der Beschwerden

Bei bis zu **53,2 %**
der Patient:innen

verbesserten sich die subjektiven
Beschwerden durch den MKS*

Gute Compliance

Bis zu **75,6 %**
der Patient:innen

trugen den MKS* mehrheitlich täglich***

Bei **17,7 %**
der Patient:innen

verbesserte sich objektiv der klinische
Befund nach CEAP-Klasse**

Bis zu **68,4 %**
der Patient:innen

trugen den MKS* von morgens bis abends

* MKS = Medizinischer Kompressionsstrumpf
** CEAP = Einteilung der klinischen Ausprägung chronischer Venenerkrankungen
*** Regelmäßige Anwender:innen: täglich oder an mindestens 50 Prozent aller Tage pro Woche

¹ Schwahn-Schreiber C et al. Langzeitbeobachtung zur ambulanten Therapie phlebologischer Erkrankungen mit medizinischen Kompressionsstrümpfen in Deutschland – die mediven®-Beobachtungsstudie. Phlebologie 2016;45(1):15-24.

² Schwahn-Schreiber C et al. Versorgungsrealität mit medizinischen Kompressionsstrümpfen im ambulanten Bereich. Folgeanalyse der mediven®-Beobachtungsstudie. Phlebologie 2016;45(4):207-214.

Die Studie deckt auf: Optimierungsbedarf bei der Versorgung

Versorgungsrealität



Ca. **3/4** der
Patient:innen
trugen einen MKS* aus
leichtem Material –
unabhängig von CEAP
und BMI

Patientenkriterium Gewicht



Ca. **2/3** der
Patient:innen
waren adipös oder
übergewichtig

Der Begriff „Material“ umfasst die verschiedenen textilen Charakteristika eines MKS* und wird durch die Festigkeit des Gewebes, die Rigidität und die Elastizität definiert.

Die mediven Beobachtungsstudie hat gezeigt, dass bei der Verordnung von medizinischen Kompressionsstrümpfen patientenindividuelle Faktoren nur selten berücksichtigt werden. Obwohl zwei Drittel der Patient:innen übergewichtig oder adipös waren, bekamen 73,8 Prozent Kompressionsstrümpfe aus leichten Materialien verschrieben.

Aus diesem Grund hat medi einen mediven Versorgungskompass (siehe Seite 14) entwickelt, um Sie bei der schnellen und einfachen MKS*-Versorgung zu unterstützen. In nur wenigen Schritten gelingt es Ihnen, einen patientenindividuellen Kompressionsstrumpf zu finden.

Darum empfiehlt medi folgende Vorgehensweise:

Schritt 1: Indikation berücksichtigen (Indikationsübersicht)

Schritt 2: patientenindividuelle Kriterien berücksichtigen (Versorgungskompass)

* MKS = Medizinischer Kompressionsstrumpf

Schritt 1: Phlebologische Indikationsübersicht

medi Kompressionsversorgungen verbessern ...

- venöse Symptome inklusive Schmerzreduktion.
- die Lebensqualität bei chronischen Venenkrankheiten.

Folgende Indikationen sollen berücksichtigt werden (höchster Empfehlungsgrad):¹

Indikation	Produkt (CCL)	mediven elegance (1, 2)
Chronische Venenerkrankungen nach CEAP		
C0s  Keine sichtbaren Anzeichen einer venösen Erkrankung		●
C1  Besenreiser, Teleangiektasien, retikuläre Varizen		●
C2  Varikose ohne Zeichen einer CVI C2r Rezidiv Varikose		●
C3  Prävention und Therapie venöser Ödeme		
C4  Prävention und Therapie von Hautveränderungen C4a Pigmentierung, Ekzem C4b Dermatoliposklerose, Atrophie blanche C4c Corona phlebectatica		
C5  Abgeheiltes Ulcus cruris venosum (UCV), Prävention des UCV-Rezidivs		
C6  Florides UCV C6r Rezidiv eines UCV		
Sonstige		
Therapie des gemischten Ulcus cruris		
Sonstige chronische Venenkrankheiten		
Initialphase nach Varikosetherapie		●
Funktionelle venöse Insuffizienz bedingt durch Adipositas		
Sonstige Ödeme		
Stauungsbeschwerden und Ödeme in der Schwangerschaft, postoperative Reperfusionsoedeme, posttraumatische, postoperative, berufsbedingte, medikamentös bedingte Ödeme, Ödeme infolge Immobilitäten		
Thromboembolie		
• Oberflächliche Venenthrombose		●
• Tiefe Beinvenenthrombose		
• Zustand nach Thrombose, postthrombotisches Syndrom		
• Thromboseprophylaxe bei mobilen Patient:innen		●
• Armvenenthrombose		
Andere Indikationen		
• Entzündliche Dermatosen der Beine		●
• Übelkeit, Schwindel in der Schwangerschaft		●

medi Tipp: Wir beziehen uns bei den Indikationen auf die aktuelle S2k-Leitlinie Medizinische Kompressionstherapie der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie.¹ Für die Versorgung mit Hilfsmitteln zur Kompressionstherapie sind die jeweils gültigen Leitlinien zu beachten.² Begründen Sie daher mit Verweis auf die aktuelle Leitlinie.

¹ Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 12.06.2024).
² Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbands, PG 17, Online veröffentlicht unter: <https://hilfsmittel.gkv-spitzenverband.de/home/verzeichnis/7c51a666-bee0-452b-94a9-e367216d5b2e> (Letzter Zugriff 12.06.2024).

	mediven for men (1, 2)	mediven comfort (1, 2)	mediven cotton (1, 2)	mediven plus (1, 2, 3)	mediven active (1, 2)	mediven forte (2, 3)	mediven harmony (1, 2)	mediven ulcer kit (2 x 20 mmHg)	circaid juxtalite (20–30 / 30–40 / 40–50 mmHg)
	•	•	•	•	•	•			
	•	•	•	•	•	•			
	•	•	•	•	•	•			
	•	•	•	•	•	•			•
		•	•	•	•	•			•
				•		•	•	•	•
							•	•	
							•		
		•	•	•		•			
						•			
	•	•	•	•	•	•			
	•	•	•	•	•	•			
		•	•	•	•	•			
	•	•	•	•	•	•			
							•		
	•	•	•	•	•	•			
		•	•	•		•			

Entstauungspotenzial

Schritt 2: Der mediven® Versorgungskompass

Einfach patientenindividuell versorgen mit mediven®


Empfehlung:

- Je **höher** das Gewicht,
 - Je **stärker** die Phlebödemneigung,
 - Je **schwerer** die venöse Erkrankung,
 - Je **weicher** das Bindegewebe,
- umso **kräftiger** sollte das Strumpfmaterial sein.
 → Entscheidend für die Material-Auswahl ist jeweils das Kriterium mit der schwersten Ausprägung.


medi Tipp

Sicher versorgen bei Begleiterkrankungen.

Kund:innen mit chronischer Venenerkrankung und gleichzeitig
 → leichter bis mittelschwerer peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) und / oder
 → Diabetes mellitus / diabetischer Polyneuropathie (PNP) haben besondere Anforderungen an einen medizinischen Kompressionsstrumpf.
 mediven angio wurde speziell dafür entwickelt – und die Sicherheit in einer klinischen Studie bestätigt. Fragen Sie Ihre Kund:innen aktiv nach diesen Begleiterkrankungen.
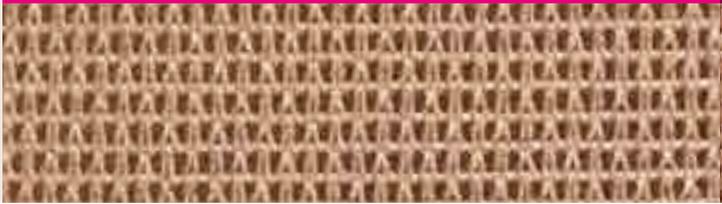
<div style="text-align: right; padding-right: 10px;">Material</div> <div style="text-align: left; padding-left: 10px;">Kriterien</div>	<div style="text-align: center; background-color: #e91e63; color: white; padding: 5px;">Leicht (z. B. mediven elegance)</div> 
1. Gewicht	
2. Phlebödemneigung	
3. Schweregrad der Erkrankung	
Empfohlener mediven Kompressionsstrumpf	<div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"> mediven elegance </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"> mediven for men </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"> </div>

medi Tipp

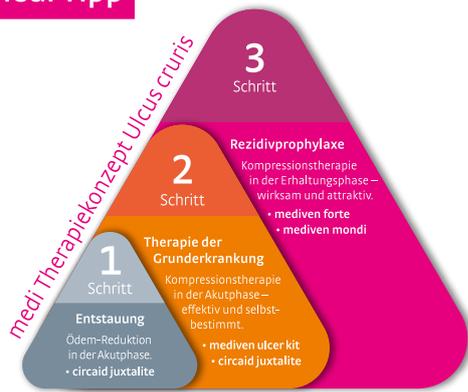

Bitte berücksichtigen Sie bei C5 und C6 zusätzlich das Therapiekonzept Ulcus cruris. Art.-Nr.: 0050515
www.medi.biz/wunde

Versorgen Sie Lymph- und Lipödeme mit mediven Flachstrick – siehe Versorgungslogik Flachstrick. Art.-Nr.: 0025090
www.medi.biz/fs-versorgungslogik

Mittel
(z. B. mediven plus)

Kräftig
(z. B. mediven forte)



+

++

mediven comfort

mediven cotton

mediven plus

mediven active

mediven forte



Entstauungstherapie mit circaid®

Medizinische adaptive Kompressionssysteme, wie circaid juxtalite, sind die Alternative zum herkömmlichen Wickelverband. Als Hilfsmittel bieten sie eine effektive Entstauung von ausgeprägten venösen Ödemen und eignen sich hervorragend zur Behandlung des offenen Beins.



circaid® Produkteigenschaften



Built-In-Pressure®

Built-In-Pressure® System

- Zum Einstellen, Kontrollieren und Nachjustieren des korrekten therapeutischen Drucks



Breathe-O-Prene

Breathe-O-Prene

- Atmungsaktives Material
- Geruchshemmender Effekt



Juxtaposed band

Juxtaposed Band-System

- Optimaler Sitz durch ineinandergreifende Bänder
- Bänder einzeln nachjustierbar



Variety

Vielfalt

- Großes Sortiment an Versorgungsoptionen
- Umfangreiches Größenangebot



Easy handling

Einfache Handhabung

- Leichtes An- und Ablegen nach Einweisung durch Fachpersonal



Inelastic

Unelastisch

- Unelastisches Material für eine effektive Therapie und hohen Tragekomfort
- Von der Natur inspiriert






circaid® Built-In-Pressure® System (BPS)

Unelastische circaid Kompressionsprodukte lassen sich auf einen exakten Kompressionsbereich mit graduiertem Druckverlauf einstellen – vom Sprunggelenk aufwärts.

Das circaid Built-In-Pressure Systems (BPS) sorgt bei der Kompressionstherapie für den erforderlichen Kompressionsbereich. Mit der Messkarte für das circaid Built-In-Pressure System (BPS) können Patient:innen ihren verordneten Kompressionsbereich beim Anlegen des Produkts einstellen und bei Bedarf im Laufe des Tages nachregulieren. Somit ist der richtige Kompressionsbereich über die gesamte Tragedauer gewährleistet. Gleichzeitig lässt sich leicht bestimmen, ob der richtige Druckbereich angelegt ist.

circaid® Maßtabelle

Maßtabelle

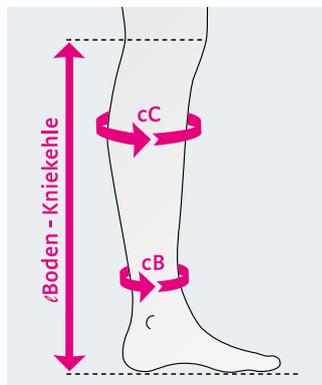

Hinweis

Sollten die Maße der Patient:innen nicht in die Werte der Maßtabelle fallen, ist eine Versorgung mit circaid juxtalite nicht möglich.

circaid® juxtalite® Unterschenkel

Umfangmaße in cm				
	S	M	M – X*	L
cC	26 – 36	33 – 44	44 – 54	41 – 51
cB	19 – 22	22 – 27	22 – 27	25 – 32
	L – X*	XL	XL – X*	XXL
cC	51 – 61	37 – 48	48 – 61	53 – 64
cB	25 – 32	30 – 37	30 – 37	35 – 42

Maße für die Längenbestimmung		
	Kurz	Lang
∠ Boden – Kniekehle	< 44	> 44




medi Tipp

Mit dem circaid juxtalite Maßband (Art.-Nr. 0097C78) einfach und schnell zur richtigen Produktlänge. Legen Sie hierfür die Markierung am Knöchel an und halten das Maßband an das Bein Ihrer Kund:innen. Sie können direkt ablesen, welche Produktlänge notwendig ist.

Größe / Art.-Nr.	Kurz	Lang
S	JU17702000	JU17002000
M	JU17703000	JU17003000
M – X*	JU17713000	JU17013000
L	JU17704000	JU17004000
L – X*	JU17714000	JU17014000
XL	JU17705000	JU17005000
XL – X*	JU17715000	JU17015000
XXL	JU17706000	JU17006000

* – X = extraweite Wade

Maßtabelle

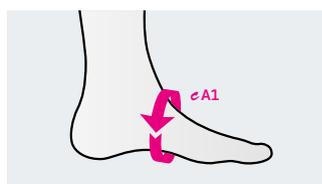


Hinweis

Es wird empfohlen, eine circaid Fußoption immer in Kombination mit einer circaid Beinversorgung zu tragen.

circaid® juxtalite® Fußteil

Umfang in cm	S	M
cA1	19 – 26	24 – 31
Art.-Nr.	JU1W002000	JU1W003000


Maßtabelle

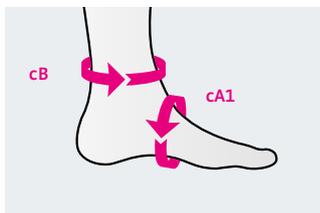

circaid® pac band Fußteil

Umfang in cm	Standard	Groß	Extragroß
cB	19–27	25–50	45–56
cA1	19–36	22–41	22–41
Art.-Nr.	JU5P001000	JU5P002000	JU5P003000
PZN	11484780	11484797	12575651

Maßtabelle

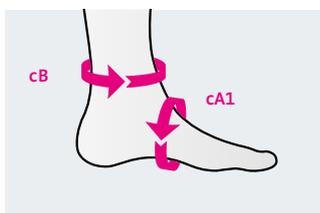

circaid® kompressive Socke

Umfang in cm	Standard	Groß
cB	19–27	25–50
cA1	19–36	22–41
Art.-Nr.	JU51001000	JU51002000

circaid® Positionsnummern

circaid juxtalite Unterschenkel	circaid juxtalite Fußteil
Serie	Serie
17.06.23.2001	17.06.23.3001



Die mediven® Wohlfühl- Kompression

mediven verkörpert in der modernen Venentherapie passende medizinische Kompressionsstrümpfe für nahezu jede Indikation. Sie sind bis ins Detail auf die Bedürfnisse der Patient:innen abgestimmt.

medi denkt in Sachen Venentherapie weiter. Deshalb können sich Ihre Kund:innen auf mediven Produkte verlassen. mediven Strümpfe werden auf Hightech-Niveau produziert, sind mit Wohlfühl-Eigenschaften ausgestattet und bieten ausgezeichneten Tragekomfort.

mediven® Produkteigenschaften



Clima Comfort

Clima Comfort* für

- Raschen Abtransport von Feuchtigkeit von der Hautoberfläche
- Hohe Atmungsaktivität



Clima Fresh

Integrierte Clima Fresh Funktion

- Geruchshemmender Effekt



Perfect Fit

Perfect Fit

- Hohe Passgenauigkeit
- Medizinisch wirksamer Druckverlauf
- Optimale Versorgungsbedingungen bei Serie und Maß



Vielfalt

Große Vielfalt an Varianten und Sonderausführungen

Farben für mehr Lebensqualität

- Große Auswahl an Standardfarben und topaktuelle Trendfarben erhältlich.

Hightech-Fäden für natürliche Elastizität

- Hohe Zweizug-Elastizität
- Optimaler Tragekomfort
- Leichtes An- und Ausziehen
- Perfekter, faltenfreier Sitz
- Höchst attraktive Transparenz und Feinheit



Vgl. Ben Ammar, F. (DermScan):
Klinische Untersuchung der Hautverträglichkeit eines Medizinprodukts – Anwendungstest unter dermatologischer Kontrolle, Tunis, 2012 / 2013.

Produkteigenschaften mediven ulcer kit®



Weich

Weich**

- Weiches Material für einen angenehmen Tragekomfort
- Gleitet sanft und schonend über die Haut



Clima Fresh

Integrierte Clima Fresh Funktion

- Geruchshemmender Effekt



Easy donning

Einfaches An- / Ablegen***

- Unter- und Überstrumpf mit jeweils 20 mmHg zum einfachen An- und Ablegen
- Weicher Unterstrumpf erleichtert das Anlegen des Überstrumpfes

* Clima Comfort

Wissenschaftlich getestet vom französischen Institut IFTH¹. Das Testergebnis zeigt, dass die Clima Comfort Technologie von medi den Klimaausgleich zwischen Haut und Strumpf gewährleistet. medi erreicht eine hervorragende Gesamtbewertung mit 11 von 12 Punkten.

¹Gardon-Mollard C, Gogué-Meunier G. Etude comparative du transfert de la vapeur d'eau dans différents articles de compression médicale. Phlébologie 2011,64(2):53-60.


** Diese Merkmale gelten nur für den mediven ulcer Unterstrumpf

*** Dieses Merkmal gilt für das mediven ulcer kit

mediven® Maßtabelle


Maßtabelle

mediven elegance®

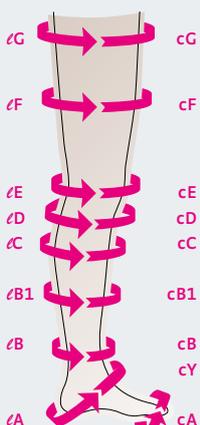Seriengröße ohne Naht		I	II	III	IV	V	VI	VII	
AG mit Haftband normal	cG	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	64-72	
AG mit Haftband weit	cG	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	73-85	
$l = \text{Längen-} c = \text{Umfang-}$ $\text{maße} \quad \text{maße}$ 	Umfangmaße in cm	cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	64-85
		cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	57-78
		cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	42-53
		cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
		cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
		cB1	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	35-41
		cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
		cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	34-42
		cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	28-35
		Längenmaße	lG normal	72-83 cm					
lG kurz	62-71 cm								
lD normal	39-44 cm								
lD kurz	34-38 cm								
Fußteile	hochelastische Unifußgröße, Schuhgröße 36-43								

Maßtabelle

mediven® plus · mediven® cotton · mediven comfort®

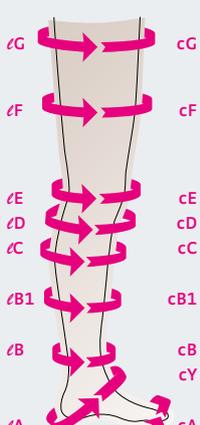Seriengröße ohne Naht		I	II	III	IV	V	VI	VII	
AG mit Haftband normal	cG	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	64-72	
AG mit Haftband weit	cG	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	73-85	
$l = \text{Längen-} c = \text{Umfang-}$ $\text{maße} \quad \text{maße}$ 	Umfangmaße in cm	cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	64-85
		cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	57-78
		cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	42-53
		cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
		cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
		cB1	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	35-41
		cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
		cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	34-42
		cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	28-35
		Längenmaße	lG normal	72-83 cm					
lG kurz	62-71 cm								
lD normal	39-44 cm								
lD kurz	34-38 cm								
Maxi-Leibteil	Nur bei mediven plus AT Wir empfehlen ein Maxi-Leibteil ab einem Leibteilumfang von:								
	Größe I-III	T = ab 95 cm			H = ab 110 cm				
	Größe IV-V	T = ab 120 cm			H = ab 135 cm				
	Größe VI-VII	T = ab 140 cm			H = ab 145 cm				
Fußteile	hochelastische Unifußgröße, Schuhgröße 36-43								

mediven® Maßtabelle

Maßtabelle

mediven® forte

Seriengröße ohne Naht		I	II	III	IV	V	VI	VII
AC mit Haftband normal	cG	44-47	46-50	50-54	53-58	56-61	60-65	64-70
AC mit Haftband weit	cG	48-53	51-57	55-61	59-65	62-70	66-74	71-80
<p>l = Längen- c = Umfang- maße</p>	cG	44-53	46-57	50-61	53-65	56-70	60-74	64-80
	cF	40-47	42-51	45-55	48-58	51-62	54-67	58-72
	cE	30-37	33-40	36-42	38-44	40-46	42-48	44-50
	cD	28-33	30-35	32-37	34-39	36-41	38-43	40-45
	cC	29-34	31-36	33-38	35-40	37-42	39-44	41-46
	cB1	24-26	26-28	28-31	30-33	32-35	34-37	36-39
	cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
	cY	28-30	29-32	31-34	33-36	34-38	36-40	37-41
	cA	18-21	20-23	22-25	24-27	26-29	28-31	30-33
<p>längenmaße</p>	lG normal	72-83 cm						
	lG kurz	62-71 cm						
	lD normal	38-43 cm						
	lD kurz	33-37 cm						
<p>Fußteile</p>	2 Fußlängen bei Serie mit geschlossener Fußspitze:							
	kleiner Fuß bis 23 cm $\hat{=}$ Schuhgröße 36-38							
	großer Fuß ab 23 cm $\hat{=}$ Schuhgröße 38-43							

Maßtabelle

mediven® active · mediven® for men mediven® angio

Seriengröße ohne Naht		I	II	III	IV	V	VI	VII
<p>l = Längen- c = Umfang- maße</p>	cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
	cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
	cB1	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	35-41
	cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
	cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	34-42
	cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	28-35
<p>längenmaße</p>	mediven active							
	lD normal	43-49 cm						
	lD kurz	37-42 cm						
	mediven for men mediven angio							
	lD normal	39-44 cm						
	lD kurz	34-38 cm						
<p>Fußteile</p>	mediven active geschlossene Fußspitze, Schuhgröße 38-48							
	mediven for men geschlossene Fußspitze, Schuhgröße 39-46							
	mediven angio 2 Fußlängen bei Serie mit geschlossener Fußspitze: kleiner Fuß bis 25 cm $\hat{=}$ Schuhgröße 36-40 großer Fuß ab 25 cm $\hat{=}$ Schuhgröße 40-46							

mediven® Positionsnummern

	mediven elegance		mediven for men	mediven comfort		mediven cotton		mediven plus	
	Serie	Maß	Serie	Serie	Maß	Serie	Maß	Serie	Maß
CCL 1									
AD	1706.01.0061	1706.10.0013	1706.01.0084	1706.01.0073	1706.10.0012	1706.01.0131	1706.10.0097	1706.01.0023	1706.10.0027
AF		1706.11.0006							1706.11.0013
AG	1706.03.0055	1706.12.0013		1706.03.0068	1706.12.0012	1706.03.0113	1706.12.0084	1706.03.0019	1706.12.0026
AT	1706.04.0055	1706.13.0012		1706.04.0071	1706.13.0011	1706.04.0115	1706.13.0081	1706.04.0023	1706.13.0025
AT/U	1706.04.0060							1706.04.0023	
AT/H								1706.04.0023	
CCL 2									
AD	1706.01.1122	1706.10.1026	1706.01.1098	1706.01.1150	1706.10.1024	1706.01.1229	1706.10.1142	1706.01.1050	1706.10.1047
AF		1706.11.1011							1706.11.1020
AG	1706.03.1109	1706.12.1025		1706.03.1139	1706.12.1023	1706.03.1177	1706.12.1128	1706.03.1046	1706.12.1045
AT	1706.04.1091	1706.13.1021		1706.04.1130	1706.13.1020	1706.04.1188	1706.13.1123	1706.04.1038	1706.13.1043
AT/U	1706.04.1096							1706.04.1038	
AT/H								1706.04.1038	
CCL 3									
AD								1706.01.2026	1706.10.2017
AF									1706.11.2008
AG								1706.03.2023	1706.12.2016
AT								1706.04.2015	1706.13.2015
AT/U								1706.04.2015	
AT/H								1706.04.2015	

	mediven active	mediven forte		mediven angio	
	Serie	Serie	Maß	Serie	Maß
CCL 1					
AD	1706.01.0100			1706.01.0124	1706.10.0093
AF					
AG					
AT					
AT/U					
AT/H					
CCL 2					
AD	1706.01.1168	1706.01.1130	1706.10.1025	1706.01.1225	1706.10.1138
AF			1706.11.1021		
AG		1706.03.1121	1706.12.1024		
AT		1706.04.1140	1706.13.1034		
AT/U					
AT/H					
CCL 3					
AD		1706.01.2043	1706.10.2009		
AF			1706.11.2009		
AG		1706.03.2039	1706.12.2008		
AT		1706.04.2030	1706.13.2010		
AT/U					
AT/H					

Abrechnungspositionen für An- und Ausziehhilfen

02.40.01.3000	medi Lang-Griff Butler
02.40.01.3000	medi Vario-Griff Butler
02.40.01.3000	medi Hosen Butler
02.40.01.3000	medi Big Butler
02.40.01.3000	medi Arm Butler

Abrechnungspositionen für Zubehör

17.99.99.2003	komprimierendes Leibteil
17.99.99.2006	Hüftbefestigung für AF- und AG-Strümpfe
17.99.99.2007	Hüftbefestigung für Stumpfstrümpfe
17.99.99.2008	Haftrand
17.99.99.2009	Einbeinhosenteil (Beinring)
17.99.99.2018	Eingriff
17.99.99.2019	Schwangerschaftsleibteil – ab CCL 2
17.99.99.2020	Stoma-Öffnung
17.06.07.1005	Strumpfhalter einseitig
17.06.07.2005	Strumpfhalter zweiseitig

mediven® Farbspektrum

Alle aktuellen Trendfarben zu unseren Rundstrick-Qualitäten finden Sie unter www.medi.biz/farben

Farbe	mediven elegance	mediven for men	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven active	mediven forte	mediven angio
Schwarz	•	•	•	•	•	•	•	•
Anthrazit	•	•	•		•	•	•	
Grau	○		○		○		○	
Marine	•	•	•		•	•	•	
Cashmere	•		•		•		•	
Caramel	•		•	•	•		•	•
Sand	•		•		•		•	
Beige	•		○		•		○	
medi Magenta	○				○			
Weiß	○				○	•		
Braun		•				•		

○ Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage.

mediven® Sortimentsübersicht Länge und Befestigung

Länge	Befestigung	mediven elegance	mediven for men	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven active	mediven forte	mediven angio
AD	Trikotrand	•	•	•	•	•	•	•	•
	Noppen-Haftband (NoB)	•		•		•		•	
	Noppen-Haftband schmal (sNoB)	•		•		•		•	
	Mikronoppen-Haftband sensitiv (MBs)	•		•		•		•	
AF	Trikotrand	•				•		•	
	Mikronoppen-Haftband sensitiv (MBs)	•		•		•		•	
	Flächen-Haftband Rose (FBR)	•		•		•		•	
	Noppen-Haftband (NoB)	•		•		•		•	
	Noppen-Haftband mit Motiv (NoM)	•		•		•		•	
AG	Trikotrand	•				•		•	
	Hüftbefestigung					•		•	
	Mikronoppen-Haftband sensitiv (MBs)	•		•	•	•		•	
	Flächen-Haftband Rose (FBR)	•		•		•		•	
	Noppen-Haftband (NoB)	•		•	•	•		•	
	Noppen-Haftband mit Motiv (NoM)	•		•		•		•	

Länge	Befestigung	mediven elegance	mediven for men	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven active	mediven forte	mediven angio	
AT	Standard-Leibteil	•			•	•		•		
	Komfort-Leibteil			•						
	Maxi-Leibteil					•				
	leicht kompr. LT	•				•		•		
	mittel kompr. LT					•		•		
	hoch kompr. LT					•		•		
	Zwickel-Auswahl Seite 78 – 90	•		•		•		•		
	AT / U	geschlossenes LT	•				•		•	
		offenes LT	•				•		•	
		leicht kompr. LT	•				•		•	
Zwickel-Auswahl Seite 78 – 90		•				•		•		
AT / H	Schlitz quer					•		•		
	leicht kompr. LT					•		•		
	mittel kompr. LT					•		•		
	hoch kompr. LT					•		•		
	Zwickel-Auswahl Seite 78 – 90					•		•		
AT / E	rechts					•		•		
	links					•		•		
	leicht kompr. LT					•		•		
	mittel kompr. LT					•		•		
	hoch kompr. LT					•		•		
	Herren-Zwickel					•		•		
	U-Zwickel					•		•		
	Zwickel-Auswahl Seite 78 – 90					•		•		



circaid® juxtalite®

Effektive Entstauung – Selbstmanagement für Patient:innen. Die einfache Handhabung von circaid juxtalite ermöglicht es Patient:innen, nach vorheriger Einweisung durch Fachpersonal, die Entstauungstherapie selbstständig durchzuführen. Der individuelle Kompressionsdruck lässt sich exakt einstellen, kontrollieren und nachjustieren – auch von den Patient:innen selbst. Das Nachjustieren der einzelnen Bänder hält den therapeutisch notwendigen Kompressionsdruck aufrecht – die Ödemrückbildung wird wirksam gefördert.¹

¹ Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html (Letzter Zugriff 12.06.2024).

circaid® juxtalite®

Medizinisches adaptives Kompressionsystem für die initiale Entstauung von ausgeprägten venösen Ödemen und bei Ulcus cruris venosum – die Alternative zum herkömmlichen Wickelverband.

medi Tipp¹:

Aufgrund der Produkteigenschaften empfehlen wir circaid juxtalite für:

- Frauen / Männer
- Initiale Entstauung von ausgeprägten venösen Ödemen
- Behandlung des Ulcus cruris venosum
- Bis zu 24-stündige Kompressionstherapie
- Mobile / immobile Patient:innen

Indikationen

circaid juxtalite ist im Hilfsmittelverzeichnis für folgende Indikationen gelistet:

- Initiale Entstauung von ausgeprägten venösen Ödemen
- Behandlung des Ulcus cruris venosum

Eigenschaften

- Mit handlicher Messkarte (BPS-Karte) zuverlässig einstellbarer und kontrollierbarer Kompressionsdruck
- Nachjustieren der Bänder erhält den Kompressionsdruck kontinuierlich aufrecht²
- 4 Bänder für einfache Handhabung, gerade auch bei älteren Patient:innen
- Breathe-O-Prene: atmungsaktives Material mit einem hohen Arbeitsdruck
- Geruchshemmendes Material



Waschanleitung

Pflegeleicht     

für Waschmaschine und Trockner geeignet

¹ Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

² Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html (Letzter Zugriff 12.06.2024).



circaid® juxtalite® Unterschenkel



BPS-Karte

Produktvorteile



Einstellbare Kompressionsbereiche

20 – 30 / 30 – 40
40 – 50 mmHg

Standardfarben

S = Serie




Videos

Mehr Informationen sowie ein Anlegevideo finden Sie unter:



Lieferbare Varianten

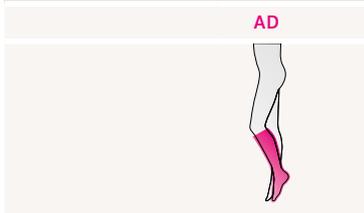

Hilfsmittelnummer 17.06.23.2001


Material-Zusammensetzung

Nylon	Polyurethan	Elastan
54 %	39 %	7 %

Lieferumfang

- 1 Stück medizinisches adaptives Kompressionssystem
- 1 Stück circaid Built-In-Pressure System (BPS) Messkarte
- 2 Stück circaid kompressive Socken
- 2 Stück circaid Unterziehstrümpfe (Baumwolle, ohne Kompression)

Maßtabelle

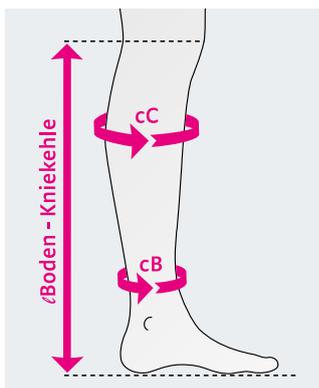

	Umfangmaße in cm			
	S	M	M – X*	L
cC	26 – 36	33 – 44	44 – 54	41 – 51
cB	19 – 22	22 – 27	22 – 27	25 – 32
	L – X*	XL	XL – X*	XXL
	cC	51 – 61	37 – 48	48 – 61
cB	25 – 32	30 – 37	30 – 37	35 – 42

	Maße für die Längenbestimmung	
	Kurz	Lang
∟Boden – Kniekehle	< 44	> 44

Größe / Art.-Nr.	Kurz	Lang
S	JU17702000	JU17002000
M	JU17703000	JU17003000
M – X*	JU17713000	JU17013000
L	JU17704000	JU17004000
L – X*	JU17714000	JU17014000
XL	JU17705000	JU17005000
XL – X*	JU17715000	JU17015000
XXL	JU17706000	JU17006000

* – X = extraweite Wade

Hinweis

Sollten die Maße der Patient:innen nicht in die Werte der Maßtabelle fallen, ist eine Versorgung mit circaid juxtalite nicht möglich.



medi Tipp

Mit dem circaid juxtalite Maßband (Art.-Nr. 0097C78) einfach und schnell zur richtigen Produktlänge. Legen Sie hierfür die Markierung am Knöchel an und halten das Maßband an das Bein Ihrer Kund:innen. Sie können direkt ablesen, welche Produktlänge notwendig ist.



1 circaid Built-In-Pressure System (BPS)

- Mit handlicher Messkarte (BPS-Karte) einstellbarer und kontrollierbarer Kompressionsdruck
- Jederzeit nachjustierbar – für eine kontinuierliche Kompressionstherapie
- Nach proximal graduiert abfallender Druckverlauf

2 Breathe-O-Prene

- Unelastisches Material mit hoher Wandstabilität – für hohen Arbeitsdruck
- Atmungsaktiv und geruchshemmend

3 Einfache Handhabung

- Nach Einweisung durch Fachpersonal einfaches An- und Ablegen der Versorgung – fördert Selbstmanagement
- Weniger fehleranfällig in der Anlage als Kompressionsbandagierungen¹

4 Juxtaposed Band-System

- System aus einzelnen, ineinandergreifenden Bändern – für optimalen Sitz
- Extrabreite Bänder vermeiden Fensterödeme
- Nachjustieren der einzelnen Bänder verhindert einen Druckverlust der Versorgung – die Ödemrückbildung wird wirksam gefördert¹

5 Kompressive Socke

- Beugt Ödemen im Vorfuß vor
- Fördert die Mobilität – Tragen normaler Schuhe möglich²
- Zusätzliche Fußoption verfügbar

¹ Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 12.06.2024).

² Protz K et al. Kompressionsmittel für die Entstauungstherapie. Vergleichende Erhebung im Querschnitt zu Handhabung, Anpressdruck und Tragegefühl. Hautarzt 2018;69(3):232-241.

circaid® juxtalite® Fußoption

Die folgende Fußoption ist die perfekte Ergänzung zu circaid juxtalite.

Hinweis

Es wird empfohlen, eine circaid Fußoption immer in Kombination mit einer circaid Beinversorgung zu tragen. Die Indikationen der circaid Fußoptionen sind identisch zu den Indikationen der entsprechenden circaid Beinversorgung. Diese müssen separat bestellt werden.

circaid® juxtalite® Fußteil

Zusätzliche Kompressionsversorgung mit geschlossener Ferse für venöse Erkrankungen.

Produktdetails

- Kompression für Fuß und Sprunggelenk
- Für eine perfekte Passform: Produkt in der Länge kürzbar
- Einfache Handhabung – ideal für Selbstmanagement
- Kann über der kompressiven Socke getragen werden

Material-Zusammensetzung

Nylon	Polyurethan	Elastan
55 %	38 %	7 %

Hilfsmittelnummer

17.06.23.3001



circaid® juxtalite® Fußteil

Videos


Mehr Informationen, ein Anlegevideo sowie ein Video zur individuellen Anpassung finden Sie unter:

Product Video



medi.biz/jl

Maßtabelle

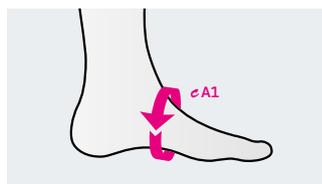

Umfang in cm	S	M
cA1	19–26	24–31
Art.-Nr.	JU1W002000	JU1W003000

Hinweis

Es wird empfohlen, eine circaid Fußoption immer in Kombination mit einer circaid Beinversorgung zu tragen.

circaid® Fußoptionen

Die folgenden Fußoptionen werden für das Tragen in Kombination mit circaid juxtalite empfohlen.

Hinweis

Es wird empfohlen, eine circaid Fußoption immer in Kombination mit einer circaid Beinversorgung zu tragen. Die Indikationen der circaid Fußoptionen sind identisch zu den Indikationen der entsprechenden circaid Beinversorgung. Diese müssen separat bestellt werden.

circaid® pac band Fußteil

Zusätzliche Kompression für Fußrücken und Knöchel


Produktdetails

- Zusätzliche Kompression für den Fußrücken und im Knöchelbereich bei mäßiger bis starker Ödemneigung
- Patientenindividuell zuschneidbar
- Einfache Handhabung
- Leichtes, atmungsaktives Material
- Verfügbar in den Größen Standard, Groß und Extragroß
- Bilateral einsetzbar (linker oder rechter Fuß)



circaid® pac band Fußteil

Maßtabelle

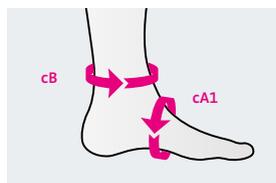

Umfang in cm	Standard	Groß	Extragroß
cB	19 – 27	25 – 50	45 – 56
cA1	19 – 36	22 – 41	22 – 41
Art.-Nr.	JU5P001000	JU5P002000	JU5P003000
PZN	11484780	11484797	12575651

circaid® kompressive Socke

Standard Kompressionsversorgung für Fuß und Sprunggelenk


Produktdetails

- Kompression für Fuß und Sprunggelenk
- Kann mit anderen circaid Fußoptionen kombiniert werden
- Verfügbar in den Größen Standard und Groß
- Standard Fußoption bei circaid juxtalite



circaid® kompressive Socke

Maßtabelle

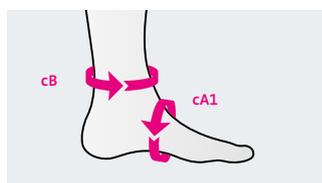

Umfang in cm	Standard	Groß
cB	19 – 27	25 – 50
cA1	19 – 36	22 – 41
Art.-Nr.	JU51001000	JU51002000

circaid® Unterziehstrumpf

Zusätzlicher Tragekomfort

- Kann direkt auf der Haut unter den circaid Produkten getragen werden
- Angenehmer Tragekomfort
- Fixiert Wundauflagen
- Eine Größe für alle Umfänge und Längen, da dehnbar in Breite und Länge
- Standardmäßig im Lieferumfang des circaid juxtalite enthalten

Artikel	Artikelnummer	Größe
1 Paar Unterziehstrümpfe	JULS709000	Unigröße



circaid® Unterziehstrumpf

circaid® Überzug

Glatter Überstrumpf für circaid Produkte

- Kann über circaid Beinversorgungen getragen werden
- Verhindert unerwünschtes Festkletten der Kompressionsversorgung in der Kleidung
- Verleiht der Kompressionsversorgung ein edles Aussehen
- Erhältlich in den Farben Schwarz und Beige
- Ohne therapeutische Kompression

Artikel	Artikelnummer	Farbe	Größe
1 Stück circaid Überzug Unterschenkel	JU5C7B2000	Beige	S
	JU5C7B4000	Beige	L
	JU5C7A2000	Schwarz	S
	JU5C7A4000	Schwarz	L



circaid® Überziehstrumpf Unterschenkel Beige



mediven elegance[®]

Das ist ein medizinischer Kompressionsstrumpf? Aber ja! Und zwar ein Modell, das die Schönheit der Frau unterstreicht. Der mediven elegance verwöhnt die Beine mit seiner kompressiven Wirkung. Dabei schmiegt er sich wie eine zweite Haut an das Bein. Er kann zu jeder Garderobe kombiniert werden und bringt die weibliche Figur perfekt zur Geltung. Getreu dem Motto: Man sieht Schönheit.

mediven elegance. So attraktiv wirkt Kompression.

mediven elegance®

Man sieht Schönheit.
So attraktiv wirkt Kompression.

medi Tipp¹:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkteigenschaften empfehlen wir mediven elegance für:

- Frauen
- Normalgewichtig
- Keine Phlebödemenneigung
- Straffes Bindegewebe

Indikationen²

- Chronische Venenerkrankungen der Stadien C0s – C2r nach CEAP
- Initiale Phase nach Varikose-therapie
- Oberflächliche Venenthrombose
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patient:innen
- Entzündliche Dermatosen der Beine
- Übelkeit und Schwindel in der Schwangerschaft

Eigenschaften

- Transparente Feinstrumpfoptik
- Mehr Zehenfreiheit durch die Soft Elastic Fußspitze
- Breit und weich gearbeitetes Kniestrumpf-Bündchen
- Verkleinerte Ferse für faltenfreien Sitz
- Edle Schmuck-Haftband-Motive für Schenkelstrümpfe



Waschanleitung

Pflegeleicht 
für Waschmaschine und
Trockner geeignet

¹ Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

² Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.



Flächen-Haftband Rose



Soft Elastic Fußspitze



Breites Kniestrumpf-Bündchen

Produktvorteile



Vgl. Ben Ammar, F. (DermScan):
Klinische Untersuchung der Haut-
verträglichkeit eines Medizinprodukts –
Anwendungstest unter dermatolo-
gischer Kontrolle, Tunis, 2012 / 2013.



STANDARD
100
96.0.1369/1
Hohenstein HTTI

Lieferbare Varianten

	AD	AF	AG	AT	AT / U
Serie CCL 1	17.06.01.0061	–	17.06.03.0055	17.06.04.0055	17.06.04.0060
Serie CCL 2	17.06.01.1122	–	17.06.03.1109	17.06.04.1091	17.06.04.1096
Maß CCL 1	17.06.10.0013	17.06.11.0006	17.06.12.0013	17.06.13.0012	–
Maß CCL 2	17.06.10.1026	17.06.11.1011	17.06.12.1025	17.06.13.1021	–

Standard-Ausführungen

Serie	Größe I – VII, Länge normal und kurz, Haftband normal und weit	
Maßanfertigung	möglich	
Sonderausführungen	möglich, siehe Seite 72 – 81	
Abschluss	AD	Trikotrand, schmales Noppen-Haftband, Noppen-Haftband, Mikronoppen-Haftband sensitiv
	AF und AG	Trikotrand, Noppen-Haftband, Noppen-Haftband mit Motiv, Flächen-Haftband Rose, Mikronoppen-Haftband sensitiv Alle Haftbänder sind Standard-Ausführungen.
Zwickel / Leibteil	AT	Komfort-Zwickel
	AT / U	mit geschlossenem Leibteil
Fußteil	offene Fußspitze, geschlossene Fußspitze, Softfußspitze ² Schuhgröße 36 – 43	

Material-Zusammensetzung am Beispiel AG

	Polyamid (PA)	Elastan (EL)
CCL 1	66 %	34 %
CCL 2	61 %	39 %

medi Tipp



medi Butler
erleichtern das Anziehen¹

**Die medi Pflegeprodukte für Haut
und Gestrick bieten Unterstützung**

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab 112

Material

Leicht

Kompressionsklasse

CCL 1, 2

Standardfarben

S = Serie
M = Maß

Schwarz
S + M

Anthrazit
S + M

Grau*
S + M

Marine
S + M

Cashmere
S + M

Caramel
S + M

Sand
S + M

Beige
S + M

medi Magenta*
S + M

Weiß*
S + M

* Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage.

Erhältlich mit funkelnden Kristallen.



Hinweis

Der mediven elegance
ist auch in Trendfarben
erhältlich.
Mehr Informationen unter
[medi.biz/trendfarben](https://www.mediviz.com/trendfarben)

¹ Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/037-005.html> (Letzter Zugriff 12.06.2024).

² Die Softfußspitze ist mit Aufpreis erhältlich. Nähere Informationen finden Sie bei den Sonderausführungen.



mediven® for men

Männer sind von medizinischen Kompressionsstrümpfen schwerer zu überzeugen als Frauen. Die Argumente des mediven for men sprechen jedoch für sich und helfen Ihnen dabei.

Dieser Kompressionsstrumpf sieht aus wie ein modischer Herrenstrumpf und ist der perfekte Begleiter für den Mann. Der stilsichere Strumpf im modischen Business-Ripp-Design sitzt wie eine zweite Haut.

mediven for men. Für den modischen Business-Look.

mediven® for men

Der Stilsichere – für den modischen
Business-Look

medi Tipp¹:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkteigenschaften empfehlen wir mediven for men für:

- Männer
- Normalgewichtig
- Keine / leichte Phlebodemneigung
- Auch für weiches Bindegewebe

Indikationen²

- Chronische Venenerkrankungen der Stadien COs – C3 nach CEAP
- Postoperative Reperfusionsoedeme
- Posttraumatische, postoperative, berufsbedingte, medikamentös bedingte Ödeme
- Ödeme infolge Immobilitäten
- Oberflächliche Venenthrombose
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patient:innen
- Entzündliche Dermatosen der Beine

Eigenschaften

- Anatomische Fußspitze mit praktischer Rechts- / Linkskennzeichnung für hohen Tragekomfort und perfekten Sitz
- Modisches Business-Ripp-Design
- Lanolin-Ausrüstung³
- Besonders weicher Komfortbund
- Für die Schuhgrößen 39 – 46 geeignet

Waschanleitung

Pflegeleicht 

für Waschmaschine und
Trockner geeignet



Kniestumpf im modischen „Business-Ripp-Design“ mit Komfort-Bündchen



Anatomisch geformte Fußspitze mit praktischer Rechts- / Linkskennzeichnung

¹ Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

² Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.

³ Natürliche Substanz zur Pflege von trockener und rauer Haut, vielseitig verwendet, beispielsweise in der Kinder- und Babypflege.

Produktvorteile



Clima Comfort



Clima Fresh



Perfect Fit



STANDARD
100

96.0.1369/1
Hohenstein HTTI



Vgl. Ben Ammar, F. (DermScan):
Klinische Untersuchung der Haut-
verträglichkeit eines Medizinprodukts-
Anwendungstest unter dermatolo-
gischer Kontrolle, Tunis, 2012 / 2013.

Lieferbare Varianten

AD



Serie CCL 1 17.06.01.0084

Serie CCL 2 17.06.01.1098

Standard-Ausführungen

Serie Größe I – VII,
Länge normal und kurz

Sonderausführungen nicht möglich

Abschluss AD Trikotrand

Fußteil geschlossene Fußspitze
Schuhgröße 39 – 46

Material-Zusammensetzung

	Polyamid (PA)	Elastan (EL)
CCL 1	77 %	23 %
CCL 2	71 %	29 %

Material

Leicht

Kompressionsklasse

CCL 1, 2

Standardfarben

S = Serie

Schwarz
S

Anthrazit
S

Marine
S

Braun
S

medi Tipp



medi Butler
erleichtern das Anziehen¹

Die medi Pflegeprodukte für Haut
und Gestrick bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab 112

¹ Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 12.06.2024).





mediven comfort[®]

mediven comfort ist aus traumhaft weichem Material gefertigt. Der Strumpf in den Kompressionsklassen 1 und 2 macht die Therapie von Venenleiden so angenehm wie möglich. Mit seiner Lanolin-Ausrüstung pflegt er die Haut und geht besonders sanft mit ihr um. Wie Sie Ihre Kund:innen vom mediven comfort überzeugen? Lassen Sie sie selbst fühlen!

mediven comfort. So anschmiegsam ist Kompression.

mediven comfort®

Man spürt Weichheit.
So anschmiegsam ist Kompression.

medi Tipp¹:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkteigenschaften empfehlen wir mediven comfort für:

- Frauen
- Normalgewichtig / übergewichtig²
- Leichte bis schwere Phlebödemenigung²
- Straffes Bindegewebe

Indikationen³

- Chronische Venenerkrankungen der Stadien C0s – C4 nach CEAP
- Initiale Phase nach Varikoseoperation
- Stauungsbeschwerden und Ödeme in der Schwangerschaft
- Postoperative Reperfusionsoedeme
- Posttraumatische, postoperative, berufsbedingte, medikamentös bedingte Ödeme
- Ödeme infolge Immobilitäten
- Oberflächliche Venenthrombose
- Zustand nach Thrombose, postthrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patient:innen
- Entzündliche Dermatosen der Beine
- Übelkeit und Schwindel in der Schwangerschaft

Eigenschaften

- Sehr weiches Material für leichtes An- und Ausziehen
- Lanolin-Ausrüstung⁴



- Doppelt gestrickte Komfortsohle für ein noch angenehmeres Laufgefühl
- Formgebendes Komfort-Leibteil
- Elastischer und strapazierfähiger Komfort-Zwickel

¹ Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

² Nutzen Sie den mediven comfort bei schwerem Ödem nur bei normalgewichtigen Patient:innen. Bei Übergewicht und starkem Ödem empfiehlt medi kräftigeres Material, um Schnürfurchen vorzubeugen.

³ Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.

⁴ Natürliche Substanz zur Pflege von trockener und rauer Haut, vielseitig verwendet, beispielsweise in der Kinder- und Babypflege.

Waschanleitung

Pflegeleicht     
für Waschmaschine und
Trockner geeignet



Komfort-Leibteil



Komfortsohle



Noppen-Haftband

Produktvorteile



Clima Comfort

Clima Fresh

Vielfalt

Perfect Fit



Vgl. Ben Ammar, F. (DermScan):
Klinische Untersuchung der Haut-
verträglichkeit eines Medizinprodukts –
Anwendungstest unter dermatolo-
gischer Kontrolle, Tunis, 2012 / 2013.

Lieferbare Varianten

	AD	AG	AT
Serie CCL 1	17.06.01.0073	17.06.03.0068	17.06.04.0071
Serie CCL 2	17.06.01.1150	17.06.03.1139	17.06.04.1130
Maß CCL 1	17.06.10.0012	17.06.12.0012	17.06.13.0011
Maß CCL 2	17.06.10.1024	17.06.12.1023	17.06.13.1020

Standard-Ausführungen

Serie	Größe I – VII, Länge normal und kurz, Haftband normal und weit	
Maßanfertigung	möglich	
Sonderausführungen	möglich, siehe Seite 72 – 81	
Abschluss	AD	Trikotrand, schmales Noppen-Haftband, Noppen-Haftband, Mikronoppen-Haftband sensitiv
	AG	Noppen-Haftband, Noppen-Haftband mit Motiv, Flächen-Haftband Rose, Mikronoppen-Haftband sensitiv Alle Haftbänder sind Standard-Ausführungen.
Zwickel	AT	Komfort-Zwickel
Fußteil	offene Fußspitze, geschlossene Fußspitze, Softfußspitze ² Schuhgröße 36 – 43	

Material-Zusammensetzung am Beispiel AG

	Polyamid (PA)	Elastan (EL)
CCL 1	68 %	32 %
CCL 2	65 %	35 %

medi Tipp



medi Butler erleichtern das Anziehen¹

Die medi Pflegeprodukte für Haut und Gestrick bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab 112

Material

Mittel

Kompressionsklasse

CCL 1, 2

Standardfarben

S = Serie
M = Maß

Schwarz
S + M

Anthrazit
S + M

Grau*
S + M

Marine
S + M

Cashmere
S + M

Caramel
S + M

Sand
S + M

Beige*
S + M

* Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage.

Erhältlich mit funkelnden Kristallen.



Hinweis

Der mediven comfort ist auch in Trendfarben erhältlich.
Mehr Informationen unter [medi.biz/trendfarben](https://www.medi.biz/trendfarben)

¹ Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/037-005.html> (Letzter Zugriff 12.06.2024).

² Die Softfußspitze ist mit Aufpreis erhältlich. Nähere Informationen finden Sie bei den Sonderausführungen.



*Fühl den Unterschied.
Mach einen Unterschied.*



mediven[®] cotton

mediven cotton ist der erste medizinische Kompressionsstrumpf mit Bio-Baumwolle von medi. Die Kombination mit Funktionsfasern sorgt für eine thermoregulierende Wirkung. Die Naturfaser Baumwolle gilt als besonders sanft – und ist damit für empfindliche und allergische Haut geeignet. Dies wurde für mediven cotton dermatologisch von Dermatest geprüft und jeweils mit der Bestnote „sehr gut“ bewertet. Die Verwendung von Bio-Baumwolle und recyceltem Polyamid-Garn bringt zusätzliche Vorteile für Mensch und Umwelt.

mediven cotton. Natürlich gut versorgt.

mediven[®] cotton

Natürlich gut versorgt.

medi Tipp¹:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkteigenschaften empfehlen wir mediven cotton für:

- Frauen / Männer
- Normalgewichtig / übergewichtig
- Leichte bis schwere Phlebödemeigung
- Auch für weiches Bindegewebe
- Kund:innen mit sensibler oder allergischer Haut

Indikationen²

- Chronische Venenerkrankungen der Stadien C0s – C4 nach CEAP
- Initiale Phase nach Varikosetherapie
- Stauungsbeschwerden und Ödeme in der Schwangerschaft
- Postoperative Reperfusionsoedeme
- Posttraumatische, postoperative, berufsbedingte, medikamentös bedingte Ödeme
- Ödeme infolge Immobilitäten
- Oberflächliche Venenthrombose
- Zustand nach Thrombose, postthrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patient:innen
- Entzündliche Dermatosen der Beine
- Übelkeit und Schwindel in der Schwangerschaft

Eigenschaften

- Reine Bio-Baumwolle – an der Innenseite des Strumpfes platziert, direkt auf der Haut



- Polyamid-Garn mit einem Recycling-Anteil von 60 Prozent für eine effektive und ressourcenschonende Kompression
- Thermoregulierender Effekt – kühlend bei hohen und isolierend bei niedrigen Temperaturen
- Dermatologisch getestet durch Dermatest – optimale Kompressionsversorgung für Kund:innen mit sensibler oder allergischer Haut
- Blickdichte Optik
- Weiche Bio-Baumwolle auf der Innenseite erleichtert das Anziehen

Waschanleitung

Pflegeleicht     


Für Waschmaschine und Trockner geeignet

¹ Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

² Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.



Doppelte Umwindung mit Bio-Baumwoll-Garn

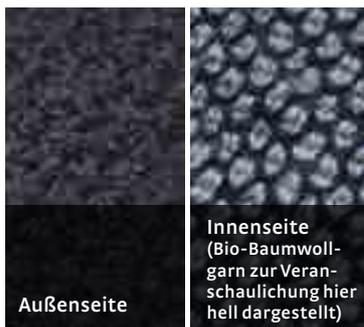

Bio-Baumwolle – direkt auf der Haut



Sehr flacher Abschluss an den Zehen bei offener Fußspitze

Produktvorteile



dermatest-
garantle.de



dermatest-
garantle.de



STANDARD
100
22.0.02800
Hohenstein HTTI



STANDARD
100
96.0.1369/1
Hohenstein HTTI

Material

Mittel

Kompressionsklasse

CCL 1, 2

Standardfarben

S = Serie
M = Maß*

Schwarz

S + M

Caramel

S + M

* Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage.

mediven cotton

	AD	AG	AT
Serie CCL 1	17.06.01.0131	17.06.03.0113	17.06.04.0115
Serie CCL 2	17.06.01.1229	17.06.03.1177	17.06.04.1188
Maß CCL 1	17.06.10.0097	17.06.12.0084	17.06.13.0081
Maß CCL 2	17.06.10.1142	17.06.12.1128	17.06.13.1123

Standardausführungen

Serie	Größe I – VII, Länge normal und kurz, Haftband normal und weit	
Maßanfertigung	möglich	
Sonderausführungen	nicht möglich	
Abschluss	AD	Trikotrand
	AG	Noppen-Haftband, Mikronoppen-Haftband sensitiv Alle Haftbänder sind Standard-Ausführungen.
Zwickel	AT	Standard-Zwickel
Fußteil	offene Fußspitze, geschlossene Fußspitze, Schuhgröße 36 – 43	

Material-Zusammensetzung am Beispiel AG

	Polyamid (PA)*	Bio-Baumwolle	Elastan
CCL 1	51 %	27 %	22 %
CCL 2	46 %	27 %	27 %

*mit einem Recycling-Anteil von 60 Prozent

medi Tipp



medi Butler Die medi Pflegeprodukte für Haut
erleichtern das Anziehen¹ und Gestrick bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab 112

¹ Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 12.06.2024).





mediven[®] plus

mediven plus hat sich seit über 40 Jahren für eine Vielzahl an Indikationen für SIE und IHN etabliert. Der bewährte medizinische Kompressionsstrumpf in den Kompressionsklassen 1, 2 und 3 mit zusätzlichen Pluspunkten macht zuverlässig alles mit. Getreu dem Motto: Man erlebt Zuverlässigkeit.

mediven plus. So vielfältig ist bewährte Kompression.

mediven® plus

Man erlebt Zuverlässigkeit.
So vielfältig ist bewährte Kompression.

medi Tipp¹:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkteigenschaften empfehlen wir mediven plus für:

- Frauen / Männer
- Normalgewichtig / übergewichtig
- Leichte bis schwere Phlebödemenneigung
- Auch für weiches Bindegewebe

Indikationen²

- Chronische Venenerkrankungen der Stadien C0s – C5 nach CEAP
- Initiale Phase nach Varikosetherapie
- Stauungsbeschwerden und Ödeme in der Schwangerschaft
- Postoperative Reperfusionsoedeme
- Posttraumatische, postoperative, berufsbedingte, medikamentös bedingte Ödeme
- Ödeme infolge Immobilitäten
- Oberflächliche Venenthrombose
- Tiefe Beinvenenthrombose
- Zustand nach Thrombose, postthrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patient:innen
- Entzündliche Dermatosen der Beine
- Übelkeit und Schwindel in der Schwangerschaft



Eigenschaften


- Hohe Strapazierfähigkeit und blickdichte Optik
- Optimaler Sitz durch Plus-Ferse, optimierte Fußspitze, gerippte Sohlenverstärkung breites Bündchen
- Besonders für starke Oberschenkel empfohlen
- Maxi-Leibteil als Standard-Variante

Waschanleitung

Pflegeleicht     
für Waschmaschine und Trockner geeignet

¹ Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

² Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.

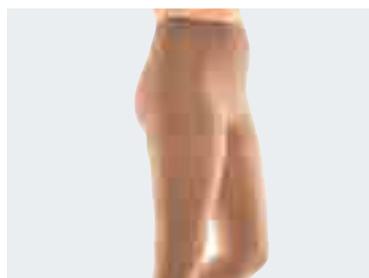

Maxi-Leibteil als Standard-Variante



Komfortable Plus-Ferse und zuverlässige Sohlenverstärkung



Breites Bündchen

Produktvorteile



Vgl. Ben Ammar, F. (DermScan):
Klinische Untersuchung der Haut-
verträglichkeit eines Medizinprodukts –
Anwendungstest unter dermatolo-
gischer Kontrolle, Tunis, 2012 / 2013.



STANDARD
100
96.0.1369/1
Hohenstein HTTI

Lieferbare Varianten

	AD	AF	AG	AT	AT / U	AT / H
Serie CCL 1	17.06.01.0023	–	17.06.03.0019	17.06.04.0023	17.06.04.0023	17.06.04.0023
Serie CCL 2	17.06.01.1050	–	17.06.03.1046	17.06.04.1038	17.06.04.1038	17.06.04.1038
Serie CCL 3	17.06.01.2026	–	17.06.03.2023	17.06.04.2015	17.06.04.2015	17.06.04.2015
Maß CCL 1	17.06.10.0027	17.06.11.0013	17.06.12.0026	17.06.13.0025	–	–
Maß CCL 2	17.06.10.1047	17.06.11.1020	17.06.12.1045	17.06.13.1043	–	–
Maß CCL 3	17.06.10.2017	17.06.11.2008	17.06.12.2016	17.06.13.2015	–	–

Standard-Ausführungen

Serie	Größe I – VII, Länge normal und kurz, Haftband normal und weit	
Maßanfertigung	möglich	
Sonderausführungen	möglich, siehe Seite 72 – 81	
Abschluss	AD	Trikotrand, schmales Noppen-Haftband, Noppen-Haftband, Mikronoppen-Haftband sensitiv
	AF und AG	Noppen-Haftband, Noppen-Haftband mit Motiv, Flächen-Haftband Rose, Mikronoppen-Haftband sensitiv Alle Haftbänder sind Standard-Ausführungen.
Zwickel / Leibteil	AT	Größe I – III: Schritt-Zwickel Größe IV – VII: schmaler Zwickel hinten bis Taille
		Maxi-Leibteil: Größe I – III: schmaler Zwickel hinten bis Taille Größe IV – V: breiter Zwickel hinten bis Taille Größe VI – VII: extrabreiter Zwickel hinten bis Taille
	AT / U	mit geschlossenem Leibteil
	AT / H	Schlitz quer
Fußteil	offene Fußspitze, geschlossene Fußspitze, Softfußspitze ² , Schuhgröße 36 – 43	

Material-Zusammensetzung am Beispiel AG

	Polyamid (PA)	Elastan (EL)
CCL 1	75 %	25 %
CCL 2	69 %	31 %
CCL 3	63 %	37 %

medi Tipp



medi Butler erleichtern das Anziehen¹

Die medi Pflegeprodukte für Haut und Gestrick bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab 112

Material

Mittel

Kompressionsklasse

CCL 1, 2, 3

Standardfarben

S = Serie
M = Maß

Schwarz
S + M

Anthrazit
S + M

Grau*
S + M

Marine
S + M

Cashmere
S + M

Caramel
S + M

Sand
S + M


Beige
S + M

medi Magenta*
S + M

Weiß*
S + M

* Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage.

Erhältlich mit funkelnden Kristallen.

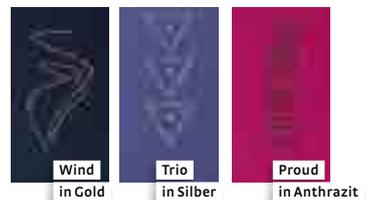

Hinweis

Der mediven plus ist auch in Trendfarben erhältlich.
Mehr Informationen unter medi.biz/trendfarben

¹ Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/037-005.html> (Letzter Zugriff 12.06.2024).


² Die Softfußspitze ist mit Aufpreis erhältlich. Nähere Informationen finden Sie bei den Sonderausführungen.



mediven[®] active

Männer, die sich zum Beispiel beruflich bedingt sehr viel bewegen, benötigen einen robusten medizinischen Kompressionsstrumpf. Er muss hohen Belastungen standhalten und im Schuh perfekt sitzen. Der Herrenstrumpf im sportlichen Feinripp-Design ist sehr weich und in keiner Situation als medizinischer Kompressionsstrumpf zu erkennen. Zeigen Sie Ihren männlichen Kunden, dass es Kompressionsstrümpfe gibt, die auch nach Mann aussehen.

mediven active. Für den aktiven Mann.

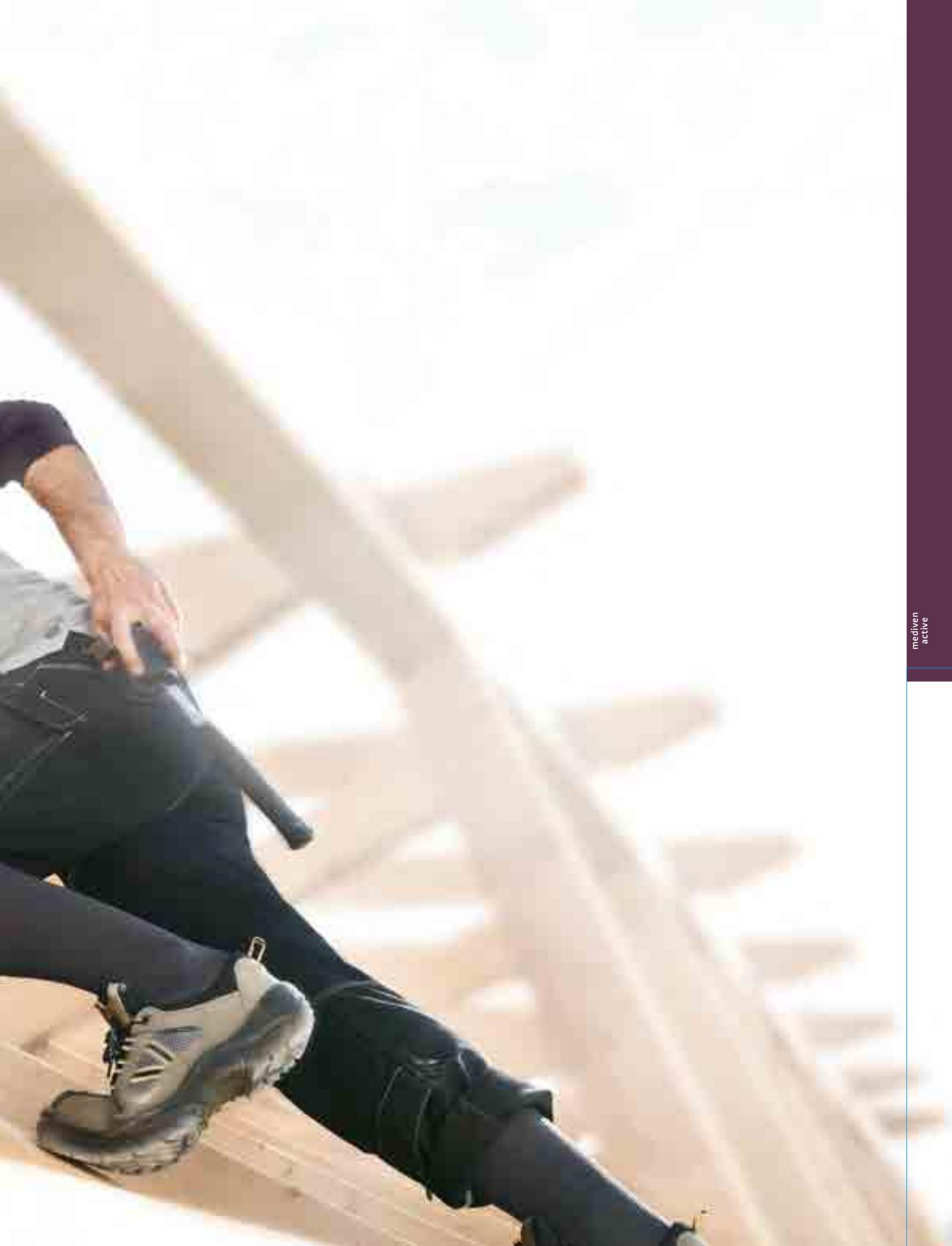

mediven® active

Der Robuste – für den aktiven Mann

medi Tipp¹:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkteigenschaften empfehlen wir mediven active für:

- Männer
- Normalgewichtig / übergewichtig
- Leichte bis schwere Phlebödemenneigung
- Auch für weiches Bindegewebe

Indikationen²

- Chronische Venenerkrankungen der Stadien C0s – C4 nach CEAP
- Postoperative Reperfusionsoedeme
- Posttraumatische, postoperative, berufsbedingte, medikamentös bedingte Ödeme
- Ödeme infolge Immobilitäten
- Oberflächliche Venenthrombose
- Zustand nach Thrombose, postthrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patient:innen
- Entzündliche Dermatosen der Beine

Eigenschaften

- Nicht spürbare und kaum sichtbare Naht
- Feinripp-Design – von einem Herrenstrumpf nicht zu unterscheiden
- Komfortsohle mit Fersenverstärkung, die starken Belastungen standhält
- Weicher und breiter Abschlussbund für hohen Komfort
- Sehr robustes Gestrick
- Für die Schuhgrößen 38 – 48 geeignet


Waschanleitung

Pflegeleicht     

für Waschmaschine und Trockner geeignet



Fußspitze ohne Naht

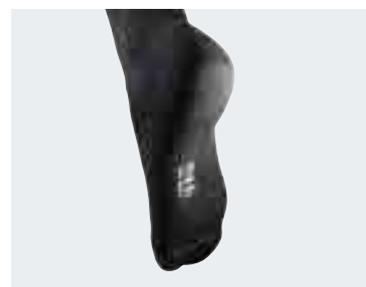

Komfortsohle

¹ Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

² Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.

Produktvorteile



Clima Comfort

Perfect Fit



STANDARD
100

96.0.1369/1
Hohenstein HTTI



Vgl. Ben Ammar, F. (DermScan):
Klinische Untersuchung der Haut-
verträglichkeit eines Medizinprodukts –
Anwendungstest unter dermatolo-
gischer Kontrolle, Tunis, 2012/2013.

Lieferbare Varianten

AD



Serie CCL 1 17.06.01.0100

Serie CCL 2 17.06.01.1168

Standard-Ausführungen

Serie	Größe I – VII, Länge normal und kurz
Sonderausführungen	nicht möglich
Abschluss	AD Trikotrand
Fußteil	geschlossene Fußspitze Schuhgröße 38 – 48

Material-Zusammensetzung

	Polyamid (PA)	Elastan (EL)
CCL 1	90 %	10 %
CCL 2	89 %	11 %

medi Tipp



medi Butler erleichtern das Anziehen¹ Die medi Pflegeprodukte für Haut und Gestrick bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab 112

Material

Kräftig

Kompressionsklasse

CCL 1, 2

Standardfarben

S = Serie

Schwarz
S

Anthrazit
S

Marine
S

Weiß
S

Braun
S

¹ Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 12.06.2024).



mediven[®] forte

Dieser Strumpf hält schwere Indikationen in Schach. Schließlich geht es darum, dass auch Kund:innen mit starkem Venenleiden aktiv am Leben teilhaben und dabei möglichst wenig Kompromisse machen müssen.

Der mediven forte ist über den ganzen Tag hinweg maximal druckstabil. Sein kräftiges Material ermöglicht die erforderliche Tiefenwirkung. Der Strumpf ist zudem sehr strapazierfähig und langlebig.

mediven forte. So stark ist wohltuende Kompression.



mediven® forte

Man fühlt Schutz. So stark ist
wohltuende Kompression.

medi Tipp¹:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkteigenschaften empfehlen wir mediven forte für:

- Frauen / Männer
- Übergewichtig / adipös
- Leichte bis schwere Phlebödemen
- Auch für weiches Bindegewebe

Indikationen²

- Chronische Venenerkrankungen der Stadien C0s – C5 nach CEAP
- Initiale Phase nach Varikoseoperation
- Funktionelle venöse Insuffizienz bedingt durch Adipositas
- Stauungsbeschwerden und Ödeme in der Schwangerschaft
- Postoperative Reperfusionsoedeme
- Posttraumatische, postoperative, berufsbedingte, medikamentös bedingte Ödeme
- Ödeme infolge Immobilitäten
- Oberflächliche Venenthrombose
- Tiefe Beinvenenthrombose
- Zustand nach Thrombose, postthrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patient:innen
- Entzündliche Dermatosen der Beine
- Übelkeit und Schwindel in der Schwangerschaft



Eigenschaften

- Kräftiges, strapazierfähiges Material für noch mehr Tiefenwirkung
- Maximale Druckstabilität den ganzen Tag
- Formstabiler Softbund am AD-Abschluss
- Blickdichte Optik
- Fühlbare Frische durch die geruchshemmende Wirkung
- 2 Fußlängen bei Serie mit Fußspitze:
 - Kleiner Fuß bis 23 cm
 - Großer Fuß ab 23 cm

Waschanleitung

Pflegeleicht     
für Waschmaschine und Trockner geeignet

¹ Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

² Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.



AD-Strumpf mit offener Fußspitze



Strapazierfähiges Gestrick



Formstabiler Softbund am AD-Abschluss

Produktvorteile



Clima Fresh

Vielfalt

Perfect Fit



STANDARD 100

96.0.1369/1
Hohenstein HTTI



Vgl. Ben Ammar, F. (DermScan):
Klinische Untersuchung der Haut-
verträglichkeit eines Medizinprodukts-
Anwendungstest unter dermatolo-
gischer Kontrolle, Tunis, 2012 / 2013.

Lieferbare Varianten

	AD	AF	AG	AT	AT / U	AT / H
Serie CCL 2	17.06.01.1130	–	17.06.03.1121	17.06.04.1140	–	–
Serie CCL 3	17.06.01.2043	–	17.06.03.2039	17.06.04.2030	–	–
Maß CCL 2	17.06.10.1025	17.06.11.1021	17.06.12.1024	17.06.13.1034	–	–
Maß CCL 3	17.06.10.2009	17.06.11.2009	17.06.12.2008	17.06.13.2010	–	–

Standard-Ausführungen

Serie	Größe I – VII, Länge normal und kurz, Haftband normal und weit
Maßanfertigung	möglich
Sonderausführung	möglich, siehe Seite 72 – 81
Abschluss	AD Trikotrand, schmales Noppen-Haftband, Noppen-Haftband, Mikronoppen-Haftband sensitiv AF und AG Trikotrand, Noppen-Haftband, Noppen-Haftband mit Motiv, Flächen-Haftband Rose, Mikronoppen-Haftband sensitiv, Hüftbefestigung Alle Haftbänder sind Standard-Ausführungen.
Zwickel	AT Größe I – III: Schritt-Zwickel Größe IV – VII: schmaler Zwickel hinten bis Taille
Fußteil	offene Fußspitze, geschlossene Fußspitze, Softfußspitze ²

Material-Zusammensetzung am Beispiel AG

	Polyamid (PA)	Elastan (EL)
CCL 2	64 %	36 %
CCL 3	64 %	36 %

medi Tipp



medi Butler
erleichtern das Anziehen¹

Die medi Pflegeprodukte für Haut
und Gestrick bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab 112

Material

Kräftig

Kompressionsklasse

CCL 2, 3

Standardfarben

S = Serie
M = Maß

Schwarz
S + M

Anthrazit
S + M

Grau*
S + M

Marine
S + M

Cashmere
S + M

Caramel
S + M

Sand
S + M

Beige*
S + M

* Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage.

Erhältlich mit funkelnden Kristallen.



Hinweis

Der mediven forte ist auch in Trendfarben erhältlich.
Mehr Informationen unter [medi.biz/trendfarben](https://www.medi.biz/trendfarben)

¹ Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/037-005.html> (Letzter Zugriff 12.06.2024).

² Die Softfußspitze ist mit Aufpreis erhältlich. Nähere Informationen finden Sie bei den Sonderausführungen.

KOMPRESSION bei chronischer Venenerkrankung und pAVK/ Diabetes?

Merino-Plüsch im gesamten Fußbereich

Feste Rippenstruktur

Einzigartige Polsterung – von über den Knöcheln bis in die Zehenspitzen

Ja, aber
sicher!*

mediven® angio – Sicherheit bis in die Fußspitze



Extralange, flache Naht

mediven[®] angio

Eine Kompressionstherapie bei Patient:innen mit und gleichzeitigen Begleiterkrankungen stellt besondere Anforderungen an einen Kompressionsstrumpf. Der mediven angio wurde speziell hierfür entwickelt und ist die optimale Lösung für Venenpatient:innen mit pAVK und / oder Diabetes mellitus.

Er ist der erste und einzige medizinische Kompressionsstrumpf dessen Sicherheit in der Anwendung bei Patient:innen mit chronischer Venenerkrankung bei gleichzeitiger leichter bis mittelschwerer pAVK und / oder Diabetes mellitus wissenschaftlich untersucht und bestätigt wurde.¹

mediven angio. Sicherheit in der Versorgung – bis in die Fußspitze.

mediven® angio

Sicherheit in der Versorgung – bis in die Fußspitze



medi Tipp²:

Aufgrund der Produkteigenschaften und der Ergebnisse der klinischen Studie¹ empfehlen wir mediven angio für:

- Frauen / Männer mit chronischer Venenerkrankung
- Begleitende leichte bis mittelschwere pAVK
- Begleitenden Diabetes mellitus

Indikationen³

- Chronische Venenerkrankung der Stadien C0s – C5 nach CEAP

Eigenschaften

- Einzigartige, weiche Polsterung mit Merino-Plüsch im gesamten Fuß
- Natürliche Merino-Wolle für optimale Thermoregulierung und zusätzlichem Tragekomfort
- Extralange und flache Naht schmiegt sich angenehm an die Zehen an, sodass eine anatomische Spitzenform entsteht
- Spezielle Rippenstruktur für ein ideales Druckverhältnis zwischen Ruhe- und Arbeitsdruck und als Orientierungshilfe für die korrekte Anlage
- Mikro-Plüsch im gesamten Unterschenkel für einen angenehmen Tragekomfort
- Farbe Caramel – eignet sich zur schnellen Erkennung von Flüssigkeitsabsonderungen bei etwaigen oberflächlichen Wunden durch Dunkelfärbung des Gestricks



Waschanleitung

Pflegeleicht

für Waschmaschine und Trockner geeignet

medi Tipp



medi Butler erleichtern das Anziehen⁴

Die medi Pflegeprodukte für Haut und Gestrick bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab 112

* Sicherheit des Produktes in klinischer Studie belegt: Der Einsatz des medizinischen Kompressionsstrumpfes mediven angio ist bei Patient:innen mit Venenerkrankungen und gleichzeitig leichter bis mittelschwerer peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) und / oder Diabetes mellitus sicher.¹

¹ Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease. *BMJ Open Diab Res Care* 2020;8:e001316.

² Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

³ Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.


⁴ Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 12.06.2024).

mediven® angio

Die Lösung für Patient:innen mit chronischer Venenerkrankung bei gleichzeitiger Begleiterkrankung pAVK und / oder Diabetes mellitus



- Extrabreites Abschlussbündchen**
Sicherer Halt und großflächige Druckverteilung
- ✓ Vermeidung von Einschnürungen

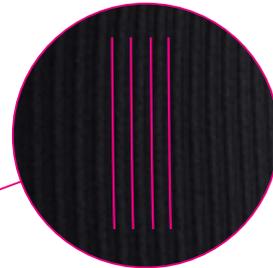

- Feste Rippenstruktur**
Griffige Struktur mit hoher Längsdehnung und feinem Plüsch-Material
- ✓ Vereinfachtes Anlegen und angenehmer Tragekomfort



- Merino-Plüsch im gesamten Fußbereich**
Einzigartige, weiche Polsterung von der Zehenspitze bis über die Knöchel
- ✓ Vermeidung von Druckspitzen bei Sensibilitäts- oder Hautstörungen und optimale Thermoregulierung

- Extralange, flache Naht**
Besondere Naht bis über die Zehengrundgelenke
- ✓ Optimale Druckentlastung der Zehenspitzen und Zehengrundgelenke



mediven® angio

Sicherheit in der Versorgung – bis in die Fußspitze

Lieferbare Varianten

AD



Serie CCL 1	17.06.01.0124
Serie CCL 2	17.06.01.1225
Maß CCL 1	17.06.10.0093
Maß CCL 2	17.06.10.1138

Standard-Ausführungen

Serie	Größe I – VII Länge normal und kurz
Maßanfertigung	möglich
Sonderausführungen	nicht möglich
Abschluss	Extrabreites Bündchen
Fußteil	Geschlossene Fußspitze kleiner Fuß: bis 25 cm $\hat{=}$ Schuhgröße 36 – 40 großer Fuß: ab 25 cm $\hat{=}$ Schuhgröße 40 – 46

Material-Zusammensetzung

	Polyamid (PA)	Elastan (EL)	Merino-Wolle
CCL 1	71 %	22 %	7 %
CCL 2	70 %	23 %	7 %



mediven® angio in Caramel



mediven® angio in Schwarz

Material

Mittel

Kompressionsklasse

CCL 1, 2

Produktvorteile



Clima Comfort



Clima Fresh



Perfect Fit



Vielfalt



STANDARD
100
96.0.1369/1
Hohenstein HTTI

Standardfarben

S = Serie
M = Maß*

Schwarz
S+M

Caramel
S+M

* Lieferzeit bis zu 10 Arbeitstage.

Einzigartige Neuheit

mediven angio – der erste und einzige medizinische Kompressionsstrumpf dessen Sicherheit in der Anwendung bei Patient:innen mit chronischer Venenerkrankung bei gleichzeitiger Begleiterkrankung pAVK und / oder Diabetes mellitus wissenschaftlich untersucht und bestätigt wurde.*

Einzigartige Produkteigenschaften

mediven angio wurde speziell für Patient:innen mit chronischer Venenerkrankung und leichter bis mittelschwerer pAVK und / oder Diabetes mellitus entwickelt und optimal auf deren Bedürfnisse abgestimmt.

Einzigartige Sicherheit

In einer klinischen Studie¹ mit beiden Patiententypen wurde die Sicherheit von mediven angio untersucht und wissenschaftlich belegt:

- ✓ Stabile Durchblutung bis in die kleinsten Blutgefäße
- ✓ Keine Schädigung der Haut
- ✓ Keine Schnürfurchen
- ✓ Keine Druckstellen
- ✓ Hoher Tragekomfort

Bestätigt für die Kompressionsklassen 1 und 2



* Sicherheit des Produktes in klinischer Studie belegt: Der Einsatz des medizinischen Kompressionsstrumpfes mediven angio ist bei Patient:innen mit Venenerkrankungen und gleichzeitig leichter bis mittelschwerer peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) und / oder Diabetes mellitus sicher.¹
¹ Rother U et al. Safety of medical compression stockings in patients with diabetes mellitus or peripheral arterial disease. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001316.



mediven® Sonderausführungen Rundstrick

Jede:r Kund:in ist anders – um individuell zu versorgen, bieten wir Ihren Kund:innen zahlreiche Sonderausführungen. Das sind Artikel-Varianten, die über das mediven Standard-Sortiment hinausgehen.

Die nachfolgende Übersicht unterstützt Sie bei der Wahl der richtigen Zusätze. Durch die individuelle Versorgung tragen Sie dazu bei, dass Kund:innen ihre Strümpfe gerne und regelmäßig tragen. Achten Sie daher auf die unterschiedlichen Anforderungen von Venenpatient:innen und gehen Sie explizit darauf ein. medi bietet Ihnen alles, was Sie dafür benötigen. Für zufriedene Kund:innen.



Standard-Ausführungen Fußspitzen

Offene Fußspitze

medi Tipp:

- Offene Spitze erfolgt auf Wunsch der Patient:innen, wenn sie diese bevorzugen



	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Maßanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis

Geschlossene Fußspitze

medi Tipp:

- Unifußgröße: mediven elegance, mediven comfort, mediven cotton und mediven plus
Schuhgröße 36 – 43
- Zwei Fußgrößen bei mediven forte:
 - Klein, bis 23 cm
 - Groß, ab 23 cm



	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Maßanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis

Sonderausführungen Fußspitzen

Softfußspitze

medi Tipp:

- Bei Kund:innen, die im Zehenbereich empfindlich sind (z. B. Hammerzehe) und daher gerne eine besonders weiche Fußspitze tragen möchten

Hinweis: Es kann aufgrund der unterschiedlichen Strickmaterialien zu Farbabweichungen kommen.



	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Maßanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis

Hallux-valgus-Zehenfach

medi Tipp:

- Bei Kund:innen, die mehr Bewegungsfreiheit in den Zehen benötigen



	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Maßanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Bei nachträglicher Änderung	–	–	–	–	–

Anatomische Fußspitze

medi Tipp:

- Bei Kund:innen mit einer Überempfindlichkeit im Zehenbereich
- Besonders gut für schmale Schuhe geeignet (z. B. Business-Schuhe)

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Maßanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Bei nachträglicher Änderung	–	–	–	–	–



Trikot-Fußspitze nach Angaben verlängern oder verkürzen

medi Tipp:

- Individuelle Versorgung nach kundenspezifischen Maßen

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Maßanfertigung	Standard	Standard	–	Standard	Standard
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis



Trikot-Fußspitze nach Angaben verlängert



Trikot-Fußspitze nach Angaben verkürzt

Trikot-Rand am Fuß nach Angaben verlängern

medi Tipp:

- Individuelle Versorgung nach kundenspezifischen Maßen

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Maßanfertigung	Standard	Standard	–	Standard	Standard
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis



Fußlänge nach Angaben kürzen

medi Tipp:

- Individuelle Versorgung nach kundenspezifischen Maßen

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Maßanfertigung	Standard	Standard	–	Standard	Standard
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis



Anti-Rutsch-Segmente

medi Tipp:

- Bieten mehr Unterstützung im Alltag
- Das Gehen auf Strümpfen wird sicherer und Ihre Patient:innen haben mehr Halt* im Schuh

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Maßanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis



* Halt bezieht sich auf das Gehen in Schuhen mit Absatz.

Leibteile

Strumpfhose mit kompressivem Leibteil

medi Tipp:

Sicherer Halt und mehr Tragekomfort

- Bei Kund:innen, die einen hohen Leibteilmumfang benötigen
- Bei Kund:innen, die weiches Bindegewebe besitzen
- Bei Bauchmuskelschwäche oder Diastasen

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	mit Aufpreis	–	–	mit Aufpreis	–
Maßanfertigung	mit Aufpreis	–	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis



Leibteil verlängert / verkürzt

medi Tipp:

Sicherer Halt und mehr Tragekomfort

- Verlängert bei Kund:innen mit stärkerem Leib oder starkem Po

medi Tipp:

Sicherer Halt und mehr Tragekomfort

- Verkürzt bei Kund:innen mit schwachem Po (hüfthohes Tragen möglich)

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	mit Aufpreis	–	–	mit Aufpreis	–
Maßanfertigung	ohne Aufpreis	–	–	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	–	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis



Leibteil vorne / hinten, verlängert / verkürzt

medi Tipp:

Sicherer Halt und mehr Tragekomfort

- Vorne verlängert oder hinten verkürzt bei Kund:innen mit schwachem Po, aber stärkerem Leib

medi Tipp:

Sicherer Halt und mehr Tragekomfort

- Vorne verkürzt oder hinten verlängert bei Kund:innen mit starkem Po, aber wenig Leib

Hinweis: Die Differenz zwischen der vorderen und hinteren Leibteil-Länge kann maximal 9 cm betragen.

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	mit Aufpreis	–	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Maßanfertigung	ohne Aufpreis	–	–	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	–	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis



Hose mit offenem Schritt

medi Tipp:

Mehr Tragekomfort und bessere Alltagstauglichkeit

- Bei Kund:innen mit stark eingeschränkter Bewegungsfreiheit
- Bei inkontinenten Patient:innen
- Bei Träger:innen von Dauerkathetern
- Bei Kund:innen mit gynäkologischen Mykosen

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	mit Aufpreis	–	–	mit Aufpreis	–
Maßanfertigung	ohne Aufpreis	–	–	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	–	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis



Hose mit Stoma-Loch

medi Tipp:


Mehr Tragekomfort und bessere Alltagstauglichkeit

- Bei Stoma-Träger:innen

Bitte beachten Sie:

- Passen Sie bei einer Erstversorgung erst die Hose den Kund:innen an und markieren Sie anschließend die Stoma-Öffnung.
- Schicken Sie zur Einarbeitung der Öffnung die Hose an medi. Auf diese Weise wird sie exakt platziert.
- Schicken Sie bei einer Wiederversorgung bitte die „Vorlage“ mit.

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Maßanfertigung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis

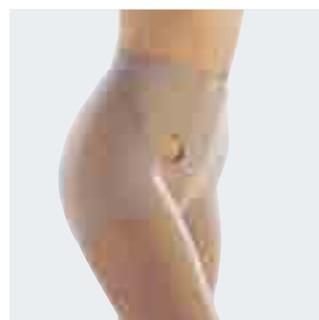

Einbeinhose

medi Tipp:

- Als Alternative zu Hüftbefestigung oder Haftband

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus*	mediven forte*
Serienanfertigung	–	–	–	mit Aufpreis	–
Maßanfertigung	–	–	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis

* Aufpreisregelung immer ausgehend vom Preis AG mit Trikotrand



Standard-Ausführungen Haftbänder

Flächen-Haftband Rose, Noppen-Haftband, Noppen-Haftband mit Motiv, Mikronoppen-Haftband sensitiv

Flächen-Haftband Rose

medi Tipp: bewährter, zuverlässiger Halt durch flächige Beschichtung. Elegantes, feminines Design. Feine, dünne Haftband-Qualität.

Noppen-Haftband

medi Tipp: bewährter, zuverlässiger Halt durch Noppen-Struktur. Gute Luftzirkulation. Neutrales Design. Stabile, robuste Haftband-Qualität.

Noppen-Haftband mit Motiv

medi Tipp: bewährter, zuverlässiger Halt durch Noppen-Struktur. Gute Luftzirkulation. Modisches Design. Stabile, robuste Haftband-Qualität.

Mikronoppen-Haftband sensitiv

medi Tipp: kaum spürbare, feine Mikronoppen für zuverlässigen Halt. Sehr gute Luftzirkulation. Neutrales Design. Feine, dünne Haftband-Qualität.



Flächen-Haftband Rose



Noppen-Haftband



Noppen-Haftband mit Motiv



Mikronoppen-Haftband sensitiv



Vgl. Ben Ammar, F. (DermScan):
Klinische Untersuchung der Hautverträglichkeit eines Medizinprodukts – Anwendungstest unter dermatologischer Kontrolle, Tunis, 2012 / 2013.



Quelle:
Final Clinical Security Test – Eurofins DERMSCAN, Bucharest, 2019.

	(FBR) Flächen-Haftband Rose	(NoB) Noppen- Haftband	(NoM) Noppen-Haftband mit Motiv	(MBs) Mikronoppen- Haftband sensitiv
mediven elegance*				
Serienanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard
Maßanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis
mediven comfort*				
Serienanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard
Maßanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis
mediven cotton*				
Serienanfertigung	–	Standard	–	Standard
Maßanfertigung	–	Standard	–	Standard
Bei nachträglicher Änderung	–	–	–	–
mediven plus*				
Serienanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard
Maßanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis
mediven forte*				
Serienanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard
Maßanfertigung	Standard	Standard	Standard	Standard
Bei nachträglicher Änderung	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis	mit Aufpreis

*Aufpreisregelung immer ausgehend vom Preis mit Haftband


Hüftbefestigung

medi Tipp:

- Sicherer Halt und mehr Tragekomfort
- Bei Kund:innen mit starken oder konisch verlaufenden Oberschenkeln
- Bei sehr weichen Oberschenkeln
- Bei Allergiker:innen (Alternative zum mit Silikon beschichteten Haftband)
- Bei Kund:innen, die durch mechanische Wirkungsweise von Haftbändern zu Hautreaktionen neigen

	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Serienanfertigung	–	–	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Maßanfertigung	–	–	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis
Bei nachträglicher Änderung	–	–	–	mit Aufpreis	mit Aufpreis

* Aufpreisregelung immer ausgehend vom Preis AG mit Trikotrand

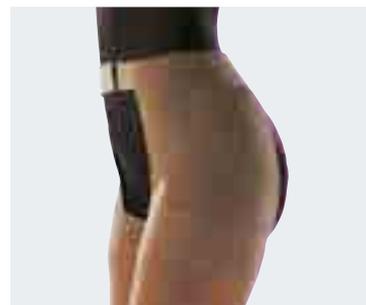

Strumpfhalterung

Strumpfhalterung aus Gurtband, verstellbar mit zwei bzw. mit vier Strumpfhaltern. Kann bei allen Qualitäten angewendet werden.

Einseitig in den Größen	1	2	3
Taille	80 – 90 cm	95 – 105 cm	110 – 120 cm
Doppelseitig in den Größen	1	2	3
Taille	80 – 90 cm	95 – 105 cm	110 – 120 cm



Meterware

Kann nach Bedarf bestellt werden.

- **Flächen-Haftband Rose (FBR)**
- **Noppen-Haftband (NoB)**
- **Noppen-Haftband mit Motiv (NoM)**
- **Mikronoppen-Haftband sensitiv (MBs)**
- Zusammensetzung:
Silikon, Polyamid, Polyester, Elasthan
- In den Farben
Beige, Caramel, Schwarz, Weiß und Cashmere







mediven® Zwickel-Varianten

Der perfekte Sitz des Kompressionsstrumpfes ist das A und O.

Nur wenn Ihre Kund:innen sich damit wohlfühlen, tragen sie ihren Strumpf konsequent. medi bietet daher unterschiedliche Zwickel-Varianten. Auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick zu den zahlreichen Möglichkeiten. Neben den Bildern vereinfacht Ihnen eine Beschreibung die richtige Wahl.

mediven® Zwickel-Varianten

Standard-Zwickel	mediven elegance	mediven comfort	mediven cotton	mediven plus	mediven forte
Komfort-Zwickel	Größe I – VII cT 60 – 125 cH 80 – 145	Größe I – VII cT 60 – 125 cH 80 – 135	Größe I – VII cT 60 – 125 cH 80 – 135		
Schritt-Zwickel <i>Wenig Bauch und wenig Po</i> Bei einem schwach ausgeprägten Bauch und Po				Größe I – III cT 60 – 95 cH 80 – 110	Größe I – III cT 60 – 95 cH 80 – 110
Schmaler Zwickel hinten <i>Wenig Bauch und viel Po</i> Bei einem ausgeprägten Po und im Vergleich dazu eher flachen Bauch				Größe IV – VII cT 80 – 125 cH 100 – 145	Größe IV – VII cT 80 – 125 cH 100 – 145
Breiter Zwickel hinten <i>Wenig Bauch und sehr viel Po</i> Bei einem deutlich ausgeprägten Po und im Vergleich dazu eher flachen Bauch				Maxi-Leibteil Größe I – III cT 95 – 140 cH 110 – 150	
Extrabreiter Zwickel hinten <i>Viel Bauch und viel Po</i> Bei einem ausgeprägten Po und Bauch				Maxi-Leibteil Größe IV – V cT 120 – 150 cH 135 – 160	
Umstandshose geschlossen <i>Wachsender Bauch</i> Geeignet für schwangere Frauen mit wachsendem, hohem Bauchumfang	Größe I – VII cT ab 60 cH ab 80			Größe I – VII cT ab 60 cH ab 80	
Herrenhose, Querschlitze <i>Für Herren (mit Eingriff)</i>				Größe I – VII cT 60 – 125 cH 80 – 145	

Zwickel-Varianten Rundstrick

Komfort-Zwickel

Standard-Zwickel

Ausführung Serie

Qualitäten mediven elegance, mediven comfort, mediven cotton

Größen I – VII

Ausführung Maß

Qualitäten mediven elegance, mediven comfort

Bitte bestellen Sie „Komfort-Zwickel“



vorne



hinten

Schritt-Zwickel

Standard-Zwickel

Schwach ausgeprägter Bauch und Po.

Ausführung Serie

Qualitäten mediven plus, mediven forte

Größen I – III

Ausführung Maß

Qualitäten mediven plus, mediven forte

Bitte bestellen Sie „Schritt-Zwickel“



vorne



hinten

Maxi-Leibteil

Große Hüft- und Taillenumfänge.

Sonderausführung

Qualität mediven plus

Größen I – VII



vorne



hinten

Schmaler Zwickel hinten

Ausgeprägter Po und im Vergleich dazu ein eher flacher Bauch.

Maßanfertigung	
Qualitäten	mediven elegance mediven cotton mediven plus mediven forte
Sonderausführung	
Qualitäten	mediven plus, Größe I – III Maxi-Leibteil, Größe I – III mediven forte, Größe I – III
Bitte bestellen Sie	„Schmaler Zwickel hinten“



vorne



hinten

Schmaler Zwickel vorne

Ausgeprägter Bauch und ein relativ flacher Po.

Maßanfertigung	
Qualitäten	mediven elegance mediven cotton mediven plus mediven forte
Sonderausführung	
Qualitäten	mediven elegance mediven plus
Bitte bestellen Sie	„Schmaler Zwickel vorne“



vorne



hinten

Breiter Zwickel hinten

Deutlich ausgeprägter Po und im Vergleich dazu ein eher flacher Bauch.

Maßanfertigung	
Qualitäten	mediven elegance mediven comfort mediven cotton mediven plus mediven forte
Sonderausführung	
Qualitäten	mediven elegance mediven comfort mediven plus Maxi-Leibteil, Größe IV – VII
Bitte bestellen Sie	„Breiter Zwickel hinten“



vorne



hinten

Breiter Zwickel vorne

Deutlich ausgeprägter Bauch und im Vergleich dazu ein eher flacher Po.

Maßanfertigung	
Qualitäten	mediven elegance mediven comfort mediven cotton mediven plus mediven forte
Sonderausführung	
Qualitäten	mediven elegance mediven plus mediven comfort
Bitte bestellen Sie	„Breiter Zwickel vorne“



vorne



hinten

Variabler Zwickel hinten

Schmale Taille, deutlich ausgeprägter Po und im Vergleich dazu ein eher flacher Bauch.

Maßanfertigung	
Qualitäten	mediven elegance mediven plus mediven forte
Sonderausführung	
Qualitäten	mediven elegance mediven plus
Bitte bestellen Sie	„Variabler Zwickel hinten“



vorne



hinten

Variabler Zwickel vorne

Schmale Taille, deutlich ausgeprägter Bauch und im Vergleich dazu ein eher flacher Po.

Maßanfertigung	
Qualitäten	mediven elegance mediven plus mediven forte
Sonderausführung	
Qualitäten	mediven elegance mediven plus
Bitte bestellen Sie	„Variabler Zwickel vorne“



vorne



hinten

Durchgehender Zwickel schmal

Empfindlichkeit gegen Druck und leichter Po- und Bauchansatz.

Maßanfertigung

Qualitäten	mediven elegance mediven cotton mediven plus mediven forte
------------	---

Sonderausführung

Qualitäten	mediven elegance mediven plus
Bitte bestellen Sie	„Durchgehender Zwickel schmal“



vorne



hinten

Durchgehender Zwickel vorne schmal und hinten breit

Hoher Bauchumfang und ein besonders stark ausgeprägter Po.

Maßanfertigung

Qualitäten	mediven elegance mediven cotton mediven plus mediven forte
------------	---

Sonderausführung

Qualitäten	mediven elegance mediven plus
Bitte bestellen Sie	„Durchgehender Zwickel vorne schmal und hinten breit“



vorne



hinten

Durchgehender Zwickel vorne breit und hinten schmal

Insgesamt hoher Bauchumfang und ein stark ausgeprägter Po.

Maßanfertigung

Qualitäten	mediven elegance mediven cotton mediven plus mediven forte
------------	---

Sonderausführung

Qualitäten	mediven elegance mediven plus
Bitte bestellen Sie	„Durchgehender Zwickel vorne breit und hinten schmal“



vorne



hinten

Durchgehender Zwickel breit

Hoher Bauch- und Hüftumfang.

Maßanfertigung	
Qualitäten	mediven elegance mediven comfort mediven cotton mediven plus mediven forte
Sonderausführung	
Qualitäten	mediven elegance mediven plus mediven comfort
Bitte bestellen Sie	„Durchgehender Zwickel breit“



vorne



hinten

Umstandshose AT / U, geschlossen

Standard-Zwickel

Geeignet für schwangere Frauen mit wachsendem, hohem Bauchumfang.

- Weicher und anschmiegsamer Zwickel, das Material hebt sich optisch heller ab
- Leibteilverlängerung für besseren Sitz

Ausführung Serie	
Qualitäten	mediven elegance, mediven plus
Größen	I – VII
Ausführung Maß	
Qualitäten	mediven elegance mediven plus, mediven forte
Bitte bestellen Sie	„Umstandshose AT / U, geschlossen“



vorne



Seite

Umstandshose AT / U, offen

Geeignet für schwangere Frauen mit wachsendem, hohem Bauchumfang und vorhandener Druckempfindlichkeit.

Maßanfertigung

Qualitäten	mediven elegance mediven plus mediven forte
------------	---

Sonderausführung

Qualitäten	mediven elegance mediven plus
Bitte bestellen Sie	„Umstandshose AT / U, offen“



vorne



Seite

Herren-Zwickel mit Querschlitzz

Geeignet für Herren (mit Eingriff).

Ausführung Serie

Qualitäten	mediven plus
Größen	I – VII

Ausführung Maß

Qualitäten	mediven plus, mediven forte
Bitte bestellen Sie	„Herren-Zwickel mit Querschlitzz“



vorne



hinten



mediven ulcer kit[®]

Die Versorgung des Ulcus cruris erfordert ein ausgeklügeltes Therapiekonzept. Mit dem mediven ulcer kit können Patient:innen mit offenem Bein effizient behandelt werden. Das ulcer kit besteht aus zwei Komponenten, die übereinander getragen werden: mediven ulcer und mediven ulcer plus. Der Unter- wie auch der Überstrumpf haben jeweils 20 mmHg und sorgen somit Tag und Nacht für eine therapeutisch effektive Kompressionstherapie.

Mehr zum medi Therapiekonzept Ulcus cruris erfahren Sie in unserem Produktkatalog, Seite 4.





mediven
ulcer kit

mediven ulcer kit®

Ulkus-Strumpfsystem mit 2 x 20 mmHg für eine effektive bis zu 24-stündige Kompressionstherapie^{1,2}

medi Tipp`:

Aufgrund der Produkteigenschaften empfehlen wir mediven ulcer kit für:

- Frauen / Männer
- Nach initialer Entstauungsphase
- 24-stündige Kompressionstherapie

Indikationen

- Therapie des Ulcus cruris venosum (CEAP-Klassifikation C6)
- Therapie des Ulcus cruris venosum-Rezidivs (CEAP-Klassifikation C6r)
- Therapie des gemischten (arteriell und venös bedingten) Ulcus cruris (unter Berücksichtigung der Kontraindikationen)
- Prävention des Ulcus cruris venosum-Rezidivs (CEAP-Klassifikation C5)

Eigenschaften

- Bereits nachts therapeutisch wirksam^{1,2}
- Einfaches Anlegen: Unterstrumpf erleichtert das Anziehen des Überstrumpfes³
- Geruchshemmende Wirkung im Unterstrumpf für optimale Hygiene
- mediven ulcer sollte aus hygienischen Gründen täglich gewechselt werden, zwei Unterstrümpfe standardmäßig im Lieferumfang enthalten
- Angenehmes Tragegefühl bei gleichzeitig hoher Strapazierfähigkeit
- Erfüllt die Anforderungen der EWMA** hinsichtlich des therapeutisch notwendigen Drucks (40 mmHg)⁴
- Hohe Wandstabilität dank doppeltem Strumpf

Waschanleitung

Unterstrumpf: 

Überstrumpf: 

für Waschmaschine und

Trockner geeignet



Hinweis

Ein anschauliches Video zum Anlegen des mediven ulcer kits finden Sie hier: www.medi.biz/ulcerkit

* Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

¹ Partsch B et al. Compression stockings for treating venous leg ulcers: measurement of interface pressure under a new ulcer kit. Phlebologie 2008;23(1):40-46.

² Wolff O et al. The effect of compression ulcer stockings on the capillary filtration rate and the formation of oedema. Phlebologie 2011;5:245-250.

³ Tickle J. Managing venous leg ulcers and oedema using compression hosiery. Nursing Standard 2015;30(8):57-63.

⁴ Franks P et al. Management of Patients with Venous Leg Ulcer Challenges and Current Best Practice. J Wound Care 2016;25 Suppl 6:1-67.

** European Wound Management Association

mediven ulcer kit[®]

Ulkus-Strumpfsystem mit 2 x 20 mmHg für eine effektive bis zu 24-stündige Kompressionstherapie^{1,2}

Unterstrumpf mediven[®] ulcer

Therapeutisch effektive
Kompression mit 20 mmHg
während der Nacht.^{1,2}

Flacher Abschlussrand
gibt sicheren Halt und
schnürt nicht ein.

Weiches Material mit
antibakteriellem Effekt
sorgt für angenehmen
Tragekomfort und einfaches
Anziehen.

Eingestrickter Ristbereich
ermöglicht eine optimale
Passform und reduziert die
Faltenbildung bei
angewinkeltem Fuß.

Spezielle Fersenkonstruktion
bietet optimale Druck-
entlastung und Farb-
markierung zur einfachen
Positionierung.

Überstrumpf mediven[®] ulcer plus

Zusätzliche 20 mmHg
Kompression während
des Tages.

Breites Abschluss-
bündchen gewähr-
leistet optimalen
Tragekomfort.

Mittlere Materialstärke
sorgt für angenehmen
Arbeitsdruck und eine
dezenzte Optik.

Komfortable Plus-Ferse
und zuverlässige
Sohlenverstärkung
ermöglicht eine hohe
Strapazierfähigkeit.

Auch mit
geschlossener
Fußspitze
erhältlich.



mediven ulcer kit®

Ulkus-Strumpfsystem mit 2 x 20 mmHg für eine effektive bis zu 24-stündige Kompressionstherapie^{1,2}

Lieferumfang

- 2 mediven ulcer Unterstrümpfe
- 1 mediven ulcer plus Überstrumpf
- 1 Anziehhilfe für Strümpfe mit offener Fußspitze (bei mediven ulcer kit mit offener Fußspitze)

mediven ulcer kit

	AD	AD
		
	Geschlossene Fußspitze	Offene Fußspitze
Serie 2 x 20 mmHg	17.06.08.1004	17.06.08.1004


mediven® ulcer refill

Artikel	VE	Hilfsmittelnummer
mediven ulcer refill Nachfüllpack	2 x mediven ulcer	17.99.99.2024

Artikel	Artikelnummer	
Geschlossene Fußspitze	kurz	normal
mediven ulcer kit	381708△000	381008△000
Offene Fußspitze		
mediven ulcer kit	381707△000	381007△000
Nachfüllpack (je VE 2 Stück)		
mediven ulcer refill	8X4718△000	8X4018△000

△ = Bitte die Größe von 1–7 ergänzen

Maßtabelle

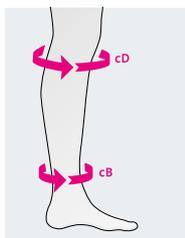

Größe		I	II	III	IV	V	VI	VII
Umfänge (in cm)	Fessel cB	18–20	20–22	22–24	24–26	26–28	28–30	30–32
	unter Knie cD	27–33	29–36	32–39	34–42	36–45	38–48	40–50
Farbmarkierung	Ferse	Rosa	Blau	Gelb	Rot	Grau	Grün	Braun
		Kurz	Normal					
Länge (in cm)	∅D	34–38	39–44					

Studien

- ¹ Partsch B et al. Compression stockings for treating venous leg ulcers: measurement of interface pressure under a new ulcer kit. Phlebologie 2008;23(1):40-46.
- ² Wolff O et al. The effect of compression ulcer stockings on the capillary filtration rate and the formation of oedema. Phlebologie 2011;5:245-250.

Kompression

2 x 20 mmHg

Produktvorteile



Weich *



Clima Fresh



Easy donning



STANDARD
100
96.0.1369/1
Hohenstein HTTI

* Diese Merkmale gelten nur für den mediven ulcer Unterstrumpf.

Farben

S = Serie

Caramel
S



mediven ulcer kit® mit geschlossener Fußspitze





Basisversorgungen von medi

Der medizinische Hilfsmittelmarkt befindet sich im Wandel. Schon heute müssen Sie als Leistungserbringer beispielsweise bis zu zwei aufzahlungsfreie medizinische Kompressionsstrümpfe als Basisversorgung bereithalten. medi bietet Ihnen dafür die ideale Lösung. Mit dem duomed basic und dem Maxis MICRO bieten Sie Ihren Kund:innen aufzahlungsfreie Produkte mit solider Produktqualität. Die Strümpfe erhalten Sie in allen wichtigen Varianten als Serien- und Maßversorgung.

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit medi ermöglicht es Ihnen, auf alle Kundenbedürfnisse einzugehen und das komplette Sortiment aus aufzahlungsfreien Produkten, mediven Qualitätsprodukten sowie individuellen Premium-Zusätzen abzudecken. Erhalten Sie von medi alles einfach aus einer Hand.

duomed[®] basic

medi Tipp¹:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkteigenschaften empfehlen wir duomed basic für:

- Frauen / Männer
- Normalgewichtig / übergewichtig
- Leichte bis schwere Phlebödemenneigung
- Auch für weiches Bindegewebe

Indikationen²

- Chronische Venenerkrankungen der Stadien C0s – C4 nach CEAP
- Initiale Phase nach Varikosetherapie
- Stauungsbeschwerden und Ödeme in der Schwangerschaft
- Postoperative Reperfusionsoedeme
- Posttraumatische, postoperative, berufsbedingte, medikamentös bedingte Ödeme
- Ödeme infolge Immobilitäten
- Oberflächliche Venenthrombose
- Zustand nach Thrombose, postthrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patient:innen
- Entzündliche Dermatosen der Beine
- Übelkeit, Schwindel in der Schwangerschaft

Eigenschaften

- Blickdichtes Gestrick

Waschanleitung

Pflegeleicht 

für Waschmaschine und

Trockner geeignet



Noppen-Haftband

¹ Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

² Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.

Produktvorteile



STANDARD 100
96.0.1369/1
Hohenstein HTTI

Kompressionsklasse

CCL 1, 2

Standardfarben

S = Serie
M = Maß

Caramel
S + M

Schwarz
S + M

Lieferbare Varianten

	AD	AG	AT	AT / U
Serie CCL 1	17.06.01.0110	17.06.03.0097	17.06.04.0102	17.06.04.0102
Serie CCL 2	17.06.01.1176	17.06.03.1203	17.06.04.1172	17.06.04.1172
Maß CCL 1	17.06.10.0078	17.06.12.0071	17.06.13.0068	17.06.13.0068
Maß CCL 2	17.06.10.1122	17.06.12.1113	17.06.13.1111	17.06.13.1111

Standard-Ausführungen


Serie	Größe I – VII, Länge normal und kurz, Haftband normal und weit	
Maßanfertigung	möglich	
Sonderausführung	nicht möglich	
Abschluss	AD	Trikotrand, schmales Noppen-Haftband
	AG	Noppen-Haftband
Zwickel/ Leibteil	AT	Standard-Zwickel
Fußteil	offene Fußspitze, geschlossene Fußspitze Schuhgröße 36 – 43	

Material-Zusammensetzung

	Polyamid (PA)	Elastan (EL)
CCL 1	58 %	42 %
CCL 2	55 %	45 %

Seriengröße ohne Naht

		I	II	III	IV	V	VI	VII
AG mit Haftband normal	cG	43 – 48	45 – 52	49 – 56	53 – 60	56 – 64	60 – 68	64 – 72
AG mit Haftband weit	cG	49 – 57	53 – 62	57 – 67	61 – 72	65 – 77	69 – 81	73 – 85
ℓ = Längen- maße c = Umfang- maße	cG	43 – 57	45 – 62	49 – 67	53 – 72	56 – 77	60 – 81	64 – 85
	cF	39 – 52	41 – 56	44 – 60	47 – 65	50 – 69	53 – 73	57 – 78
	cE	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 45	39 – 48	41 – 51	42 – 53
	cD	27 – 33	29 – 36	32 – 39	34 – 42	36 – 45	38 – 48	40 – 50
	cC	28 – 34	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 46	39 – 49	41 – 51
	cB1	23 – 27	24 – 29	26 – 32	29 – 35	31 – 37	33 – 39	35 – 41
	cB	18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30	30 – 32
	cY	26 – 31	28 – 33	29 – 35	31 – 37	32 – 38	33 – 40	34 – 42
	cA	17 – 22	19 – 24	21 – 26	23 – 29	25 – 32	27 – 34	28 – 35

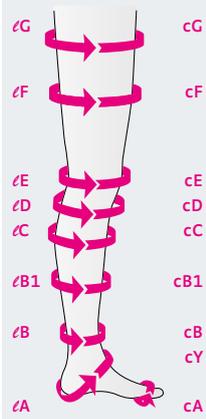

Umfangmaße in cm

Längenmaße

ℓG normal	72 – 83 cm
ℓG kurz	62 – 71 cm
ℓD normal	39 – 44 cm
ℓD kurz	34 – 38 cm

Fußteile hochelastische Unifußgröße, Schuhgröße 36 – 43

medi Tipp¹:

Aufgrund der Materialstärke, der Passform und der Produkteigenschaften empfehlen wir Maxis MICRO für:

- Frauen / Männer
- Normalgewicht
- Leichte Ödemneigung
- Straffes Bindegewebe

Indikationen²

- Chronische Venenerkrankungen der Stadien C0s – C3 nach CEAP
- Initiale Phase nach Varikosetherapie
- Stauungsbeschwerden und Ödeme in der Schwangerschaft
- Postoperative Reperfusionsoedeme
- Posttraumatische, postoperative, berufsbedingte, medikamentös bedingte Ödeme
- Ödeme infolge Immobilitäten
- Oberflächliche Venenthrombose
- Zustand nach Thrombose, postthrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patient:innen
- Entzündliche Dermatosen der Beine
- Übelkeit und Schwindel in der Schwangerschaft

Eigenschaften

- Transparentes Gestrick

Waschanleitung

Pflegeleicht     

für Waschmaschine und

Trockner geeignet



Noppen-Haftband

¹ Bitte beachten Sie, dass diese Empfehlung weder die ärztliche Diagnose noch die Beratung durch den medizinischen Fachhandel ersetzt.

² Die Wahl des optimalen Kompressionsstrumpfes ist abhängig von der Indikation und den individuellen Bedürfnissen der Patient:innen.

Produktvorteile



STANDARD 100
96.0.1369/1
Hohenstein HTTI

Kompressionsklasse

CCL 1, 2

Standardfarben

S = Serie
M = Maß

Bronze
S + M

Schwarz
S + M

Lieferbare Varianten

	AD	AF	AG	AT	AT / U
Serie CCL 1	17.06.01.0082	–	17.06.03.0076	17.06.04.0079	17.06.04.0079
Serie CCL 2	17.06.01.1132	–	17.06.03.1119	17.06.04.1112	17.06.04.1112
Maß CCL 1	17.06.10.0053	17.06.11.0043	17.06.12.0052	17.06.13.0050	17.06.13.0050
Maß CCL 2	17.06.10.1078	17.06.11.1048	17.06.12.1076	17.06.13.1068	17.06.13.1068

Standard-Ausführungen

Serie	Größe 2 – 7, Länge normal und kurz, Haftband normal und weit	
Maßanfertigung	möglich	
Sonderausführungen	nicht möglich	
Abschluss	AD	Trikotrand
	AG	Noppen-Haftband
Zwickel / Leibteil	AT	Standard-Zwickel
Fußteil	offene Fußspitze, geschlossene Fußspitze Unifußgröße	

Material-Zusammensetzung

	Polyamid (PA)	Elastan (EL)
CCL 1	67 %	33 %
CCL 2	62 %	38 %

Seriengröße ohne Naht

	2	3	4	5	6	7
AG mit Haftband normal	44–51	48–55	52–59	55–63	59–67	63–70
AG mit Haftband weit	52–61	56–66	60–71	64–76	68–81	71–83

L = Längen- maße c = Umfang- maße	Längs- maße	Leibteil- maße	Umfangmaße in cm	Seriengröße ohne Naht						
				2	3	4	5	6	7	
	L	c	cG	44–61	48–66	52–71	55–76	59–81	63–83	
			cF	40–50	43–54	46–58	49–63	52–66	56–70	
			cE	32–39	34–42	36–44	38–47	40–50	41–52	
			cD	28–35	31–38	33–41	35–44	37–47	39–49	
			cC	29–36	32–39	34–42	36–45	38–48	40–50	
			cB1	23–29	25–31	28–34	30–36	32–38	35–40	
			cB	19–21	21–23	23–25	25–27	27–29	29–31	
			cY	27–32	28–34	30–36	31–37	32–40	34–42	
			cA	18–23	20–25	22–28	24–31	26–33	27–34	
			L	c	c	cH	110	120		130
cT	80	90					100			
L	c	c	lG normal	72–83						
			lG kurz	62–71						
			lD normal	39–44						
			lD kurz	34–38						



mediven harmony[®]

Der Armstrumpf „ohne Naht“ eignet sich beispielsweise für den Einsatz bei posttraumatischen Ödemen.



mediven harmony®

Rundgestrickter Armstrumpf in sieben Seriengrößen

Indikationen

- Armvenenthrombose
- Postoperative und posttraumatische Ödeme (Hinweis: nicht für ausgeprägte Ödeme geeignet!)


Handteil:

- Wirkt der Ödembildung im Handbereich entgegen während des Tragens eines medizinischen Kompressionsstrumpfes für den Arm

Eigenschaften

- Doppelte Ellipse im Bereich des Ellenbogens und der Ellenbeuge für verminderte Faltenbildung in der Ellenbeuge, dadurch Verhinderung von Einschnürung, Druckstellen, Hautreizungen, Hautverletzungen im Beugesehenbereich und der vaskulären Strukturen
- Gewährleistung der Gelenkfunktionalität
- UV-Schutzfaktor 80
- Lanolin-Ausrüstung¹

Handteil mediven harmony SL

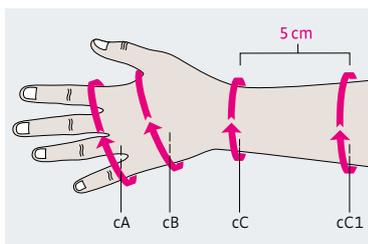

Lieferbare Varianten

AC1-Handteil
ohne Finger, mit Daumenansatz



Nahtloses
Handteil

17.99.99.2011

Material-Zusammensetzung Handteil

	Polyamid (PA)	Elastan (EL)
CCL 1	82 %	18 %
CCL 2	78 %	22 %

* Maßpunkt cC1 befindet sich 5 cm oberhalb von cC



Waschanleitung

Pflegeleicht für Waschmaschine und Trockner geeignet

Umfang / Handteil (cm)

Größen	II	III	IV	V	VI	VII
cC1*	15,0 – 18,0	17,0 – 20,0	19,0 – 21,5	21,0 – 23,5	23,0 – 26,0	25,5 – 30,0
cC	13,5 – 15,5	15,0 – 18,0	17,0 – 20,0	19,0 – 21,0	20,0 – 23,5	22,5 – 27,5
cB	15,5 – 20,0	17,5 – 21,0	19,5 – 23,0	20,5 – 24,0	22,5 – 26,0	24,5 – 30,0
cA	15,0 – 19,0	17,0 – 20,0	19,0 – 22,0	20,0 – 23,0	22,0 – 25,0	24,0 – 29,0

medi Tipp



medi Butler erleichtern das Anziehen²

Die medi Pflegeprodukte für Haut und Gestrick bieten Unterstützung

Mehr Informationen zum medi Zubehör ab 112

¹ Natürliche Substanz zur Pflege von trockener und rauer Haut, vielseitig verwendet, beispielsweise in der Kinder- und Babypflege.

² Allgemein gilt für An- und Ausziehhilfen: Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 12.06.2024).

Produktvorteile



Clima Comfort



Perfect Fit



Double ellipses



STANDARD 100
96.0.1369/1
Hohenstein HTTI



STANDARD 100
97.0.3231
Hohenstein HTTI

Kompressionsklasse

CCL 1, 2


Farben

S = Serie

Sand
S

Caramel
S

Armstrumpf

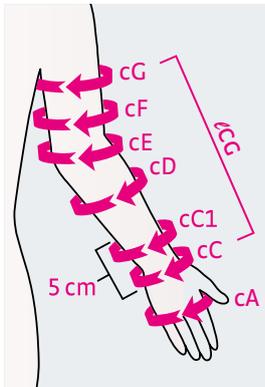

Maßpunkte mediven harmony

Standard-Ausführungen

Farben	Sand, Caramel
Seriengrößen	I – VII, Standard und Extraweit
Maßanfertigung	nicht möglich
Abschluss	Noppen-Haftband schmal, 2,5 cm
Handteil	ohne Finger, mit Daumenansatz

Material-Zusammensetzung

Armversorgung	Polyamid (PA)	Elastan (EL)
CCL 1	66 %	34 %
CCL 2	57 %	43 %

Länge (cm)

Standardlänge 41 – 47

Varianten (alle Varianten erhältlich in den Ausführungen Standard und Extraweit)

AG-Armstrumpf mit integriertem Handteil und Haftband-Abschluss



Standard	CCL 1: 17.10.01.0013 CCL 2: 17.10.01.1017
Extraweit	CCL 1: 17.10.01.0013 CCL 2: 17.10.01.1017

CG-Armstrumpf mit Haftband-Abschluss



Standard	CCL 1: 17.10.01.0014 CCL 2: 17.10.01.1019
Extraweit	CCL 1: 17.10.01.0014 CCL 2: 17.10.01.1019

Armstrumpf	Größe I		Größe II		Größe III		Größe IV	
Umfang (cm)	Standard	Extraweit	Standard	Extraweit	Standard	Extraweit	Standard	Extraweit
cG	25,5 – 28,0	28,5 – 31,0	28,0 – 30,5	30,5 – 33,5	30,0 – 33,0	33,0 – 36,0	32,0 – 35,0	35,0 – 38,5
cF	23,5 – 25,5	25,5 – 28,0	25,0 – 27,5	27,5 – 30,0	27,5 – 30,0	30,0 – 33,0	29,5 – 32,0	32,0 – 35,0
cE	23,0 – 25,0	24,0 – 26,0	24,5 – 26,5	26,5 – 29,0	26,0 – 28,5	28,5 – 31,0	27,5 – 30,0	30,0 – 33,0
cD	22,0 – 24,0	24,0 – 26,0	23,0 – 25,0	25,0 – 27,5	24,0 – 26,0	26,0 – 28,5	25,0 – 27,5	28,0 – 30,5
cC1 = 100 %	15,0 – 16,5		16,5 – 18,0		18,0 – 19,5		19,5 – 21,0	
cC	13,5 – 14,5		14,5 – 15,5		16,0 – 17,5		17,5 – 19,0	
cA	15,0 – 18,0		16,0 – 19,0		17,0 – 20,0		19,0 – 22,0	

Armstrumpf	Größe V		Größe VI		Größe VII	
Umfang (cm)	Standard	Extraweit	Standard	Extraweit	Standard	Extraweit
cG	33,5 – 36,5	37,0 – 40,5	36,0 – 39,5	39,5 – 43,0	38,0 – 41,5	41,5 – 45,5
cF	31,0 – 34,0	34,0 – 37,0	33,0 – 36,0	36,0 – 39,5	35,0 – 38,5	38,5 – 42,0
cE	29,0 – 31,5	31,5 – 34,5	30,5 – 33,5	33,5 – 36,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39,0
cD	27,0 – 29,5	29,5 – 32,0	28,5 – 31,0	31,0 – 34,0	30,5 – 33,5	33,5 – 36,5
cC1 = 100 %	21,0 – 23,0		23,0 – 25,0		25,0 – 27,5	
cC	19,0 – 20,5		20,5 – 22,5		22,5 – 24,5	
cA	20,0 – 23,0		22,0 – 25,0		24,0 – 27,0	





medi travel® Reisestrümpfe

Menschen mit gesundem Venensystem denken bei Urlaubs- oder Geschäftsreisen nicht sofort an Thromboseprophylaxe. Doch das ist bei langen Autofahrten oder im Flugzeug besonders wichtig. Reisestrümpfe gehören auf jede Reise-Checkliste. Sie können das Risiko einer Reisthrombose reduzieren¹.

Integrieren Sie das Thema Thromboseprophylaxe auf Reisen in Ihre Kundengespräche und empfehlen Sie die medi travel Reisestrümpfe – als gesunden Urlaubsbegleiter für fitte Beine.

¹ Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/037-005.html> (Letzter Zugriff 12.06.2024).

medi travel[®] men

Der sportliche Reisestrumpf für IHN

Eigenschaften

- Blickdichter Kniestrumpf in attraktiver Rippenoptik
- Kontrollierter, nach oben abnehmender Druckverlauf
- Kann das Risiko einer Reisthrombose reduzieren¹
- Besonders weiches Material mit verstärkter Sohle
- Angenehmer Bündchenabschluss
- Clima Comfort: für raschen Abtransport von Feuchtigkeit von der Hautoberfläche und hohe Atmungsaktivität
- Für Menschen mit gesundem Venensystem
- Nicht verordnungsfähig

Waschanleitung

Pflegeleicht für Waschmaschine und Trockner geeignet

Lieferbare Varianten		Größenermittlung													
AD															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Umfang</th> <th>Größe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18 – 20 cm</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>20 – 23 cm</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>23 – 26 cm</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>26 – 29 cm</td> <td>XL</td> </tr> <tr> <td>29 – 32 cm</td> <td>XXL</td> </tr> </tbody> </table>	Umfang	Größe	18 – 20 cm	S	20 – 23 cm	M	23 – 26 cm	L	26 – 29 cm	XL	29 – 32 cm	XXL	
Umfang	Größe														
18 – 20 cm	S														
20 – 23 cm	M														
23 – 26 cm	L														
26 – 29 cm	XL														
29 – 32 cm	XXL														
Länge normal und kurz	Das Längenmaß wird von der Ferse bis unter das Knie gemessen.	Die richtige Größe des medi travel bestimmen Sie durch genaues Messen des Fesselumfanges.													
Standard-Ausführungen															
Fußteil	geschlossene Spitze, Schuhgröße 38 – 48														
Serie	Größe S – XXL, Länge normal (43 – 49 cm) und kurz (37 – 42 cm)														
Material-Zusammensetzung															
Polyamid (PA)	Elastan (EL)														
90 %	10 %														

¹ Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 12.06.2024).

Produktvorteile



Hightech-Faden
Höchste Längs- und Quere-
elastizität sorgt für optimalen
Tragekomfort am Bein

Textiles Vertrauen nach
Oeko-Tex Standard 100



CE medi travel entspricht allen anzuwendenden EU-Richtlinien. Alle vorgeschriebenen Konformitätsbewertungsverfahren wurden durchgeführt.

Farben

S = Serie



medi travel® women

Der modische Reisestrumpf für SIE

Eigenschaften

- Kniestrumpf in semitranspanter Optik
- Kontrollierter, nach oben abnehmender Druckverlauf
- Kann das Risiko einer Reisetrombose reduzieren¹
- Angenehmer Bündchenabschluss
- Clima Comfort: für raschen Abtransport von Feuchtigkeit von der Hautoberfläche und hohe Atmungsaktivität
- Clima Fresh mit geruchshemmender Wirkung
- Für Menschen mit gesundem Venensystem
- Nicht verordnungsfähig

Waschanleitung

Pflegeleicht für Waschmaschine und Trockner geeignet

Lieferbare Varianten		Größenermittlung													
AD															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Umfang</th> <th>Größe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18 – 20 cm</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>20 – 23 cm</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>23 – 26 cm</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>26 – 29 cm</td> <td>XL</td> </tr> <tr> <td>29 – 32 cm</td> <td>XXL</td> </tr> </tbody> </table>	Umfang	Größe	18 – 20 cm	S	20 – 23 cm	M	23 – 26 cm	L	26 – 29 cm	XL	29 – 32 cm	XXL	
Umfang	Größe														
18 – 20 cm	S														
20 – 23 cm	M														
23 – 26 cm	L														
26 – 29 cm	XL														
29 – 32 cm	XXL														
Länge normal und kurz	Das Längenmaß wird von der Ferse bis unter das Knie gemessen.	Die richtige Größe des medi travel bestimmen Sie durch genaues Messen des Fesselumfanges.													
Standard-Ausführungen															
Fußteil	geschlossene Spitze, Schuhgröße 36 – 43														
Serie	Größe S – XXL, Länge normal (39 – 44 cm) und kurz (34 – 38 cm)														
Material-Zusammensetzung															
Polyamid (PA)	Elastan (EL)														
75 %	25 %														

¹ Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 12.06.2024).




Hightech-Faden
Höchste Längs- und Quere-
elastizität sorgt für optimalen
Tragekomfort am Bein

Textiles Vertrauen nach
Oeko-Tex Standard 100



CE medi travel entspricht allen anzuwendenden EU-Richtlinien. Alle vorgeschriebenen Konformitätsbewertungsverfahren wurden durchgeführt.



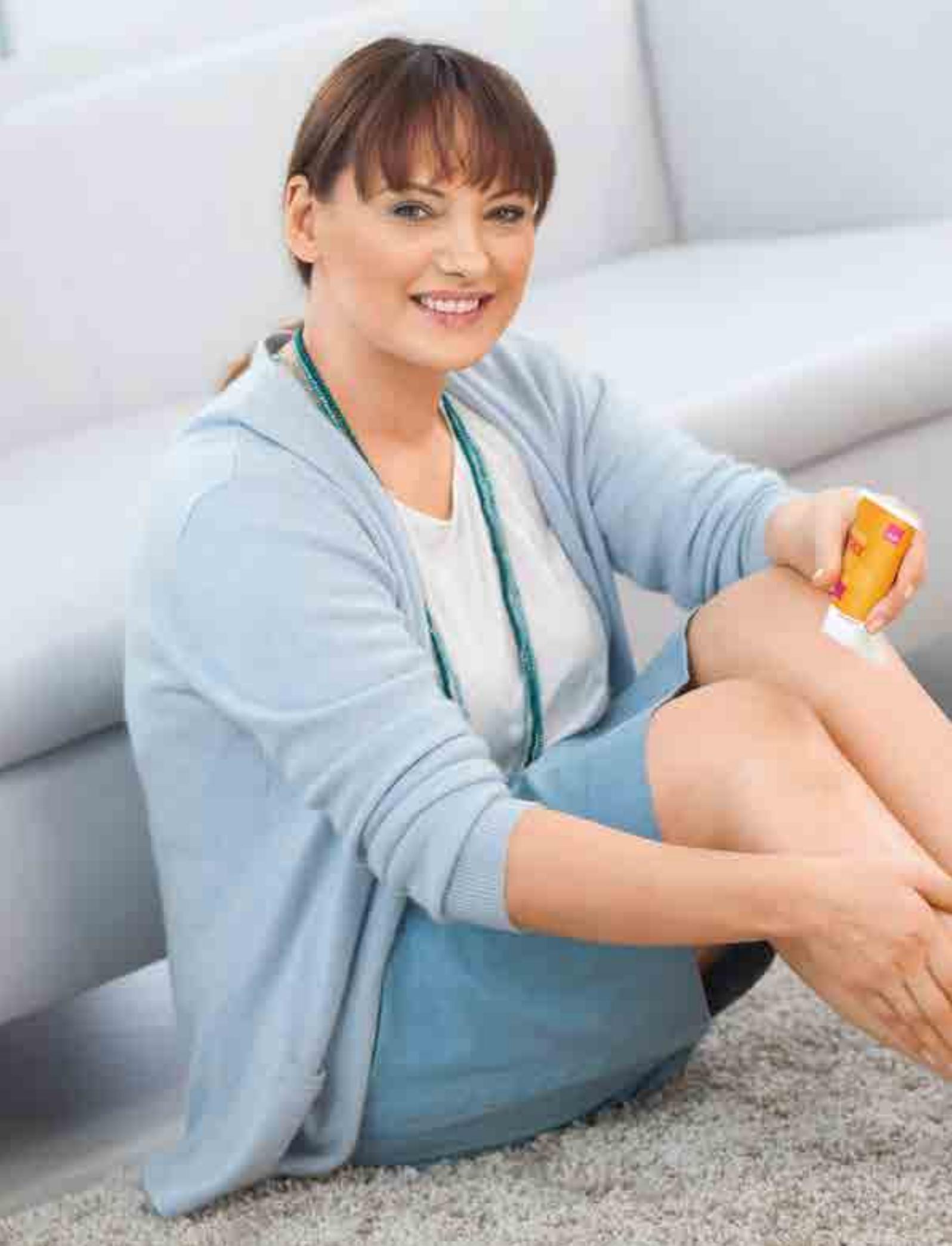



medi Zubehör

medi bietet neben medizinischen Kompressionsstrümpfen für den Rund- und Flachstrick-Bereich auch ergänzende Produkte. Gerade die Haut sehnt sich in der Kompressionstherapie nach besonderer Pflege. Ihre Kund:innen sprechen von juckender oder trockener Haut? Empfehlen Sie die Pflegeprodukte von medi. Sie sind speziell auf Venen- und Ödempatient:innen abgestimmt und verwöhnen die Haut mit wertvollen Inhaltsstoffen.

Pflegeprodukte für Kompressionsstrümpfe schonen das Gestrick und gewährleisten eine lange Lebensdauer des Strumpfes.

Ihre Kund:innen benötigen Hilfe beim Anziehen ihrer medizinischen Kompressionsstrümpfe? Es gibt unterschiedliche An- und Ausziehhilfen, die den täglichen Umgang mit den medizinischen Kompressionsstrümpfen wesentlich vereinfachen.

medi Hautpflege

**Bieten Sie Ihren Kund:innen mehr.
Zum Beispiel streichelzarte Haut
in der Kompressionstherapie**

Die Hautpflege-Produkte von medi besitzen zahlreiche wohltuende Inhaltsstoffe. Sie harmonieren perfekt mit der Venentherapie und sorgen für gepflegte und gesunde Haut.


Hinweis

Der medizinische Kompressionsstrumpf steht im Mittelpunkt der Venentherapie. Die richtige Hautpflege stellt dabei einen wichtigen Bestandteil dar, schließlich wird der Strumpf in der Regel täglich getragen. Das kann die Haut beanspruchen. Die Hautpflege-Produkte von medi sind speziell auf die Kompressionstherapie abgestimmt und sorgen für eine Haut in Balance.

Wichtiger Tipp für Allergiker:innen

Alle Produkte werden höchsten Anforderungen gerecht und ohne Parabene (= Konservierungsstoffe) oder Wollwachs-Alkohole hergestellt.

Die Produkte der medi Pflege unterliegen keinem Mindesthaltbarkeits- oder Verfallsdatum. Sie sind mit einer „geöffneten Dose“ und einer Monatsangabe gekennzeichnet. Das bedeutet, sobald die Tube geöffnet wird und folglich der Inhalt Verwendung findet, sollte das Produkt innerhalb der nächsten sechs, neun oder zwölf Monate aufgebraucht werden. Dieses Zeichen wird beispielsweise auch bei Duschbädern eingesetzt.

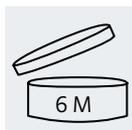

**medi Pflegeprodukte sind Kosmetik-
produkte und dürfen nur auf intakter
Haut angewendet werden.**

medi day® – kühlende Hautpflege mit Rosskastanie

- Erfrischende und kühlende Wirkung
- Gepflegte, geschmeidige Haut
- Reduziert das Spannungsgefühl
- Unterstützt den Tragekomfort von medizinischen Kompressionsstrümpfen

50 ml Tube / 150 ml Tube / 500 ml Spender

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi day, 50 ml Tube	6 Stück	P400025000
medi day, 150 ml Tube	6 Stück	P400026000
medi day, 500 ml Spender	1 Stück	P400027000



Weitere Informationen zum durchgeführten Test finden Sie auf www.dermatest-garantie.de



medi day®

medi night – Hautpflege mit regenerierender Hamamelis

- Für wohltuende Erholung in der Nacht
- Beruhigt die Haut und unterstützt zusätzlich die Regeneration

50 ml Tube / 150 ml Tube

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi night, 50 ml Tube	6 Stück	P500025000
medi night, 150 ml Tube	6 Stück	P500026000



Weitere Informationen zum durchgeführten Test finden Sie auf www.dermatest-garantie.de



medi night

medi fresh – erfrischendes Spray mit Menthol

- Der Frische-Kick für zwischendurch
- Unmittelbar spürbare Erfrischung
- Mehrmals tägliches Anwenden möglich
- Schonend zum Strumpfgestrick
- Leichte Handhabung im Alltag

100 ml Flasche

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi fresh, 100 ml Flasche	6 Stück	P900026000



Weitere Informationen zum durchgeführten Test finden Sie auf www.dermatest-garantie.de



medi fresh

medi soft – Hautpflege mit Rosskastanie und feuchtigkeitsspendender Urea

- Sanfter Cremeschaum zur Hautpflege rund um die Uhr
- Gepflegte, geschmeidige Haut
- Reduziert das Spannungsgefühl
- Unterstützt den Tragekomfort von medizinischen Kompressionsstrümpfen
- Gibt Gestrick und Haftbändern zusätzlichen Halt

125 ml Dose

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi soft, 125 ml Dose	6 Stück	P800026000



Weitere Informationen zum durchgeführten Test finden Sie auf www.dermatest-garantie.de



medi soft

Hinweis

medi soft ist für Diabetiker:innen geeignet. Dose ist zu 100 % recycelt (ausgenommen Sprühkopf, Kappe und Etikett).

medi Gestrickpflege

Das spezielle Handwaschmittel von medi ist extra auf mediven Kompressionsstrümpfe abgestimmt. Es eignet sich für die tägliche Wäsche und reinigt das Gestrick schonend und effektiv.

Das medi Fleckenfluid entfernt Schuhabrieb an Ferse und Fußspitze. Es wird vor der Wäsche auf die entsprechenden Stellen aufgetragen (fünf Minuten einwirken lassen).

Eigenschaften

- Schutz der Farbe
- Schonende Pflege
- Einfache Handhabung
- Geruchsneutral
- Dermatologisch verträglich



medi clean – Handwaschmittel für medizinische Kompressionsstrümpfe

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi clean, 200 ml	6 Stück	P920026000



medi clean

medi spot ex – Fleckenstift

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi spot ex, 15 ml	6 Stück	P930005000



medi spot ex

medi Wäschenetz

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi Wäschenetz	15 Stück	1020585000



medi Wäschenetz

An- und Ausziehhilfen für Strümpfe und Socken

medi 2in1

- Mit der medi 2in1 gleitet der Kompressionsstrumpf mühelos über die Ferse
- Für alle Kompressionsstrumpflängen
- Für offene und geschlossene Zehen
- Strapazierfähig und reißfest
- Platzsparend zusammenzulegen und immer schnell zur Hand – zu Hause oder unterwegs

Artikel	Beschreibung	Art.-Nr.
medi 2in1	für alle Strumpflängen geeignet	6900013000



medi 2in1

medi Butler Off

Schnelles und einfaches Ausziehen von Strümpfen, Socken und medizinischen Kompressionsstrümpfen, ohne Bücken. Nicht empfohlen für mediven forte.

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi Butler Off	1 Stück	6900362000



Ausziehhilfe medi Butler Off

medi Handschuhe

medi Gummihandschuhe

Erleichtern das Verteilen und richtige Positionieren kompressiver Gestricke am Bein beziehungsweise am Arm. Material: Naturkautschuk

Artikel	Größe	VE	Art.-Nr.
Gummihandschuh	S	1 Paar	6901022000
Gummihandschuh	M	1 Paar	6901023000
Gummihandschuh	L	1 Paar	6901024000
Gummihandschuh	S	12 Paar / Karton	6901122000
Gummihandschuh	M	12 Paar / Karton	6901123000
Gummihandschuh	L	12 Paar / Karton	6901124000



Gummihandschuhe

medi Textilhandschuhe mit Latex

Erleichtern das Verteilen und richtige Positionieren kompressiver Gestricke am Bein beziehungsweise am Arm. Material: Polyester und Latex


Artikel	Größe	VE	Art.-Nr.
Textilhandschuh	S	1 Paar	6903022000
Textilhandschuh	M	1 Paar	6903023000
Textilhandschuh	L	1 Paar	6903024000
Textilhandschuh	S	12 Paar / Karton	6903122000
Textilhandschuh	M	12 Paar / Karton	6903123000
Textilhandschuh	L	12 Paar / Karton	6903124000



Textilhandschuhe mit Latex

Größenbestimmung für medi Gummi- und Textilhandschuhe

Bitte legen Sie Ihre rechte Hand an die eingezeichnete Linie für die innere Handkante und des Daumens. Strecken Sie die Finger dabei locker, ohne sie zu spreizen. An den eingezeichneten Markierungen können Sie die Handschuhgröße ablesen.

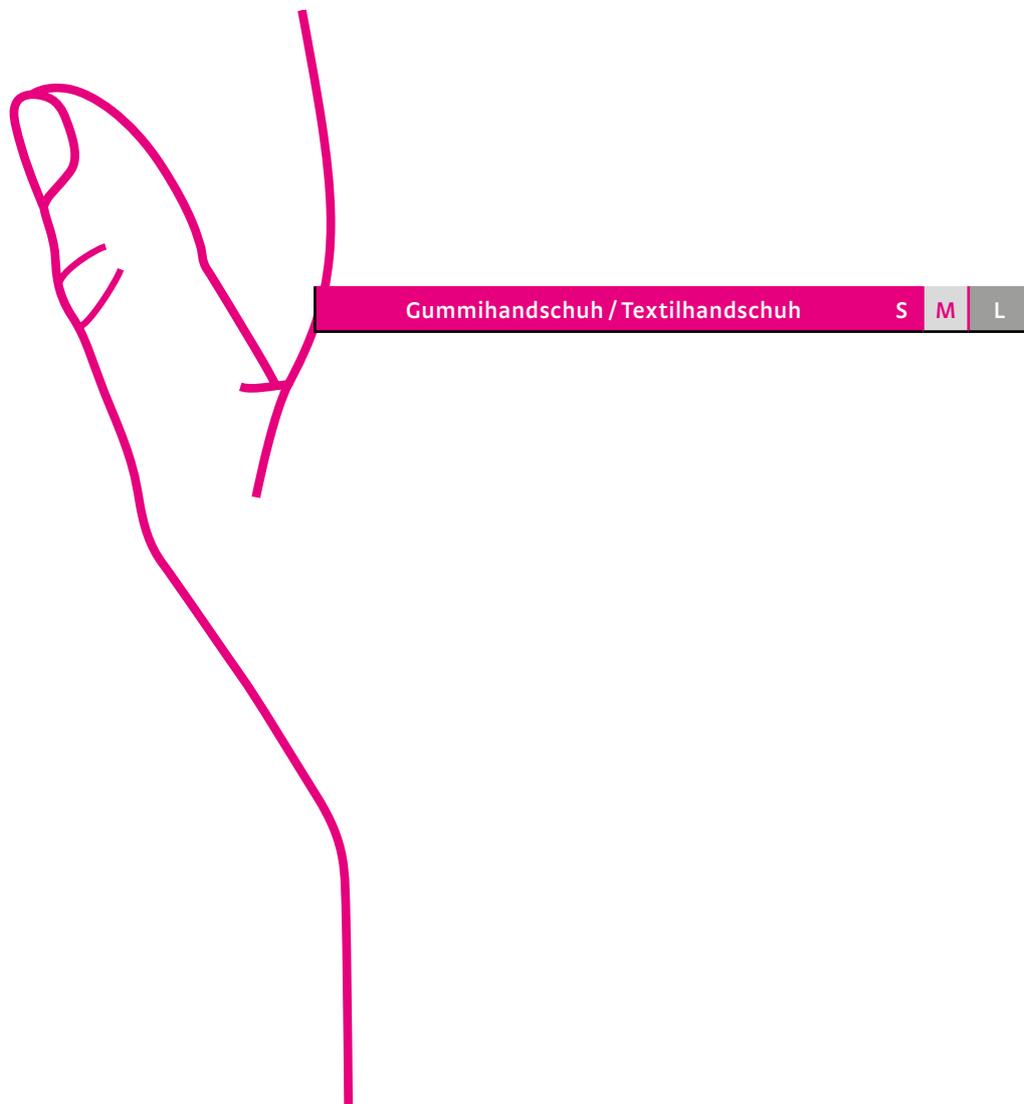

Anziehhilfe für Strümpfe ohne Spitze

Artikel	VE	Art.-Nr.
Anziehhilfe	Einzelbezug 1 Stück	6900002000
Anziehhilfe	Verkaufskarton 40 Stück	6900022000



Anziehhilfe für Strümpfe ohne Spitze

medi Butler

Anziehhilfen für medizinische Kompressionsstrümpfe

Indikationen¹

- Lähmungen
- Altersbedingte Kraftminderungen
- Arthrose / Rheuma
- Adipositas per magna
- Weitgehende Wirbelsäulen- / Hüft- / Knieversteifungen
- Degenerative Erkrankungen der Hände / im Handbereich
- Folge von Verletzungen / Amputationen


medi Tipp:

An- und Ausziehhilfen dienen dem Schutz und der Schonung des Strumpfmaterials und erleichtern das An- und Ausziehen von MKS. Sie ermöglichen insbesondere Patient:innen mit Bewegungseinschränkungen den Umgang mit den Materialien, da sie den Bewegungs- und Kraftaufwand minimieren.¹

medi Lang-Griff Butler

Artikel	Art.-Nr.
medi Lang-Griff Butler	6900052000

Für Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen
Hilfsmittelnummer: 02.40.01.3000

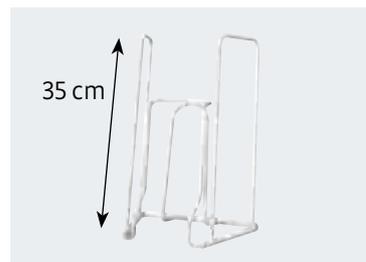

medi Lang-Griff Butler


¹ Rabe E et al. S2k-Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK). Online veröffentlicht unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/037-005.html> (Letzter Zugriff 12.06.2024).

medi Big Butler

Artikel	Art.-Nr.
medi Big Butler	6900102000

Für mehr Anziehkomfort bei großen Strumpfgrößen, empfohlen für die Größen V, VI, VII

Hilfsmittelnummer: 02.40.01.3000

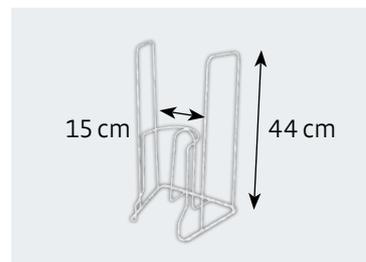


medi Big Butler

medi Vario-Griff Butler

Artikel	Art.-Nr.
medi Vario-Griff Butler	6900051000

Für Patient:innen mit Bewegungseinschränkung, Grifflänge individuell einstellbar

Hilfsmittelnummer: 02.40.01.3000

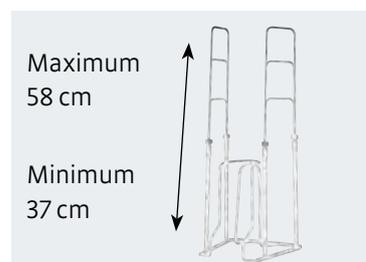


medi Vario-Griff Butler

medi Hosen Butler

Artikel	Art.-Nr.
medi Hosen Butler	6900055000

Für leichtes Anziehen von Kompressionsstrumpfhosen

Hilfsmittelnummer: 02.40.01.3000

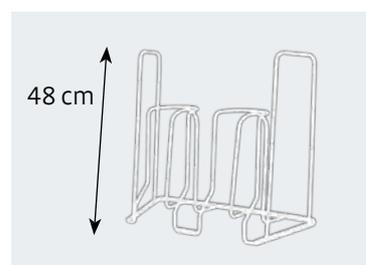

medi Hosen Butler

medi Arm Butler

Artikel	Schaftdurchmesser	Art.-Nr.
medi Arm Butler	11 cm	6900057000

Erleichtert das Anlegen von Armstrümpfen ohne die Mithilfe dritter Personen

Hilfsmittelnummer: 02.40.01.3000



medi Arm Butler

medi Tipp:

Eine Studie¹ belegt, dass der Gebrauch einer An- und Ausziehhilfe das Anlegen der Kompressionsstrümpfe signifikant verbessert. Die Erfolgsquote stieg von 72 auf 93 Prozent. Die Proband:innen nahmen den Anziehvorgang leichter und angenehmer wahr. Unter den verwendeten Anziehhilfen erzielte der medi Butler mit 90 Prozent die beste Erfolgsquote beim Anlegen eines Strumpfes der Kompressionsklasse 3.

¹ Sippel K, Seifert B, Hafner J. Donning devices (foot slips and frames) enable elderly people with severe chronic venous insufficiency to put on compression stockings. Eur J Vasc Endovasc Surg 2015;49(2):221-229.

Therapiehilfen

medi fix

Artikel	VE	Art.-Nr.
medi fix, 50 ml	6 Stück	1023025000

Klebe-Lotion für Kompressionsstrümpfe mit Trikotrand.



medi fix Soft-Roller

medi Erstausrüstungspakete

Hochwertige Kunststofftasche, diverse Informationsbroschüren, Kundenzufriedenheitskarte und Handschuhe in unterschiedlichen Größen.

Hinweis: Erfolgt bei der Bestellung keine Größenangabe, liefern wir automatisch Größe M.

Artikel	VE	Größe	Art.-Nr.
EAP mit Gummihandschuhe	1 Stück	S	1020560000
EAP mit Gummihandschuhe	1 Stück	M	1020561000
EAP mit Gummihandschuhe	1 Stück	L	1020562000
EAP mit Gummihandschuhe	6 Stück	S	1021560000
EAP mit Gummihandschuhe	6 Stück	M	1021561000
EAP mit Gummihandschuhe	6 Stück	L	1021562000
EAP mit Textilhandschuhe	1 Stück	S	1020570000
EAP mit Textilhandschuhe	1 Stück	M	1020571000
EAP mit Textilhandschuhe	1 Stück	L	1020572000
EAP mit Textilhandschuhe	6 Stück	S	1021570000
EAP mit Textilhandschuhe	6 Stück	M	1021571000
EAP mit Textilhandschuhe	6 Stück	L	1021572000




medi Erstausrüstungspaket



medi Erstausrüstungspaket

* Weitere Informationen zum durchgeführten Test finden Sie auf www.dermatest-garantie.de



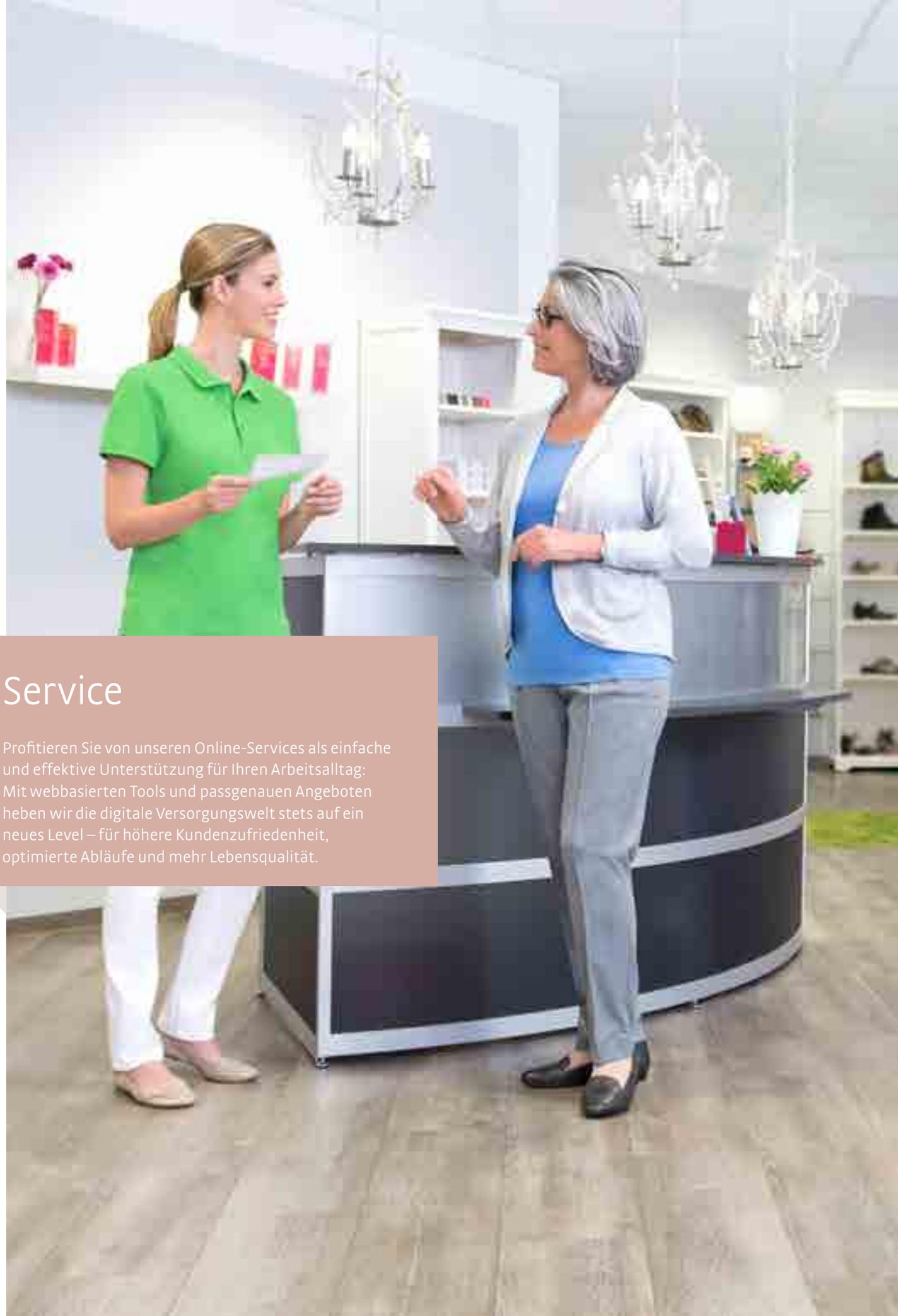

Service

Profitieren Sie von unseren Online-Services als einfache und effektive Unterstützung für Ihren Arbeitsalltag: Mit webbasierten Tools und passgenauen Angeboten heben wir die digitale Versorgungswelt stets auf ein neues Level – für höhere Kundenzufriedenheit, optimierte Abläufe und mehr Lebensqualität.

medi vision – der digitale Assistent


So flexibel wie Ihr Alltag

Vom Maßnahmen bis zur Bestellung – mobil oder im Sanitätshaus:
Entscheiden Sie selbst, wie medi vision Sie in Ihrem Arbeitsalltag unterstützt.



Eine App für Rund- und Flachstrick.

Einfach und effektiv zur passenden mediven Kompressionsversorgung.

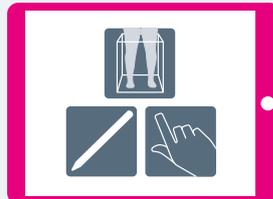

Digitales Maßblatt – bequem und übersichtlich ausfüllen.

Per Handeingabe, mit Apple Pencil oder über 3D-Scan.



Erst Maßnahmen, später bestellen.

Im Fachhandel und unterwegs flexibel einsetzbar.



Zufriedene Kund:innen durch moderne Beratung.

Angenehm, hygienisch und individuell versorgen.

Lieblingsfunktionen aus dem Fachhandel



„Die manuellen Eingabemöglichkeiten der Maßdaten bei medi vision sind großartig und einfach zu handhaben! So kann ich die Maßdaten direkt digital eintragen sowie Übertragungs- und Schreibfehler vermeiden.“

Anja Scholz,
Fachkraft im Sanitätshaus Scholz



„Ich mag die Scan-Funktion bei medi vision am liebsten, da ich damit die Hautmaße meiner Patient:innen komfortabel und ergonomisch aufnehmen kann. Dabei ist meine Fachkompetenz weiterhin von großer Bedeutung: Ich kann selbst entscheiden, wo die einzelnen Maßpunkte gesetzt und angepasst werden müssen.“

Michaela Löser, Fachkraft im Sanitätshaus Rulitschka

Neugierig?
Scannen Sie den
QR-Code oder
kontaktieren Sie
Ihre medi
Handelsvertretung
Compression.



medi.biz/vision

Werbung

medi Marketing-Center

Bestellen Sie kostenfrei aufmerksamkeitsstarke Dekoration im medi Marketing-Center.



medi Bilder-Pool

Neutrale Produktfotos und attraktive Imagebilder für Ihren digitalen Auftritt bietet der medi Bilder-Pool.



medi Fachhandelsportal

Im medi Fachhandelsportal finden Sie verbraucherorientierte Marketing-Konzepte, bei denen die Kund:innen im Mittelpunkt stehen (zum Beispiel das bewährte Kundenbindungskonzept etc.).



Bestellung

medi e-shop

Bequem und flexibel konfigurieren, bestellen und retounieren. Rund um die Uhr. Einfach und unkompliziert.



Digitales Retourenmanagement

Organisieren Sie Ihre Rücksendungen und Anfragen bei Versorgungen jetzt noch effizienter und profitieren Sie – denn in vielen Fällen entfällt die Rücksendung.



Aftersales

medi Erinnerungsservice

Mit dem medi Erinnerungsservice denken Ihre Kund:innen zuverlässig an ihre Wiederversorgung mit Kompressionsstrümpfen.



Kennen Sie schon unsere kostenlosen Newsletter?

Bleiben Sie jederzeit zu Fach- und Service-Themen sowie Produkt-Highlights von medi auf dem Laufenden – kostenlos, gebündelt und aktuell! Mit den medi Newslettern erhalten Sie wertvolles und praktisches Know-how für Ihren Arbeitsalltag. Spannende Einblicke bieten Interviews mit Fachhändlern, Patient:innen, Ärzt:innen und Physiotherapeut:innen.

Unsere Newsletter für Sie in der Übersicht:

medi for you


- ✓ Für Führungs- und Fachkräfte im Sanitätsfachhandel
- ✓ Das erwartet Sie: Fach-Interviews, Gesundheitswissen, Produktneuigkeiten aus den Bereichen Kompression, Orthopädie und Footcare sowie Branchen-News
- ✓ Sechsmal jährlich

Kostenlose Anmeldung: medi.biz/mfy

medi Lymph-News

- ✓ Für alle, die Lymphpatient:innen versorgen und fachlich begleiten
- ✓ Das erwartet Sie: Experten-Interviews und Gast-Beiträge von Lymphspezialist:innen, Produktneuigkeiten und Versorgungskonzepte sowie aktuelle Informationen aus der Gesundheitspolitik
- ✓ Viermal jährlich

Kostenlose Anmeldung: medi.biz/lymph-news

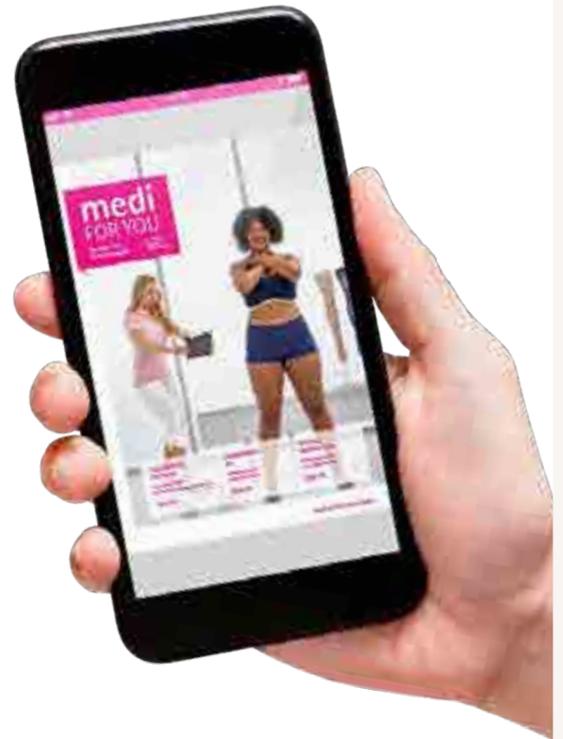

Arbeitsmaterialien für Sie

Nutzen Sie unsere Maßblöcke, um Ihre Patient:innen passgerecht zu versorgen.

circaid®



**Bestellblock Serie
circaid**
Art.-Nr. 0050549
DIN A4

Rundstrick



**Bestellblock Serie
Rundstrick**
Art.-Nr. 0020730
DIN A4



**Bestellblock Maß
Rundstrick**
Art.-Nr. 0020733
DIN A4



**Maßtabellenset
Phlebologie**
Art.-Nr. 0020320
DIN A4

Aufklärung für Patient:innen

Ausführliche Informationen rund um den Kompressionsstrumpf



**Alles Wissenswerte
zum Kompressions-
strumpf**
Art.-Nr. 0020624
DIN A5



Flyer medi Pflege
Art.-Nr. P990008
DIN lang



**Broschüre
medi travel**
Art.-Nr. 0022721
DIN lang

medi Campus Weiterbildungsangebot

Wissen – Können – unternehmerischer Erfolg

Bei über 500 erfolgreich durchgeführten Seminartagen vermittelt der medi Campus täglich Wissen durch erfahrene Trainer:innen und Coaches. Die medi Weiterbildungsangebote stehen für langfristigen, unternehmerischen Erfolg, denn eine Investition in Wissen und Kompetenz bringt noch immer die besten Zinsen.

Gerne steht Ihnen unser Team unter T +49 921 912-2020 oder seminare@medi.de zur Verfügung und berät Sie bei der Auswahl des für Sie passenden Seminars.



Für alle medi Seminare können Sie sich ganz einfach online anmelden unter: www.medi.biz/campus



Zweckbestimmungen

circaid® Beinversorgungen:

Die Kompressionsversorgung dient bei Patient:innen mit Venen- und Lympherkkrankungen zur Kompression des Beins.

circaid® Fußoptionen:

Die Kompressionsversorgung dient bei Patient:innen mit Venen- und Lympherkkrankungen zur Kompression des Fußes und des Knöchels.

Rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf:

Rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Venensystems.

medi Bein Butler:

Anziehhilfe für medizinische / klinische Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen.

medi Arm Butler:

Anziehhilfe für medizinische / klinische Kompressionsarmstrümpfe.

medi 2in1:

An- und Ausziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen mit offener und auch geschlossener Spitze.

mediven ulcer kit®:

Rundgestricktes Kompressionsstrumpfsystem zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich zur Behandlung von Erkrankungen des Venensystems.

medi travel®:

Rundgestrickter Kompressionsstrumpf der unteren Extremitäten zur physikalischen Thromboseprophylaxe für venengesunde Reisende.

mediven harmony SL:

Flachgestrickte medizinische Kompressionsversorgung zur Kompression der oberen Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Venen- oder Lymphgefäßsystems.

mediven harmony®:

Rundgestrickte medizinische Kompressionsversorgung zur Kompression der oberen Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Venen- oder Lymphgefäßsystems.

Unser medi Kundencenter ist für Sie da.

Hotline +49 921 912-111

Oder per E-Mail: OrderPhlebologie@medi.de

medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Germany
www.medi.de



0020965/08.2024