



BAUERFEIND VON MENSCHEN FÜR MENSCHEN. FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT.

Die Bauerfeind AG ist einer der weltweit führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel. Mit unseren Produkten bringen wir Menschen in Bewegung und leisten dadurch einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit.

MEDIZINISCHES WISSEN UND FACHLICHE KOMPETENZ

Über Jahrzehnte erworbene Kompetenz in Technologie und Fertigung verbinden wir mit Innovationskraft, die Tradition eines mittelständischen, familiengeführten Unternehmens mit globalem Denken. Unsere Spezialisten arbeiten seit jeher eng mit Ärzten, Wissenschaftlern und Entwicklern zusammen. Das Ergebnis sind patentierte sowie preisgekrönte Produkte und Dienstleistungen.

Bandagen und Orthesen von Bauerfeind stehen für höchste Qualität.

WIRKSAME VIELFALT

Bauerfeind hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit modernen orthopädischen Bandagen und Orthesen dazu beizutragen, Menschen ein aktives und beschwerdefreies Leben bis ins hohe Alter zu ermöglichen. Die Produkte zeichnen sich durch bestätigte medizinische Wirksamkeit und neueste Materialien aus.

Die Bandagen und Orthesen unterstützen Heilungsprozesse nach Verletzungen, bei degenerativen Veränderungen sowie nach Operationen und sorgen für neue Mobilität.

KOMPROMISSLOSE QUALITÄT

Bauerfeind-Produkte erfüllen nicht einfach Standards – sie genügen höchsten Ansprüchen an Qualität, Wirksamkeit und Tragekomfort. Das bestätigen regelmäßige Prüfverfahren, deren Siegel und Kennzeichen unsere Produkte nach erfolgreicher Testung tragen dürfen. Alle Bandagen und Orthesen von Bauerfeind entsprechen den Anforderungen der Verordnung über Medizinprodukte (EU) 2017/745. Alle medizinischen Bandagen und Orthesen sind CE-gekennzeichnet und entsprechen damit den aktuell gültigen rechtlichen Vorgaben.



WEITERE BAUERFEIND-SORTIMENTSBEREICHE



VENOTRAIN-KOMPRESSIONSSTRÜMPFE

zeichnen sich durch medizinisch bestätigte Wirksamkeit und einzigartige Materialeigenschaften aus. Sie verbessern die Venentätigkeit und wirken venös bedingten Beinbeschwerden entgegen. Sowohl bei leichten bis mittleren als auch bei fortgeschrittenen Venenerkrankungen sowie im Beruf und auf Reisen bietet das VenoTrain-Sortiment den jeweils passenden Strumpf an. Durch eine breite Auswahl an Farben und Mustern lassen sie sich wunderbar modisch kombinieren.



KOMPRESSIONSSTRÜMPFE FÜR DIE ÖDEMTHERAPIE

Jeder Tag wird liebenswerter, wenn man sich wohlfühlt. Dafür wurden die flachgestrickten, maßgeschneiderten VenoTrain* curaflow Kompressionsstrümpfe entwickelt. Die vielseitige und farbenfrohe Versorgung passt sich den individuellen Formen der Beine, Arme, Hände oder des Brustkorbs (Thorax) von Lymph- und Lipödempatienten optimal an. VenoTrain* curaflow entlastet spürbar, um unbeschwert, selbstbewusst und attraktiv durch den Alltag zu gehen.



EINLAGENROHLINGE

Die Füße sind das Fundament des Körpers. Sie unterstützen den Fuß in seiner natürlichen Funktionsweise und können so die Biomechanik des Körpers positiv beeinflussen. Da nicht jeder Fuß die gleiche Art der Unterstützung braucht, hält Bauerfeind über 300 verschiedene Modelle bereit.

> MEDIZINISCHE HILFSMITTEL WIRKEN NACHWEISLICH*

* Bandagen / Orthesen, Kompressionsstrümpfe und Einlagen helfen nach Verletzungen und bei Erkrankungen, schnell wieder auf die Beine zu kommen.

(Quelle: repräsentative Patientenumfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag von eurocom e.V., 2023, n=1.300 Nutzer von Bandagen/Orthesen, Kompressionsstrümpfen und Einlagen)

Einen Überblick über alle Versorgungsbereiche finden Sie online unter: experts.bauerfeind.com

INHALT

DER BAUERFEIND-SERVICE

AUF DEN KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN

> Seite 6

BAUERFEIND-PRODUKTEIGENSCHAFTEN

DAS PLUS AN FUNKTION, QUALITÄT UND TRAGEKOMFORT

> Seite 8

TRAIN-BANDAGEN

DER MASSSTAB FÜR DIE ZUKUNFT

> Seite 10

THERAPIE NEU GEDACHT

SecuTec® Genu Flex –
DIE INNOVATION DER KNIEORTHESEN

> Seite 12

DIE BAUERFEIND HILFSMITTEL-APP

DER PRODUKTFINDER FÜR ÄRZTE UND FACHHÄNDLER

> Seite 14

DIE BAUERFEIND THERAPIE-APP

TRAINING ALS IDEALE THERAPIE-ERGÄNZUNG

> Seite 15

BAUERFEIND-AKADEMIE

KOMPETENT. ZIELORIENTIERT. ERFOLGREICH.

> Seite 16

QUALITÄT LÄSST SICH (AN)MESSEN

BAUERFEIND-MESSTECHNIK

> Seite 18

FÜR JEDEN VERSORGUNGSBEREICH DAS PASSENDE PRODUKT



FUSS UND SPRUNGGELENK



22 Indikationstabelle

- 24 MalleoTrain®
- 25 MalleoTrain®S
- 26 MalleoTrain®S open heel
- 27 MalleoTrain® Plus
- 28 AchilloTrain®
- **30** AirLoc[®]
- 31 MalleoLoc®L
- 32 MalleoLoc®L3
- 33 MalleoLoc®
- **34** CaligaLoc®
- **35** ValguLoc®
- 36 ValguLoc*II37 Xtern summit
- **37** Xtern frontier

WEITERE PRODUKT-INFORMATIONEN UND SERVICELEISTUNGEN



KNIE, OBERSCHENKEL UND HÜFTE



40 Indikationstabelle

- 42 Bauerfeind-Knieportfolio
- 44 GenuTrain®
- 46 GenuTrain® A3
- 47 GenuTrain®P3
- 48 GenuTrain®S
- 49 GenuTrain®S Pro
- **50** GenuPoint®
- **51** SofTec®Genu
- **52** SecuTec®Genu
- **54** SecuTec®Genu Flex
- **56** GenuTrain®OA
- **57** SecuTec®OA
- **58** MOS-Genu
- **59** GenuLoc®
- 60 CoxaTrain®
- **62** SofTec®Coxa
- 63 MyoTrain®



WIRBELSÄULE UND HALS



66 Indikationstabelle

- 68 Bauerfeind-Rückenportfolio
- 70 LumboTrain® straight LumboTrain® waisted
- 72 SacroLoc®
- 74 Spinova® Mum
- **76** LordoLoc®
- 77 LumboLoc®
- **78** LumboLoc®Forte
- **79** Spinova®-System
- 82 Spinova® Stabi Classic
- 83 Spinova® Support Plus
- 84 Spinova® Unload Classic
- 85 Spinova® Unload Plus
- **86** Spinova®Immo Plus
- 87 Spinova®Immo
- 88 SecuTec®Dorso
- 89 SecuTec®Lumbo
- 90 SofTec®Lumbo
- 91 Spinova®Osteo
- **92** SofTec® Dorso
- 93 CerviLoc* | CerviLoc* S

(1)

HAND, ELLENBOGEN UND SCHULTER



96 Indikationstabelle

- 98 ManuTrain®
- 99 ManuLoc®
- **100** ManuLoc®long
- **101** ManuLoc®long Plus
- 102 RhizoLoc®OA
- **103** RhizoLoc*
- 104 ManuLoc® Rhizo
- **105** ManuLoc® Rhizo long
- 106 ManuLoc® Rhizo long Plus
- 107 EpiTrain®
- 108 EpiPoint®
- 109 OmoTrain*
- 110 OmoTrain*S
- 111 OmoLoc®

ERSATZTEILE, ZUBEHÖR UND ZUSÄTZE

- 114 Fuß und Sprunggelenk
- 115 Knie, Oberschenkel und Hüfte
- 118 Wirbelsäule und Hals
- 122 Hand, Ellenbogen und Schulter
- 123 Werkzeugbedarf Orthesen
- **125** Zusatzprodukte

MASSVERSORGUNG

128 Maßbestellblätter

135 Serienbestellbatt

DER BAUERFEIND-SERVICE AUF DEN KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN

ONLINESHOP-SERVICE

Bei Bestellungen über den Bauerfeind-Onlineshop zu reduzierten Versandkosten können Sie vielfältige Funktionen nutzen, wie z.B. den Bestellstatus, die Verfügbarkeitsanzeige oder die Patientenakte. Zum Anlegen eines Kundenkontos registrieren Sie sich unter: experts.bauerfeind.com/register



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- + 24 h online
- + mit Webbrowser von überall erreichbar
- + intuitiver Bestellprozess
- + tagesaktueller Bestellstatus
- + geringe Versandkosten
- + intelligente Suchfunktion

- + digitaler Angebotsprozess
- + direkte Anbindung an Bauerfeind-Messtechnik BODYTRONIC
- + Patientenakte zur Speicherung von Mess- und Versorgungsdaten
- + Unterstützung per Kundenservice, E-Mail, Kontaktformular: experts.bauerfeind.com/contact

^{*}Für die Nutzung von Branchensoftware oder EDI kontaktieren Sie bitten den Bauerfeind-Kundenservice.

KUNDENSERVICE BANDAGEN UND ORTHESEN

Profitieren Sie von unserem Know-how und lassen Sie sich beraten. Telefonisch stehen wir Ihnen gern von Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr zur Verfügung. Sie erreichen uns 24 Stunden täglich per E-Mail und Fax.







T +49 (0) 800 0 0105 20 **F** +49 (0) 800 0 0105 25 **E** info@bauerfeind.com

SERVICE-GARANTIEN

FÜR FACHHÄNDLER IN DEUTSCHLAND



KOSTENFREIE TELEFON- UND FAXHOTLINE

Wir sind gern für Sie da!



100 % ERREICHBAR

Als kompetente Ansprechpartner stehen wir Ihnen Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr telefonisch gern zur Verfügung. Über Fax, E-Mail und elektronische Bestellsysteme erreichen Sie uns rund um die Uhr (Systemstörungen und Wartungsarbeiten ausgenommen).



ELEKTRONISCHE BESTELLSYSTEME

Bestellen Sie einfach, schnell und mit reduzierten Versandkosten: Per elektronischer Schnittstellenanbindung oder unserem Onlineshop mit vielfältigen Funktionen, wie z.B. dem Bestellstatus und der Verfügbarkeitsanzeige.



VERSAND AM GLEICHEN ARBEITSTAG

Sie bestellen bis 15.00 Uhr – wir versenden Lagerware am gleichen Tag (Großaufträge ausgenommen). Express-Wünsche stimmen wir gern mit Ihnen ab.



EXPRESS-FERTIGUNG FÜR SCHNELLE MASSVERSORGUNG

Eilige Maßaufträge VenoTrain micro, VenoTrain soft und soft S sowie VenoTrain impuls in der Farbe Caramel versenden wir noch am gleichen Arbeitstag, wenn Sie bis 10.00 Uhr den Auftrag auslösen.



GENAUER LIEFERTERMIN

Zu Ihren Bestellungen nennen wir Ihnen den genauen Liefertermin.



KEINE VERSANDKOSTEN

Bei einem Auftragswert über 200,00€, sowie für Maßanfertigungen, übernehmen wir die Versandkosten. Sie können sortimentsübergreifend alle Artikel in einem Auftrag bestellen.



KOSTENFREIE WARENABHOLUNG

Avisieren Sie die Retoure in unserem Onlineshop oder senden Sie uns das ausgefüllte Rücksendeformular und wir holen nach Prüfung die Ware ab – auf unsere Kosten.



365 TAGE WARENRÜCKNAHME

Einwandfreie Lagerware nehmen wir innerhalb von 365 Tagen nach Lieferung laut AGB zurück.



RETOURENBEARBEITUNG IN FÜNF TAGEN

Wir bearbeiten Ihre Retoure innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Wareneingang.

BAUERFEIND- PRODUKTEIGENSCHAFTENDAS PLUS AN FUNKTION, QUALITÄT UND TRAGEKOMFORT

Bauerfeind steht seit über 90 Jahren für ausgezeichnete Qualität und eine exzellente Hilfsmittelversorgung. Erfahren Sie mehr über anspruchsvolles Know-how und hochwertige Produkteigenschaften, welche sich durch unser gesamtes Portfolio ziehen.

+ TRAIN-GESTRICK

Die dreidimensionale Oberfläche des atmungsaktiven Materials ermöglicht eine stete Mikrozirkulation und Wechselkompression während der Bewegung. Die muskuläre Stabilisierung unterstützt physiologische Bewegungsabläufe. Das Train-Gestrick liegt passgenau an und sitzt positionssicher.



+ KOMFORTZONE

An besonders sensiblen Stellen des Körpers, wie zum Beispiel an Beugen, knöchernen Vorsprüngen oder an Randzonen, bieten wir besonders dehnbares Material für mehr Tragekomfort, minimalen Druck und erleichtertes An- und Ausziehen.



+ HAUTFREUNDLICH UND ATMUNGSAKTIV

Es ist uns ein großes Anliegen, den Wünschen vieler Anwender nach besonders hautfreundlichen Produkten nachzukommen. Deshalb entwickeln wir Materialien, die angenehm und atmungsaktiv auf der Haut anliegen.



+ EINFACHE HANDHABUNG

Wir legen Wert auf leichtes Anlegen und kraftsparende Handhabung unserer Produkte. Dafür integrieren wir individuelle Versorgungslösungen, wie zum Beispiel ergonomische Anziehhilfen, praktische Handschlaufen, spezielle Reißverschlüsse, flexible Klettgurte oder individuelle Verschlusssysteme.



+ WERKZEUGFREIE ANPASSUNG

Für die individuelle Versorgung können Sie viele unserer Komponenten, wie zum Beispiel Aluminiumrahmen oder Gelenke, ohne Werkzeug anformen oder einstellen. Zügiger Service und unkomplizierte Handhabung stehen für hohe Kundenzufriedenheit und Zeiteinsparung.



+ MEHRSTUFIGE THERAPIE

Der modulare Aufbau moderner Orthesen ermöglicht durch die Zugabe bzw. Entnahme von Funktionselementen eine mehrstufige Therapie je nach erforderlicher Stabilisierung und gewünschter Mobilisierung.



+ IN STUDIEN BELEGT

Erfahren Sie mehr über neueste Studienergebnisse von Ihrem Bauerfeind-Außendienst, in zertifizierten CME-Fortbildungen oder unter bauerfeind.de/arzt.



+ DIGITALE VERMESSUNG

Mit den zukunftsweisenden BODYTRONIC-Messsystemen bietet Bauerfeind die Möglichkeit, Bandagen, Kompressionsstrümpfe, Einlagen und Schuhe individuell anzupassen. Das gewährleistet perfekten Sitz, hohen Tragekomfort und die volle Entfaltung der medizinischen Wirksamkeit – für eine qualitativ hochwertige Versorgung.



TRAIN-BANDAGENDER MASSSTAB FÜR DIE ZUKUNFT

Weniger Schmerzen und mehr Gelenkstabilität sind die therapeutischen Ziele medizinischer Bandagen. Aber eine Bandage kann nur wirklich helfen, wenn sie gut sitzt und angenehm zu tragen ist. Sie muss täglich überzeugen, denn:

DAS IST PATIENTEN / INNEN BEIM KAUF EINER BANDAGE WICHTIG:*

84%

84%

81%

angenehm zu tragen Nach diesen Aspekten handelt Bauerfeind seit jeher. einfach und unkompliziert anund auszuziehen Gefühl von Sicherheit und Stabilität

Bei den neuen Train-Bandagen sind

WIRKUNG, TRAGEKOMFORT UND HANDLING JETZT NOCH ÜBERZEUGENDER.







MODERNE VISKOELASTISCHE PELOTTEN FÖRDERN SCHMERZ-LINDERNDE WIRKUNG**

- entlasten und reduzieren Schmerzen
- innovative Massageelemente aus unterschiedlich festen Komponenten stimulieren intensiv

"Schween R, Gehring D, Gollhofer A (2015);

Immediate Effects of an Elastic Knee Sleeve on Frontal Plane Gait Biomechanics in Knee Osteoarthritis PLoS ONE 10(1): e0115782. doi:10.1371/journal.pone.0115782

^{*} Repräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag von eurocom e.V., 2023



»DIE PASSFORM IST FINZIGARTIG«

Die dreidimensionale, anatomische Grundform und hohe Elastizität des Gestricks sorgen dafür, dass Train-Bandagen in Bewegung optimal sitzen und so ihre Wirkung voll entfalten können.

> Birgit Görnert, Leiterin Globales Produktmanagement

DAS HOCH-TIEF-GESTRICK

+ STABILISIERENDER EFFEKT MIT DEM ZIEL DER SCHMERZLINDERUNG

dank großflächiger Kompression mit stark strukturierter Oberfläche in Verbindung mit Pelotten

+ REGT DEN STOFFWECHSEL AN UND WIRKT HEILUNGSFÖRDERND

das komprimierende Gestrick erzeugt bei Bewegung eine wohltuende Wechseldruckmassage

+ WIRKT DANK OPTIMALER PASSFORM

das Gestrick ist anatomisch vorgeformt und hochelastisch für einen sicheren Sitz, vor allem in der Bewegung

+ ANGENEHM ZU TRAGEN

an den empfindlichen Körperstellen ist das Gestrick dünner, die Struktur luftiger und die Kompression sanfter

BEWÄHRTE BAUERFEIND QUALITÄT

KOMFORTABEL UND STRAPAZIERFÄHIG

Die elastischen Kompressionsgarne werden von uns vor dem Strickprozess zweimal umwunden.

Das garantiert ein optimales Dehnverhalten und sorgt für die angenehm weiche Oberfläche unserer Bandagen.

WEICHE RÄNDER


breite druckminimierte Ränder verhindern Einschneiden



THERAPIE NEU GEDACHT

SecuTec® Genu Flex – <u>Die Innovation der Knieorthesen</u>

- + flexibel in der Bewegung durch einzigartige Flex-Module
- + individuelle Passform durch Ein- und Ausklicken der Flex-Module und verlängerbare Gelenkschenkel
- + therapiebegleitend anpassbar bei Muskelzu- und -abnahme
- + zuverlässiger Schutz im aktiven Alltag

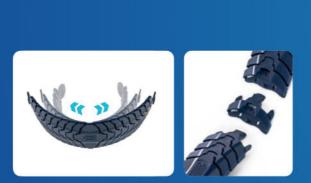

SecuTec Genu Flex passt sich an.

Muskeln verändern in der Bewegung ihre Form und während der Therapiezeit ihren Umfang.



VON EXPERTEN EMPFOHLEN

ÜBERZEUGEND IM DUO

Für die zielgerichtete Versorgung nach orthopädischen Eingriffen oder Verletzungen am Knie. Prof. Dr. med. Rolf Haaker Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Rheumatologie und Traumatologie, St. Vincenz Hospital Brakel



»Nach Kreuzbandoperation sorgen vor allem effektive Stabilisierung und Ödemreduktion für einen zügigen Heilungsprozess. Als Mittel der Wahl gelten positionssichere Orthesen und medizinische Kompressionsstrümpfe, die einfach anzulegen sind.«

SecuTec® Genu Flex

FÜR MEHR DYNAMIK IN DER THERAPIE



 effektive Führung und Stabilisierung nach dem Vier-Punkt-Prinzip und flexibel in der Bewegung

VenoTrain® soft S

DAS MULTITALENT FÜR LEICHTES ANLEGEN



+ effektive postoperative und posttraumatische Ödemkontrolle zum Schwellungsabbau

Vorteile in der Therapie

✓ Rehabilitation verbessern

✓ entstandene Ödeme reduzieren √ Heilungsprozess fördern

HILFSMITTEL- UND THERAPIE-APP

DAS GANZHEITLICHE KONZEPT **VON BAUERFEIND**

DIE BAUERFEIND-HILFSMITTEL-APP

Der Produktfinder für Ärzte und Fachhändler.

Der intuitiv bedienbare, digitale Produktfinder vereinfacht Ärzten und Fachhändlern die Auswahl des geeigneten medizinischen Hilfsmittels enorm: Erhalten Sie alle relevanten Informationen zum Bauerfeind-Produktportfolio schnell und unkompliziert. Zudem können Sie sich eine individuelle Merkliste erstellen und Produkte mit Ihren Patienten und Kunden aus der App heraus teilen.







TRAINING MIT DER BAUERFEIND THERAPIE-APP


Beweglichkeit kommt von Bewegung.

Nur mit konsequenter Bewegung bleibt der Körper mobil und kann optimal regenerieren. In Abstimmung mit dem behandelnden Arzt unterstützt die Bauerfeind Therapie-App Patienten dabei, mit Produkten von Bauerfeind zu trainieren. Sie motiviert die Anwender gezielt, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Für mehr körperliche Aktivität in der Schwangerschaft wurden Übungen zusammengestellt, die speziell auf die Bedürfnisse von Schwangeren abgestimmt sind.



Kostenlos verfügbar für iOS und Android. Mehr Informationen finden Sie unter: bauerfeind.de/app

Infoftyer für Ihre Kunden können Sie bestellen unter: 19002060031001 Flyer Therapie-App

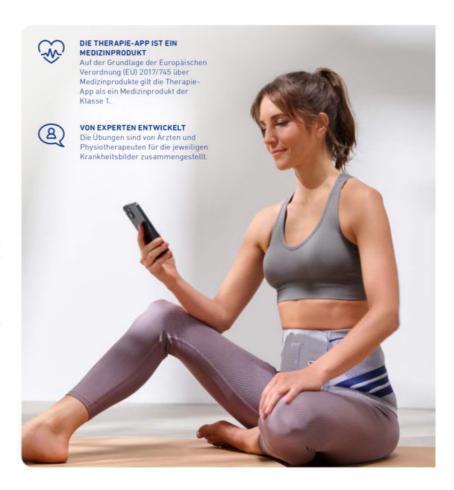

WAS KANN DIE THERAPIE-APP?



FLEXIBLES TRAINING FÜR JEDEN PATIENTEN

Das Training wird individuell für die Indikation und das aktuelle Befinden zusammengestellt. Die Übungsauswahl lässt sich jederzeit flexibel durch den Anwender anpassen – auch wenn mehr als ein Bauerfeind-Produkt im Einsatz ist.



EXPERTEN-KNOW-HOW RUND UM DIAGNOSE UND BAUERFEIND-PRODUKT

Anwender erhalten regelmäßig nützliches und verständlich aufbereitetes Hintergrundwissen zu Indikationen und Bauerfeind-Produkten von unseren Experten.



SPEZIELLES RÜCKEN-TRAINING WÄHREND DER SCHWANGERSCHAFT

Für das Training bei Rückenbeschwerden während der Schwangerschaft sind zahlreiche Übungen enthalten, die speziell auf die Bedürfnisse von Schwangeren abgestimmt sind.



Wir bieten Ihnen dafür qualifizierte Trainings mit hohem Praxisbezug in ganz Deutschland zu folgenden Kategorien:

MEDIZINISCHES WISSEN UND FACHLICHE KOMPETENZ

»Basistraining Bandagen«
»Training – Die Knietherapie mit Bauerfeind«

MARKETING / VERKAUF

»Erfolgreicher Verkauf von Hilfsmitteln«

PERSONAL

»Sanitätshausfachverkäufer/in für Quer- und Berufseinsteiger« »Azubi-Camp« Das komplette Trainingsangebot finden Sie im Trainingskatalog unter experts.bauerfeind.com/downloads

Weitere Informationen und Anmeldeunterlagen erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter oder der Bauerfeind-Akademie:

T 0800 0 01 05 01 F 0800 0 01 05 02 E akademie@bauerfeind.com

VORTEILE AUF EINEN BLICK

TRAININGS MIT HOHEM PRAXISBEZUG

Die Trainings unserer Akademie beinhalten stets einen medizinischen Anteil für ein besseres Verständnis und mehr fachliche Kompetenz.

Speziell ausgebildete Trainer wie Orthopädietechniker, Physiotherapeuten und Lymphtherapeuten führen Sie professionell und zielgruppenspezifisch durch die unterschiedlichen Themenbereiche.

HOLEN SIE SICH DIE BAUERFEIND-AKADEMIE INS HAUS!

Möchten Sie ein individuelles, speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Training? Sie können bei uns ein Training ganz nach Ihren Wünschen buchen. Dabei können Sie zum Beispiel das Thema, den Ort und die Zeit frei wählen. Sprechen Sie uns an!

ONLINE-TRAININGS

Sie möchten zeit- und kosteneffizient lernen? Sie können ein individuelles Online-Training buchen und bestimmen den Inhalt und das Thema ganz individuell nach Ihren Bedürfnissen.





Wir bieten Ihnen **E-Learnings** für zeit- und ortsunabhängiges Lernen in Ihrer eigenen Geschwindigkeit an.

Registrieren Sie sich gleich hier:




IN WENIGEN MINUTEN ZUM PASSENDEN TRAINING MIT UNSEREM

SCHULUNGSFINDER








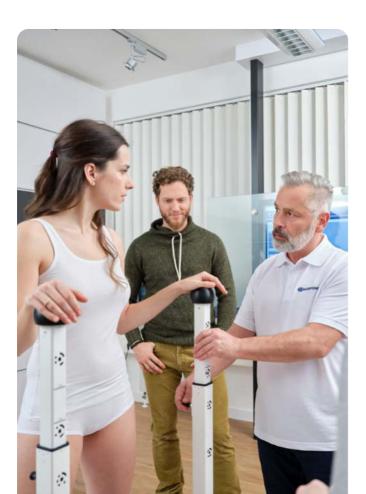





QUALITÄT LÄSST SICH (AN)MESSEN. BAUERFEIND-MESSTECHNIK

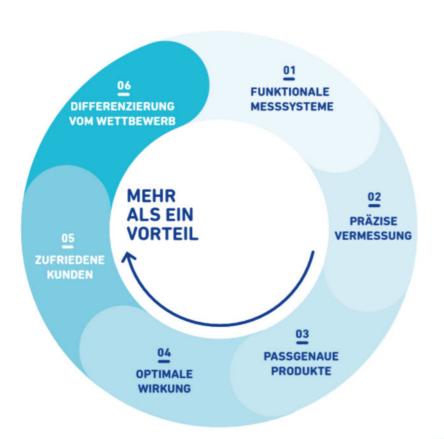












BODYTRONIC° 410 FLEXIBLER 3D-SCANNER FÜR DIE UNTEREN EXTREMITÄTEN

- berührungsloses, textilfreies Messen für die Versorgung mit Kompressionsstrümpfen und Knie-/Sprunggelenkbandagen
- · 3D-Abbild des Messbereiches bis zur Taille
- schneller und einfacher Auf- und Wiederabbau

AUSWAHL DES PASSGENAUEN PRODUKTES

Das BODYTRONIC 610 bietet Ihnen eine Entscheidungshilfe bei der Auswahl einer optimalen Serien- oder Maßversorgung.

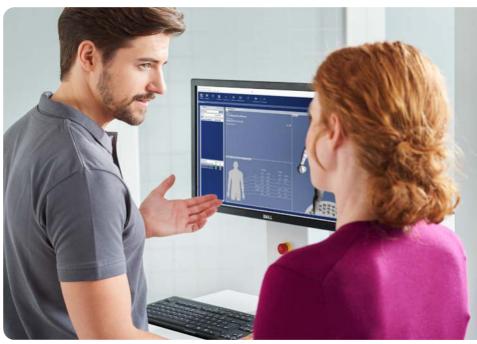



BODYTRONIC® 610

GANZKÖRPER-SCANNER INKLUSIVE PRODUKTVERSORGUNG ALLER EXTREMITÄTEN

- berührungsloses, textilfreies Messen für Kompressionsstrümpfe, Knie- und Sprunggelenkbandagen, Knieorthesen sowie für Rücken-, Arm- und Schulterprodukte
- Ganzkörper-Scan möglich, Export der 3D-Daten
- Standfläche von lediglich 1,60 m²



SCANNER UND KAMERA

Muster aus unbedenklichen Infrarot-Lichtstrahlen werden auf die zu vermessende Person projiziert und digital erfasst. Die Software berechnet aus den Bildinformationen das exakte 3D-Abbild.




SELBSTDREHENDE MESSPLATTFORMBewegt den Patienten gleichmäßig und schließt so

Fehlerquellen bei der Messung aus.

FUSS UND SPRUNGGELENK

FÜR EINE GEZIELTE FUSS- UND SPRUNGGELENK-THERAPIE



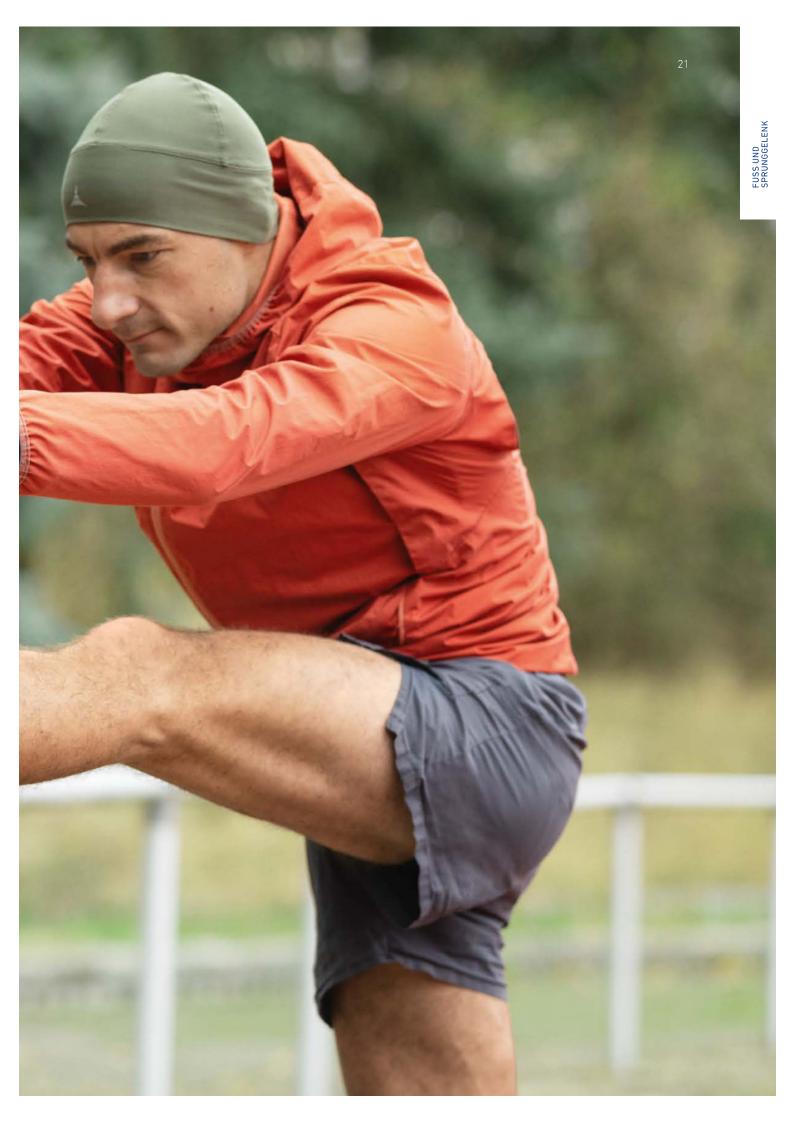

INDIKATIONSTABELLE FUSS- UND SPRUNGGELENKTHERAPIE

PRODUKT		MalleoTrain*	MalleoTrain*S/ S open heel	MalleoTrain° Plus	AchilloTrain*	AirLoc*
					NEU	31
PRODUKTMERKMAL		Entlastung und Stabilisierung des Sprunggelenks	Stabilisierung des Sprunggelenks durch funktionelles Gurtsystem	Erhöhte Stabilisierung und Entlastung des Sprunggelenks durch funktionelles Gurtsystem	Linderung von Achilles- sehnenbeschwerden durch Friktionspelotte und Fersenkeil	Bewegungstimitierende Sprunggelenkorthese mit anpassbarer Luftpolsterung
HILFSMITTELNUMMER	*	05.02.01.0001	keine	05.02.01.2004	05.02.01.1003	23.02.02.0007
SEITENZAHL		24	25 + 26	27	28 + 29	30
INDIKATIONEN						
	leicht	•	•	•		
Bandinsuffizienz / Instabilität	mittel					•
	schwer					
Reizzustände (posttraumatisch/postoperation)	v)	•		•	•	
Kapselbandverletzung (akut)						•
frühfunktionelle Therapie		•		•		•
konservative / postoperative Ti	herapie	•		•		•
Rehabilitation / Protektion		•	•	•		•
Sinus-Tarsi-Syndrom / Instabilität des Subtalargelenk	is .					
Rezidivprophylaxe		•	•	•		•
Arthrose / Arthritis		•				
Tendopathie		•				
Tendomyopathie		•				
Achillodynie					•	
Haglundferse					•	
Hallux valgus (konservativ / po	stoperativ)					
Weber-A-Fraktur (nicht dislozi	ert)					•
Fußheberschwäche (z.B. nach Schlaganfall, Operation, MS)	Trauma,					

^{*}Angaben zur Rezeptierung gelten nur in Deutschland

MalleoLoc* L	MalleoLoc* L3	MalleoLoc*	CaligaLoc*	ValguLoc*	ValguLoc* II	Xtern summit	Xtern frontier
Me							NEU P
Laterale Stabilisierung des Sprunggelenks	Laterale Stabilisierung des Sprunggelenks – abrüstbar in drei Stufen	Erhöhte Stabilisierung des oberen und unte- ren Sprunggelenks	Stabilisierung des oberen und unteren Sprunggelenks nach schweren Verletzungen	Korrektur der Großzehe in Ruhe	Korrektur der Großzehe in Ruhe und Bewegung	unterstützt ein physiologisches Gangbild	unterstützt ein physiologisches Gangbild
23.02.02.1042	23.02.04.0010	23.02.02.2004	23.02.01.0003	23.01.01.0007	23.01.01.1002	23.03.02.6038	23.03.02.6039
31	32	33	34	35	36	37	37
•	•						
•	•	•					
		•	•				
•	•						
•	•	•	•				
•	•	•					
•	•	•	•				
•	•	•	•		•		
			•				
•	•	•					
				•	•		
						•	•
				1			

MalleoTrain®

Entlastung und Stabilisierung des **Sprunggelenks**

Hilfsmittelnummer

05.02.01.0001










an Innen- und Außenknöchel angepasste Pelotten

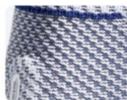

Train-Gestrick





INDIKATIONEN

- · chronische, postoperative und posttraumatische Reizzustände, z.B. nach Distorsionen
- · Arthrose und Arthritis, Gelenkergüsse und Schwellungen
- · Tendopathie
- · Tendomyopathie
- Bänderinsuffizienz
- · frühfunktionelle/konservative Therapie
- Rezidivprophylaxe

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · die dosierte Kompression beschleunigt die Resorption von Ödemen, Ergüssen und
- · durch die Pelotten wird eine Umverteilung der Bandagenkompression von den prominenten Malleolen auf das umgebende Weichteilgewebe bewirkt
- · neuromuskuläre Gelenkstabilisierung durch Gestrickkompression
- · in der Bewegung entsteht eine intermittierende Kompression, die über Gelenkkapsel und Sehnenlogen die Durchblutung fördert
- · optimierte Haltbarkeit auch bei hoher Beanspruchung durch Verstärkung der Naht mit einem elastischen Band
- · die atmungsaktive und besonders weiche Komfortzone am Spann des anatomisch geformten Train-Gestricks ermöglicht höchsten Tragekomfort bei optimaler medizinischer Wirkung

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + Komfortzone
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: beige, schwarz, titan Ausführungen: rechts, links

optional:

Maßanfertigung (beige, titan)

Hinweis:

ARTIKEL-NR.

bei Maßanfertigung zusätzliche Hilfsmittelnummer: 05.99.99.0001

LIEFERUMFANG

inklusive Anziehhilfe

IN STUDIE^A BELEGT

· 60 % der Patienten empfinden weniger Schmerzen mit der Sprunggelenkbandage MalleoTrain

	-		

17-19

19-21

* = Farbe (1) beige, (7) schwarz, (8) titan + = Ausführung (6) rechts, (7) links ° = Größe (1-6)

Fesselumfang (cm)

GRÖSSE

21 - 2327-29 110 1110 30°0 +0° Maßanfertigung: Die genauen Messpunkte entnehmen

Sie bitte dem Maßbestellblock oder dem Maßbestellblatt auf Seite 133.





MalleoTrain® S

Stabilisierung des Sprunggelenks durch funktionelles Gurtsystem

Hilfsmittelnummer

KEINE

Keine Erstattung durch die Krankenkasse, außer mit Einzelfallgenehmigung.





in Achter-Tour gewickeltes Gurtsystem



flaches Gurtsystem





Komfortzone am Spann



INDIKATIONEN

- · Bandinsuffizienz
- · Supinationsprophylaxe
- · leichte Distorsionen

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · stabilisiert Bewegungsebenen des Sprunggelenks und wirkt antisupinatorisch dank individuell einstellbarem Gurtsystem
- · wirkt wie ein funktioneller Tapeverband und verbindet Mittelfuß mit distalem Unterschenkel über eine vertikale Achter-Tour
- · neuromuskuläre Gelenkstabilisierung durch Gestrickkompression
- · die atmungsaktive und besonders weiche Komfortzone am Spann des anatomisch geformten Train-Gestricks ermöglicht höchsten Tragekomfort bei optimaler medizinischer Wirkung
- · besonders flaches Gurtsystem auf anatomisch geformtem Train-Gestrick passt in viele Schuhe
- · optimierte Haltbarkeit auch bei hoher Beanspruchung durch Verstärkung der Naht mit einem elastischen Band

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + Komfortzone
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: schwarz, titan Ausführungen: rechts, links

LIEFERUMFANG inklusive Anziehhilfe

GRÖSSE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Fesselumfang (cm)	17 – 19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	110 1111 30*0 +0°

^{* =} Farbe (7) schwarz, (8) titan



^{+ =} Ausführung (6) rechts, (7) links ° = Größe (1 – 6)

MalleoTrain® S open heel

Stabilisierung des Sprunggelenks und verbesserter Bodenkontakt durch offenen **Fersenbereich**

Hilfsmittelnummer

KEINE

Keine Erstattung durch die Krankenkasse, außer mit Einzelfallgenehmigung.









flaches Gurtsystem







Komfortzone am Spann

INDIKATIONEN

- · Bandinsuffizienz
- · Supinationsprophylaxe
- · leichte Distorsionen

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · stabilisiert Bewegungsebenen des Sprunggelenks und wirkt antisupinatorisch dank individuell einstellbarem Gurtsystem
- · wirkt wie ein funktioneller Tapeverband und verbindet Mittelfuß mit distalem Unterschenkel über eine vertikale Achter-Tour
- · neuromuskuläre Gelenkstabilisierung durch Gestrickkompression
- · die atmungsaktive und besonders weiche Komfortzone am Spann des anatomisch geformten Train-Gestricks ermöglicht höchsten Tragekomfort bei optimaler medizinischer Wirkung
- · offener Fersenbereich für einen verbesserten Bodenkontakt
- · besonders flaches Gurtsystem auf anatomisch geformtem Train-Gestrick passt in viele Schuhe

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + Komfortzone
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: beige, titan

Ausführungen: rechts, links

GRÖSSE	1	2	3	4	5	ARTIKEL-NR.
Fesselumfang (cm)	17 – 19	19-21	21-23	23-25	25-27	110 1115 10*0 +0°



* = Farbe (1) beige, (8) titan + = Ausführung (6) rechts, (7) links



MalleoTrain® Plus

Erhöhte Stabilisierung und Entlastung des Sprunggelenks durch funktionelles Gurtsystem

Hilfsmittelnummer

05.02.01.2004









in Achter-Tour gewickeltes Gurtsystem



flaches Gurtsystem



Train-Gestrick



Komfortzone am Spann

INDIKATIONEN

- · chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände
- · postoperative Rehabilitation
- · frühfunktionelle Therapie von Kapselbandverletzungen des oberen bzw. unteren Sprunggelenks
- · Bandinsuffizienz/Instabilität
- · Supinationsprophylaxe, besonders bei gesteigerten Aktivitäten

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · stabilisiert Bewegungsebenen des Sprunggelenks und wirkt antisupinatorisch dank individuell einstellbarem Gurtsystem
- · wirkt wie ein funktioneller Tapeverband und verbindet Mittelfuß mit distalem Unterschenkel über eine vertikale Achter-Tour
- · zusätzliche Stabilität durch mediale und laterale Pelotten, die vom Achter-Gurt eng umfasst werden
- · neuromuskuläre Gelenkstabilisierung durch Gestrickkompression
- · die atmungsaktive und besonders weiche Komfortzone am Spann des anatomisch geformten Train-Gestricks ermöglicht höchsten Tragekomfort bei optimaler medizinischer Wirkung
- · besonders flaches Gurtsystem auf anatomisch geformtem Train-Gestrick passt in viele Schuhe
- optimierte Haltbarkeit auch bei hoher Beanspruchung durch Verstärkung der Naht mit einem elastischen Band

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + Komfortzone
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: rechts, links

LIEFERUMFANG

inklusive Anziehhilfe

GRÖSSE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Fesselumfang (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	110 1112 1080 +0°

^{+ =} Ausführung (6) rechts, (7) links
° = Größe (1–6)




AchilloTrain®

Linderung von Achillessehnenbeschwerden durch Friktionspelotte und Fersenkeil

Hilfsmittelnummer

05.02.01.1003

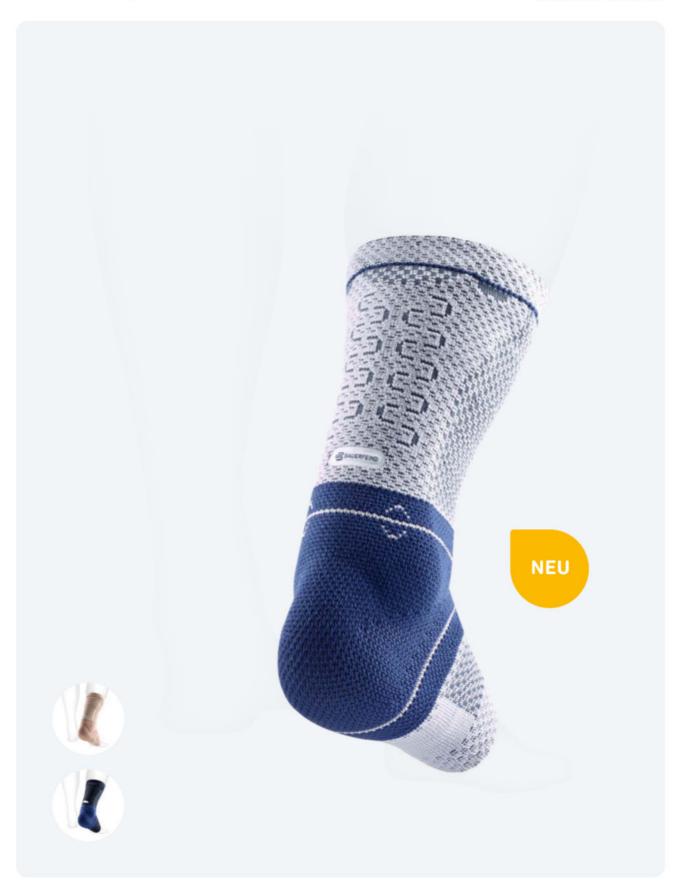







gesamten Sehnenverlauf





Entlastung



Komfortzone am Spann

INDIKATIONEN

- · Achillodynie (Tendinose, Paratendinitis, Bursitis subachillea)
- · Haglundferse
- · chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände, z.B. bei Achillessehnenrupturen

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · die Pelotte sorgt für eine gleichmäßige Druckeinleitung und bewirkt in der Bewegung einen Massageeffekt, die Durchblutung wird lokal verbessert, Ödeme werden reduziert
- · die integrierte Sehnenpelotte ist viskoelastisch und anatomisch geformt
- gezielte Wechselkompression dient u.a. zur Verbesserung der Muskelsteuerung und der Koordination der Bewegung

ANWENDUNGSHINWEISE

· Fersenkeile bitte beidseitig verwenden zum Beinlängenausgleich der Gegenseite

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: beige, schwarz, titan

Ausführungen: gleiche Ausführung

für rechts und links

Ersatzteile / Zusätze: siehe Seite 114 und Preisliste

LIEFERUMFANG

inklusive Anziehhilfe

inklusive viskoelastische Fersenkeile (ein Paar)

GRÖSSE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Fesselumfang (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	110 1101 40*0 00°

^{* =} Farbe (1) beige, (7) schwarz, (8) titan



AirLoc®

Bewegungslimitierende Sprunggelenkorthese mit anpassbarer Luftpolsterung

Hilfsmittelnummer

23.02.02.0007





Anpassen der Luftpolsterung an den Schwellungszustand mittels integrierter Pumpe und Ablassventil



passt sich an die individuelle Fußbreite an, dank einer elastischen Schalenverbindung



optimaler Sitz am Unterschenkel durch zwei anatomisch geformte Klettourte



angenehmes Tragen dank flacher, anatomisch geformter Konstruktion mit weichen Polstern



stabilisiert in Kombination mit einem Schuh

INDIKATIONEN

- Versorgung bei Kapsel-Bandverletzungen (akut)
- frühfunktionelle / konservative Therapie, z. B. nach Sprunggelenkdistorsion und Bandruptur
- postoperative Rehabilitation / Protektion, z. B. nach Bandnaht / -rekonstruktion
- chronische Bandinsuffizienz / Instabilität
- · Rezidivprophylaxe
- · Weber-A-Fraktur (nicht disloziert)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- stabilisiert nach akuten Verletzungen in Kombination mit einem Schuh den medialen und lateralen Kapselbandapparat des Sprunggelenks
- Pronation und Supination werden mechanisch eingeschränkt, um vor erneuten Traumata zu schützen.
- die flache, anatomisch geformte Orthese in Universalgröße für rechts/links ist vor allem für die Akutversorgung ausgelegt
- innenseitig liegen großflächige Schaumstoffpolster in einem weichen Mikrofaserbezug an
- zwei anatomisch vorgeformte Kunststoffschalen bilden eine U-Schiene und werden mit zwei anatomisch geformten Klettgurten fixiert, die zirkulär um Fessel und Unterschenkel verlaufen
- unterhalb des Fersenbeins sind die Schalen elastisch miteinander verbunden und passen sich an die individuelle Fußbreite und den aktuellen Schwellungsgrad an

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + werkzeugfreie Anpassung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: blau

Ausführungen: gleiche Ausführung

für rechts und links

Größe: universal

IN STUDIE^A BELEGT

 34% weniger Komplikationen in der Sprunggelenktherapie im Vergleich zu einem Tapeverband

ANWENDUNGSHINWEISE

- die zusätzlich lateral eingefügte Luftpolsterung kann mittels integrierter Pumpe und Ablassventil an den individuellen Schwellungszustand angepasst werden
- trägt kaum auf und passt gut in verschiedenes Schuhwerk

ARTIKEL-NR.

120 1303 2050 000

GRÖSSE

In einer Universalgröße erhältlich

Lardenoye, S., Theunissen, Ed., Cleffken, B., Brink, P., R., G., de Bie, R., A., Poeze, M.: The effect of taping versus semi-rigid bracing on patient outcome and satisfaction in ankle sprains: a prospective, randomized controlled trial BMC Musculoskeletal Disorders 2012, 13:8; http://www.biomedcentral.com/1471-2474/13/81

MalleoLoc® L

Laterale Stabilisierung des **Sprunggelenks**

Hilfsmittelnummer

23.02.02.1042









Mikrofaser-Polstermaterial



Schale



schlanke L-Schale



passt in Alltags-und Businessschuhe

INDIKATIONEN

- · konservative Behandlung von Distorsionen und Bandrupturen
- · akute und chronische Kapselbandinstabilitäten
- · Prophylaxe bei chronischer Bandinstabilität
- · postoperative Rehabilitation / Protektion, z.B. nach Bandnaht/-rekonstruktion
- posttraumatische / postoperative Reizzustände

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · stabilisiert den Fuß im Schuh und schützt lateral vor seitlichem Umknicken, ohne das normale Abrollen des Fußes einzuschränken
- · L-Schale liegt vor dem Talus an und wirkt einem Talusvorschub entgegen
- · individuell positionierbare Plantar-Pelotte (optional) stimuliert die Fußhebermuskulatur für eine zusätzliche aktive Stabilisierung
- · angenehmer Tragekomfort durch weiches Mikrofaser-Polster

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + werkzeugfreie Anpassung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: rechts, links

Größe: Universal

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 114 und Preisliste

IN STUDIE^A BELEGT

- · wirkt einem Umknicken entgegen
- stabilisiert das Sprunggelenk

GRÖSSE

In einer Universalgröße erhältlich

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links

ARTIKEL-NR.

120 1326 1080 +00

⁶ Gehring, D., Münch, M., Gollhofer A., Laborstudie: Nachweis von antisupinatorischen Effekten von Orthesen innerhalb des Verletzungsmechani Orthopädieschuhtechnik, Ausg. 10, S. 26–29, 2018

MalleoLoc® L3

Laterale Stabilisierung des Sprunggelenks - abrüstbar in drei Stufen

Hilfsmittelnummer

23.02.04.0010













Therapielösung für drei Stabilitätsbedürfnisse

Reißverschluss

passt in Alltags- und Businessschuhe

INDIKATIONEN

- · konservative Behandlung von Distorsionen und Bandrupturen
- akute und chronische Kapselbandinstabilitäten
- · Prophylaxe bei chronischer Bandinstabilität
- postoperative Rehabilitation / Protektion, z.B. nach Bandnaht/-rekonstruktion
- posttraumatische / postoperative Reizzustände

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- abrüstbare Orthese begleitet den Patienten während der Therapie und bietet eine Lösung für drei Stabilitätsbedürfnisse entsprechend des Heilungsverlaufes
- Weichteilkompression der Bandage beschleunigt den Abbau von Schwellungen, verbessert die Propriozeption und wirkt muskelaktivierend
- stabilisiert den Fuß im Schuh lateral und schützt vor seitlichem Umknicken, ohne das normale Abrollen des Fußes einzuschränken
- L-Schale liegt vor dem Talus und arbeitet einem Talusvorschub entgegen
- Reißverschluss für leichtes Anlegen der Bandage

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Komfortzone
- + werkzeugfreie Anpassung
- + mehrstufige Therapie
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: rechts, links

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 114 und Preisliste

IN STUDIE^A BELEGT

- · wirkt einem Umknicken entgegen
- stabilisiert das Sprunggelenk

GRÖSSE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Fesselumfang (cm)	17 – 19	19-21	21 – 23	23-25	25-27	27-29	120 1327 1080 +0°

^{+ =} Ausführung (6) rechts, (7) links ° = Größe (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/malleoloc-l3



⁴ Gehring, D., Münch, M., Gollhofer A., Laborstudie Nachweis von antisupinatorischen Effekten von Orthesen innerhalb des Verletzungsmechanismus; Orthopädieschuhtechnik, Ausg. 10, S. 26-29, 2018

MalleoLoc®

Erhöhte Stabilisierung des oberen und unteren Sprunggelenks

Hilfsmittelnummer


23.02.02.2004









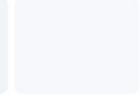



plantare Zunge

natomisch geformtes, bilaterales

INDIKATIONEN

- frühfunktionelle/konservative Therapie bei Kapselbandverletzungen und bei Verletzungen des Lig. Bifurcatum, z.B. nach Distorsion und Bandruptur
- · postoperative Protektion nach Bandnaht / -rekonstruktion
- · chronische Bandinsuffizienz
- · Rezidivprophylaxe

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · stabilisiert den Fuß und schützt vor seitlichem Umknicken
- · ermöglicht Plantarflexion sowie Dorsalextension und arbeitet gleichzeitig einem Talusvorschub entgegen, »normales« Gehen wird nicht ein-
- · aktiviert die Fußhebermuskulatur über eine plantare Zunge und unterstützt so die stabilisierende Wirkung und den Supinationsschutz durch die Orthese

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + werkzeugfreie Anpassung
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: rechts, links

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 114 und Preisliste

IN STUDIENA BELEGT

- · wirkt einem Umknicken entgegen
- stabilisiert das Sprunggelenk

GRÖSSE	1(NORMAL)	2 (BREIT)	ARTIKEL-NR.
Fersenbreite (cm)	<6	>6	120 1301 3080 +0°





^{+ =} Ausführung (6) rechts, (7) links ° = Größe (1 – 2)

Gehring et al.: Expecting ankle tilts and wearing an ankle brace influence joint control in an imitated ankle sprain mechanism during walking. Gait & Posture 2014; 39 (3), 894–898. Eberbach H., et al., J. Orthop. Surg. Res. (2021) 16:620; https://doi.org/10.1186/s13018-021-02750-6

CaligaLoc®

Stabilisierung des oberen und unteren Sprunggelenks nach schweren Verletzungen

Hilfsmittelnummer

23.02.01.0003









Ansicht von medial

INDIKATIONEN

- konservative Therapie von schweren Sprunggelenkverletzungen
- postoperative Protektion nach Bandnaht / -rekonstruktion
- chronische Instabilität des oberen und / oder unteren Sprunggelenks mit Gegenanzeigen zur Operation
- posttraumatisches Sinus-Tarsi-Syndrom und dekompensierte Instabilität des Subtalargelenks, auch temporäre Stabilisierungshilfe

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- verhindert unphysiologische Stresssituationen für das obere und teilweise auch untere Sprunggelenk
- Anhebung der Außenkante des Rückfußes und Entlastung des lateralen Bandapparates dank integriertem Pronationskeil

ANWENDUNGSHINWEISE

- individuelle Anpassung durch Ausschneiden des Polsters bei starker Schwellung dank Aussparung im Bereich des Außenknöchels
- ausschließlich in bequemen Straßen- oder Turnschuhe zu tragen, im Liegen oder Sitzen entlastet die Orthese das Sprunggelenk auch ohne Schuhe

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + werkzeugfreie Anpassung
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: rechts, links

IN STUDIE[∆] BELEGT

 23,3 Tage früher wieder arbeitsfähig im Vergleich zum Gips

GRÖSSE	1	2	3	ARTIKEL-NR.
Richtwert Schuhgröße	34 – 38	39-43	44-48	120 1300 4080 +0°

^{+ =} Ausführung (6) rechts, (7) links

^{° =} Größe (1 - 3)

A Zwipp et al, Die konservativ-funktionelle Behandlung des Knöchelbänderrisses hat sich bewährt: 5-Jahres-Ergebnisse, Med. Orth. Tech., Ausg. 114, S. 122–126, 1994 @ Gentner Verlag Stuttgart

ValguLoc®

Korrektur der Großzehe in Ruhe

Hilfsmittelnummer

23.01.01.0007







INDIKATION

· Hallux valgus (konservativ und postoperativ)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · korrigiert die Fehlstellung der Großzehe und dehnt verkürzte Kapselanteile bzw.
- postoperativ können Korrekturverluste (z.B. durch Narbenzüge) vermieden werden und die Schalung vermittelt der Großzehe einen gewissen Schutz vor mechanischen Einflüssen
- stufenlos anpassbarer Korrekturdruck mit Klettverschluss
- · hoher Tragekomfort dank weichem Gurtund Polstermaterial

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + werkzeugfreie Anpassung
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: rechts, links

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 114 und Preisliste

GRÖSSE	1	2	3	ARTIKEL-NR.
Richtwert Schuhgröße	34 – 36	37-40	41 – 46	120 1310 2080 +0°

^{+ =} Ausführung (6) rechts, (7) links ° = Größe (1 – 3)

ValguLoc® II

Korrektur der Großzehe in Ruhe und Bewegung

Hilfsmittelnummer

23.01.01.1002





mehrdimensionales Gelenk zur Einstellung des Abduktions- und



freie Beweglichkeit des Großzehengrundgelenks oder Fixierung in einstellbaren Flexions- und Extensionswinkeln

INDIKATIONEN

- postoperative Protektion / Rehabilitation nach Hallux-valgus-OP
- konservativ-funktionelle Therapie der Hallux-Fehlstellung mit Mobilisationsfunktion

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- individuelle Einstellung eines Korrekturwinkels der Großzehe dank dreidimensional verstellbarem Gelenk
- anpassbar an die individuelle Fußform, optional stufenweise arretierbar zur postoperativen Schienung / Ruhigstellung des Großzehengrundgelenks
- Druckentlastung des Großzehengrundgelenks durch Korrektur
- passt in weites Straßenschuhwerk durch flach anliegende Bauhöhe
- ermöglicht natürliches Abrollen des Fußes

DAS BAUERFEIND-PLUS

+ einfache Handhabung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: gleiche Ausführung für links und rechts

Größe: Universal

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 115 und Preisliste

GRÖSSE	ARTIKEL-NR.
In einer Universalgröße erhältlich	120 1316 0050 000

Xtern summit* Xtern frontier

Unterstützen ein physiologisches Gangbild

Hilfsmittelnummer

23.03.02.6038 Xtern summit 23.03.02.6039 Xtern frontier





er Patient kann mit Xtern verschiedene Schuhe tragen (Bild zeigt Beispiele)



Schubbefestigungsclips (beim Produkt enhalten)



verschluss von Xtern frontier, auch bei Xtern summit verwendbar



INDIKATIONEN

Fußheberschwäche ohne oder mit leichter Spastik:

- Peronaeusparese
- · nach einer Rücken-, Hüft- oder Knieoperation
- · nach einer traumatischen Verletzung im Bereich der unteren Gliedmaßen

Zusätzlich (Versorgung mit Xtern frontier):

- · Parese nach Schlaganfall mit eingeschränkter Beweglichkeit der Finger
- Multiple Sklerose (MS)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · gibt dem Fuß Bewegungsenergie zurück, dank biomechanisch-optimiertem Orthesendesign
- · natürliches Gehen, Wandern und mehr: Orthesenkonstruktion passt sich unebenen Untergründen an
- · passt an viele Schuhe durch Klicksystem, auswechselbar an Alltags-, Sportschuhen und sogar Sandalen (10 Clips enthalten)
- · hoher Tragekomfort: kein direkter Körperkontakt am Fuß und Sprunggelenk, damit Vermeidung von Blasen und Druckstellen
- · geringe Lagerkapazität durch Drei-Größen-System mit gleicher Ausführung für das rechte und linke Bein
- · individuelle Einlagenversorgung möglich

ANWENDUNGSHINWEISE bei eingeschränkter Feinmotorik der

Hände empfehlen wir die Xtern frontier aufgrund von:

- · einhändig schließbarem Magnetverschluss
- · Einstieg von hinten

BESTELLOPTIONEN

Farben: schwarz

Ausführungen: gleiche Ausführung für rechts und links

Ersatzteile / Zusätze: siehe Seite 115 und Preisliste


GRÖSSE		S	М	L	ARTIKEL-NR.
Xtern summit	Richtwert Schuhgröße	34,5-41,5	40,5-46,0	45,0-51,0	120 1355 1170 00°
Xtern frontier	Richtwert Schuhgröße	34,5-41,5	40,5-44,5	44,5-51,0	120 1356 1170 00°
Xtern Testset					190 0110 0110 001


Bei Zwischengrößen: für schlankere Füße die kleinere Größe verwenden.

Hersteller:

TurboMed Orthotics Inc. 240 Sydney (Suite 101) St-Augustin-de-Desmaures, QC, G3A 0P2, CANADA

° = Größe S (1), M (2), L (3)

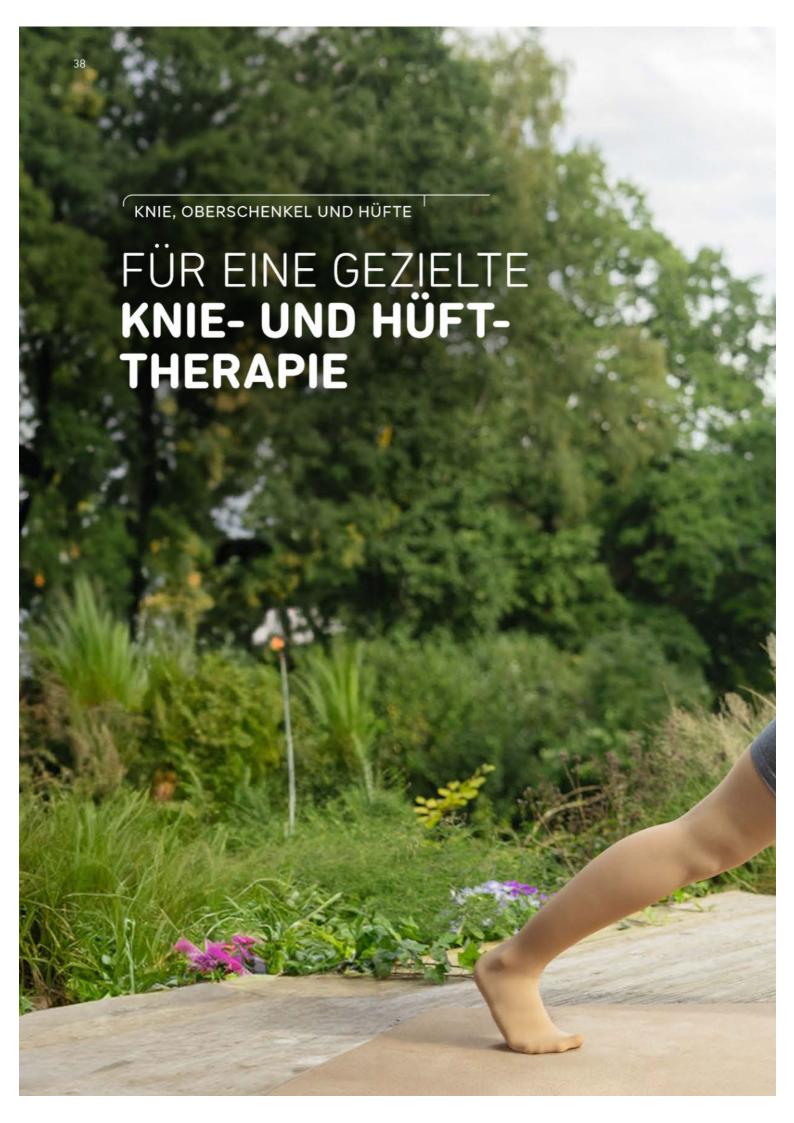

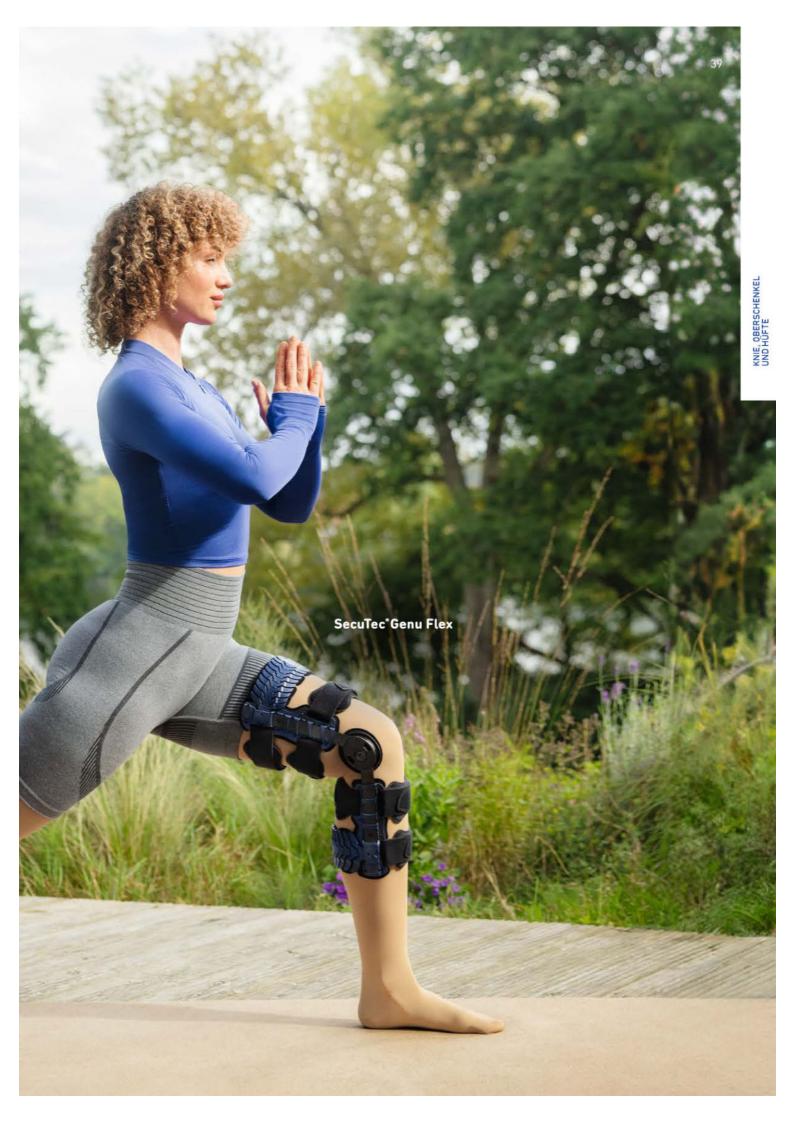

INDIKATIONSTABELLE KNIE- UND HÜFTTHERAPIE

PRODUKT		GenuTrain*	GenuTrain*A3	GenuTrain*P3	GenuTrain*S	GenuTrain*S Pro	GenuPoint*	SofTec*Genu
			NEU	To the second			*	
PRODUKTM	ERKMAL	Aktivierung, Entlastung und Stabilisierung des Kniegelenks	Aktivierung und Stabilisierung bei komplexen Knie- beschwerden wie Gonarthrose	Zentrierung und Sicherung der Patella durch einstellbaren Korrekturzügel	Verstärkte Stabilisierung des Kniegelenks durch seitliche Gelenkschienen	Verstärkte Stabilisie- rung des Kniegelenks durch seitliche Gelenkschienen und Limitierung des Bewegungsumfangs	Gezielte Entlastung und Führung der Patellasehne	Aktive und passive Stabilisierung des Kniegelenks – ideal für die Langzeit-Therapie
HILFSMITTE	LNUMMER*	05.04.01.0006	05.04.01.2006	23.04.05.0011	23.04.03.0014	23.04.03.1045	05.04.01.1023	mit Kosten- voranschlag
INDIKATION	EN I SEITENZAHL	44	46	47	48	49	50	51
Reizzustände (posttraumatisch	n / postoperativ)	•	•	•			•	
rezidivierender (Gelenkerguss	•	•					
Patellalateralisa	tion		•	•				
femoropatellare	s Schmerzsyndrom			•			•	
	leicht bis mittel	•	•	•	•	•		
Instabilität	schwer bis komplex							•
	funktionell, z.B. Non C	oper						•
Meniskusverletz	ung	•				•		•
nach Meniskusre	efixation							•
Seitenbandverle	tzung							•
Ruptur vorderes Kreuzband (ACL								•
Gonarthrose/	leicht bis mittel	•	•		•	•		
Arthritis	mittel bis schwer							
	orpeltransplantation							
Tendopathie		•	•					
Patellafraktur (k	onservativ oder postop	erativ)						
Genu recurvatur	n							•
Umstellungsoste	eotomie							
Knieruhigstellun	g							
	g (Muskelverhärtung, Muskelfaserriss)							
Prävention / Rez	divprophylaxe	•	•	•	•	•		•
Coxarthrose								
Hüftgelenkluxati	on							
nach endoprothe	etischem Eingriff/Wech	selprothesen						
muskuläre Dysb	alance Lenden-Becken-	-Hüft-Region						
muskuläre Prob	erne nach Gelenkopera	tionen Hüfte						
Impingement Hü	ftgelenk							
Instabilität des I	lüftgelenks (nach T.E.P.,	nach Revisionsein	griff)					
Instabilitätsgefü	hl in der Hüfte							
Lockerung Hüftp	rothese, wenn OP nicht	möglich						
chronische Reiz	zustände (z.B. Bursitis i	.V.m. Arthrose)						
chronische Tend	inopathie i.V.m. Arthros	se						

^{*}Angaben zur Rezeptierung gelten nur in Deutschland 1 Kellgren-Lawrence-Score 2-4

SecuTec*Genu	SecuTec*Genu Flex	GenuTrain*OA	SecuTec*OA	MOS-Genu	GenuLoc*	CoxaTrain*	SofTec* Coxa	MyoTrain*
dorsal frontal	S NEU		E.				A STATE OF THE STA	
Stabilisierung mit Limitierung des Bewegungsumfangs bei komplexen Knieverletzungen	Stabilisierung und Limitierung des Bewegungsumfangs bei komplexen Knieverletzungen	Gezielte Entlastung und Stabilisierung für mehr Aktivität bei Gonarthrose	Entlastung und Stabilisierung bei Gonarthrose mit Beinachsen- fehlstellung	Korrektur und Stabilisierung nach komplexen Knieverletzungen oder bei Umstel- lungsosteotomie	Ruhigstellung des Kniegelenks – gestreckt oder in einem voreingestellten Beugewinkel	Stabilisierung und Schmerz- reduktion im Hüftgelenk für mehr Aktivität bei Coxarthrose	Erhöhte Stabilisierung und Führung des Hüftgelenks	Einstellbare Kompression zur Behandlung von Muskel- verletzungen des Oberschenkels
23.04.03.3011	23.04.03.3084	23.04.04.1021	23.04.04.2010	kurz 23.04.03.3012 lang 23.04.04.2006	23.04.01.0014	23.05.01.0006	23.05.01.1003	keine
52	54	56	57	58	59	60	62	63
		•						
•	•			•			•	
	•							
•	•	•	•	•				
•	•	•	•	•				
•	•		•	•				
•	•		mit Beinachs- fehlstellung	•				
		•						
		•	•	•				
		•	•	•				
_				_				
•					•			
				mit Kreuzgurt				
				•				
								•
						a 1		•
						•	•	
							•	
						•		
						•		
						•		
						•		
						•		
						•		
						•		
						•		

BAUERFEIND KNIETHERAPIE

GEZIELTE UND ERSTKLASSIGE VERSORGUNG

Bauerfeind präsentiert ein einzigartiges Knieportfolio mit vielfältigen Produktlösungen für häufige Krankheitsbilder und Funktionsstörungen des Kniegelenks.

Für den allgemeinen Knieschmerz eignet sich unser Klassiker, die GenuTrain. Patienten mit Patellaproblemen, Gonarthrose oder Trauma können von den spezifischen Produkten in unserem Bauerfeind-Knieportfolio profitieren.



GenuTrain* Differenzierte Diagnose: PATELLA GONARTHROSE TRAUMA GenuPoint* GenuTrain* A3 GenuTrain* S/S Pro GenuTrain* P3 GenuTrain* OA SofTec* Genu SecuTec* Genu SecuTec* Genu Flex



Um die Knietherapie perfekt abzurunden, empfehlen wir als zusätzlichen Therapie-Baustein die **Bauerfeind Therapie-App**.

ACHTUNG: nicht nach der direkten Trauma-Therapie verwenden.

bauerfeind.de/app

»Die zahlreichen Krankheitsbilder des komplexen Kniegelenkes erfordern eine große und exklusive Auswahl an Hilfsmitteln für die bestmögliche therapeutische Umsetzung.«



Prof. Dr. med. Rolf Haaker Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Rheumatologie und Traumatologie, St. Vincenz Hospital Brakel



Nach der Versorgung mit Bandagen und Orthesen bestätigen Patienten:

> 80% spürbar gesteigerte Lebensqualität**

72% mehr Mobilität**

61% weniger Schmerzmittel**

25% verzichten auf OPs**

> 18% verzichten auf Schmerzmittel**

JoHM_03_2017; Fuchs & Prütz 2017, S. 67 reSp Allensbach-Patientenumfrage 2023 (Allensbach Archiv, IfD-Umfrage 10658) im Auftrag der Eurocom: www.eurocom-info.de/studien/patientenum-frage-ifd-allensbach/

GenuTrain® BEI KNIESCHMERZ

Der Klassiker bei vielen Problemen rund ums Knie ist die Kniebandage GenuTrain von Bauerfeind. Sie vereint Expertise, höchste Qualität und jahrelange Erfahrung in einem Produkt.

Schnell gegen Schmerz, langristig wirksam.



2 von 3 Patienten haben weniger Schmerzen¹ GenuTrain lindert gezielt den Schmerz

9 von 10 Patienten empfinden mehr Stabilität¹ GenuTrain stabilisiert das Kniegelenk spürbar

9% weniger Belastung¹ GenuTrain entlastet das Kniegelenk bei jedem Schritt entsteht weniger Druck auf das Tibiaplateau

2º nachgewiesene Reduktion der max. Knieadduktion der Gelenkachse¹ GenuTrain beeinflusst die neuromuskuläre Steuerung des Gangs

verbesserte Sensomotorik² GenuTrain steigert die Propriozeption bei Patienten mit Defizit in der Gelenkwahrnehmung und bewirkt eine neuromuskuläre Stabilisierung des Kniegelenks

Schween R, GehringD, GollhoferA (2015); Immediate Effects of an Elastic Knee Sleeve on Frontal Plane Gait Biomechanics in Knee Osteoarthritis.PLOS | one 10(1): e0115782. doi:10.1371/journal.pone.0115782
 Sell S, Zacher J, Lack S; Proprioception decline in the osteoarthritic knee;Z. Rheumatol, 52: 150-155: (1993) Gait Biomechanics in Knee Osteoarthritis.PLOS | one 10(1): e0115782. doi:10.1371/journal.pone.0115782

GenuTrain®

Aktivierung, Entlastung und Stabilisierung des Kniegelenks

Hilfsmittelnummer

05.04.01.0006













Train-Gestrick

integrierte An- und Ausziehhilfe

komfortable Kniekehle

Comfort-Größen

INDIKATIONEN

- Tendopathie, Tendomyopathie, Ansatzligamentose, Meniskopathie, chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände
- · rezidivierender Gelenkerguss
- Gonarthrose / Arthritis (Gelenkverschleiß / Gelenkentzündung)
- · Prävention/Rezidivprophylaxe
- · Instabilitätsgefühl

IN STUDIENA BELEGT

- 89 % der Probanden empfinden mehr Kniegelenkstabilität
- messbar weniger Belastung auf das Kniegelenk
- nachweisliche Reduzierung von Schmerzen beim Tragen der Bandage
- Steigerung des Leistungsvermögens und der koordinativen Fähigkeiten des Kniegelenks

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- nachweisliche Entlastung und Stabilisierung des Kniegelenks dank der gezielten Aktivierung der gelenkstabilisierenden Muskulatur
- Massage der Menisken durch seitliche Meniskusflügel trägt zur Schmerzminderung bei
- Hoffa Spots wirken auf den Hoffa-Körper, der den Stoffwechsel fördert und Entzündungsprozesse reguliert
- komplexe Stimulation von Mechanosensoren verbessert Koordination, Sensomotorik und physiologische Bewegungsabläufe
- Verbesserung der Beweglichkeit dank der Massage verspannter Muskeln, Sehnen und Faczien
- beschleunigt die Resorption von Ödemen und Ergüssen und unterstützt den Heilungsverlauf bei Reizzuständen
- die atmungsaktiven Wirkzonen und besonders weichen Komfortzonen des anatomisch geformten Train-Gestricks ermöglichen höchsten Tragekomfort bei optimaler medizinischer Wirkung

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + Komfortzone
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: beige, schwarz, titan

Ausführungen: gleiche Ausführung für rechts und links

optional:

Silikonisierung:

Standard-Größen (schwarz, titan), Comfort-Größen (beige, schwarz, titan)

Maßanfertigung (beige, titan): Haftband, Klettverschluss

Hinweis: bei Maßanfertigung zusätzliche Hilfsmittelnr.: 05.99.99.0001

Ersatzteile / Zusätze:

Noppenhaftband (titan), siehe Seite 115 und Preisliste

GRÖSSE		0	1	2	3	4	5	6	7	ARTIKEL-NR.	
Charles	Umfang oben (cm)	35-38	38-41	41 – 44	44-47	47-50	50-53	53-56	56-59	110 /120 /014 000	
Standard	Umfang unten (cm) 25-28 28-31 31-34					37-40	40-43	43-46	46-49	110 4120 60 * ▲ 00°	
C()	Umfang oben (cm)				47-50	50-53	53-56	56-59	59-62	110 /120 /014 000	
Comfort	Umfang unten (cm)				34-37	37-40	40-43	43-46	46-49	110 4120 60 * ▲ 08°	



Maßanfertigung: Die genauen Messpunkte entnehmen Sie bitte dem Maßbestellblock oder dem Maßbestellblatt auf Seite 129.

^{* =} Farbe (1) beige, (7) schwarz, (8) titan

^{▲ =} Silikonisierung (0) ohne, (9) mit (nur titan und schwarz, Comfort-Größen auch beige)

^{° =} Größe (0-7)

A Schween R., Gehring D., Gollhofer A. »Immediate effects of an elastic knee sleeve on frontal plane gait biomechanics in knee osteoarthritis«. PLoS One. 2015 Jan 26;10(1):e0115782. doi: 10.1371/journal.pone.0115782. eCollection 2015. Sole et al. BMC Musculoskeletal Disorders (2021) 22:655; https://doi.org/10.1186/s12891-021-04540-x. Sole et al. BMC Musculoskeletal Disorders (2022) 23:560; https://doi.org/10.1186/s12891-022-05488-2.

GenuTrain® A3

Aktivierung und Stabilisierung bei komplexen Kniebeschwerden wie Gonarthrose

Hilfsmittelnummer

05.04.01.2006







neue Zwei-Komponenten-



Pelotte mit genoppten Funktionszonen und Friktionspunkten



Unterschenkelbereich



Bandagenrand



Anziehhilfe

INDIKATIONEN

- · Gonarthrose und Arthritis
- · chronische, posttraumatische und postoperative Reizzustände
- · Tendopathie, Ansatzligamentosen und Tendomyopathie
- · Gonalgie bei funktioneller Instabilität infolge muskulärer Dysbalancen
- rezidivierender Gelenkerguss
- · Prävention/Rezidivprophylaxe
- · Patellalateralisation

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · Zwei-Komponenten-Pelotte mit Funktionszonen wirkt auf typische Beschwerdeareale ein; die in der Bewegung entstehende Funktionsmassage zielt darauf ab, Schmerzen im medialen Kapselbandbereich zu lindern
- · Aktivierung der gelenkstabilisierenden Muskulatur und Verbesserung der Koordination durch die Stimulation von Mechanosensoren in der Haut und im Muskel-Sehnenübergang
- · Wechseldruckmassage in der Bewegung fördert die Ödemableitung und Resorption von Ergüssen und unterstützt Heilungsprozesse
- · kraftsparendes An- und Ablegen der Bandage dank ergonomisch geformter Anziehhilfen und aufgrund einzigartiger Dehnungszone im Unterschenkelbereich
- · Höchstmaß an Tragekomfort dank druckminimierter Randbereiche, besonders weicher Kniekehle und feuchtigkeitsregulierender Eigenschaften des Train-Gestricks
- · positionssicherer Sitz durch anatomische Passform und Punktsilikonisierung am oberen Bandagenrand
- · GenuTrain A3 steht für Anti Arthros Algos

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + Komfortzone
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: beige, schwarz, titan Ausführungen: rechts, links



GRUSSE		2	3	4	3	0	,	ARII
Umfang oben (cm)	35-41	39-46	42-51	47 – 56	51-60	55-64	59-68	110
Umfang unten (cm)	28-29	29-32	32-35	35-38	38-41	41 – 44	44-47	- 110 4

^{* =} Farbe (1) beige, (7) schwarz, (8) titan + = Ausführung (6) rechts, (7) links

CDÖSSE





GenuTrain® P3

Zentrierung und Sicherung der Patella durch einstellbaren Korrekturzügel

Hilfsmittelnummer

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
23.04.05.0011













Patellapelotte

Detonisierungspelotte

INDIKATIONEN

- · Reizzustände des Kniegelenks (Femoropatellares Schmerzsyndrom, Chondropathia patellae, Chondromalazie, Patellaspitzensyndrom / Jumper's Knee, Runner's Knee)
- · Patellalateralisation
- Patellahochstand
- · nach Lateral-Release-OP
- · Instabilitätsgefühl

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- Die Pelotte bewirkt in Verbindung mit dem individuell einstellbaren Korrekturzügel eine Zentrierung der Kniescheibe. Sie schützt die Patella in ihrer physiologischen Gleitbahn und wirkt einem lateralen Abdriften entgegen.
- · Friktionspunkte auf distalem Pelottenabschnitt massieren den Hoffa-Körper und wirken druckentlastend und schmerz-
- Detonisierungspelotte fördert eine leichte Entspannung des Tractus iliotibialis; der laterale Zug auf die Patella kann so minimiert werden
- · verbesserte Propriozeption durch Pelottenflügel mit proximaler Verlängerung bis zum Musculus vastus medialis
- · beschleunigte Resorption von Ödemen und Ergüssen dank medizinisch wirksamer Kompression und Wechseldruckmassage in der Bewegung
- · GenuTrain P3 steht für Permanent Patella Protection

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + Komfortzone
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: beige, schwarz, titan Ausführungen: rechts, links

optional:

Silikonisierung (nur titan), Maßanfertigung (beige, titan): mit Haftband

bei Maßanfertigung zusätzliche Hilfsmittelnummer: 23.99.99.0001

GRÖSSE	
Umfang oben (cm)	

Umfang unten (cm) 28-31 * = Farbe (1) beige, (7) schwarz, (8) titan

39-42

42-45

45-48

▲ = Silikonisierung (0) ohne, (9) mit (nur titan) + = Ausführung (6) rechts, (7) links

Maßanfertigung: Die genauen Messpunkte entnehmen Sie bitte dem Maßbestellblock oder dem Maßbestellblatt auf Seite 130.

48-51

51-54

54-57

ARTIKEL-NR.

110 4140 30° +0°





GenuTrain® S

Verstärkte Stabilisierung des Kniegelenks durch seitliche Gelenkschienen

Hilfsmittelnummer

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
23.04.03.0014

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












Pelotte

seitliche Gelenkschienen

INDIKATIONEN

- · Gelenkinstabilitäten (leichten bis mittleren Grades)
- · Gonarthrose
- Arthritiden (z.B. rheumatoide Arthritis)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · Stabilisierung und Führung des Kniegelenks erfolgt durch seitliche Gelenkschienen in Kombination mit dem zirkulär umlaufenden Gurtsystem an Ober- und Unterschenkel
- · flach anliegend und individuell einstellbar durch Zuggurte mit Mikroklett
- · hoher Tragekomfort dank atmungsaktivem, feuchtigkeitsabsorbierendem Train-Gestrick mit spezieller Kniekehle und druckminimierten Randbereichen
- · Förderung der neuromuskulären Gelenkstabilisierung durch die Ansprache der Propriosensoren
- · Schmerzminderung durch Wechseldruckmassage der parapatellaren Weichteilstrukturen in der Bewegung dank Train-Gestrick und viskoelastischer Pelotte
- · beschleunigte Resorption von Ödemen und Ergüssen durch Kompressions- und Massageeffekt des anliegenden elastischen Gestricks

ANWENDUNGSHINWEISE

· die anatomisch geformten Gelenkschienen sind thermoplastisch anformbar und können an die individuelle Anatomie angepasst werden

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + Komfortzone
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: beige, schwarz, titan Ausführungen: rechts, links

optional:

Maßanfertigung (titan): mit Haftband

Hinweis:

bei Maßanfertigung zusätzliche Hilfsmittelnummer: 23.99.99.0001

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 115 und Preisliste

Umfang oben (cm) Umfang unten (cm)

38 - 41

41-44 31 - 34

44-47 34 - 37

47 - 5037 - 40

50 - 5340-43

56-59 53-56

ARTIKEL-NR.

110 4130 40*0 +0°



* = Farbe (1) beige, (7) schwarz, (8) titan + = Ausführung (6) rechts, (7) links

° = Größe (1 – 7)

Maßanfertigung: Die genauen Messpunkte entnehmen Sie bitte dem Maßbestellblock oder dem Maßbestellblatt auf Seite 131

GenuTrain® S Pro

Verstärkte Stabilisierung des Kniegelenks durch seitliche Gelenkschienen und Limitierung des Bewegungsumfangs

Hilfsmittelnummer


23.04.03.1045

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








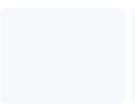



Pelotte

Limitierung der Knieflexion

Limitierung der Knieextension

INDIKATIONEN

- · Gelenkinstabilitäten (leichten bis mittleren Grades)
- · Gonarthrose
- Arthritiden (z.B. rheumatoide Arthritis)
- · Meniskusverletzungen

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · therapiegerechte Einschränkung des
- · Stabilisierung und Führung des Kniegelenks erfolgt durch seitliche Gelenkschienen in Kombination mit dem zirkulär umlaufenden
- stabilisierung durch die Ansprache der
- · beschleunigte Resorption von Ödemen und Ergüssen durch Kompressions- und Massageeffekt des anliegenden Kompressionsgestricks
- durch Zuggurte mit Mikroklett
- massage der parapatellaren Weichteilstrukturen in der Bewegung dank Train-Gestrick und viskoelastischer Pelotte

- Bewegungsumfangs über limitierbare Gelenke
- Gurtsystem an Ober- und Unterschenkel
- · Förderung der neuromuskulären Gelenk-Propriosensoren
- · flach anliegend und individuell einstellbar
- · Schmerzminderung durch Wechseldruck-

ANWENDUNGSHINWEISE

34 - 37

- · Flexion und Extension des Kniegelenks können unabhängig voneinander limitiert werden (Flexion: 30°, 60°, 90°) (Extension: 20°)
- · die anatomisch geformten Gelenkschienen sind

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: beige, schwarz, titan Ausführungen: rechts, links

optional:

Maßanfertigung (titan): mit Haftband

bei Maßanfertigung zusätzliche Hilfsmittelnummer: 23.99.99.0001

thermoplastisch anformbar und können an die
individuelle Anatomie angepasst werden

GRÖSSE	1	2	3	4	5	6	7
Umfang oben (cm)	38-41	41 – 44	44-47	47-50	50-53	53-56	56-59

31 - 34

ARTIKEL-NR.

110 4135 00*0 +0°

* = Farbe (1) beige, (7) schwarz, (8) titan

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links

° = Größe (1 – 7)

Umfang unten (cm)



37-40

40-43

43-46



GenuPoint®

Gezielte Entlastung und Führung der Patellasehne

Hilfsmittelnummer

05.04.01.1023





Pelotte mit Friktionsnoppen

INDIKATIONEN VORTEILE

 Reizzustände im Bereich der Patellasehne (Femoropatellares Schmerzsyndrom, Chondropathia patellae, Patellaspitzensyndrom / Jumper's Knee)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- Führung und Entlastung der Patellasehne durch punktgenaue Kompression
- die viskoelastische Pelotte mit speziellen Druckpunkten massiert typische Schmerzareale, lindert Beschwerden und verbessert die Koordination
- dynamische Druckanpassung und bedarfsgerechte Kompression durch individuell einstellbaren Gurt
- maximale Bewegungsfreiheit dank anatomischer Form

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: schwarz, titan

Ausführungen: gleiche Ausführung für rechts und links

IN STUDIE[∆] BELEGT

 weniger Schmerzen und verbesserte Propriozeption

GRÖSSE	1	2	3	ARTIKEL-NR.
Umfang (cm)	28 – 30	30-35	35-44	120 4240 00*0 00°

^{* =} Farbe (7) schwarz, (8) titan

° = Größe (1 – 3)



A Strid J. de Vries; Inge van den Akker-Scheek; Svenja L. Haak; Ron L. Diercks; Henk van der Worp; Johannes Zwerver Effect of a patellar strap on the joint position sense of the symptomatic knee in athletes with patellar tendinopathy Journal of Science and Medicine in Sport; 20, 11, S. 986 – 991, 2017

SofTec® Genu

Aktive und passive Stabilisierung des Kniegelenks - ideal für die Langzeit-Therapie

namentliche Verordnung mit Kostenvoranschlag









stabiler, zirkulärer Kraftschluss nach dem Vier-Punkt-Prinzip



limitierbaren Gelenken



Korrekturzügel

INDIKATIONEN

- · Ruptur des vorderen und / oder hinteren Kreuzbandes (ACL/PCL) zur konservativen Therapie, präund zeitversetzten postoperativen Versorgung, Langzeit-Rehabilitation und bei chronischer Insuffizienz
- · schwere und / oder komplexe Instabilitäten (traumatisch, degenerativ; z.B. »Unhappy Triad«)
- · Seitenbandverletzungen
- · funktionelle Instabilitäten. z.B. Defizite der neuromuskulären Steuerung, Non-Coper
- · zur Begrenzung des Bewegungsumfangs (z. B. nach Meniskusrefixation oder Meniskusimplantation)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- Stabilisierung des Kniegelenks nach dem Vier-Punkt-Prinzip durch zugfesten, unelastischen Gestrickanteil, seitliche Gelenkschienen und Klettgurte
- · Vermeidung schädigender Zwangskräfte auf das Kniegelenk durch die dreidimensionale Einstellung der Orthesengelenke auf die individuelle Kompromissdrehachse
- · Selbstfindung der individuellen Kompromissdrehachse
- · korrekte Positionierung der SofTec Genu am Bein mittels Patella-Aussparung in der
- · wirkt dem Abdriften der Patella entgegen über einen in der Pelotte integrierten Korrekturzügel
- · dauerhaft sicherer Sitz dank anatomisch geformter Klettzuggurte

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Komfortzone
- + werkzeugfreie Anpassung
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: schwarz, titan

Ausführungen: rechts, links

optional:

Gelenkschutz (Sportschutz) zum sicheren Tragen auf dem

Spielfeld

Ersatzteile / Zusätze: siehe Seite 116 und Preisliste

IN STUDIENA BELEGT

muskuläre Stabilisierung des Kniegelenks

ANWENDUNGSHINWEISE

· die Gelenke sind für Extension und Flexion

· mechanische und neuro-

in 10°-Abständen limitierbar

GRÖSSE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Umfang oben (cm)	38-42	41 – 45	44-49	48-53	51-57	54-60	320
Umfang Mitte (cm)	29-32	32-35	35-38	38-41	41 - 44	44-47	122 4600 10*0 +0°
Umfang unten (cm)	28-32	31-35	34-38	36-40	39-43	42-46	

^{* =} Farbe (7) schwarz, (8) titan

Gelenkschutz für Kontaktsportarten

A Strutzenberger, G., et al., Effect of Brace Design on Patients with ACL-Ruptures; Int. J. Sports Med. 2012; 33: 934–939 Focke A., Steingrebe H., Möhler F., Ringhof S., Sell S., Potthast W. and Stein T. (2020) Effect of Different Knee Braces in ACL-Deficient Patients Front. Bioeng. Biotechnol. 8:964. doi: 10.3389/fbioe.2020.00964



129 4601 1070 000




^{+ =} Ausführung (6) rechts, (7) links

SecuTec® Genu

Stabilisierung mit Limitierung des Bewegungsumfangs bei komplexen Knieverletzungen

Hilfsmittelnummer

23.04.03.3011

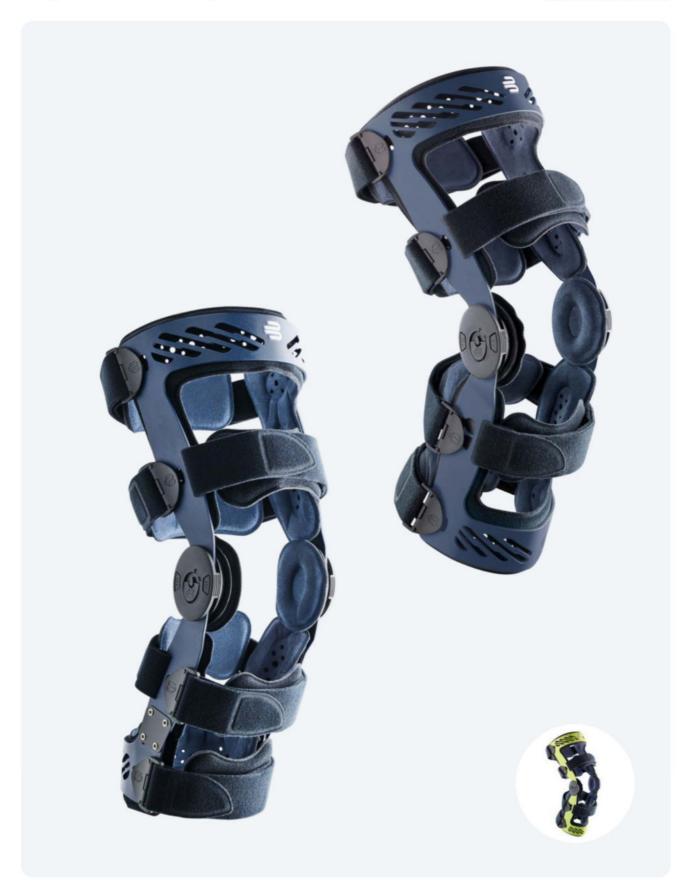





Wadengurtverstellung



Ober-/Unterschenkelrahmen sind in verschiedenen Größen kombinierbar



Z-Schiene mit weichen Schienbeingurten

adaptive Wadenschelle

INDIKATIONEN

- Ruptur des vorderen und / oder hinteren Kreuzbandes (ACL / PCL)
- nach Bandoperationen / Bandplastiken
- schwere und / oder komplexe Instabilitäten (traumatisch, degenerativ, z. B. »Unhappy Triad«)
- · Seitenbandverletzungen
- zur Begrenzung des Bewegungsumfangs des Kniegelenks (z.B. nach Meniskusrefixation oder Meniskusimplantation)
- Patellafraktur (konservativ und postoperativ)

IN STUDIE^A BELEGT

 besonders positionsstabil in der Bewegung

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- umfassende Stabilisierung sowohl einer ACL-, PCL- oder komplexen Bandverletzung bieten sechs Gurte in Kombination mit dem Hartrahmen nach dem Vier-Punkt-Prinzip
- Gelenk werkzeuglos limitieren und ruhigstellen, Winkel von außen ablesbar
- · anatomisch korrekter und sicherer Sitz
- extrem leicht, schlank und stabil dank spezialveredelter Leichtmetall-Legierung des Rahmens

VERSION FRONTAL:

- kann vom Patienten leicht frontal aufgelegt und fixiert werden, somit verringert sie den Stress auf das verletzte Knie
- hohe Rotationsstabilität mittels anatomisch geformter Rahmenkonstruktion, inkl. Tibiakantenform

VERSION DORSAL:

 die adaptive Wadenschelle mit selbstregulierendem Neigungswinkel passt sich der Kontur des Wadenmuskels für höchsten Tragekomfort und sicheren Sitz an

ANWENDUNGSHINWEISE

Flexion und Extension werden unabhängig voneinander limitiert:

• Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°,

60°, 75°, 90°

Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

 Ruhigstellung kann in 0°, 10°, 20°, 30°, 45° realisiert werden

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + werkzeugfreie Anpassung
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: blau, grün (nur frontal)

Ausführungen: frontal oder dorsal, rechts oder links

Kombination von Ober- und Unterschenkelteil in zwei unterschiedlichen Größen möglich (max. Differenz: zwei Größen) Lieferung als Bausatz

Ersatzteile:

siehe Seite 116 und Preisliste

GRÖSSE	1	2	3	4	5	6	7	ARTIKEL-NR.	FRONTAL	DORSAL
Umfang oben (cm)	38-42	41-45	44-49	48-53	51-57	54-60	60-72	Kauforthese	121 4610 1**0 +0°	121 4655 1050 +0°
Umfang unten (cm)	28-32	31-35	34-38	36-40	39-43	42-46	46-51	Rückführorthese	121 4614 0**0 +0°	121 4656 1050 +0°
KOMBINATIONEN								teilmontiert	121 4619 0**0 +0°	121 4657 1050 +0°
proximale Rahmengröße	1	2	3	4	5	6	7	Bauset	121 4647 0**0 +^>	121 4658 1050 +^>
distale Rahmengröße	1_3	1-4	1_5	2-6	3_7	4-7	5-7			

^{* =} Farbe (05) blau, (23) grün

^{+ =} Ausführung (6) rechts, (7) links ° = Größe (1-7)

^{^ =} proximale Rahmengröße


> = distale Rahmengröße

SecuTec® Genu Flex

Stabilisierung und Limitierung des Bewegungsumfangs bei komplexen Knieverletzungen

Hilfsmittelnummer

23.04.03.3084

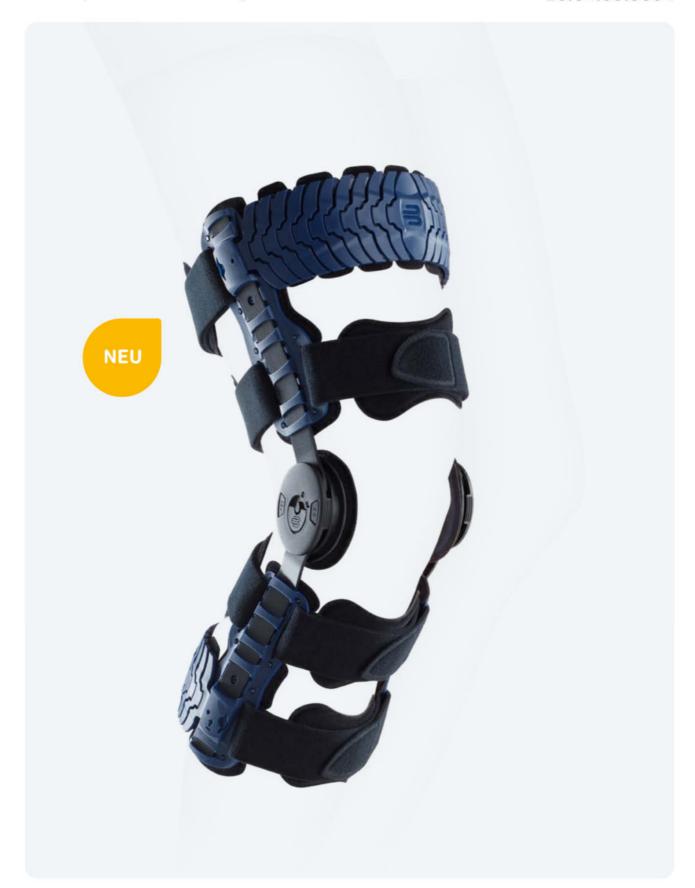









Bewegung an die Beinanatomie an



verkzeuglos limitierbare Extension und Flexion



flach ausgepolstert

INDIKATIONEN

- · Ruptur des vorderen und / oder hinteren Kreuzbandes (ACL/PCL)
- nach Bandoperationen / Bandplastiken
- · schwere und / oder komplexe Instabilitäten (traumatisch, degenerativ, z.B. »Unhappy Triad«)
- Seitenbandverletzungen
- · zur Begrenzung des Bewegungsumfangs des Kniegelenks (z.B. nach Meniskusrefixation oder Meniskusimplantation)
- · zur konservativen Therapie oder Langzeit-Rehabilitation
- · funktionelle Instabilitäten

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · zuverlässige Stabilisierung nach dem Vier-Punkt-Prinzip durch Kombination von teilflexibler Rahmenkonstruktion mit unelastischen Gurten
- · positionssicherer Sitz und hoher Tragekomfort dank teilflexiblem Rahmen, der sich in der Bewegung an die Anatomie des Beines anpasst
- · adaptive Passform auch während des Therapieverlaufs durch ein- und ausklickbare Kettenglieder am Ober- und Unterschenkel
- · optimale Größeneinstellung dank verlängerbarer Gelenkschenkel
- · bewährte Gelenkkonstruktion für werkzeugloses Limitieren oder Ruhigstellen
- · unauffälliger und sicherer Schutz im aktiven Alltag durch leichte, flach anliegende Konstruktion mit weichen Mikrofaserpolstern

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + mehrstufige Therapie
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farbe: blau

Ausführungen:

rechts oder links

Ersatzteile:

siehe Seite 116 und Preisliste

ANWENDUNGSHINWEISE

Flexion und Extension werden unabhängig voneinander limitiert:

- Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- Ruhigstellung kann in 0°, 10°, 20°, 30°, 45° realisiert werden

GRÖSSE	1	2	3	4	5	ARTIKEL-NR.
Umfang oben (cm)	37-45	45-53	53-61	61 – 69	69-81	Kauforthese

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links

GRÖSSE	1	2	3	4	5	ARTIKEL-NR.	
Umfang oben (cm)	37-45	45-53	53-61	61 – 69	69-81	Kauforthese	121 4678 1050 +0°
Umfang unten (cm)	28-36	32-40	36-44	40-48	44-52	Rückführorthese	121 4677 1050 +0°



GenuTrain® OA

Gezielte Entlastung und Stabilisierung für mehr Aktivität bei Gonarthrose

Hilfsmittelnummer

23.04.04.1021









Boa® Fit System



3D-Netzgestrick





große An- und Ausziehhilfen

INDIKATIONEN

- · mediale oder laterale Gonarthrose
- · Instabilität (mediolateral)
- · Knorpelknochenläsion unikompartimentell
- · Zustand nach Knorpelchirurgie bzw. Knorpelaufbau bei notwendiger einseitiger postoperativer Entlastung
- · nach einseitigen Meniskus-
- · Osteochondrosis dissecans (postoperativ)
- · Bone Bruise (Knochenödem des medialen Femur condylus / Tibiaplateau)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · spürbare Entlastung der schmerzhaften Knieseite durch das innovative Entlastungs- und Stabilisierungssystem mit seinen umlaufenden Bändern nach dem Drei-Punkt-Prinzip
- · einfaches Dosieren der Entlastung über den Drehverschluss des Boa® Fit Systems - ohne weitere Betätigung von Klettverschlüssen
- · mehr Aktivität dank leichtem Gewicht und sicherer Positionierung am Bein
- · flexible Gelenkschiene, Doppel-8-Gurt und 3D-Netzgestrick adressieren die Sensomotorik und fördern natürliche Bewegungsabläufe
- · angenehmes Tragen auch über längeren Zeitraum durch das atmungsaktive 3D-Netzgestrick und die druckfreie Beugezone in der Kniekehle
- · einfaches An- und Ablegen ermöglichen zwei leicht zu fassende Schlaufen am jeweils oberen und unteren Rand der Orthese

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + werkzeugfreie Anpassung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: schwarz-blau

Ausführungen:

- rechts medial / links lateral: für mediale Entlastung am rechten Bein; oder für laterale Entlastung am linken Bein
- · links medial / rechts lateral: für mediale Entlastung am linken Bein; oder für laterale Entlastung am rechten Bein

optional:

Limitierungs-Set in drei Größen siehe Seite 116 und Preisliste

IN STUDIENA BELEGT

- · reduziert spürbar Schmerzen und erhöht die schmerzfreie Gehstrecke
- steigert die Gelenkstabilität
- · intensiviert körperliche Aktivität
- erhöht die Mobilität · verbessert die Lebensqualität

ANWENDUNGSHINWEISE

- · werkzeugfreie Anformung der Gelenkschiene für die individuelle Anpassung an das Patientenbein
- · einfache Handhabung des Boa® Fit Systems:
 - Drehverschluss öffnen, um die Bänder zu entspannen und die Orthese an- und abzulegen
 - Drehverschluss schließen und drehen zur Regulierung der Schmerzentlastung

- + = Ausführung (6) rechts medial/links lateral, (7) links medial/rechts lateral ° = Größe (1 5)
- Stetter, B.J.; et al.; Osteoarthritis. J. Clin. Med. 2024, 13, 1535, https://doi.org/10.3390/jcm13061535



GRÖSSE ARTIKEL-NR. Umfang oben (cm) 40 - 4747-52 52-58 57-65 60 - 72121 4165 0070 +09 28 - 34Umfang unten (cm) 34 - 3939 - 4343-46 46 - 50

SecuTec® OA

Entlastung und Stabilisierung bei Gonarthrose mit Beinachsenfehlstellung

Hilfsmittelnummer

23.04.04.2010





eine Orthese für beide Entlastungsrichtungen, keine Verengung der Kniebreite



anpassbare Wadenschelle



Gelpolster mit Einschubkeilen



Kombination von unterschiedlicher Größen für ideale Passform



leichtes An- und Ablegen durch Schnellverschlüsse

INDIKATIONEN

- mediale oder laterale Gonarthrose / Arthritis (mittel bis schwer)
- Zustand nach Knorpeltransplantation
- · nach Meniskusrefixation
- Ruptur vorderes / hinteres Kreuzband (ACL / PCL) mit Beinachsenfehlstellung

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- Korrektur und Entlastung nach dem Drei-Punkt-Prinzip (varus und valgus)
- Stabilisierung nach dem Vier-Punkt-Prinzip (Schublade; anterior/posterior)
- ideale Passform und Kraftübertragung durch anpassbare Wadenschelle und verstellbaren Unterschenkelrahmen
- hoher Tragekomfort dank leichtem Aluminiumrahmen
- leichtes An- und Ablegen durch Schnellverschlüsse
- für exakte Anpassung sorgen die anatomisch geformten Kondylengelpolster mit Einschubkeilen

ANWENDUNGSHINWEISE

- individuelle Anpassung am distalen Rahmen zur Varus- oder Valguseinstellung (jeweils 25°) mit 3 mm Inbusschlüssel
- Flexion und Extension werden unabhängig voneinander limitiert (Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°) (Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°)
- bewegungseinschränkend bis fixierend durch Gelenklimitierungen (separat bestellbar)

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: blau

Ausführungen: rechts, links

optional:

Limitierungs-Set

Kombination von Ober- und Unterschenkelteil in zwei unterschiedlichen Größen möglich (max. Differenz: zwei Größen) Lieferung als Bausatz

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 117 und Preisliste

GRÖSSE	1	2	3	4	5	6	7	ARTIKEL-NR.
Umfang oben (cm)	38-42	41 – 45	44-49	48-53	51 – 57	54-60	60-72	121 4690 0050
Umfang unten (cm)	28-32	31-35	34-38	36-40	39-43	42-46	46-51	121 4691 0050
KOMBINATIONEN								121 4692 0050
proximale Rahmengröße	1	2	3	4	5	6	7	
distale Rahmengröße	1-3	1-4	1-5	2-6	3-7	4-7	5-7	

^{+ =} Ausführung (6) rechts, (7) links

° = Größe (1 – 7)

= proximale Rahmengröße = distale Rahmengröße





MOS-Genu

Korrektur und Stabilisierung nach komplexen Knieverletzungen oder bei Umstellungsosteotomie

Hilfsmittelnummer

23.04.03.3012 short 23.04.04.2006 long









ung in Varus- und Valgusrichtung



bis 12° möglich

INDIKATIONEN

Konservativ:

- · Kreuz- und Seitenbandverletzungen
- · komplexe Instabilitäten
- · Entlastung des jeweiligen Gelenkteiles bei O- und X-Bein-Gelenkverschleiß

nach OP MOS-Genu kurz:

- · Bandoperationen / Bandrekonstruktionen
- · Meniskusnaht- und Meniskusersatz-Operationen (Meniskusimplantation)

nach OP MOS-Genu lang:

- · nach Achskorrektur am Schienbein (tibiale Umstellungsosteotomie)
- · nach komplexen Bandrekonstruktionen
- · in Einzelfällen für gelenknahe Knochenbrüche (Frakturen)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- die Varus-/Valgus-Einstellung wirkt im Drei-Punkt-Prinzip und entlastet das entsprechende Knie-Kompartiment bzw. Kollateralband und korrigiert die Beinachsenstel-
- · die Knieorthese basiert auf dem bekannten Vier-Punkt-Prinzip und wirkt so einer vorderen Schublade entgegen
- · die Rahmenkonstruktion stabilisiert das Kniegelenk gegen varisierende bzw. valgisierende Kräfte, als Langversion mit längerem Hebel
- · sehr gute Kraftübertragung und sicherer Sitz dank großer Auflagefläche der Gurte
- monozentrisches Gelenk mit physiologisch optimiertem Gelenkdrehpunkt reduziert mögliche Zwangskräfte der Orthese auf das Kniegelenk auf ein Minimum

105-115

ANWENDUNGSHINWEISE

- · Varus-/Valguseinstellung bis 12° möglich.
- die monozentrischen Gelenke sind in 10°-Schritten für Flexion und Extension limitierbar
- Größenbestimmung der MOS-Genu-Knieorthese: das Bein des Patienten im 30°-Beugungswinkel lagern und die Bestimmung des Beugungswinkels mit dem MOS-Genu-Goniometer überprüfen. Das Ausmessen der M-L-Kniebreite erfolgt in Höhe der Femurkondylen mit dem MOS-Genu-Orthometer (ohne Druck). Die Größe der Orthese wird im Sichtfenster abgelesen. Bei geteilter Größenanzeige muss der Zustand der Schwellung oder einer Atrophie sowie die Breite des anderen Kniegelenks berücksichtigt werden.

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: blau

ARTIKEL-NR.

121 4660 405# +09

Ausführungen: short, long, rechts, links

optional: Poplitealgurt wirkt einer

Hyperextension entgegen Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 117 und Preisliste

IN STUDIE^A BELEGT

- 30 % weniger Belastung auf der medialen Seite

Max. Kniebreite (mm)

= Ausführung (1) short, (2) long + = Ausführung (6) rechts, (7) links

° = Größe (1-5)

GRÖSSE

Kutzner et al., The effect of valgus braces on medial compartment load of the knee j in vivo load measurements in three subjects, Journal of Biomechanics 44, 1354-1360, 2011

125-135

115-125





85 - 95

95-105

GenuLoc®

Ruhigstellung des Kniegelenks - gestreckt oder in einem voreingestellten Beugewinkel

Hilfsmittelnummer

23.04.01.0014



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












Kniekehlenpolster

INDIKATIONEN

- · präoperative, postoperative, posttraumatische Ruhigstellung
- · konservative Behandlung von Patellafrakturen

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · Kniebeugewinkel anpassbar über dorsale Aluminiumschienen
- · geringere Ödembildung dank herausnehmbarem Kniekehlenpolster
- · seitliche, stabilisierende Kunststoffstäbe passen sich an dem eingestellten Kniebeugewinkel automatisch an und gewährleisten eine gute Passform

ANWENDUNGSHINWEISE

- · die Aluminiumschienen sind auf 20°-Kniewinkel vorgeformt
- · Universalgröße, eine Ausführung für rechtes und linkes Knie

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv

BESTELLOPTIONEN

Farben: schwarz Größe: Universal

GRÖSSE	ARTIKEL-NR.
In einer Universalgröße erhältlich	120 4320 0070 000

CoxaTrain®

Stabilisierung und Schmerzreduktion im Hüftgelenk für mehr Aktivität bei Coxarthrose

Hilfsmittelnummer

23.05.01.0006









Gluteal Pad - massiert Triggerpunkte



Trochanter Pad - massiert in der Bewegung



montier- und anformbai



verstellbare Gelenkschiene

INDIKATIONEN

- Coxarthrose (Kellgren-Lawrence-Score 2-4)
- · muskuläre Dysbalance Lenden-Becken-Hüft-Region
- · muskuläre Probleme nach Gelenkoperationen der Hüfte
- Impingement des Hüftgelenks
- · Instabilität des Hüftgelenks (nach T.E.P., nach Revisionseingriff)
- · Instabilitätsgefühl in der Hüfte
- · Lockerung der Hüftprothese, wenn OP nicht möglich
- · chronische Reizzustände (z.B. Bursitis i.V.m. Arthrose)
- · chronische Tendinopathie i. V. m. Arthrose

IN STUDIE^A BELEGT

- reduziert Nachtschmerzen
- · reduziert Schmerzen beim Gehen
- · erhöht die Mobilität

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · schmerzlindernder Ausgleich muskulärer Dysbalancen in der Lenden-Becken-Hüft-Region (LBH) bei Bewegung mit positivem Einfluss auf das Gangbild:
 - durch Stabilisierung des Beckens und Entlastung der Iliosakralgelenke (ISG)
 - durch Massageeffekt der dorsalen ISG-Friktionspelotten auf die lokalen Bandstrukturen und die anliegende Muskulatur
 - durch Friktionsmassage des Trochanter Pads, das sich beim Gehen zyklisch auf und
 - durch Triggerpunkt-Massage des Gluteal Pads
- · stabilisierende Führung durch die laterale Gelenkschiene
- · hohe Patienten-Compliance
- · einfaches Anlegen ohne viel Kraftaufwand durch umgelenkte Zuggurte und praktische Fingertaschen/-schlaufen

ANWENDUNGSHINWEISE

Gezielte Anpassung durch

- · werkzeugfreies Schränken der Gelenkschiene an die jeweilige Anatomie
- höhenverstellbare Oberschenkelbandage über die Gelenkschiene
- · individuell einstellbare Zuggurte der Beckenbandage zur Stabilisierung

- · dreistufige Einschränkung der Hüftbewegung in Flexion und Extension durch optionale Gelenklimitierungsstifte (60°, 75°, 90°)
- · beidseitige Versorgung möglich (Bestellung weiteres Gelenk, Beinteil und Gluteal Pad für die noch zu versorgende Seite notwendig)

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + werkzeugfreie Anpassung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Ausführungen:

Gelenk short < 170 cm Körpergröße Gelenk long > 170 cm Körpergröße

optional:

Limitierungsstifte

Hinweis:

· in Einzelfällen kann es sein, dass statt einer gemessenen Größe »short« eine »long« Gelenkschiene besser passt oder umgekehrt

Ersatzteile:

siehe Seite 117 und Preisliste

BECKEN-	GRÖSSE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
BANDAGE	Umfang Becken (cm)	85 - 95	95-105	105-115	115-125	125-135	135-145	122 2581 2080 00°
	° = Größe (1 – 6)							
OBER-	GRÖSSE	1	2	3				ARTIKEL-NR.
SCHENKEL- BANDAGE	Umfang Oberschenkelmitte (cm)	43-53	53-63	63-73				122 2582 1080 +0°
BANDAGE	+ = Ausführung (6) rechts, (7) links ° = Größe (1 – 3)							
GELENK	GRÖSSE	SHORT	LONG					ARTIKEL-NR.
	Körpergröße (cm)	< 170 cm	> 170 cm					122 2584 100# 000
	# = Ausführung (1) short, (2) long					in T.; Effects of		Gait Biomechanics,

experts.bauerfeind.com/coxatrain

Front. Bioeng. Biotechnol. (2022) 10:888775. doi: 10.3389/fbioe.2022.888775



SofTec® Coxa

Erhöhte Stabilisierung und Führung des Hüftgelenks

Hilfsmittelnummer

23.05.01.1003



monozentrisches Gelenk für Abduktion / Adduktion und Flexion / Extension



dreiteilige Beckenfassung aus Kunststoff



höhenverstellbares Gelenk



Gelenkschutz



beidseitige Versorgung

INDIKATIONEN

- · Luxation
- · totalendoprothetischer Eingriff
- totalendoprotethischer Revisionseingriff
- Hüftkopfresektion (Girdlestone-Situation)
- Hüftspacer bei zweizeitiger Wechseloperation
- Coxarthrose (mittelschwerer bis schwerer Grad)
- Instabilitäten

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- Orthese fixiert den Gelenkkopf sicher in der Gelenkpfanne durch die Kombination aus
 - der sicheren Positionierung der Beckenfassung auf den Beckenkämmen
 - der individuellen Anpassung der seitlichen Oberschenkelfassung
 - der indikationsgerechten Adaption des Orthesengelenks
- lässt die Versorgung in der individuell erforderlichen Adduktions- oder Abduktionsstellung zu und begrenzt Extension und Flexion dank des mehrdimensionalen, monozentrischen Gelenks
- sicheres Operationsergebnis durch die Limitierung vorgegebener Bewegungen
- einfache und korrekte Positionierung der Orthese durch im Gestrick integrierte, anatomisch vorgeformte Beckenfassung
- individuell zuschneidbare Gestrickteile und Zuggurte an Becken- und Beinfassung
- optimale Führung des Hüftgelenks und anatomisch korrekter Sitz dank monozentrischem Orthesengelenk

ANWENDUNGSHINWEISE

- individuell und parallel zum H
 üftdrehpunkt einstellbar
- das Gelenk ist für Extension und Flexion in 10°-Abständen zwischen -10° und +90° limitierbar

- Adduktion und Abduktion sind stufenlos zwischen -6° und +6° einstellbar
- das Gelenk ist in ungekröpfter und gekröpfter Version erhältlich und kann sowohl für die Versorgung des rechten als auch des linken Hüftgelenks verwendet werden
- beidseitige Versorgung möglich (Bestellung Erweiterungsset notwendig)
- die Anpassung der Orthese ist direkt am Krankenbett auch am liegenden Patienten möglich

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: Gelenk gekröpft / Ge

Gelenk gekröpft / Gelenk ungekröpft, gleiche Ausführung für rechts und links

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 118 und Preisliste

 GRÖSSE
 1
 2
 3
 ARTIKEL-NR.

 Umfang Leib (cm)
 75-95
 95-115
 115-135
 122 252# 0080 00°

MyoTrain[®]

Einstellbare Kompression zur Behandlung von Muskelverletzungen des Oberschenkels

Hilfsmittelnummer

KEINE

Keine Erstattung durch die Krankenkasse, außer mit Einzelfallgenehmigung.







INDIKATIONEN

- · Muskelverhärtung
- Muskelzerrung
- Muskelprellung (sogenannter Pferdekuss)
- Muskelfaserriss
- · Muskelfaserbündelriss, bspw. der rückseitigen Oberschenkelmuskulatur (Hamstrings)
- · Verletzung der Fascia lata
- · posttraumatische, postoperative Reizzustände
- · Prävention/Rezidivprophylaxe

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · wirkt nach den Prinzipien eines Muskelaufhängeverbandes mit Kompression auf die verletzte Stelle
- · Einstellung der Kompression durch Klettgurtsystem und zwei frei einsetzbare Pelotten
- · gezielte Wirkung mittels Akutpelotte unmittelbar nach der Verletzung, um Blutungen zu hemmen und Hämatome einzugrenzen
- · flächige Kompression dank großer Funktionspelotte minimiert Schwellungen und mindert Beschwerden
- · Höchstmaß an Tragekomfort und Positionssicherheit dank anatomischem Formgestrick, silikonisiertem Haftrand und druckreduziertem Randbereich
- · reguliert den Muskeltonus und beugt Rezidivverletzungen vor

DAS BAUERFEIND-PLUS

+ einfache Handhabung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: gleiche Ausführung für rechts und links

GRÖSSE							
Umfang oben	(c						

44-48 32 - 35Umfang unten (cm)

48-52 35 - 38

52-56 38-41

56-60 41-44

60-64 44-47


64-68 47-50

ARTIKEL-NR. 68-72

50-53

110 3250 0080 00°



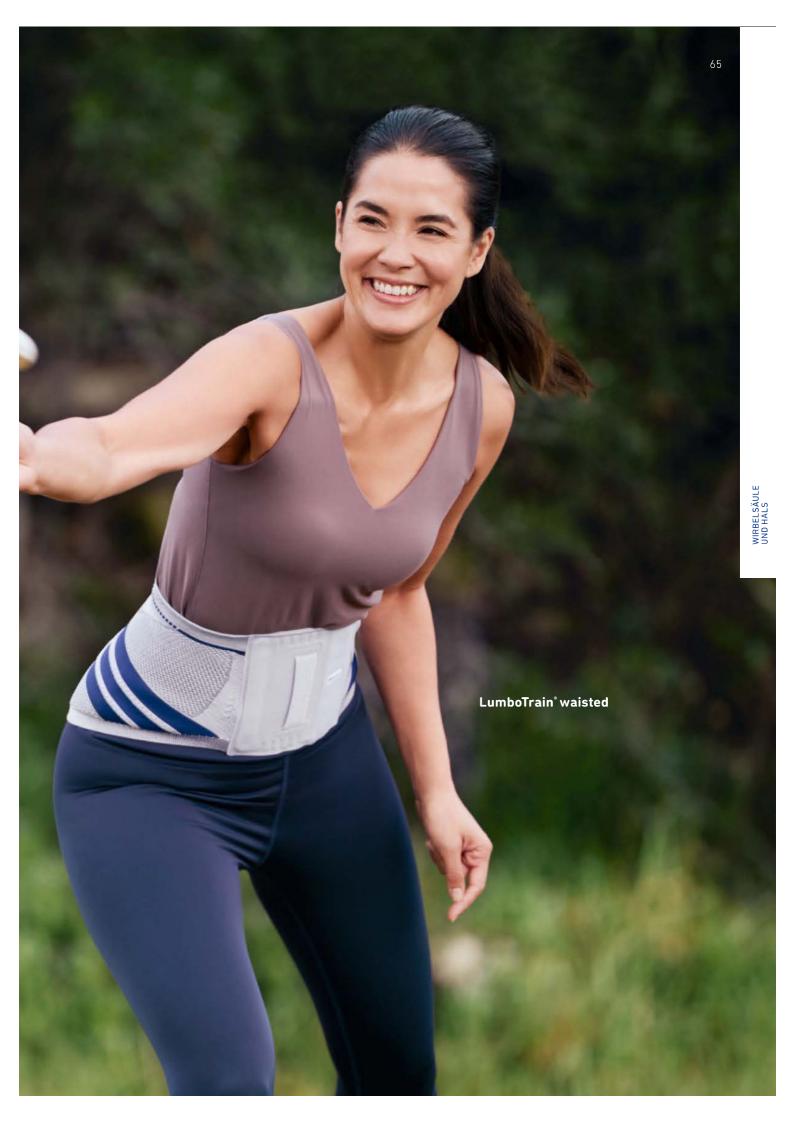

INDIKATIONSTABELLE WIRBELSÄULE UND HALS

PRODUKT	st	umboTrain* traight / aisted	SacroLoc*	LordoLoc*	LumboLoc*	LumboLoc* Forte	Spinova* Mum	Spinova* Stabi Classic	Spinova* Support Plus
				-	TIME	Am		(3)	
PRODUKTMERKMAL	En Sta dei	itivierung, itlastung und abilisierung r Lenden- rbelsäule	Stabilisierung des Beckens und gezielte Entlastung der Iliosakral- gelenke	Stabilisierung und Entlastung der Lenden- wirbelsäule mit Zuggurten	Anatomisch (körpergerecht) formgestrickte Lendenwirbel- säulen-Orthese mit muskelakti- vierender und ent- lastender Wirkung	Verstärkte Stabi- lisierung und Entlastung der Lendenwirbel- säule mit variab- tem Gurtsystem	zur Entlastung der LWS und Stabilisierung von ISG während und nach der Schwangerschaft (Rückbildung)	Moderate Stabilisierung der Lenden- wirbelsäule durch Korsettstäbe	Stabilisierung der Lendenwirbel- säule mit anato- misch geformter Rückenpelotte
FUNKTIONSELEMEN	NT		db	IIII	VIII		db	-	abrüstbar
HILFSMITTELNUMM		23.14.03.2011** 23.14.03.2012***	23.11.01.1002	23.14.03.1007	23.14.03.0012	23.14.02.0006	beantragt für 23.14.02.0	23.14.04.0023	23.14.02.2010
SEITENZAHL		70	72	76	77	78	74	82	83
INDIKATIONEN									
Allgemeine Schmerzzuständ LWS-Bereich (akut und chro		•		•	•		•		
(pseudo-) radikuläres Lumbalsyndrom/Lumbo-	mittel					•	•	•	•
ischialgie mit muskulären Ausfällen bei Bandscheiben- protrusionen / Prolaps	schwer								
Degeneration / muskuläre	leicht	•					•		
Insuffizienz der Wirbel-	mittel			•	•	•			
säule	schwer								•
Zustand nach Prolaps (konse	ervativ)	•						•	•
Zustand nach Diskektomie, Prolaps (post-OP)		•				•	•	•	•
Facettensyndrom / Arthrose	mittel schwer				•	•		•	•
lumbale Deformitäten	Julittu								•
Ligamento-Tendomyopathier	n						-		
	Grad I					•			
Spondylolyse/	Grad II								
Spondylolisthese	Grad III								-
Zustand nach Spondylodese		tie (nost-OP)							
lumbale Spinalkanalstenose (konservativ, postoperativ)									•
Foraminastenosen									
Osteoporose									•
Erkrankung des Iliosakralgel ISG-Syndrom, -Arthrose, -Ins		llockade	•				•		
Beckenringinstabilität, z.B. Symphysensprengung /	-lockerung		•				•		
Myalgien, Tendopathien der I	Beckenregio	on	•						
Gefügestörung nach Spondyle	odese im Üb	ergang L5-S1	•						
Konservative Behandlung na	ach Beckenfi	rakturen	•						
Wirbelkörper- frakturen Entlastung Vo									•
Osteochondrose									
Tumore (Metastasen)									
Wirbelfrakturen (LWS)									
schmerzhafter Rundrücken									
	mittel								
Schmerzzustände im HWS-Bereich	schwer								
*Angaben zur Rezentierung gelte									

^{*}Angaben zur Rezeptierung gelten nur in Deutschland
**LumboTrain straight (gerader Schnitt)
***LumboTrain waisted (taillierter Schnitt)

				ľ			No.		1	
Spinova* Unload Classic	Spinova* Unload Plus	Spinova* Immo Plus	Spinova* Immo	SecuTec* Dorso	SecuTec* Lumbo	SofTec* Lumbo	Spinova* Osteo	SofTec* Dorso	CerviLoc*	CerviLoc*S
(3)		1	4			1			E	
Moderate Entlordosierung und Entlastung der Lenden- wirbelsäule mit abrüstbarem Überbrückungs- rahmen	und verstärkte Entlastung der Lendenwirbel- säule mit abrüstbarem	der Lenden-	Immobili- sierung der Lenden- wirbelsäule	Entlordosierung und Entlastung der Lenden- wirbelsäule durch Über- brückungs- rahmen und Korsettstäbe	Entlordosierung und Entlastung der Lenden- wirbelsäule durch Über- brückungs- rahmen	Immobilisierung der Lenden- wirbelsäule mit Mobilisierungs- funktion durch abrüstbare Schale	Stabilisierung und aktive Aufrichtung der Wirbel- säule mit freiem Brust- und Bauch- bereich	Erhöhte Stabilisierung der Brust- und Lendenwirbel- säule	Stabilisierung (der Halswirbel:	
abrüstbar	abrüstbar	abrüstbar		abrüstb	ar abrüstbar	abrüstbar		Ĭ		
23.14.02.1011	23.14.04.2009	23.14.02.2002	23.14.01.0003	23.14.04.1009	23.14.04.2012	23.14.02.2013	23.15.04.4027	23.15.04.3004	23.12.03.0028	23.12.03.1018
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	93
	•	•		•	•	•				
		_			•		•	_		
		•			•	•		•		
•		•		•	•	•		•		
•										
	•	•		•	•	•				
	•	•		•	•					
•	•	•		•	•					
•	•	•		•	•	•				
		•		•	•					
		•			•					
					_	,				
				•1			•	•		
		2		2.86						
		•		•						
	750	•	7//	<u> </u>	×					
		•								
				•		•	• 7	• 3		
							•	•	•	
									E7	•
								- 12	•	•

BAUERFEIND-RÜCKENTHERAPIE

EXZELLENT VERSORGEN, EXPERTISE ZEIGEN

52%

weniger Schmerzmittel¹ (Dosiseinheit pro Tag im Versuchszeitraum von drei Wochen im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne Bandage)

keiner der Patienten zeigte Hinweise auf Muskelatrophie²

höhere Rückenmuskelaktivität nach drei Wochen Tragezeit² (im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne Bandage)



AKTIVIEREN STABILISIEREN ENTLORDOSIEREN LORDOSIEREN/ **IMMOBILISIEREN STÜTZEN** SacroLoc' 50 Seite 72 LumboTrain* LordoLoc* straight/waisted Seite 76 Seite 70 LumboLoc' LumboLoc*Forte Seite 77 Seite 78 Spinova* Mum Seite 74 LSO Spinova* Unload Classic Spinova* Stabi Classic Spinova' Immo Seite 87 Seite 82 Seite 84 Spinova* Immo Plus Spinova* Support Plus Spinova* Unload Plus Seite 86 Seite 85 Seite 83 SecuTec*Lumbo SecuTec* Dorso SofTec* Lumbo Seite 89 Seite 90 Spinova* Osteo SofTec* Dorso **TLSO** Seite 91 CerviLoc* | CerviLoc* S CO

Valle-Jones J, C, Walsh H, O'Hara J, O'Hara H, Davey N, B, Controlled trial of a back support (LumboTrain) in patients with non-specific low-back pain; Curr. Med. Res. Opin.,(1992), 12, 604
 Anders, C., Hubner, A.: Influence of elastic lumbar support belts on trunk muscle function in patients with nonspecific acute lumbar back pain, PLoSONE 14(1): e0211042. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211042; 2019.




Die schwangere Frau trägt die Rückenorthese Spinova® Mum.

LumboTrain® straight LumboTrain® waisted

Hilfsmittelnummer

straight 23.14.03.2011 waisted 23.14.03.2012

Aktivierung, Entlastung und Stabilisierung der Lendenwirbelsäule

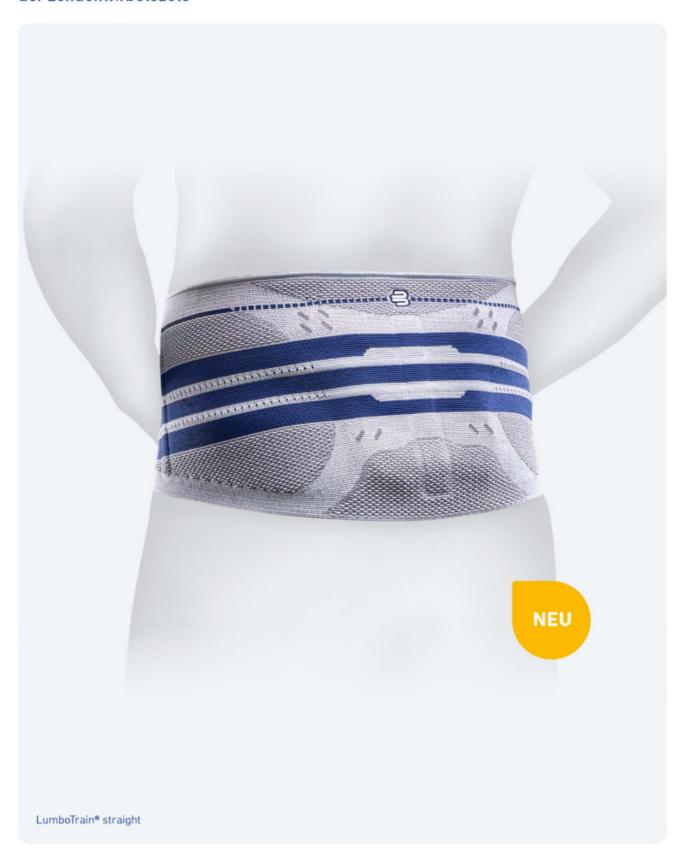







Pelotte individuell positionierbar



praktische Handschlaufen für leichtes An-/Ablegen



perforierter Verschluss und große Zwischenräume im Gestrick für hohe Atmungsaktivität



LumboTrain waisted, tailliert mit hohem Beinauschnitt

INDIKATIONEN

rückfedernden Noppen

- · allgemeine Schmerzzustände im LWS-Bereich (akut und chronisch)
- · degenerative Erkrankung der Lendenwirbelsäule, z. B. Osteochondrose, Spondylarthrose, lumbale Deformitäten, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten
- · Zustand nach Prolaps (konservativ / postoperativ)
- · Zustand nach Diskektomie

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · gezielte Schmerzlinderung während der Bewegung wird ermöglicht durch die Wechseldruckmassage von Gestrick und viskoelastischer Pelotte
- · die lumbale Pelotte wirkt mit flexiblen und rückfedernden Noppen gezielt auf Schmerzpunkte ein
- · leichtes, kraftsparendes Anlegen mittels praktischer Handschlaufen
- · stabilisiert und entlastet lumbal durch die aufrichtende Wirkung der zirkulären Kompression
- · LumboTrain waisted mit taillierter Form und hohem Beinausschnitt

ANWENDUNGSHINWEISE

· Pelotte kann nach Bedarf individuell positioniert werden

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + Komfortzone
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Versionen:

straight (gerader Schnitt) waisted (taillierter Schnitt)

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 118 und Preisliste

IN STUDIE⁴ BELEGT

- · 13 % höhere Rückenmuskelaktivität nach drei Wochen **Tragezeit**
- · bis zu 69 % weniger Schmerzen im Vergleich zur Kontrollgruppe

GRÖSSE	1	2	3	4	5	6	7	ARTIKEL-NR.	
Umfang Leib (cm)	70 _ 90	gn_gn	90_100	100_110	110_120	120_120	120_1/5	110 941# 4090 000	



= Größe (1-7)

Anders, C., Hübner, A. Influence of elastic lumbar support belts on trunk muscle function in patients with nonspecific acute lumbar back pain PLoS ONE 14(1): e0211042, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211042; 2019



SacroLoc®

Stabilisierung des Beckens und gezielte Entlastung der Iliosakralgelenke

Hilfsmittelnummer

23.11.01.1002













ISG-Stabilisierung

dorsale ISG-Pelotten

Zuggurtsystem

elastisches Netzmaterial mit patentierter Gurtführung

individuell einstellbare Zuggurte

INDIKATIONEN

- · Erkrankungen der Iliosakralgelenke (ISG-Syndrom, ISG-Arthrose, ISG-Instabilität)
- · Beckenringinstabilität, z.B. Symphysensprengung und -lockerung
- · Iliosakralgelenk-Blockierung (akut und prophylaktisch)
- · Gefügestörung nach Spondylodesen (im Übergang L5-S1)
- · Myalgien und Tendopathien der Beckenregion
- · konservative Behandlung nach Beckenfrakturen

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · entlastet sofort das Becken und die Iliosakralgelenke durch zirkuläre Kompression mittels individuell einstellbarer Zuggurte
- · gezielte Friktionsmassage und Stabilisierung des ISG-Bereichs durch präzise positionierbare dorsale Pelotten
- · einzigartiger Tragekomfort, auch im Sitzen durch atmungsaktive Netzmaterialien
- · seitliche Umlenkschlaufen für hohe Krafteinleitung bei geringem Kraftaufwand
- · hohe Patientencompliance, da die Orthese unauffällig unter der Kleidung getragen werden kann
- · das rigide Zuggurtsystem stabilisiert zirkulär, die Nutation (Relativbewegung) des Sakrum wird eingeschränkt, die Bänder werden entlastet und Schmerzen gelindert

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ersatzteile / Zusätze: siehe Seite 118 und Preisliste

ANWENDUNGSHINWEISE

- · Eignung und Anwendung der Orthese während der Dauer einer Schwangerschaft ist ärztlich im Einzelfall abzustimmen
- · Pelotten können nach Bedarf individuell positioniert werden

IN STUDIENA BELEGT

- · 32 % Schmerzreduktion
- 58,3% verbesserte aufrechte Haltung durch Patienten empfunden

GRÖSSE ARTIKEL-NR.

Umfang Becken (cm) 70 - 80 80-90 90-100 100-110 110-120 130-140 120 8416 2080 00° 120 - 130



^{° =} Größe (1-7)

^{*} Sichting, F., Bütner, Ch.; Effects of a Pelvic Compression Belt on Balance Control in Patients with chronic Sacroiliac Joint Pain; OrthopädieTechnik; 01,19, 18-21; 2019 Hammer et al. Pelvic Belt Effects on Health Outcomes and Functional Parameters of Patients with Sacroiliac Joint Pain, PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0136375 August 25, 2015.

Spinova® Mum

Entlastung der Lendenwirbelsäule und Stabilisierung der Iliosakralgelenke während und nach der Schwangerschaft (Rückbildung)

Hilfsmittelnummer

beantragt für 23.14.02.0









Anheben des Bauches und Entlordosierung der Wirbelsäule



Stabilisierung des Beckens



mitwachsender Bauchverschluss



dorsale ISG-Pelotten

INDIKATIONEN

Lendenwirbelsäulen-Indikationen:

- Schmerzzustände und Instabilitäten im Becken-/ Lendenwirbelsäulen-Bereich
- · Lumbalgien
- radikuläres, pseudo-radikuläres Lumbalsyndrom
- akute oder chronische Lumboischialgie
- mittelgradige lumbale Deformität (Hyperlordose, Spondylolisthese, Skoliose)
- Zustand nach BS-OP mit kleinem bis mittelgroßem Prolaps
- Entzündungen
- · Degeneration

Andere Indikationen:

- · Symphysenlockerung
- Symphysensprengung
- Erkrankungen der Iliosakralgelenke (ISG-Syndrom, ISG-Arthrose, ISG-Instabilität)
- ISG-Blockierung (akut und prophylaktisch)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- entlastet die Lenden-Becken-Hüftregion während und nach der Schwangerschaft
- dorsal unterstützen Korsettstäbe die Lendenwirbelsäule und Pelotten wirken entspannend auf die Iliosakralgelenke (ISG)
- einzigartiges Gurtsystem hebt den Bauch leicht an und stabilisiert das Becken
- besonders weicher Bauchverschluss passt sich an wachsenden Umfang an
- hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht und atmungsaktives Netzmaterial
- Stabilisierung der Iliosakralgelenke und Symphyse durch zirkuläre Kompression mittels individuell einstellbarer Zuggurte

ANWENDUNGSHINWEISE

- Pelotten können nach Bedarf individuell positioniert oder entfernt werden
- durch seitliches Ziehen der Zuggurte wird der obere Gurt zur Bauchanhebung und Entlordosierung angesteuert
- durch frontales Ziehen der Zuggurte wird der untere Gurt zur Beckenkompression und Stabilisierung der Iliosakralgelenke und Symphyse eingestellt

DAS BAUERFEIND PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farbe: titan

GRÖSSE	1	2	3	4	ARTIKEL-NR.
Umfang Becken (cm)	80-90	90-100	100-115	115-130	122 8579 1000 00°



LordoLoc®

Stabilisierung und Entlastung der Lendenwirbelsäule mit Zuggurten

Hilfsmittelnummer

23.14.03.1007









dorsal integrierte Korsettstäbe



elastische Zuggurte für individue einstellbare Kompression



Verschlussverlängerung (Zubehör)

INDIKATIONEN

- allgemeine Schmerzzustände im LWS-Bereich (akut und chronisch)
- mittelstarke Degeneration / muskuläre Insuffizienz

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- richtet die Lendenwirbelsäule durch eingearbeitete Korsettstäbe auf
- verstärkte Stabilisierung durch individuell einstellbare Zuggurte
- trägt nicht auf dank leichter und flacher Konstruktion
- aktiviert die Bauch- und Rückenmuskulatur dank komprimierendem und elastischem Material

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ersatzteile / Zusätze: siehe Seite 118 und Preisliste

GRÖSSE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Umfang Leib (cm)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	121 8500 0080 00°



LumboLoc®

anatomisch (körpergerecht) formgestrickte Lendenwirbelsäulen-Orthese mit muskelaktivierender und entlastender Wirkung

Hilfsmittelnummer

23.14.03.0012









dorsal eingearbeitete Korsettstäbe

INDIKATIONEN

- · allgemeine Schmerzzustände im LWS-Bereich (akut und chronisch)
- mittelstarke Degeneration / muskuläre Insuffizienz
- Facettensyndrom

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · richtet die Lendenwirbelsäule durch eingearbeitete Korsettstäbe auf
- · stabilisiert und entlastet lumbal dank komprimierendem Train-Gestrick
- · leichtes Anlegen mittels praktischer Handschlaufen
- passgenauer Sitz durch elastisches Material und anformbare Korsettstäbe

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + Train-Gestrick
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

IN STUDIE[∆] BELEGT

· im Durchschnitt 53 Schmerztage weniger im Jahr

GRÖSSE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Umfang Leib (cm)	70 – 80	80-90	90-100	100-110	110 – 120	120-130	121 8400 3080 00°



A Roelofs et al. Lumbar Supports to Prevent Recurrent Low Back Pain among Home Care Workers, Annals of Internal Medicine 2007, 147, 685-692



LumboLoc® Forte

Verstärkte Stabilisierung und Entlastung der Lendenwirbelsäule mit variablem Gurtsystem

Hilfsmittelnummer

23.14.02.0006









 Stabilisierung durch Korsettstäbe



zwei Funktionen in einer Orthese:
 Indikationsgerechte Krafteinleitung durch höhenverstellbaren Funktionsgurt



Verschlussverlängerung (Zubehör)

INDIKATIONEN

- · Facettengelenksarthrose
- mittelschwere Lumboischialgie mit leichten muskulären Ausfällen bei Bandscheibenprotrusionen / Prolaps
- mittelschweres (pseudo-) radikuläres Lumbalsyndrom
- Spondylolyse / Spondylolisthese Grad 1
- mittelgradige lumbale Deformität
- Zustand nach Prolaps, z. B. postoperativ
- · Ligamento-Tendomyopathie
- mittelstarke Degeneration / muskuläre Insuffizienz

IN STUDIE^A BELEGT

- 33 % weniger Schmerzen
- · 25 % erhöhte Mobilität
- 89 % der Patienten empfinden eine gute Stabilisierung

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- verstärkte Stabilisierung durch individuell einstellbare Zuggurte
- richtet die Lendenwirbelsäule durch eingearbeitete Korsettstäbe auf
- höhenverstellbarer Funktionsgurt für indikationsgerechte Krafteinleitung
- zusätzliche Stabilisierung durch Pelotten für den Lendenbereich oder das Kreuzbein*

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

optional: bei der Verordnung wahlweise Lenden- oder Kreuzbeinpelotte mit angeben; diese muss separat bestellt werden

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 118 und Preisliste

* bitte die Art der Pelotte rezeptieren

LumboLoc Forte

GRÖSSE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Umfang Leib (cm)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	121 8403 0080 00°



LumboLoc Forte Pelotten

GRÖSSE	ARTIKEL-NR.
In einer Universalgröße erhältlich	121 840# 0050 001

^{# =} Ausführung (4) Kreuzbeinpelotte, (5) Lendenpelotte



^{*} Katzer, A., et al.; Wirkung einer Lumbalorthese auf das Schmerzempfinden und die Mobilität bei Patienten mit lumbalen Rückenschmerzen; Nicht interventionelle Studie; ORTHOCLINIC, Hamburg, 2021

Spinova®-System

Das modulare Spinova-System zur gezielten Therapie bei Indikationen der Lendenwirbelsäule.

Das Spinova-System mit acht unterschiedlichen Rückenorthesen ist ein innovatives Produktkonzept von Bauerfeind zur Verbesserung der Therapiemöglichkeiten bei vielen Indikationen im Bereich der Lendenwirbelsäule.

Die Spinova-Rückenorthesen folgen einem einheitlichen Konzept: Übergreifendes Funktionselement ist das komfortable Spinova-Netzmaterial. Durch zirkulär integrierte Korsettstäbe wirkt es wie ein Lindemann-Mieder. Über das variable Spinova-Zuggurtsystem mit der Rückenkassette wird die zirkuläre Kraft in therapeutisch relevanter Art eingeleitet. Das klassische Zuggurtsystem der Classic-Linie leitet eine moderate

Kraft ein. Ergänzt wird das System durch indikationsspezifische Spinova-Funktionselemente wie Rückenund Bauchpelotte, Überbrückungsrahmen oder Schale.

Spinova-Lumbalorthesen kommen zum Einsatz, wenn eine Haltungskorrektur oder Entlastung der Lendenwirbelsäule notwendig ist. Sie können effektiv einer unphysiologischen Belastung der Wirbelsäule und ihrer Bandscheiben vorbeugen.

Sie sind vielfältig anpassbar und bieten dem Patienten einzigartigen Tragekomfort und einfaches Handling.

KLASSISCHES ZUGGURTSYSTEM

bei leichtem bis mittelschwerem Indikationsausmaß

- · moderate Krafteinleitung
- individuell einstellbare Kompression
- komfortables, kraftsparendes Anlegen

Produktzuordnung:

- Spinova® Stabi Classic
- Spinova® Unload Classic



VARIABLES ZUGGURTSYSTEM

bei mittelschwerem bis schwerem Indikationsausmaß

- optimale Stabilität durch gezielte Krafteinleitung
- indikationsbezogen einstellbar
- · variierbar hinsichtlich Richtung und Stärke
- für den Patient sicher reproduzierbar


Produktzuordnung:

- Spinova® Support Plus
- Spinova® Unload Plus
- Spinova® Immo Plus
- Spinova® Immo



Spinova®-System



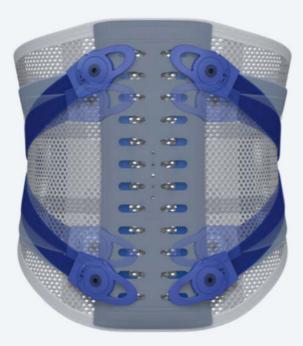

variables Zuggurt-System, Rückansicht







Entlordosierung Stabilisierung Lordosie

ÜBERGREIFENDE FUNKTIONSELEMENTE SPINOVA-SYSTEM



zirkulär integrierte Korsettstäbe entsprechen Lindemann-/Stabgittermieder



elastisches Spinova-Netzmaterial, anatomisch geformt, sehr atmungsaktiv



anatomisch geformter Bauchverschluss mit Mikroklett und Fingertaschen für leichtes An-/Ablegen

FUNKTIONSELEMENT KLASSISCHES ZUGGURTSYSTEM



individuell festziehbare klassische Klettgurte dienen der moderaten Stabilisierung der LWS

FUNKTIONSELEMENTE VARIABLES ZUGGURTSYSTEM



anformbare Rückenkassette stabilisiert und korrigiert von Kreuzbein bis untere BWS



parallel zur Wirbelsäule angeordnete Rückenkassette überbrückt Dornfortsätze, kein Druck auf Wundbereich



individuell höhenverstellbare Zuggurte sorgen für indikationsgerechte Krafteinleitung



durch fest einstellbares Drehmoment im Gurtschloss kraftvoller, definierter Zug zur Stabilisierung



patentiertes Spinova-Zuggurtsystem sorgt für dreifache Zugkraft



durch fest einstellbare Gurtspannung und Koppelverschluss konstanter therapeutischer Umfangsdruck

WIRBELSAU

INDIKATIONSSPEZIFISCHES MEHRSTUFIGES THERAPIE-KONZEPT

Der modulare Aufbau der Spinova-Lumbalorthesen ermöglicht durch die Entnahme und Zugabe von indikationsspezifischen Funktionselementen eine individuelle Therapie nach einem zweistufigen Behandlungsschema.



INDIKATIONSSPEZIFISCHE FUNKTIONSELEMENTE

AB- UND AUFRÜSTBAR

Überbrückungsrahmen



- anatomisch selbst anpassende, schwenkende Querstreben
- leicht anformbare, höhenadaptierbare Aluminiumstreben

Pelotten



- Rückenpelotte dient zur flächigen Überbrückung und Unterstützung der Lendenlordose
- Bauchpelotte dient der erhöhten Kompression des Bauchraums

Schalensystem





- individuell anpassbar, durch gegenseitig verschiebbare Schalenhälften
- werkzeugfreies abrüsten der Schale durch Lösen der elastischen Bänder und Rändelschraube
- sofort einsetzbar durch voreingestellten Schalenumfang
- reduzierter Anpassungsaufwand durch zwei Schalengrößen (short 33 cm, standard 38 cm)

ZWEISTUFIGES BEHANDLUNGSKONZEPT

1. Stufe: Stabilisierungsphase

Zur effektiven postoperativen oder initial konservativen Korrektur der Segmente wird die Orthese zusammen mit den indikationsspezifischen Funktionselementen (Schale/Überbrückungsrahmen/Pelotten) verwendet.

2. Stufe: Mobilisierungsphase

Mit zunehmender Mobilisierung des Patienten werden die indikationsspezifischen Funktionselemente entfernt. Die in der Orthese verbleibenden Korsettstäbe erzielen eine externe Stützwirkung.

Ein erneutes Aufrüsten der Orthese ist bei Bedarf je nach Stabilitätsbedürfnis jederzeit möglich.







Spinova® Stabi Classic

Moderate Stabilisierung der Lendenwirbelsäule durch Korsettstäbe

Hilfsmittelnummer

23.14.04.0023





zirkulär integrierte Korsettstäbe,



Fingertaschen auf dem Bauchverschluss

INDIKATIONEN

- · Facettengelenksarthrose
- mittelschweres (pseudo-) radikuläres Lumbalsyndrom
- mittelschwere Lumboischialgie mit leichten Ausfällen bei Bandscheibenprotrusion / Prolaps
- Zustand nach Prolaps (konservativ/postoperativ)
- · Zustand nach Diskektomie
- · Spondylolisthese Grad I

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- stabilisiert moderat die Lendenwirbelsäule und richtet durch integrierte zirkulär angeordnete Korsettstäbe auf
- der stützende Effekt entfaltet seine Wirkung bis in die untere Brustwirbelsäule
- leichtes Anlegen mittels großer Fingertaschen auf dem Bauchverschluss
- passgenauer Sitz durch verformbare Aluminiumstäbe
- die Länge der Zuggurte ist individuell einstellbar

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ersatzteile / Zusätze: siehe Seite 120 und Preisliste

GRÖSSE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Umfang Leib (cm)	70 - 80	80-90	90-105	105-115	115-125	125 – 140	122 8561 1000 00°



Spinova® Support Plus

Stabilisierung der Lendenwirbelsäule mit anatomisch geformter Rückenpelotte

Hilfsmittelnummer

23.14.02.2010





zirkulär integrierte Korsettstäbe,



individuell adaptierbares Zuggurtsystem zur regulierten Krafteinleitung



abrüstbare Rückenpelotte



Bauchpelotte



INDIKATIONEN

- · Wirbelfrakturen (LWS) mit Wirbelkörperschaden - Entlastung Wirbelvorderkante
- · Spondylolyse / Spondylolisthese Grad II
- · mittelschwere Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei erheblichen Bandscheibenprotrusionen/Prolaps
- · lumbale Spinalkanalstenosen auch mit Paresen (konservativ, postoperativ)
- · mittelschweres (pseudo-) radikuläres Lumbalsyndrom
- · schwere Degeneration/muskuläre Insuffizienz
- · Zustand nach Prolaps (postoperativ/konservativ)
- · Zustand nach Diskektomie
- · Zustand nach Spondylodese / Kyphoplastie (einetagig / mehretagig)
- · Osteoporose
- · mittelschwere lumbale Deformität bei Facettensyndrom/ Arthrose

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · zirkulär eingearbeitete Korsettstäbe wirken stabilisierend und aufrichtend
- · individuell adaptierbares Zuggurtsystem zur regulierten Krafteinleitung
- · verstärkte Aufrichtung durch erhöhten Abdominaldruck mittels Bauchpelotte
- · stützt die natürliche Lendenlordose durch großflächige, anatomisch geformte Rückenpelotte

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + mehrstufige Therapie
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: short, standard

- · short < 170 cm Körpergröße
- standard > 170 cm Körpergröße

Ersatzteile / Zusätze: siehe Seite 120 und Preisliste

IN STUDIE[∆] BELEGT

· gute Patientencompliance und hohes Stabilitätsempfinden

GRÖSSE	1	2	3	4	5	6	7
	Tours orange		Contraction	Common the constant	The second of the second	CONTRACT REPORTS	- Designation

ARTIKEL-NR. 100-110 110-120 120-130 130-140 Umfang Leib (cm) 70 - 8090 - 100

A Rommelspacher, Y., et al., Treatment with and without stabilizing lumbar spinal orthosis after one- or two-level spondylodesis: A randomized controlled trial. Technol Health Care. 2020;28(5):541-549. doi: 10.3233/THC-191820.



^{+ =} Ausführung (0) standard, (1) short ° = Größe (1-7)

Spinova® Unload Classic

Moderate Entlordosierung und Entlastung der Lendenwirbelsäule mit abrüstbarem Überbrückungsrahmen

Hilfsmittelnummer

23.14.02.1011





zirkulär integrierte Korsettstäbe,



Überbrückungsrahmen



Entlordosierung

INDIKATIONEN

- · stabile Wirbelfrakturen (LWS) mit Wirbelkörperschaden, Entlastung der Wirbelhinterkante
- · Spondylolyse/Spondylolisthese Grad I-II
- mittelschwere Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei erheblichen Bandscheibenprotrusionen / Prolaps
- · lumbale Spinalkanalstenosen auch mit Paresen (konservativ, postoperativ)
- · mittelschweres (pseudo-) radikuläres Lumbalsyndrom
- · Facettensyndrom
- · Zustand nach Diskektomie

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · zirkular eingearbeitete Korsettstäbe wirken stabilisierend und aufrichtend
- · korrigiert die Lendenlordose durch sich selbst anpassenden Überbrückungsrahmen
- · Entlastung der Wirbelhinterkante der Lendenwirbelsäule

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + mehrstufige Therapie
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: short, long

- short < 170 cm Körpergröße
- long > 170 cm Körpergröße

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 120 und Preisliste

GRÖSSE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Umfang Leib (cm)	70 - 80	80-90	90-105	105-115	115-125	125-140	122 8562 100+ 00°





Spinova® Unload Plus

Entlordosierung und verstärkte Entlastung der Lendenwirbelsäule mit abrüstbarem Überbrückungsrahmen

Hilfsmittelnummer

23.14.04.2009





zirkulär integrierte Korsettstäbe,



individuell adaptierbares Zuggurtsystem zur regulierten Krafteinleitung



Überbrückungsrahmen



Bauchpelotte



Entlordosierung

INDIKATIONEN

- · Wirbelfrakturen (LWS) mit Wirbelkörperschaden -Entlastung Wirbelhinterkante
- · Spondylolyse/Spondylolisthese Grad I-II
- · schwerste lumbale Deformität bei Facettensyndrom / Arthrose
- · schwerste Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei erheblichen Bandscheibenprotrusionen/Prolaps
- · lumbale Spinalkanalstenosen auch mit Paresen (konservativ, postoperativ)
- · schwerstes (pseudo-) radikuläres Lumbalsyndrom
- Foraminastenosen

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · zirkulär eingearbeitete Korsettstäbe wirken stabilisierend und aufrichtend
- · korrigiert die Lendenlordose durch selbst anpassenden Überbrückungsrahmen
- · Entlastung der Wirbelhinterkante der Lendenwirbelsäule
- · verstärkte Entlastung der Wirbelsäule durch erhöhten Abdominaldruck mittels Bauchpelotte
- · individuell adaptierbares Zuggurtsystem zur regulierten Krafteinleitung

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + mehrstufige Therapie
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan


Ausführungen: short, long

- short < 170 cm Körpergröße
- long > 170 cm Körpergröße

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 120 und Preisliste

GRÖSSE	1	2	3	4	5	6	7	ARTIKEL-NR.
Umfang Leib (cm)	70 - 80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	130-140	122 8543 100+ 0

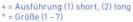



Spinova® Immo Plus

Immobilisierung der Lendenwirbelsäule mit Mobilisierungsfunktion durch abrüstbare Schale

Hilfsmittelnummer

23.14.02.2002





zirkulär integrierte Korsettstäbe,



individuell adaptierbares Zuggurtsystem zur regulierten Krafteinleitung



Schalensystem in zwei Größer



Bauchpelotte



INDIKATIONEN

- · Wirbelfrakturen (LWS) mit erheblichem Wirbelkörperschaden - Entlastung Wirbelvorder- und / oder -hinterkante
- · Tumore (Metastasen)
- · Zustand nach Spondylodese (einetagig / mehretagig)
- · schwerstes (pseudo-) radikuläres Lumbalsyndrom
- · schwerste Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei erheblichen Bandscheibenprotrusionen/Prolaps
- · lumbale Spinalkanalstenosen mit Paresen (konservativ, postoperativ)
- · Foraminastenosen
- · Osteochondrose
- · schwere Degeneration / muskuläre Insuffizienz
- · schwere lumbale Deformität bei Facettensyndrom/Arthrose
- · Zustand nach Prolaps (konservativ/postoperativ)
- · Zustand nach Diskektomie
- · Spondylolyse/Spondylolisthese Grad I-III

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · die Stabilisierung, Entlastung und Bewegungslimitierung der LWS erfolgt mittels einer rumpfumfassenden Schale mit zirkulärer Beckenfassung
- · individuelle Einstellung und passgenauer Sitz dank zweiteiligem Schalensystem
- · das Spinova-Zuggurtsystem bildet mit der Schale eine funktionelle Einheit; Umfangskräfte können individuell und indikationsgerecht eingeleitet werden
- · verstärkte Entlastung der Wirbelsäule durch erhöhten Abdominaldruck mittels Bauchpelotte
- · eingearbeitete Korsettstäbe stabilisieren zusätzlich und richten auf

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + mehrstufige Therapie
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: short, standard

- short < 170 cm Körpergröße
- standard > 170 cm Körpergröße

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 120 und Preisliste

GRÖSSE	1	2	3	4	5	6	7	ARTIKEL-NR.
Umfang Leib (cm)	70 – 80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	130-140	122 8541 100+ 00°



^{+ =} Ausführung (0) standard, (1) short ° = Größe (1 – 7)

Spinova® Immo

Immobilisierung der Lendenwirbelsäule

Hilfsmittelnummer

23.14.01.0003





individuell anpassbares Schalensystem



individuell adaptierbares Zuggurtsystem zur regulierten Krafteinleitung



Immobilisierung

INDIKATIONEN

- Ruhigstellung der LWS (präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, entzündliche Erkrankungen)
- konservative Frakturbehandlung von einfachen und stabilen Frakturen

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- die Stabilisierung, Entlastung und Bewegungslimitierung der LWS erfolgt mittels einer rumpfumfassenden Schale mit zirkulärer Beckenfassung
- individuelle Einstellung und passgenauer Sitz dank zweiteiligem Schalensystem
- das Spinova-Zuggurtsystem bildet mit der Schale eine funktionelle Einheit; Umfangskräfte können individuell und indikationsgerecht eingeleitet werden

DAS BAUERFEIND-PLUS

+ digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ersatzteile / Zusätze: siehe Seite 120 und Preisliste

GRÖSSE	1	2	3	4	5	6	7	ARTIKEL-NR.
Umfang Leib (cm)	70 - 80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	130-140	122 8540 1000 00°



SecuTec® Dorso

Entlordosierung und Entlastung der Lendenwirbelsäule durch Überbrückungsrahmen und Korsettstäbe

Hilfsmittelnummer

23.14.04.1009









anatomisch geformte Korsettstäbe



integratives Stabuittersystem



Verschlussverlängerung (Zubehör)

INDIKATIONEN

- Spondylolisthese (mit rezidivierenden Lumboischialgien) Grad I-III
- Zustand nach Prolaps (z. B. postoperativ)
- · Zustand nach Diskektomie
- Wirbelfrakturen (LWS) mit Wirbelkörperschaden
- Osteoporose
- mittlere bis schwere Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei erheblichen Bandscheibenprotrusionen / Prolaps
- schweres (pseudo-) radikuläres Lumbalsyndrom
- mittlere bis schwere lumbale Deformität bei Facettensyndrom/Arthrose
- · lumbale Spinalkanalstenosen

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- entlastet und richtet die LWS auf durch die Kombination aus Korsettstäben, anatomischem Formgestrick und Zuggurten
- wirkt entlordosierend durch einen Überbrückungsrahmen

DAS BAUERFEIND-PLUS

+ einfache Handhabung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 118, 119 und Preisliste

GRÖSSE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Umfang Leib (cm)	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135	121 8474 0080 00°



SecuTec® Lumbo

Entlordosierung und Entlastung der Lendenwirbelsäule durch Überbrückungsrahmen

Hilfsmittelnummer

23.14.04.2012









Bauchpelotte



Verschlussverlängerung (Zubehör)

INDIKATIONEN

- · schwerste Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei erheblichen Bandscheibenprotrusionen/Prolaps
- · schwerstes (pseudo-) radikuläres Lumbalsyndrom
- · Spondylolyse / Spondylolisthese Grad I-III
- · mittlere bis schwere lumbale Deformität bei Facettensyndrom/Arthrose
- · lumbale Spinalkanalstenosen
- · mittlere bis schwere Degeneration / muskuläre Insuffizienz
- · Wirbelfrakturen (LWS) mit Wirbelkörperschaden
- · Zustand nach Prolaps, z.B. postoperativ
- · Zustand nach Diskektomie

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · wirkt entlordosierend durch die Kombination aus abrüstbarem Überbrückungsrahmen, anatomischem Formgestrick und Zuggurten
- · verstärkte Entlastung der Wirbelsäule durch erhöhten Abdominaldruck mittels Bauchpelotte

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: short, long

- · short < 170 cm Körpergröße
- long > 170 cm Körpergröße

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 118, 119 und Preisliste

GRÖSSE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Umfang Leib (cm)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	121 8460 108+ 00°





SofTec® Lumbo

Immobilisierung der Lendenwirbelsäule mit Mobilisierungsfunktion durch abrüstbare Schale

Hilfsmittelnummer

23.14.02.2013





urzversion der Halbschale



angversion der Halbschale



kraftsparendes LPT-Gurtsystem





(Zubehör)

INDIKATIONEN

- · Spondylolyse / Spondylolisthese Grad II-III
- · schwerste Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei erheblichen Bandscheibenprotrusionen/Prolaps
- · schwerstes (pseudo-) radikuläres Lumbalsyndrom
- · degeneratives Facettensyndrom
- · Zustand nach Prolaps, (konservativ/postoperativ)
- · Zustand nach Diskektomie
- · Zustand nach Spondylodese / Kyphoplastie (einetagig / mehretagig)
- · lumbale Spinalkanalstenosen
- · Wirbelfrakturen (LWS) mit Wirbelkörperschaden
- · Tumore (Metastasen)
- · schwere Degeneration / muskuläre Insuffizienz

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · Stabilisierung der Lendenwirbelsäule: durch die gezielte Kombination der verschiedenen Orthesenmodule (Formgestrick, CFK-Stäbe in zwei Stärken, Halbschale) lassen sich verschiedene Stabilisierungsgrade
- · komfortables, kraftsparendes Anlegen für den Patienten
- · hoher Tragekomfort
- · verstärkte Entlastung der Wirbelsäule durch erhöhten Abdominaldruck mittels Bauchpelotte

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + mehrstufige Therapie
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: short, long, zwei Höhen

- · dorsale Höhe der Kunststoffhalbschale: short 29 cm, long 35 cm
- · Stabilisierung: short L5-S1, long L3-S1
- short < 170 cm Körpergröße
- · long > 170 cm Körpergröße

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 118, 119 und Preisliste

GRÖSSE	1	2	3	4	HALBSCHALE	ARTIKEL-NR.
Umfang Hüfte (cm)	75 - 90	75 - 90 90 - 105			short	122 8480 0081 00°
	75 – 90	90-105	105-120	120-135	long	122 8480 0082 00°





Spinova® Osteo

Stabilisierung und aktive Aufrichtung der Wirbelsäule mit freiem Brust- und Bauchbereich

Hilfsmittelnummer

23.15.04.4027









Beckenbandage



Reklinator



Gurtsystem



Wirkprinzip

INDIKATIONEN

- stabile, osteoporotische Wirbelkörperfrakturen
- Osteoporose
- · schmerzhafter Rundrücken
- · muskuläre Insuffizienz

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- aktive Aufrichtung zur Entlastung und Korrektur der Lendenwirbelsäule und Brustwirbelsäule sowie eine Bewegungseinschränkung in Sagittalebene
- dosierbare Aufrichtung durch spezielle Gurtführung, die individuelle Krafteinleitung ermöglicht
- richtet auf durch Aluminium-Reklinator in Verbindung mit Zuggurtung und Beckenbandage
- freier Bauch- und Brustbereich und hohe Positionsstabilität der Orthese dank tiefsitzender Beckenbandage
- adaptierbare Gurtführung durch höhenverstellbare dorsale Gurtfixierung
- kraftsparendes Anlegen mittels Hand- und Fingerschlaufen
- erhöhtes Stabilitätsgefühl durch gepolsterte seitliche Gurtkreuze

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + werkzeugfreie Anpassung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

optional:

bei Zwischenmaß kleineren Reklinator/größere Bandage wählen

fünf Standard-Größen: S2, S3, M3, M4, L4

18 Größenkombinationen aus Reklinator (S-L) und Bandage (1-6)

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 120 und Preisliste

Spinova Osteo

GRÖSSE	S2	S3	M3	M4	L4	ARTIKEL-NR.
Länge Rücken (cm)	50-58	50-58	59-67	59-67	68-76	
Umfang Becken (cm)	80-90	90-100	90-100	100-110	100-110	122 8568 0000 000
oo_Nummer	12	13	23	24	34	



Spinova Osteo Reklinator teilmontiert

GRÖSSE	S	М	L	ARTIKEL-NR.
Länge Rücken (cm)	50-58	59-67	68-76	122 8570 0000 00°



Hinweis: Bei Zwischengröße kleineren Reklinator wählen.

Spinova Osteo Beckenbandage teilmontiert

GRÖSSE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Umfang Becken (cm)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	122 8569 0000 00°

^{° =} Größe (1 – 6) Hinweis: Bei Zwischengröße größere Beckenbandage wählen.

SofTec® Dorso

Erhöhte Stabilisierung der Brust- und Lendenwirbelsäule

Hilfsmittelnummer

23.15.04.3004









Aluminium-Reklinator



integriertes Kreuz



Verschlussverlängerung (Zubehör)

INDIKATIONEN

- · konservative Frakturbehandlung (bis TH8) von einfachen und stabilen Frakturen
- · Zustand nach Diskektomie
- · Zustand nach Spondylodese
- · Osteoporose
- · Tumore (Metastasen) oder entzündliche Prozesse (Spondylitis)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · richtet die Wirbelsäule auf und stabilisiert den Oberkörper durch anpassbaren Aluminiumreklinator
- · schränkt schädigende Rotationsbewegungen ein
- · dosierbare Krafteinleitung und Aufrichtung durch Zuggurte
- · am Reklinator montierbares Stabilisationskreuz aus Aluminium verstärkt die aufrichtende Wirkung der Orthese und schränkt endgradige Bewegungen zusätzlich ein (Extension / Flexion; Seitneigung)

DAS BAUERFEIND-PLUS

+ digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: short, long

- · short < 170 cm Körpergröße
- · long > 170 cm Körpergröße

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 118, 119 und Preisliste

GRÖSSE	1	2	3	4	ARTIKEL-NR.
Umfang Hüfte (cm)	75-90	90-105	105-120	120-135	122 8490 008+ 00



+ = Ausführung (1) short, (2) long ° = Größe (1–4)

CerviLoc® | CerviLoc® S

Stabilisierung und Entlastung der Halswirbelsäule

Hilfsmittelnummer

23.12.03.0028 23.12.03.1018 (S)







INDIKATIONEN

- · Schmerzzustände im HWS-Bereich (Cervikalsyndrom)
- Schleudertrauma

CerviLoc S

- · schwere Schmerzzustände im HWS-Bereich (schweres Cervikalsyndrom)
- · mittelschweres Schleudertrauma
- · Blockierung

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · gezielte Entlastung der HWS
- · höhere Unterstützung bietet die integrierte flexible Kunststoffverstärkung der CerviLoc S
- · angenehm zu tragen durch weichen, anatomisch vorgeformten Schaumstoff mit einer Aussparung für das Kinn

ANWENDUNGSHINWEISE

· drei unterschiedliche Höhen mit jeweils zwei Umfangsgrößen berücksichtigen unterschiedlich ausgeprägte Halspartien

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN


Farben: beige

GRÖSSE	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Höhe (cm)	6,5	8,5	10	6,5	8,5	10	120.050, 0010.000
Umfann Hals (cm)	32-38	34-40	34-40	36-44	36-44	38-48	120 959+ 0010 00°



^{+ =} Ausführung (0) CerviLoc, (1) CerviLoc S
° = Größe (1 – 6)



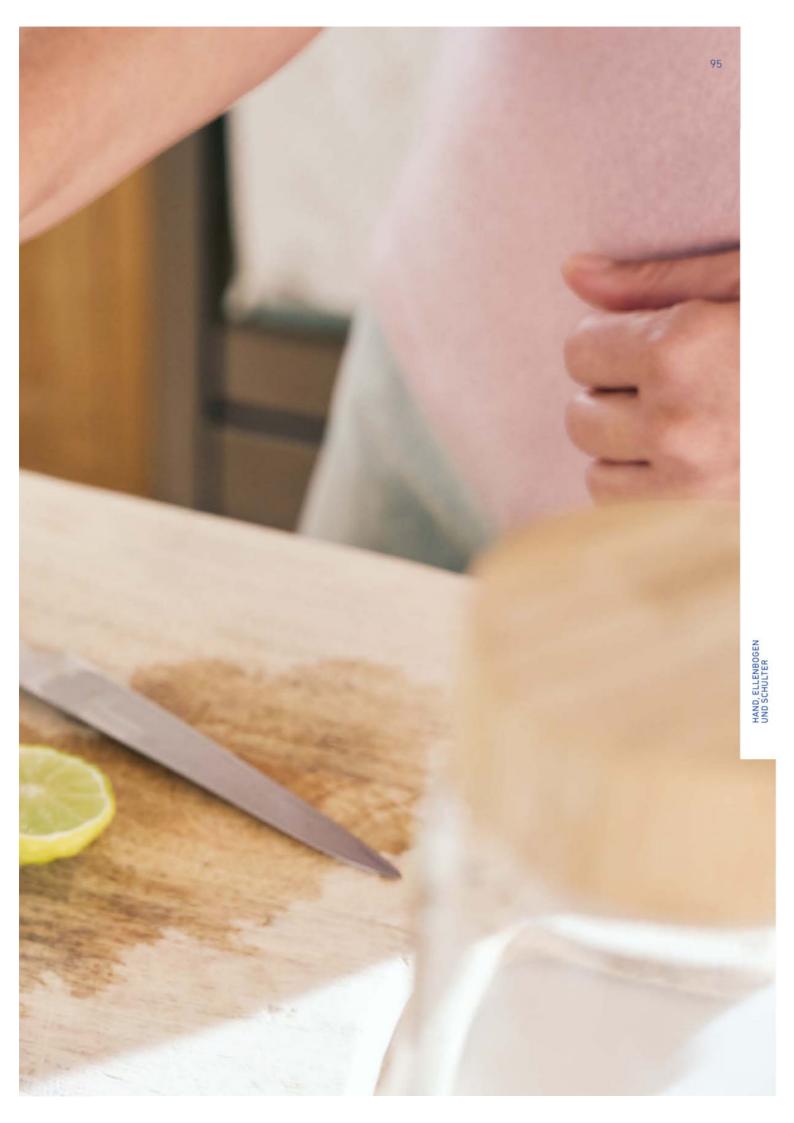

INDIKATIONSTABELLE HAND-, ELLENBOGEN- UND SCHULTERTHERAPIE

PRODUKT		ManuTrain*	EpiTrain*	OmoTrain*	OmoTrain*S	ManuLoc*	ManuLoc* long	ManuLoc* long Plus
		1				1	35	SE SE
PRODUKTMER	KMAL	Entlastung und Stabilisierung des Handgelenks	Entlastung und Stabilisierung des Ellenbogen- gelenks	Entlastung und Stabilisierung des Schultergelenks	Entlastung und Stabilisierung des Schultergelenks	Immobilisierung des Handgelenks	Immobilisierung des Handgelenks und Teile des Unterarms	Immobilisierung des Handgelenks, Teile des Unter- arms und der Finger
HILFSMITTELN	UMMER*	05.07.02.0035	05.08.01.1000	05.09.01.0001	05.09.01.0004	23.07.02.4010	23.07.02.4048	23.07.02.1014
SEITENZAHL		98	107	109	110	99	100	101
INDIKATIONEN	i							
Reizzustände (posttraumatisch / p	ostoperativ)	•	•	•	•	•	•	•
präoperativ						•	•	•
Prävention / Rezidiv	orophylaxe	•	•	•	•			
Distorsion		•				•	•	•
Kontusion						•	•	•
Bandinstabilitäten								
Instabilität, z.B. bei t	edernder Elle	•						
	leicht	•	•	•	•			
Arthrose / Arthritis	mittel					•	•	
	schwer							
Seitenbandverletzur Daumen (z.B. Skidar								
Bandverletzung im Finger-/Handbereic	h							•
Lähmung								
Tendovaginitis	leicht	•						
(Sehnenscheiden-	mittel					•	•	
entzündung)	schwer							•
	leicht					•		
Karpaltunnel- syndrom	mittel						•	
110 - CANADA (1989)	schwer							•
Tendomyopathie			•					
Epicondylitis lateralis / medialis h	umeri		•					

^{*}Angaben zur Rezeptierung gelten nur in Deutschland

RhizoLoc* OA	RhizoLoc*	ManuLoc* Rhizo	ManuLoc* Rhizo long	ManuLoc* Rhizo long Plus	OmoLoc*	EpiPoint*
1	01	A	THE	S. S.	a l	-
Ruhigstellung und Entlastung des Daumensattel- bzw. Daumengrund- gelenks	Stabilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks	Immobilisierung des Handgelenks mit Daumenfassung	Immobilisierung des Handgelenks und Teile des Unterarms mit Daumenfassung	Immobilisierung der gesamten Hand und Teile des Unterarms	Immobilisierung der Schulter	Gezielte Entlastung der Sehnenansätze am Ellenbogen
23.07.01.1065	23.07.01.1007	23.07.02.2022	23.07.02.2029	23.07.02.3015	23.09.01.0062	23.08.04.0010
102	103	104	105	106	111	108
•	•	• akut	•	•	•	
		•	•	•	•	
						•
•	•	•	•	•		
•						
•	•					
		•	•			
	•	•	•	•		
		•		•		
				•		
		•	•			
				•		
		•				
						•

ManuTrain®

Entlastung und Stabilisierung des Handgelenks

Hilfsmittelnummer

05.07.02.0035









Aktivitätsstufe III





eiche, anatomisch geformte



komplettes Gurtsystem

INDIKATIONEN

- · chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände
- · Distorsionen (Handgelenksverletzungen, z.B. Verstauchungen)
- · Arthrose (Gelenkverschleiß)
- · Instabilität, z.B. bei federnder Elle
- · Tendovaginitis (Sehnenscheidenentzündung)
- · Prävention/Rezidivprophylaxe

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · therapiegerechte Stabilisierung und Aktivierung des Handgelenks durch das Gurtsystem und optimale Kompression des Train-Gestricks
- · Druckentlastung des ulnaren Knochenvorsprungs durch viskoelastische Pelotte
- · besondere Dehnfähigkeit und kompressionsreduzierte Ränder für ein kraftsparendes Anund Ablegen
- · anatomisch geformte Daumenöffnung und nahtfreie, weiche Komfortzone zwischen Daumen und Zeigefinger für einen anhaltenden Tragekomfort
- · Kompression des durchblutungsfördernden Hoch-Tief-Gestricks für eine verbesserte Gelenkfunktion

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + Komfortzone
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: beige, schwarz, titan Ausführungen: rechts, links Frsatzteile / Zusätze: siehe Seite 122 und Preisliste

LIEFERUMFANG inklusive Anziehhilfe



Link zum Video: **Das Gurtsystem** richtig anlegen

ANWENDUNGSHINWEISE

· drei Aktivitätsstufen gewährleisten eine individuelle Versorgung - von der Akuttherapie bis zur Präventivanwendung

IN PRÜFVERFAHRENA BESTÄTIGT

· Gurtsystem stabilisiert das herkömmlicher Innenhandstab

Handgelenk gleichwertig wie ein

GRÖSSE ARTIKEL-NR. 14-15 17-18 18-19 19-20 110 5150 40*0 +0° Umfang Handgelenk (cm) 15 - 1616 - 17



+ = Austunrung ° = Größe (1 – 6) = Ausführung (6) rechts, (7) links

A Kirillov, M., ManuTrain auf dem Prüfstand – Die neue Generation mit Gurtsystem im Prüflabor; Bauerfeind Life Magazin 07–2022, vollständig nachzulesen unter bauerfeind-life.de



ManuLoc[®]

Immobilisierung des Handgelenks

Hilfsmittelnummer

23.07.02.4010





seitliche Stäbe



Ränder mit Ultraschall-



Rückzugstopp

INDIKATIONEN

- · posttraumatische oder postoperative Reizzustände
- · präoperativ
- · Karpaltunnelsyndrom (leichten Grades)
- · Tendovaginitis (mittleren Grades)
- · Distorsionen / Kontusionen
- · Arthrose (mittleren Grades)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · Sicherung des Handgelenks sowohl in Extension / Flexion als auch radial und ulnar durch Aluminiumstäbe
- · Orthese verhindert Fehlbewegungen des distalen und proximalen Handgelenks
- · anatomisch vorgeformter Mittelhandstab stabilisiert das Handgelenk in Funktionsstellung und kann individuell angepasst werden.
- · die Konstruktion der Orthese ermöglicht funktionelle Greifbewegungen und erhält somit die Mobilität
- · einfaches Anlegen der Orthese mit nur einer Hand möglich durch praktische Klettverschlüsse sowie Rückzugstopps an den Gurten
- · hohe Bewegungsfreiheit des Daumens durch beidseitig große Daumenöffnungen somit auch rechts und links tragbar
- · Ränder mit Ultraschallschweißtechnik für mehr Haltbarkeit und bessere Optik

ANWENDUNGSHINWEISE

· Mittelhandstab mit Luftschlitzen und seitliche Stäben aus Aluminium sind individuell anformbar

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Komfortzone
- + werkzeugfreie Anpassung
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: gleiche Ausführung für rechts und links (Daumenöffnungen beidseitig)

GRÖSSE	0	1	2	3	ARTIKEL-NR.
Umfang Handgelenk (cm)	12_15	14-18	17 - 21	20-26	120 5340 2080 00°





ManuLoc® long

Immobilisierung des Handgelenks und Teile des Unterarms

Hilfsmittelnummer

23.07.02.4048













Ränder mit Ultraschall-

Rückzugstopp

INDIKATIONEN

- · posttraumatische oder postoperative Reizzustände, z.B. nach Gipsversorgungen bei Radiusfrakturen
- · präoperativ
- · Karpaltunnelsyndrom (mittleren Grades)
- · Tendovaginitis (mittleren Grades mit Ruhe- und Nachtschmerz)
- · Distorsionen / Kontusionen
- · Arthrose (mittleren Grades)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · Sicherung des Handgelenks sowohl in Extension / Flexion als auch radial und ulnar durch verlängerte Aluminiumstäbe
- · Limitierung der Rotationsbewegungen im Handgelenk durch längeren Hebel der Orthese
- · Orthese verhindert Fehlbewegungen des distalen und proximalen Handgelenks
- · hohe Bewegungsfreiheit des Daumens durch beidseitig große Daumenöffnungen - somit auch rechts und links tragbar
- · Ruhigstellung in funktionaler Stellung bei funktionierender Greifbewegung durch anformbaren Mittelhandstab
- · einfaches Anlegen der Orthese mit nur einer Hand möglich durch praktische Klettverschlüsse sowie Rückzugstopps an den Gurten
- · Ränder mit Ultraschallschweißtechnik für mehr Haltbarkeit und bessere Optik, Richtung Ellenbogen wird die empfindlichere Haut weich abgepolstert / eingebettet

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Komfortzone
- + werkzeugfreie Anpassung
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: gleiche Ausführung für rechts und links (Daumenöffnungen beidseitig)

Ersatzteile / Zusätze: siehe Seite 122 und Preisliste

IN STUDIE^A BELEGT

° = Größe (0-3)

 22 % verbesserte Funktionalität im Alltag sechs Wochen nach der Operation

ANWENDUNGSHINWEISE

· verlängerte seitliche Stäbe und Mittelhandstab mit Luftschlitzen aus Aluminium sind individuell anformbar

GRÖSSE ARTIKEL-NR. Umfang Handgelenk (cm) 12 - 1514 - 1817 - 2120 - 26120 5340 2082 009





^a Katzmaier, P., et al., POSTOPERATIVE THERAPIE DER DISTALEN RADIUSFRAKTUR MIT DER ORTHESE ManuLoc long, nicht interventionelle Studie, MVZ Oberstdorf, 2016.

ManuLoc® long Plus

Immobilisierung des Handgelenks, Teile des Unterarms und der Finger

Hilfsmittelnummer

23.07.02.1014









anformbare Handauflage



Seitenansicht mit Funktionsstellung



Ränder mit Ultraschallschweißtechnik



Klettverschluss m Rückzugstopp

INDIKATIONEN

- posttraumatisch (multiple, komplexe Verletzungen im Hand-/Fingerbereich)
- präoperativ und postoperativ, z. B. Morbus Dupuytren, Mittelhandfrakturen
- Verletzungen/Frakturen im Handgelenksbereich
- Karpaltunnelsyndrom (schweren Grades – Nachtlagerung)
- · Tendovaginitis (schweren Grades)
- · Distorsionen / Kontusionen
- Bandverletzungen im Finger-/Handbereich

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- stabilisiert das Handgelenk, den Unterarm und die Finger; der Daumen bleibt frei beweglich
- einstellbare Lagerungspositionen in Intrinsic-Plus-Stellung oder Normalstellung zur Schmerzreduzierung und Vermeidung von Immobilisationsschäden
- Sicherung des Handgelenks sowohl in Extension / Flexion als auch radial und ulnar durch verlängerte Aluminiumstäbe
- breiter Fingergurt entlastet Bänder und Sehnen, während Finger in Position gehalten werden
- hohe Bewegungsfreiheit des Daumens durch beidseitig große Daumenöffnungen – somit auch rechts und links tragbar
- einfaches Anlegen der Orthese mit nur einer Hand möglich durch praktische Klettverschlüsse sowie Rückzugstopps an den Gurten
- Ruhigstellung in funktionaler Stellung durch anformbaren Mittelhandstab
- Ränder mit Ultraschallschweißtechnik für mehr Haltbarkeit und bessere Optik; Richtung Ellenbogen wird die empfindlichere Haut weich abgepolstert / eingebettet

ANWENDUNGSHINWEISE

 verlängerte seitliche Stäbe und Mittelhandstab mit Luftschlitzen aus Aluminium sind individuell anformbar

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Komfortzone
- + werkzeugfreie Anpassung
- + mehrstufige Therapie
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: gleiche Ausführung für rechts und links (Daumenöffnungen beidseitig)

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 122 und Preisliste

GRÖSSE	0	1	2	3	ARTIKEL-NR.
Umfang Handgelenk (cm)	12-15	14-18	17-21	20-26	128 5341 0080 00°







@ 21 cm

RhizoLoc® OA

Ruhigstellung und Entlastung des Daumensattel- bzw. Daumengrundgelenks

Hilfsmittelnummer

23.07.01.1065





stabilisierende Kunststoffspange



Handsymbol zur Orientierung beim Anlegen



reicher selbsthaftender Daumen-Wickelgurt



praktischer Verschluss mit Öse



Alltagstauglich

INDIKATIONEN

- · Arthrose (z.B. Rhizarthrose)
- · Arthritis
- · Reizzustände (chronisch, akut, posttraumatisch, postoperativ)
- · chronisch (z.B. Bandinstabilitäten, rezidivierende Gelenkfehlstellungen)
- · akut/posttraumatisch (z. B. Überlastungen, Distorsionen, Kontusionen)
- · funktionelle Beschwerden (Überlastungen, bei rezidivierenden Gelenkfehlstellungen u. ä.)
- · postoperativ (z.B. nach Arthroplastik)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · Ruhigstellung und Entlastung des Daumensattel- bzw. Daumengrundgelenks
- · hohe Stabilisierung des Daumens durch Zwei-Komponenten-Kunststoffspange
- · sichere Position dank des selbsthaftenden, weichen Daumengurtes
- · kann auch im Wasser getragen werden (danach abtrocknen und wieder anlegen), Tipp: Daumen-Wickelgurt dafür abnehmen
- · hoher Tragekomfort durch abgerundete Ränder und Perforierung
- · individuelle Anpassung durch einstellbare
- · einfaches Anlegen mit nur einer Hand durch praktischen Verschluss mit Öse möglich

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + werkzeugfreie Anpassung
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: rechts, links

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 123 und Preisliste

GRÖSSE	1	2	ARTIKEL-NR.
Umfang Handgelenk (cm)	14-17	16-20	120 5333 1080 +0°

^{+ =} Ausführung (6) rechts, (7) links ° = Größe (1-2)

Hinweis:

Bei Zwischengrößen und zierlichen Händen Größe 1 wählen.



RhizoLoc®

Stabilisierung des Daumengrundund Daumensattelgelenks

Hilfsmittelnummer











INDIKATIONEN

- · postoperative und posttraumatische Reizzustände
- · Seitenbandverletzungen, z.B. Skidaumen
- · Rhizarthrose (leichten Grades)
- · Distorsionen / Kontusionen

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · Stabilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks
- · hohe Stabilisierung des Daumengrundgelenks durch Aluminiumbügel
- · limitierbare Freigabe der Bewegung im Daumengrundgelenk (Dynamisierung) dank Klettlasche
- · einfaches Anlegen der Orthese mit nur einer Hand möglich durch praktische Klettverschlüsse sowie Rückzugstopps an den Gurten
- hoher Tragekomfort dank atmungsaktiven Materialien mit Luftporen
- · Erhalt der Bewegungsfreiheit im Handgelenk durch schmalen Gurt und kleinen Umlenkring

ANWENDUNGSHINWEISE

· individuell anformbarer Aluminiumbügel

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Komfortzone
- + werkzeugfreie Anpassung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: rechts, links

IN STUDIE[△] BELEGT

 Schmerzlinderung durch Ruhigstellung des **Daumensattelgelenks** (bis zum MCP-I-Gelenk) bei Fingerpolyarthrosen

GRÖSSE	1	2	ARTIKEL-NR.
Umfang Handgelenk (cm)	12,5 – 16	16-20	120 5330 1080 +0°
Umfang Daumen (cm)	5-7	6,5-9	120 5330 1080 +0-

^{+ =} Ausführung (6) rechts, (7) links ° = Größe (1 – 2)



^a Wanivenhaus A., Die Behandlung der Fingerpolyarthrosen; Rheumatologie und Orthopädie, 1, 10–12, 2013

ManuLoc® Rhizo

Immobilisierung des Handgelenks mit Daumenfassung

Hilfsmittelnummer

23.07.02.2022









Daumenfixierung



Ränder mit Ultraschall-



Rückzugstopp

INDIKATIONEN

- · akute, posttraumatische und postoperative Reizzustände des Handgelenks und Daumenstrahls
- · präoperativ
- · radialseitige Tendovaginitis (mittleren Grades)
- · Rhizarthrose (schweren Grades)
- · Karpaltunnelsyndrom (leichten Grades)
- Distorsionen / Kontusionen
- · Bandverletzung im Finger-/Handbereich

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · Orthese verhindert Fehlbewegungen des proximalen und distalen Handgelenks sowie des Daumengrund- und Daumensattelgelenks
- · Ruhigstellung des Handgelenks dank anformbarer Aluminiumstäbe
- · Stabilisierung des Handgelenks in Funktionsstellung dank anatomisch vorgeformtem Mittelhandstab
- einer Hand möglich durch praktische Klettverschlüsse sowie Rückzugstopps an den Gurten
- · Ränder mit Ultraschallschweißtechnik für mehr Haltbarkeit und bessere Optik

- · einfaches Anlegen der Orthese mit nur

ANWENDUNGSHINWEISE

- · Mittelhandstab mit Luftschlitzen, seitliche Stäbe und Bügel aus Aluminium sind individuell anformbar
- · im Therapieverlauf kann der Daumen zunehmend dynamisiert und die Daumenfassung komplett entfernt werden

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Komfortzone
- + werkzeugfreie Anpassung
- + mehrstufige Therapie
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: rechts, links

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 122 und Preisliste

GRÖSSE	0	1	2	3	ARTIKEL-NR.
Umfang Handgelenk (cm)	12-15	14-18	17-21	20-26	120 5345 0080 +0°





ManuLoc® Rhizo long

Immobilisierung des Handgelenks und Teile des Unterarms mit Daumenfassung

Hilfsmittelnummer

23.07.02.2029









Daumenfixierung





Ränder mit Ultraschall-



Rückzugstopp

INDIKATIONEN

- · posttraumatische oder postoperative Reizzustände, z.B. nach Gipsversorgungen bei Skaphoidfrakturen
- · präoperativ
- · radialseitige Tendovaginitis (mittleren Grades)
- · Rhizarthrose (schweren Grades)
- · Distorsionen / Kontusionen
- Karpaltunnelsyndrom (mittleren Grades)
- · Seitenbandverletzungen, z.B. Skidaumen

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · Orthese verhindert Fehlbewegungen des proximalen und distalen Handgelenks sowie des Daumengrund- und Daumensattel-
- · Limitierung der Rotationsbewegungen im Handgelenk durch längeren Hebel der
- · Ruhigstellung des Handgelenks dank anformbarer Aluminiumstäbe
- · Stabilisierung des Handgelenks in Funktionsstellung dank anatomisch vorgeformtem Mittelhandstab
- · einfaches Anlegen der Orthese mit nur einer Hand möglich durch praktische Klettverschlüsse sowie Rückzugstopps an den Gurten
- · Ränder mit Ultraschallschweißtechnik für mehr Haltbarkeit und bessere Optik; Richtung Ellenbogen wird die empfindlichere Haut weich abgepolstert / eingebettet

ANWENDUNGSHINWEISE

- · Mittelhandstab mit Luftschlitzen, seitliche Stäbe und Bügel aus Aluminium sind individuell anformbar
- · im Therapieverlauf kann der Daumen zunehmend dynamisiert und die Daumenfassung komplett entfernt werden

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Komfortzone
- + werkzeugfreie Anpassung
- + mehrstufige Therapie
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: rechts, links

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 122 und Preisliste

GRÖSSE	0	1	2	3	ARTIKEL-NR.
Umfang Handgelenk (cm)	12-15	14-18	17-21	20-26	120 5345 0082 +0°





ManuLoc® Rhizo long Plus

Immobilisierung der gesamten Hand und Teile des Unterarms

Hilfsmittelnummer

23.07.02.3015









anformbare Fingerauflage



individuell einstellbare Daumenfixierung



Ränder mit Ultraschallschweißtechnik



Klettverschluss m Rückzugstopp

INDIKATIONEN

- posttraumatisch (multiple, komplexe Verletzungen im Hand-/Fingerbereich)
- präoperativ und postoperativ, z. B. Morbus Dupuytren, Mittelhandfrakturen
- Frakturen/Verletzungen im Handwurzelbereich, z.B. nach operativer Versorgung
- Verletzungen des Daumensattelund Grundgelenks
- komplexe Bandverletzungen im Finger-/Handbereich aufgrund Traumata
- Lähmungen
- · Tendovaginitis (schweren Grades)
- · Distorsionen / Kontusionen

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- stabilisiert das Handgelenk, den Unterarm, die Finger inklusive Daumen
- einstellbare Lagerungspositionen zur Schmerzreduzierung und Vermeidung von Immobilisationsschäden
- Ruhigstellung des Handgelenks dank anformbarer Aluminiumstäbe
- einfaches Anlegen der Orthese mit nur einer Hand möglich durch praktische Klettverschlüsse sowie Rückzugstopps an den Gurten
- Ränder mit Ultraschallschweißtechnik für mehr Haltbarkeit und bessere Optik; Richtung Ellenbogen wird die empfindlichere Haut weich abgepolstert / eingebettet

ANWENDUNGSHINWEISE

- Fingerauflage wird in Neutralstellung geliefert und ist schnell und ohne Werkzeug in Intrinsic-Plus-Stellung anformbar
- Mittelhandstab mit Luftschlitzen, seitliche Stäbe und Bügel aus Aluminium sind individuell anformbar
- Unterstützung bei Physiotherapie und Mobilisierung im Heilungsprozess dank abnehmbarer Fingerauflage und Daumenfassung

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Komfortzone
- + werkzeugfreie Anpassung
- + mehrstufige Therapie
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: rechts, links

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 122 und Preisliste

GRÖSSE	0	1	2	3	ARTIKEL-NR.
Umfang Handgelenk (cm)	12-15	14-18	17-21	20-26	128 5347 0080 +0°

+ = Ausführung (6) rechts, (7) links ° = Größe (0-3)





EpiTrain®

Entlastung und Stabilisierung des Ellenbogengelenks

Hilfsmittelnummer

05.08.01.1000













Epicon+ Pads

Epicon+ Pads am Produkt

komfortable Ellenbeugezone

langes Oberarmgestrick

Train-Gestrick

INDIKATIONEN

- posttraumatische oder postoperative Reizzustände, z. B. Epicondylitis
- Arthrose / Arthritis (Gelenkverschleiß / Gelenkentzündung)
- Tendopathie (degenerative Sehnenerkrankung)
- Tendomyopathie (Muskelsehnenerkrankung)
- · Prävention/Rezidivprophylaxe

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- die therapeutische Kompression der besonders strukturierten Oberfläche des Hoch-Tief-Gestricks bewirkt zusammen mit den Epicon+ Pads eine spürbare Entlastung und eine gezielte Schmerzlinderung
- die viskoelastischen Epicon+ Pads mit Epikondylenaussparungen sorgen für Umverteilung der Bandagenkompression von den Epikondylen auf das umgebende Weichteilgewebe und ermöglichen eine sichere Positionierung der Bandage
- die weiche und besonders atmungsaktive Komfortzone in der Ellenbeuge des anatomisch geformten Train-Gestricks ermöglicht einen hohen Tragekomfort
- Epicon+ Pads entlasten die Epikondylen und die Massagenoppen einer festeren Materialkomponente üben eine wohltuende Wechseldruckmassage in der Bewegung auf die Muskel- und Sehnenansätze aus

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + Komfortzone
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: beige, schwarz, titan

Ausführungen: gleiche Ausführung für rechts und links

optional: Maßanfertigung in beige und titan, Haftband, Klettverschluss

dinweis:

bei Maßanfertigung zusätzliche Hilfsmittelnummer: 05.99.99.0001

Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 122 und Preisliste

GRÖSSE	0	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.	
größter Unterarmumfang (cm)	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31	31-33	33-35	110 6160 40*0 00°	



 $P = Gr\ddot{o}Be(0-6)$

Maßanfertigung: Die genauen Messpunkte entnehmen Sie bitte dem Maßbestellblock oder dem Maßbestellblatt auf Seite 134.



EpiPoint®

Gezielte Entlastung der Sehnenansätze am Ellenbogen

Hilfsmittelnummer

23.08.04.0010









INDIKATIONEN

· Epicondylitis lateralis humeri

· Epicondylitis medialis humeri

ursprungs, Golfer- und Werfer-

· Prävention / Rezidivprophylaxe

(Entzündung des Muskel-

(Entzündung des Muskel-

ursprungs, Tennisarm)



Fünfpunkt-Pelotte



VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · gezielte Entlastung überbeanspruchter Strukturen dank dosierter Kompression am
- · viskoelastische Fünfpunkt-Pelotte stimuliert die Triggerpunkte und ermöglicht eine punktgenaue Kompression
- · individuelle, stufenlose Druckanpassung durch elastisches Regulierband
- · roter Signalbereich am Regulierband als Indikator für zu starken Druck

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: schwarz, titan

Ausführungen: gleiche Ausführung für rechts und links

LIEFERUMFANG

auch im Display (12 Stück)

IN STUDIE^A BELEGT

 bis zu 23 % weniger Schmerzen (bei Patienten mit positivem Extensor Grip Test)

GRÖSSE	UNIVERSAL	ARTIKEL-NR. 120 6350 10*0 000	
Umfang Unterarm (cm)	22,5-33		

^{* =} Farbe (7) schwarz, (8) titan



A Promotionsschrift: Struijs et al.; Frederik Hendrikplantsoen 74-2; NL-1052 XW Amsterdam

109

OmoTrain®

Entlastung und Stabilisierung des Schultergelenks

Hilfsmittelnummer

05.09.01.0001



herausnehmbare Delta-Pelotte

INDIKATIONEN

- chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände
- Prävention/Rezidivprophylaxe
- · Arthrose (Gelenkverschleiß)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- komprimierendes Gestrick und Zug des Gurtsystems wirken zentrierend auf das Glenohumeralgelenk
- viskoelastische Delta-Pelotte mit Friktionsnoppen massiert bei Bewegung die Schulterweichteile; die Gelenkwahrnehmung wird verbessert, die Resorption von Ödemen und Ergüssen wird beschleunigt, Schmerzen werden gelindert
- Gurtführung spart den Brustbereich aus
- Delta-Pelotte kann wahlweise eingeklettet und nach Bedarf positioniert werden

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: gleiche Ausführung für rechts und links

Ersatzteile / Zusätze: siehe Seite 123 und Preisliste

GRÖSSE	0	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Umfang (cm)	20-22	22 24	24 24	24 20	20 22	22 24	26 40	110 7170 2080 00°





OmoTrain® S

Entlastung und Stabilisierung des **Schultergelenks**

Hilfsmittelnummer

05.09.01.0004





INDIKATIONEN

- · chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände
- · Prävention / Rezidivprophylaxe
- · Arthrose (Gelenkverschleiß)

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · komprimierendes Gestrick und Zug des Gurtsystems verbessern die Koadaption des Humeruskopfes zum Glenoid
- · viskoelastische Delta-Pelotte mit Friktionsnoppen massiert bei Bewegung die Schulterweichteile; dadurch werden Schmerzen gelindert, die Gelenkwahrnehmung wird verbessert und die gelenkstabilisierende Muskulatur aktiviert
- Delta-Pelotte kann wahlweise eingeklettet und positioniert werden
- · schnelles und einfaches Anlegen der Bandage durch direkte Gurtführung

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + Train-Gestrick
- + digitale Vermessung
- + Therapie-App

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: rechts, links

GRÖSSE	0	1	2	3	4	5	6	ARTIKEL-NR.
Umfang (cm)	20-22	22-24	24-26	26-29	29-32	32-36	36-40	110 7171 0080 +0°

^{+ =} Ausführung (6) rechts, (7) links ° = Größe (0-6)



OmoLoc®

Immobilisierung der Schulter

Hilfsmittelnummer

23.09.01.0062











weiche Unterleglaschen

Verschluss mit Fingertasche

breite Hand-/Armschlaufen stützen optional: Schultergurt

INDIKATIONEN

- · Immobilisierung, z.B. nach einer Schulteroperation
- · postoperativ, posttraumatisch, präoperativ
- · Luxation

VORTEILE UND WIRKWEISEN

- · Ruhigstellung des Schultergelenks in der 0°-Abduktionsstellung (innenrotiert), z.B. zur Sicherung des OP-Ergebnisses
- · Unterarm wird in der geforderten Beugung von 90-100° fixiert und dadurch können Schmerzen gelindert werden
- · sichere Fixierung und perfekter Sitz durch drei individuelle positionierbare Armschlaufen
- sichere und situative Anpassung durch Bauchverschluss mit Zuggurtsystem
- · hygienischer Vorteil durch die Konstruktion der Orthese
- · kein Schultergurt erforderlich; Fehlhaltungen und damit verbundene Verspannungen der gesunden Schulter werden so vermieden; jedoch ist der Schultergurt als Ersatzteil erhältlich

ANWENDUNGSHINWEISE

· Fixierung des Unterarms in der medizinisch therapeutischen korrekten Position, 90-100°

DAS BAUERFEIND-PLUS

- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv
- + digitale Vermessung

BESTELLOPTIONEN

Farben: titan

Ausführungen: rechts, links

optional: Schultergurt Ersatzteile / Zusätze:

siehe Seite 123 und Preisliste

GRÖSSE	1	2	ARTIKEL-NR.
Umfang Leib (cm)	bis 100	100-130	120 7360 1120 +0°
The second of th			







ERSATZTEILE, ZUBEHÖR UND **ZUSÄTZE**

VERSORGUNGSBEREICH FUSS UND SPRUNGGELENK

AchilloTrain® NEU

BEZ	EICHNUNG	ARTIKEL-NR.
01	Fersenkeil (für Bandagengröße 1–2)	11911080000001
02	Fersenkeil (für Bandagengröße 3–6)	11911080000002



AirLoc[®]

BEZ	EICHNUNG	ARTIKEL-NR.
01	Gebläseball für alte Produktvariante	12946840070000



MalleoLoc® L

BEZEICHNUNG	GRÖSSE	ARTIKEL-NR.
01 Gurt-Set	Universal	12913281000+00
02 Polster	Universal	12913291000+00
03 Pelotte		12913321000000








+ = Ausführung (6) rechts, (7) links

MalleoLoc° L3

BEZEICH	INUNG	GRÖSSE	ARTIKEL-NR.
01 Gu	rt-Set	Universal	12913281000+00

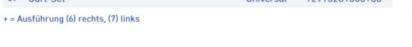



MalleoLoc*

BEZ	EICHNUNG	GRÖSSE°	ARTIKEL-NR.
01	Gurt, proximal	Universal	12913183123+00
02	Gurt, distal	Universal	12913183124000
03	Umlenkschnalle		12913093120000
04	Gurt-Set ohne Spangenpolster	Universal	12913023080+00
05	Gurt-Set mit Spangenpolster	1-2	12913023080+0°
06	Orthometer / Goniometer		12146740030000

^{+ =} Ausführung (6) rechts, (7) links



ValguLoc[®]

BEZ	EICHNUNG	GRÖSSE°	ARTIKEL-NR.
01	Gurt-Set	1-3	12913220000+0°





JBEHÖR UND ZUSÄT

ValguLoc[®] II

BEZ	EICHNUNG	GROSSE	ARTIKEL-NR.
01	Gurt-Set	Universal	12913220000000



Anziehhilfe

BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NR.
01 Anziehhilfe Bandagen	14002220050000



Xtern summit / frontier

BEZ	EICHNUNG	GRÖSSE	ARTIKEL-NR.
01	Schuhbefestigungsclip (5er Pack)		1291359100000^
02	Polster und Verschluss Xtern frontier		12913531000000
03	Polster und Gurte Xtern summit		1291352100000^
04	Fersenstopper		12913571000000
05	Extensionsstopper (für Xtern frontier Gr. S)	30 mm	12913541000001
06	Extensionsstopper (für Xtern frontier Gr. S–L und Xtern summit Gr. S)	40 mm	12913541000002
07	Extensionsstopper (für Xtern frontier Gr. M–L und Xtern summit Gr. M–L)	45 mm	12913541000003
08	Knöchel-Stabilisationsband		12913581000000



01 02 03 04 04 05 106 107 08

VERSORGUNGSBEREICH KNIE, OBERSCHENKEL UND HÜFTE

GenuTrain*

BEZ	ZEICHNUNG	FARBE	ARTIKEL-NR.
01	Noppenhaftband (5 cm breit, 1 m lang)	titan	11941230000000



GenuTrain° S

BEZ	EICHNUNG	GRÖSSE	ARTIKEL-NR.
01	Gurt-Set (für Bandagengröße 1-2)	1	129413230*0001
02	Gurt-Set (für Bandagengröße 3-4)	2	129413230*0002
03	Gurt-Set (für Bandagengröße 5-7)	3	129413230*0003
04	Gelenkstäbe	Universal	129413130*0+00







SofTec® Genu

BEZE	BEZEICHNUNG GRÖSSE		ARTIKEL-NR.
01	Gelenkschienen, lateral	Universal	12946021060+00
02	Gelenkschienen, medial	Universal	12946031060+00
03	Gelenkschutz (Sportschutz)		12946011070000
04	Limitierungs-Set (5 Abdeckkappen, 10 Arretierungsstifte)		12946070000000







SecuTec® Genu

FÜR FRONTAL UND DORSAL

BEZ	BEZEICHNUNG		ARTIKEL-NR.
01	Limitierungskeile (2× Rahmen + 2× E0)		12946161060000
02	Gelenkbeutel		12946511070000
03	Gelenkdeckel mit Vierteldrehverschluss (1 Stück)		12946451000000
04	Schnellverschluss-Set (4 Stück)		12946541000000
05	Gurtpolster-Set silikonisiert (2 Stück)		1294698000000^
06	Rahmen proximal	1-7	12946501**3+0°

FÜR FRONTAL ODER DORSAL

BEZ	EICHNUNG	GRÖSSE°	ARTIKEL-NR.
01	Gurt-Set, Version frontal	1-7	1294611207000°
02	Gurt-Set, Version dorsal	1-7	1294675107000°
03	Rahmenpolster-Set, Version frontal	1-7	12946131070+0°
04	Rahmenpolster-Set, Version dorsal	1-7	12946491070+0°
05	Gurtpolster-Set, Version frontal		1294617107000"
06	Gurtpolster-Set, Version dorsal	1-7	1294676107000°
07	Tibiakantenpolster (nur für Version frontal)		12946520070000
08	Rahmen distal, Version frontal	1-7	12946501**4+0°
09	Rahmen distal, Version dorsal	1-7	12946481054+0°




SecuTec® Genu Flex

т				
П				١
	IV.	Ε	U	
٦,				7

BEZ	EICHNUNG	GRÖSSE°	ARTIKEL-NR.
01	Kettenglieder-Set (10 Stück)		12946851050000
02	Mittelpolster-Set	0-6	1294686107000°
03	Gurt-Set	1-5	1294687107000°
04	Gurtpolster-Set	1-5	1294688107000°
05	Seitenpolster-Set		12946891070000
06	Limitierungskeile (2× Rahmen + 2× E0)		12946161060000
07	Gelenkdeckel mit Vierteldrehverschluss (1 Stück)		12946451000000

 $^{^{\}circ}$ = Größe (1 – 5), (0) wenn Größe 1 zu groß ist, (6) wenn Größe 5 zu klein ist

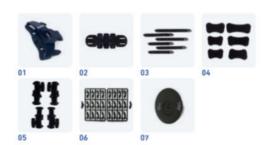

GenuTrain® OA

BEZ	EICHNUNG	ARTIKEL-NR.
01	Limitierungs-Set für Größe 1 und 2	12941660070001
02	Limitierungs-Set für Größe 3 und 4	12941660070003
03	Limitierungs-Set für Größe 5	12941660070005



^{+ =} Ausführung (6) rechts, (7) links

^{**=} Farbe (05) blau, (23) grün ^= (1) für Gr. 1–2, (3) für Gr. 3–4, (5) für Gr. 5–6, (7) für Gr. 7

^{**=} Farbe (05) blau, (23) grün += Ausführung (6) rechts, (7) links *= (1) für Gr. 1–2, (2) für Gr. 3–4, (3) für Gr. 5–6, (4) für Gr. 7

ERSATZTEILE, ZUBEHÖR UND ZUSÄTZE

SecuTec® OA

BEZEICHNUNG		GRÖSSE°	ARTIKEL-NR.
01	Gurt-Set	1-7	1294693000000°
02	Rahmenpolster-Set (inkl. Gelpolster)	1-7	12946940000+0°
03	Gurtpolster-Set	1-7	1294695000000°
04	Gurtpolster silikonisiert (2 Stück)		1294698000000^
05	Rahmen, distal (blau)	1-7	12946960050+0°
06	OA-Gelenkbeutel		12946970000000
07	Schnellverschluss-Set (4 Stück)		12946541000000
08	Limitierungskeile (2× Rahmen + 2× E0)		12946161060000
09	Inbusschlüssel 3 mm		19000070010102
10	Gelenkdeckel mit Vierteldrehverschluss (1 Stück)		12946451000000



MOS-Genu

BEZEICHNUNG		GRÖSSE°	ARTIKEL-NR.
zus	ATZTEILE		
01	Popliteal-Kreuzgurt (für Größe 1-2)		12146624050001
02	Popliteal-Kreuzgurt (für Größe 3)		12146624050003
03	Popliteal-Kreuzgurt (für Größe 4-5)		12146624050004
04	Popliteal-Pelotten	1-5	1214661409000°
05	Gelenkring	1-5	12146644050+0°
06	Ersatzteile-Set (Schrauben)		12146713000000
07	Abdeckscheiben (10er)		12146730000000
08	Orthometer / Goniometer		12146740030000
KUF	RZE VERSION		
09	Rahmen	1-5	1214664405#+0°
10	Polster-Set	1-5	12146654090+0°
11	Gurt-Set	1-5	1214667405000°
LAN	IGE VERSION		
12	Verlängerungsrahmen	Universal	1214669405#+00
13	Gurt für Verlängerungsrahmen proximal, für Gr. 1–3	1-3	1214668405300°
14	Gurt für Verlängerungsrahmen proximal, für Gr. 4–5		12146684053004
15	Gurt für Verlängerungsrahmen distal, für Gr. 1–3		12146684054001
16	Gurt für Verlängerungsrahmen distal, für Gr. 4–5		12146684054004
17	Polster für Verlängerungsrahmen	Universal	1214666409#000



CoxaTrain°

BEZEICHNUNG		ARTIKEL-NR.
01	Abdeckkappe	12925831000000
02	Glutealpelotte	12925851000000
03	Trochanter Pelotten/Polster	12925861000000
04	Limitierungsstifte (2×)	12925871000000
05	Gelenk mit Kappe, short	12925881001000
06	Gelenk mit Kappe, long	12925881002000
07	ISG-Pelotten (2-tlg.)	11984160000000





⁺⁼ Ausführung (6) rechts, (7) links ^= (1) für Gr. 1–2, (3) für Gr. 3–4, (5) für Gr. 5–6, (7) für Gr. 7

SofTec® Coxa

BEZEICHNUNG GRÖSSE°		ARTIKEL-NR.	
01	Kleinteilebeutel		12925210000000
02	Oberschenkelbandage, Ersatzteil	Universal	12925210080000
03	Beckengestrick	1-3	1292521008000°
04	Gelenk ungekröpft	Universal	12225231080000
05	Gelenk gekröpft	Universal	12225221080001
06	Limitierungs-Set (5 Abdeckkappen, 10 Arretierungsstifte)		12925340000000
07	Hüftschale mit Montage-Set	1-3	12925350000+0°
08	Inbusschlüssel 3 mm		19000070010102
09	09 Erweiterungsset beidseitige Versorgung gekröpft		12225260080000
10	Erweiterungsset beidseitige Versorgung unge	kröpft	12225270080000



HINWEIS: Aus diesen Ersatzteilen lässt sich keine komplette SofTec Coxa zusammenstellen.

VERSORGUNGSBEREICH WIRBELSÄULE UND HALS

Verschlussverlängerung

BEZ	EICHNUNG	GRÖSSE	ARTIKEL-NR.
01	Verschlussverlängerung Rückenprodukt, short Kann bei dem folgenden Produkt eingesetzt werden: SofTec Lumbo short	Universal	12984880082000
02	Verschlussverlängerung Rückenprodukt, long Kann bei folgenden Produkten eingesetzt werden: SofTec Lumbo long, SofTec Dorso long + short, SecuTec Dorso, SecuTec Lumbo, LumboLoc Forte, LordoLoc	Universal	12984881081 000



LumboTrain® straight LumboTrain® waisted



BEZEICHNUNG		GRUSSE	ARTIKEL-NR.	
01	lumbale Pelotte, inkl. Bezug	Universal	11984126000000	



LumboLoc® Forte

BEZ	EICHNUNG	GRÖSSE	ARTIKEL-NR.
01	Kreuzbeinpelotte	Universal	12184040050001
02	Lendenpelotte	Universal	12184050050001



SacroLoc*

BEZ	EICHNUNG	GRÖSSE	ARTIKEL-NR.
01	ISG-Pelotten (2-tlg.)	Universal	11984160000000





^{+ =} Ausführung (6) rechts, (7) links

UBEHÖR UND ZUS

SecuTec® Dorso

BEZ	EICHNUNG	GRÖSSE	ARTIKEL-NR.
01	CFK-Rahmen, long	Universal	12984630082000
02	Velourstasche, long		12984610082000
03	Klettpunkte Rahmen		12984650000000







SecuTec® Lumbo

BEZ	EICHNUNG	GRÖSSE	ARTIKEL-NR.
01	CFK-Rahmen	Universal	1298463008#000
02	Velourstasche		1298461008#000
03	Klettpunkte Rahmen		12984650000000
04	Abdominalpelotte (klein)	Universal	12985310000000
# = A	usführung (1) short, (2) long		









SofTec® Lumbo

BEZ	EICHNUNG	GRÖSSE°	ARTIKEL-NR.
01	Schale, short	1-3	1298482003100°
02	Schale, long	1-4	1298482003200°
03	CFK-Stab	Universal	1298483007#000
04	Korsettstab	Universal	1298484008#000
05	Abdominalpelotte (groß)	Universal	12984810080000
06	Gummiband		1298485008#000
07	Innengestrick, short	1-3	1298486008100°
08	Innengestrick, long	1-4	1298486008200°
09	Außengestrick, short	1-3	1298487 008100°
10	Außengestrick, long	1-4	1298487008200°



SofTec® Dorso

BEZ	EICHNUNG	GRÖSSE°	ARTIKEL-NR.
01	Reklinator (mit Polstern)	Universal	12984981170000
02	Reklinatorpolster	Universal	12985011000000
03	Set A (Kreuz + Montageset)		12984931000000
04	Kreuz		12984991170000
05	Montage-Set		12985021000000
06	Set B (2 Schultergute + 2 Polster)	Universal	12984940080000
07	Schultergurt (Inhalt: 2 Gurte)	Universal	12984960080000
80	Schulterpolster (Inhalt: 2 Polster)	Universal	12984970080000
09	Innengestrick	1-4	1298492008000°
10	Außengestrick	1-4	1298491008#00°



^{# =} Ausführung (1) short, (2) long

^{# =} Ausführung (1) short, (2) long

Spinova®

BEZEIC	HNUNG	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE°
01	Bauchverschluss, Set		
02	Grundbandage mit Korsettstäben**		1-7
03	Verschlussverlängerung		
04	Zuggurte, Set**		1-5
05	Seitenclip, Set (10 Stück)		
06	Rückenkassette, Set		
07	Schalensystem, Set**	small	
07	Schalensystem, Set	large	
08	Schalenbezug, Set**	short	1-2
00	Schatehbezug, Set	long	1-2
09	Überbrückungsrahmen	short	
	obel of dendingsi alimen	long	
10	Überbrückungspelotte	standard	
	obel ul dekungspetotte	short	
11	Klettstreifen Befestigung Rahmen, Set (10 Stück)		
12	Schulterpolster, Set		
13	Reklinator (ohne Bezug)	S-L	1-3
14	Schraubenset Immo		
15	Inbusschlüssel Immo		
16	Torxschlüssel Zugsystem		
17	Abdominalpelotte	groß	
18	Drehmomentschlüssel		



Stabi Classic	Support Plus	Unload Classic	Unload Plus	Immo Plus	Immo	Osteo	ARTIKEL- NUMMERN
•	•	•	•	•	•		12985450000000
	•		•	•			1298544000000°
•	•	•	•	•	•		12985650000000
	•		•	•	•		1298546000000°
	•		•	•	•		12985470000000
	•		•	•	•		12985480000000
				•	•		12985540000001
				•	•		12985540000002
				•			1298566000100°
				•			1298566000200°
		•	•				12985520001000
		•	•				12985520002000
	•						12985490000000
	•						12985490001000
		•	•				12985500000000
						•	12985710000000
						•	1298570000000°
				•	•		12985560000000
				•	•		12985570000000
	•		•	•	•		12985580000000
	•		•	•			12984810080000
	•		•	•	•		12985600000000

** GRÖSSENZUORDNUNG (in cm)	70-80	80-90	90 – 100	100-110	110 – 120	120 – 130	130 – 140
Produkt	1	2	3	4	5	6	7
Grundbandage	1	2	3	4	5	6	7
Zuggurte	1	2	3	4		5	
Schalensystem (Standardhöhe°)	1 (small)		2 (large)				
Schalenbezug	1 (short/long)			2 (shor	t/long)		

 $^{^{\}circ}~$ für Patient:innen mit einer Körpergröße größer als $170\,\mathrm{cm}$

VERSORGUNGSBEREICH HAND, **ELLENBOGEN UND SCHULTER**

ManuTrain[®]

BEZEICHNUNG		GRÖSSE	ARTIKEL-NR.	
01	Gurt (für die Größen 1-2)	1	119515230*0+01	
02	Gurt (für die Größen 3-6)	2	119515230*0+02	



ManuLoc*long

BEZ	EICHNUNG	GRÖSSE	ARTIKEL-NR.
01	Ersatzgurte (4 Stück), Farbe titan	Universal	12953430080000



ManuLoc* long Plus

BEZ	EICHNUNG	GRÖSSE	ARTIKEL-NR.
01	Fingerauflage mit Gurt, Farbe titan	1	1295342008000#
02	Ersatzgurte (4 Stück), Farbe titan	Universal	12953430080000





= Ausführung (1) Größe S, (3) Größe L

ManuLoc® Rhizo

BEZ	EICHNUNG	GRÖSSE°	ARTIKEL-NR.
01	Daumenaufsatz	0-3	12953460080+0°
02	Ersatzgurte (4 Stück), Farbe titan	Universal	12953430080000





ManuLoc® Rhizo long

BEZ	EICHNUNG	GRÖSSE°	ARTIKEL-NR.	
01	Daumenaufsatz	0-3	12953460080+0°	
02	Ersatzgurte (4 Stück), Farbe titan	Universal	12953430080000	

^{+ =} Ausführung (6) rechts, (7) links





ManuLoc® Rhizo long Plus

BEZEICHNUNG		GRÖSSE	ARTIKEL-NR.
01	Daumenaufsatz	0-3	12953460080+0°
02	Fingerauflage mit Gurt, Farbe titan	1	1295342008000#
03	Ersatzgurte (4 Stück), Farbe titan	Universal	12953430080000

- + = Ausführung (6) rechts, (7) links
- # = Ausführung (1) Größe S, (3) Größe L

EpiTrain°

BEZEICHNUNG		GRÖSSE°	ARTIKEL-NR.
01	Gurt, Farbe blau	0-6	1196163408000°





Maßabnahme für die Fingerauflagen Größe S: bis 18 cm Größe L: bis 19,5 cm

^{* =} Farbe (1) beige, (5) titan, (7) schwarz + = Ausführung (6) rechts, (7) links

ZUBEHÖR UND ZUSÄTZ

RhizoLoc® OA

BEZEICHNUNG ARTIKEL-NR. 12953341000000 01 Daumenwickelgurte (2er) OmoTrain[®] BEZEICHNUNG ARTIKEL-NR. 01 Umlenkschnalle, Farbe grau 11971720000000 OmoLoc[®] BEZEICHNUNG GRÖSSE ARTIKEL-NR. 12975060000000 01 Schultergurt Universal

Bei Verwendung von nicht original Bauerfeind-Ersatzteilen entfällt die Gewährleistung auf das gesamte Produkt, in dem das Ersatzteil zur Anwendung kommt.

WERKZEUGBEDARF ORTHESEN VON BAUERFEIND

LEGENDE	Innens	echskant	(Inbus)		Torx		Schere	Maulschlüssel 16
 notwendig optional enthalten im Lieferumfang 	o —		•		_8	(Schlüssel der MOS)		
	1,5	2,5	3	15	20	40		
CaligaLoc ³							0	
Spinova Stabi Classic / Unload							0	
Spinova Support Plus/Unload Plus						•	0	
Spinova Immo / Immo Plus		•				•	0	0
Spinova Osteo							•	
SofTec Lumbo ³							0	
SofTec Dorso ^{1,2}		•					•	
GenuTrain S Pro ³	•							
SecuTec Genu teilmontiert ¹					•			
SecuTec 0A ¹			•					
SecuTec OA teilmontiert ¹			•		•			
MOS Genu ¹				•				•
SofTec Coxa			•				•	
CoxaTrain							0	
OmoLoc							0	
RhizoLoc OA							•	



² weitere Werkzeuge, wie Puksäge o.ä. zum Kürzen des Rahmens, Werkzeug (Hammer o.ä.) zum Einschlagen / Eindrücken der Einschlagmuttern nötig





ZUSATZPRODUKTEDIE PERFEKTE ERGÄNZUNG FÜR DEN ALLTAG









01 Anziehhilfe für Bandagen

140 0222 0050 000

Die serienmäßige Anziehhilfe aus silikonbeschichtetem Polyamid spart Zeit und Kraft beim Anlegen von Train-Bandagen für das Sprunggelenk und der Handgelenkbandage ManuTrain.

02 Wäschenetz

10 Stück im Display: 262 6230 0000 000 **Stück:** 262 6200 0000 000

Sicherer Schutz bei der Maschinenwäsche: Der Reißverschluss-Beutel aus dauerhaftem und besonders feinmaschigem Gewebe hilft beim Sortieren der Wäsche und schont zuverlässig Ihre Bandagen und Kompressionsstrümpfe.











03 Waschmittel 180 ml

6 Stück im Display: 262 4230 0000 000 **Stück:** 262 4200 0000 000

Das Waschmittel reinigt die Kompression-Produkte besonders schonend. Spezielle Wirkstoffe pflegen das empfindliche Gestrick bei der täglichen Wäsche. Es behält Form und Farbe und fühlt sich angenehm an.



04 Hygieneset Bandagen/Orthesen

191 0006 0001 020

Ihre Kunden können die Wirkung der Produkte am besten bei einem Test direkt erspüren. Um bei der Produkttestung Ihre Kunden und das Produkt zu schützen, bitten wir Sie, bei der Anprobe den Unterziehstrumpf zu benutzen. Es gibt eine Uni-Version, mit der Sie alle Umfänge abdecken können.

Tipp: Ziehen Sie vorab den Unterstrumpf in das Produkt und schlagen Sie den oberen und unteren Rand um. Dann ziehen Sie beides gleichzeitig hoch.



INDIVIDUELLE VERMESSUNG

MASS-**VERSORGUNG**

MASSBESTELLUNG GenuTrain®

ion

Umrang

*BAUERFEIND® BAUERFEIND. COM ☐ Kostenvoranschlag ☐ Bestellung

Hallband (+5cm zur Länge) Klettverschluss. Angaben zum Patienten ... O adipos D weiblich O muskulös Für lalache Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigun

O links

Shurah S. P.

O beige

Knie

RICHTIG MASS NEHMEN FÜR EINEN OPTIMALEN THERAPIEERFOLG

Medizinische Hilfsmittel können nur dann optimal wirken, wenn sie genau passen. Dies setzt unter anderem voraus, dass die relevanten Körpermaße exakt ermittelt werden. Deshalb haben wir für die Maßversorgung verschiedene Bestellblätter entwickelt. Damit können Sie schnell und unkompliziert das gewünschte Bauerfeind-Produkt in der benötigten Ausführung anfordern.

Die einzelnen Bestellblätter können Sie jederzeit unter nachfolgendem Link downloaden: experts.bauerfeind.com/downloads



TIPPS ZUR MASSABNAHME

Vermessen Sie alle auf den Maßblättern angegebenen Werte – nur bei Vollständigkeit der Daten ist die passgenaue Maßanfertigung möglich.

Personen mit ausgeprägter Schwellneigung vermessen Sie nach Möglichkeit morgens.

Setzen Sie Längenmarkierungen mit einem Kajal oder einem anderen hautverträglichen Stift auf die Haut, um Umfangsmessungen sicher und reproduzierbar zu gestalten.

Bei einer beidseitigen Versorgung sollten Sie jede Seite einzeln vermessen.

Messen Sie nicht auf Zug.

Kontrollieren Sie nach der Vermessung, ob alle erforderlichen Längen- und Umfangsmaße angegeben wurden.

Knie

Maßabnahme erfolgt im Stehen bei 30° Beinstellung, wenn es die körperliche Konstitution zulässt.

Alle Maße sollten am unbekleideten Bein genommen werden.

Zeigt der Kunde ein schwaches Bindegewebe, Hautlappen etc. kann das Anlegen einer Feinstrumpfhose den Messvorgang vereinfachen.

Messung erfolgt seitlich am Bein, ausgehend von der Mitte der Kniescheibe.

Je nach Produkt sollte die erforderliche Mindestlänge der Umfangsmaße beachtet werden.

Ab einem Oberschenkelumfang von mehr als 60 cm wird die Anbringung eines Haftbandes an der Bandage empfohlen.

Fuss

Längenabnahme erfolgt im Stehen, wenn es die körperliche Konstitution zulässt.

Fußlänge wird außen ausgehend von der Ferse bis zum kleinen Zehengrundgelenk gemessen.



GenuTrain®

	141		141
			E info@bauerfeind.com F Deutschland +49(0)800 0 0105 25 F Österreich +43(0)800 44 30 131 F Schweiz +41(0)56 485 8259
Kommission			☐ Kostenvoranschlag
(z.B. Patientenname, Patientenkürzel)			☐ Bestellung
	Umfang	Länge	Knie □ links □ rechts
	f¹	e-f1	Farbe ☐ titan ☐ beige
	f	e-f	Extras* Haftband (+5 cm zur Länge)
	е		Klettverschluss oben**
			Angaben zum Patienten***
	d	e – d	☐ männlich ☐ weiblich
			adipös muskulös
	С	e-c	Alter Körpergröße
	b ^e	e – b ^e	, 0
\			 aufpreispflichtig nicht in Kombination mit Haftband möglich; nicht zirkulär optional, bitte bei anatomischen Besonderheiten für eine passgenaue Anfertigung angeben
Für eine korrekte Ve erforderlich.	ersorgung sind unbedi	ingt alle Maßangaben	Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen werden nicht zurückgenommen.
Oberschenkel: Do Kniemitte (e) me dann unbedingt l	en Umfang mindestens ssen. Wenn der Umfang höher messen, mindest e-f ¹ Serie = 19cm)	g bei f¹ größer als 47 cm ist,	
Oberschenkelan	satz (ca. Mitte zwischen	e und f ¹)	
Kniemitte			
d dünnste Stelle u	nterhalb des Knies (ca.	5–6cm unterhalb e)	
(größter) Wadeni	umfang		
o° unterer Bandage Länge e–b° mind	enabschluss d. 12cm (zur Info: Länge	e e – b° Serie = 13 cm)	Stempel
linweise:			Kunden-Nr.
Bei leichter Flexion Die Längenmaße w Der Abstand e-f¹s	sollte nicht kürzer als d	e des Beines genommen. ler Abstand e-b ° sein.	Unterschrift
Ab einem Umfang v Noppenhaftbands.	on t'> 60 cm empfiehlt	sich die Anbringung eines	Datum



GenuTrain® P3

142 142 E info@bauerfeind.com Kommission -**F** Deutschland +49 (0) 800 0 01 05 25 (z.B. Patientenname) F Österreich +43 (0) 800 44 30 131 +41 (0) 56 485 82 59 **F** Schweiz ☐ Kostenvoranschlag ☐ Bestellung ☐ **Short** (bis ca. 170 cm Körpergröße) Umfänge Längen ☐ links □ rechts **Farbe** $e - f^1 = 18 cm$ ☐ titan □ beige Sitz des Korrekturzuges ☐ Abweichung (medial) □ Standard (lateral) Extras* ☐ Haftband (+5 cm zur Länge) Angaben zum Patienten** ☐ männlich ☐ weiblich ☐ adipös muskulös e-dKörpergröße: _____ cm Alter: _ e-c * aufpreispflichtig – bitte berücksichtigen Sie die zusätzliche Länge beim Vermessen der Patienten

** optional, bitte bei anatomischen Besonderheiten für eine $e-b^e=15 cm$ passgenaue Anfertigung angeben Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen werden nicht zurückgenommen. Für eine korrekte Versorgung sind unbedingt alle ☐ long (ab ca. 170 cm Körpergröße) Maßangaben erforderlich. Umfänge Längen f¹ Oberschenkel/oberer Bandagenabschluss Oberschenkelansatz (ca. Mitte zwischen e und f1) e Kniemitte f1 $e - f^1 = 22 cm$ d dünnste Stelle unterhalb des Knies, ca. 5-6 cm c (größter) Wadenumfang be unterer Bandagenabschluss e-f e-dC e-c Stempel be $e - b^e = 17 cm$ Kunden-Nr. Hinweise: Bitte beachten Sie: • im Stehen, bei leichter • min. Umfang $f^1 = 39$ cm Flexion (30°) messen Unterschrift min. Umfang f = 37 cm· Längenmaße an • min. Umfang e = 30 cm Beinaußenseite nehmen • min. Umfang b^e = 28 cm Datum



GenuTrain® S

	143		143	
Kommission (z.B. Patientenname, Patientenkürzel)			E info@bauerfeind.com F Deutschland +49 (0) 800 0 0105 25 F Österreich +43 (0) 800 44 30 131 F Schweiz +41 (0) 56 485 82 59	
			☐ Kostenvoranschlag	
	Umfang	Länge	☐ Bestellung	
	f ¹	short: e-f1 = 18 cm long: e-f1 = 21 cm	Knie ─ □ links □ rechts	
	f	e-f	☐ kurz/short	
	•		(Bandagenlänge Oberschenkel [e-f¹] = 18 cm)	
	е		☐ lang / long (Bandagenlänge Oberschenkel $[e-f^1] = 21 cm$)	
			Extras*	
	d	e-d	☐ Haftband (+5cm zur Länge) —	
			Angaben zum Patienten** ☐ männlich ☐ weiblich	
	С	e-c	_	
\ /	b ^e	e – b ^e = 18 cm	☐ adipös ☐ muskulös	
			Alter Körpergröße	
erforderlich.	rsorgung sind un	bedingt alle Maßangaben	 aufpreispflichtig – bitte berücksichtigen Sie die zusätzliche Länge beim Vermessen der Patienten optional, bitte bei anatomischen Besonderheiten für eine passgenaue Anfertigung angeben Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen werden nicht zurückgenommen. 	
		oberhalb der Kniemitte (e) messen. berhalb der Kniemitte (e) messen.		
f Oberschenkelans	satz			
e Kniemitte				
d dünnste Stelle u	nterhalb des Knie	S		
c Wadenumfang: D Kniemitte (e) me	•	estens 12 cm unterhalb der		
b ^e Wadenumfang 18	8 cm unterhalb de	r Kniemitte (e)		
Hinweise: Maßanfertigung nur in der Farbe titan. Bei leichter Flexion (30°) messen. Die Längenmaße werden an der Außenseite des Beines genommen. Die Auswahl der Variante short / long richtet sich nach den individuellen Patientenmaßen. Die Long-Version wird für Personen ab einer Körpergröße von 1,80 mempfoblen.			Stempel	
empfohlen. • Für eine Versorgung sind die folgenden Umfangsmaße mindestens erforderlich: f (14 cm oberhalb des Knies): mindestens 38 cm e (Kniemitte): mindestens 32,5 cm			Kunden-Nr.	
c (12 cm unterhalb des k	mies): mindestens 28 c	m	Unterschrift	
			Datum	



GenuTrain® S Pro

	144		144		
Kommission (z.B. Patientenname, Patientenkürzel)			E info@bauerfeind.com F Deutschland +49 (0) 800 0 010525 F Österreich +43 (0) 800 44 30 131 F Schweiz +41 (0) 56 485 82 59		
	Umfang	Länge	☐ Bestellung		
	f¹	short: e-f ¹ = 18 cm long: e-f ¹ = 21 cm	Knie ─ □ links □ rechts		
	f	e-f		8 cm)	
	е		☐ lang / long (Bandagenlänge Oberschenkel [e-f¹] = 21 cm)		
			Extras* ☐ Haftband (+5cm zur Länge)		
	d	e – d	Angaben zum Patienten**		
	c	e-c	☐ männlich ☐ weiblich		
	b ^e	e – b ^e = 18 cm	— ☐ adipös ☐ muskulös		
			Alter Körpergröße		
Für eine korrekte Veerforderlich.	ersorgung sind ur	rbedingt alle Maßangaben	 aufpreispflichtig – bitte berücksichtigen Sie die zusätz beim Vermessen der Patienten optional, bitte bei anatomischen Besonderheiten für e passgenaue Anfertigung angeben Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfe werden nicht zurückgenommen. 	eine	
		oberhalb der Kniemitte (e) messen. Berhalb der Kniemitte (e) messen.			
f Oberschenkelar	satz				
e Kniemitte					
d dünnste Stelle ı	interhalb des Knie	S			
c Wadenumfang: Kniemitte (e) me		estens 12 cm unterhalb der			
b ^e Wadenumfang 1	8 cm unterhalb de	er Kniemitte (e)			
Hinweise: Maßanfertigung nur in der Farbe titan. Bei leichter Flexion (30°) messen. Die Längenmaße werden an der Außenseite des Beines genommen. Die Auswahl der Variante short / long richtet sich nach den individuellen Patientenmaßen. Die Long-Version wird für Personen ab einer Körpergröße von 1,80 m empfohlen. Für eine Versorgung sind die folgenden Umfangsmaße mindestens erforderlich: f (14 cm oberhalb des Knies): mindestens 38 cm e (Kniemitte): mindestens 32,5 cm		Stempel Kunden-Nr.			
c (12 cm unterhalb des	Knies): mindestens 28 (cm	Unterschrift		
			Datum		



MalleoTrain[®]

111 111 E info@bauerfeind.com $\textbf{F} \ \, \text{Deutschland} \quad \text{+49 (0)} \, 800 \, \, 0 \, \, 01 \, 05 \, 25$ F Österreich +43 (0) 800 44 30 131 +41 (0) 56 485 82 59 **F** Schweiz Kommission (z.B. Patientenname, ■ Bestellung Patientenkürzel) Fuss ☐ links ☐ rechts **Umfang** Länge Farbe □ beige ☐ titan b^1 $A - b^1$ Extras* b A - bAngaben zum Patienten** □ weiblich h ☐ adipös muskulös Körpergröße _ (Fußlänge) * aufpreispflichtig ** optional, bitte bei anatomischen Besonderheiten für eine passgenaue Anfertigung angeben Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen werden nicht zurückgenommen. Für eine korrekte Versorgung sind unbedingt alle Maßangaben erforderlich. Wadenansatz: Den Umfang mindestens 16 cm oberhalb der Ferse (A) messen. kleinster Umfang oberhalb des Knöchels b Spann (zirkuläres Maß vom Spann über die Ferse gemessen) h Umfang hinter dem Kleinzehengrundgelenk а Α A-a Fußlänge ohne Spitze (außen am Fuß gemessen mind. 14 cm) Stempel Kunden-Nr.

Unterschrift


Datum



EpiTrain®

161

Kommission
(z.B. Patientenname,
Patientenkürzel)

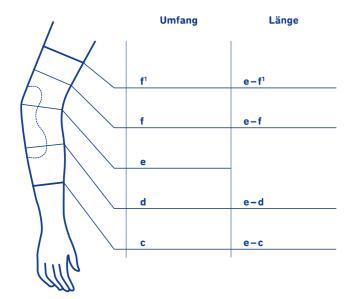

Für eine korrekte Versorgung sind unbedingt alle Maßangaben erforderlich.

- f¹ Oberarm: Den Umfang mindestens 10 cm oberhalb der Ellenbogenbeuge (e) messen.
- f Oberarmansatz
- e Ellenbogenbeuge
- d Mitte Unterarmmuskel
- c Muskelansatz: Den Umfang mindestens 12 cm unterhalb der Ellenbogenbeuge (e) messen.

Hinweise:

- Bei leichter Flexion (30°) messen.
- Die Längenmaße werden an der Innenseite des Armes genommen. Ausgangspunkt für die Ermittlung ist die Ellenbogenbeuge (e).

161

E info@bauerfeind.com

 F Deutschland
 +49 (0) 800 0 01 05 25

 F Österreich
 +43 (0) 800 44 30 131

 F Schweiz
 +41 (0) 56 485 82 59

■ Bestellung

Arm	
□ links	☐ rechts
Farbe	

☐ titan

☐ Haftband (+3 cm zur Länge)

Klettverschluss

□ oben** □ unten

Angaben zum Patienten***

männlich	weiblich

□ adipös	☐ muskulös

Alter _____ Körpergröße ____

□ beige

* aufpreispflichtig

** nicht in Kombination mit Haftband möglich; nicht zirkulär

Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen werden nicht zurückgenommen.

 Stempel				
Kunden-Nr.				
Unterschrift				
Datum				

^{***} optional, bitte bei anatomischen Besonderheiten für eine passgenaue Anfertigung angeben

BESTELLBLATT T +49 (0) 800 001 05 20 F +49 (0) 800 001 05 25 Bauerfeind AG Triebeser Straße 16 07937 Zeutenroda-Triebes info@bauerfeind.com		7								
1 05 1 05		9								
LB) 000) 000 Triebe		D								
800 800 800 3 albe 16	Зе	7								
(0) (0) ind AC er Stra euten	Größe	က								
BESTELLBL T +49 (0) 800 001 F +49 (0) 800 001 Bauerfeind AG Triebeser Straße 16 07937 Zeutenroda-Triebes info@bauerfeind.com		2								
□ ⊢ □ 8g irit		-								
		0								
	-s nu	_								
	Aus- führung	œ								
		long								
	Version	short long								
		schwarz								
Kunden-Nr. Ansprechpartner Datum Mitarbeiter Unterschrift										
echpa echpa oeiter schriff	Farbe	beige								
Kunden-Nr. Ansprechpar Datum Mitarbeiter Unterschrift		titan								
		#								
Lieferadresse (falls abweichend)	Artikel									
i li										
1	_									
	mme								-	
	Artikelnummer									
	Artil									
npel)										
(Sten									otizen	
Firma (Stempel)									Ihre Notizen	
			 	 _	 	 	 	 		

Wir verweisen auf unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Für ergänzende Hinweise zu Indikationen, Kontraindikationen und der Handhabung des von Ihnen gewünschten Produkts bitte die jeweilige Gebrauchsanweisung konsultieren!

DATENSCHUTZ-HINWEIS:

Die von Ihnen im Rahmen der Bestellung erhobenen und gegebenenfalls an uns übermittelten Patientendaten werden von uns zur Auftragsbearbeitung erfasst und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen gespeichert. Bitte informieren Sie die betreffenden Patienten hierüber und holen Sie, sofern erforderlich, die entsprechende Einwilligung hierfür ein, bevor Sie den Auftrag an uns übermitteln. Bei Nichtbeachtung können Bußgelder und andere Zwangsmaßnahmen verhängt werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter bauerfeind.de/ds.

HAFTUNGSHINWEISE:

Alle Angaben dieser Broschüre haben den Stand des Zeitpunkts der Drucklegung. Diese Broschüre ermöglicht – je nach Darstellung – einen ersten Überblick über das Fachgebiet und schlägt ausgewählte medizinische Diagnose-/Behandlungsmöglichkeiten vor. Obgleich wissenschaftlich fundiert, erheben die Darstellungen keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit/Vorstellung aller Lehrmeinungen. Sämtliche Inhalte dieser Broschüre/oder deren – auch auszugsweise – Online-Darstellung, insbesondere solche zu Diagnostik und Behandlungsformen (Texte, Bilder, Graphiken etc.), verstehen sich als unverbindliche Unterstützung der durch Arzt und Fachpersonal auszuwählenden Therapie. Diese Broschüre ersetzt nicht die notwendige persönliche Anamnese und deren fachliche Gesamtbewertung eines Arztes/Fachpersonals unter Einbeziehung ggf. bereits laufender Therapien.

Die Inhalte der Broschüre sind nur für das Fachpersonal bestimmt, nicht für Fachfremde, insbesondere nicht für Patienten.

In Zweifelsfällen suchen Sie bitte ergänzenden fachlichen Rat, auch wir unterstützen hierbei gern.

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER BAUERFEIND AG (AGB)

GELTUNGSBEREICH: DEUTSCHLAND

Preise

verstehen sich netto in Euro ab Werk zuzüglich Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe.

Versand

auf Rechnung und Gefahr des Käufers, auch dann, wenn dieser die Beförderungskosten nicht trägt. Betriebsstörungen bei uns oder einem unserer Lieferanten, Personalmangel, Streik, Aussperrung sowie höhere Gewalt berechtigen uns, die Lieferzeiten zu verlängern und entbinden uns für die Dauer der Behinderung von jeder Lieferverpflichtung.

Versandkosten

berechnen wir pauschal bei einem Nettoauftragswert des Gesamtauftrages bis 50 Euro in Höhe von sieben Euro und bis 200 Euro in Höhe von vier Euro. Maßanfertigungen sind versandkostenfrei. Besondere Versandwünsche werden nach Aufwand berechnet.

Retouren

außerhalb der Gewährleistung werden grundsätzlich erst nach vorheriger Ankündigung und Abstimmung der Rücksendung (Avisierung) unter Beifügung der Lieferpapiere entgegengenommen, wobei wir den einwandfreien Zustand der Ware voraussetzen. Ein generelles Verweigerungsrecht für solche Retouren behalten wir uns vor.

Wir berechnen für den Bearbeitungsaufwand von Retouren außerhalb der Gewährleistung bei Rücksendung bis einen Monat ab Lieferdatum zehn Euro pro Rücksendung. Bei Rücksendungen ab einen Monat nach Lieferdatum werden 20 Prozent des Nettoauftragswertes, maximal aber 25 Euro pro Artikel und Stück als Bearbeitungsgebühr berechnet, bei Rücksendung ab sechs Monaten bis zwölf Monaten nach Lieferdatum werden 40 Prozent des Nettoauftragswertes, maximal jedoch 50 Euro pro Artikel und Stück berechnet.

Die Entgegennahme von Retouren außerhalb der Gewährleistung, insbesondere für Maß- und Sonderanfertigungen, sowie für Rücksendungen über zwölf Monate nach Lieferdatum ist ausgeschlossen.

Zahlungen

sind nach Lieferung sofort fällig. Bei Teilnahme am Bankeinzugsverfahren gewähren wir vier Prozent Skonto, bei Zahlung innerhalb von zehn Tagen nach Rechnungsdatum drei Prozent Skonto. Ansonsten gilt als Zahlungsziel 30 Tage netto. Nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechnungsdatum befindet sich der Käufer im Zahlungsrückstand. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt die Lieferung nur noch gegen Vorauskasse.

Wir berechnen ab dem Zeitpunkt eingetretenen Zahlungsrückstandes Verzugszinsen in Höhe von acht Prozent über dem jeweiligen Basiszinssatz. Bei der Zahlung per Scheck, Wechsel usw. gilt diese erst als erbracht, wenn der Betrag unwiderruflich unserem Konto gutgeschrieben wurde.

Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an allen gelieferten Waren vor, bis der Käufer sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit uns beglichen hat. Der Eigentumsvorbehalt gilt anteilmäßig auch dann, wenn die Ware be- oder verarbeitet worden ist. Im Falle der Weiterveräußerung gelten die daraus entstehenden Forderungen an Dritte bis zur Höhe unserer Gesamtforderungen als vorbehaltlos an uns abgetreten. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Käufer trotz Abtretungermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Käufer nicht in Zahlungsverzug ist. Ist dies jedoch der Fall, können wir verlangen, dass der Käufer die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

Der Käufer darf die Liefergegenstände weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstiger Verfügungen durch Dritte hat der Käufer uns unverzüglich zu benachrichtigen und uns alle Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Wahrung unserer Rechte erforderlich sind.

Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Käufers freizugeben, als der Wert die zu sichernde Forderung, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20 Prozent übersteigt.

Reklamation

Gewährleistungsansprüche wegen offensichtlicher Mängel erlöschen, wenn sie nicht unverzüglich gemäß §377 HGB uns gegenüber schriftlich geltend gemacht werden. Im Übrigen verjähren Gewährleistungsansprüche ein Jahr nach Übergabe des Kaufgegenstandes. Ist die Ware mangelhaft, so liefern wir nach unserer Wahl Ersatz oder bessern nach Reparaturen können aus hygienischen Gründen nur an gewaschenen bzw. hygienisch einwandfreien Artikeln ausgeführt werden. Bei der Einsendung von ungewaschener Ware behalten wir uns die Berechnung

einer angemessenen Aufwandspauschale vor. Solange wir unseren Verpflichtungen zur Nacherfüllung nachkommen, insbesondere zur Behebung von Mängeln oder zur Lieferung einer mangelfreien Sache, hat der Kunde kein Recht, eine Herabsetzung der Vergütung zu verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag zu erklären, sofern nicht ein Fehlschlagen der Nacherfüllung vorliegt. Nicht unter die Gewährleistung fallen Fehler, die auf normalen Verschleiß und Überbelastung, missbräuchliche Verwendung, Vernachlässigung der Pflege sowie Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zurückzuführen sind.

Haftung

Wir haften nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz sowie für die Verletzung solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf (»wesentliche Pflichten«).

Im Hinblick auf die leicht fahrlässige Verletzung einer wesentlichen Pflicht ist unsere Haftung auf bei Vertragsschluss vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt.

Im Hinblick auf die leicht fahrlässige Verletzung vertraglicher Pflichten, die keine wesentlichen Pflichten sind, haften wir nicht.

Soweit unsere Haftung beschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die Haftung unserer Arbeitnehmer, Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse gelten nicht bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos, für die Haftung aufgrund des Produkthaftungsgesetzes sowie für Körperschäden (Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit). Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist hiermit nicht verbunden.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Diese AGB unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf (CISG).

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist Gera, sofern der Käufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind jedoch in allen Fällen ebenfalls berechtigt, Klage am Erfüllungsort oder am allgemeinen Gerichtsstand des Nutzers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere bezüglich ausschließlicher Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

Erfüllungsort für die Lieferung ist der Sitz unseres Unternehmens.

Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise nichtig, unwirksam, undurchführbar oder nicht durchsetzbar (»Fehlerhafte Bestimmung«) sein oder werden, so werden die Wirksamkeit und die Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen dieser AGB davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich vielmehr bereits jetzt, anstelle der Fehlerhaften Bestimmung eine solche zu vereinbaren, die im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten dem am nächsten kommt, was die Parteien nach dem Sinn und Zweck dieser Vereinbarung vereinbart hätten, wenn sie die Fehlerhaftigkeit der Bestimmung erkannt hätten. Beruht die Fehlerhaftigkeit einer Bestimmung auf einem darin festgelegten Maß der Leistung oder der Zeit (Frist oder Termin), so ist die Bestimmung mit einem dem ursprünglichen Maß am nächsten kommenden rechtlich zulässigen Maß zu vereinbaren. Gleiches gilt für etwaige Regelungslücken in diesen AGB. Diese salvatorische Klausel hat keine bloße Beweislastumkehr zur Folge, sondern bedingt § 139 BGB insgesamt ab.

Schriftform

Änderungen und/oder Ergänzungen dieser AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform (eigenhändige Unterschrift); dies gilt auch für Änderungen und Ergänzungen dieses Schriftformerfordernisses.

Datenschutzklausel/Gesprächsaufzeichnung

Zu Qualitätszwecken zeichnen wir stichprobenartig Telefonate zwischen dem Käufer und unseren Mitarbeitern auf. Diese Telefonaufzeichnungen dienen ausschließlich dem Zweck, unsere Leistung zu verbessern und werden nach ihrer Auswertung gelöscht. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Käufer willigt hiermit in die Aufzeichnungen von Telefonaten zu ausschließlich diesem Zweck ein. Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft vom Käufer widerrufen werden.

Weitere Informationen zu den jeweils aktuellen Datenschutzgrundsätzen der Bauerfeind AG unter www.bauerfeind.de/ds

MEHR LEBENSQUALITÄT FÜR IHRE KUNDEN!

Haben Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche? Kontaktieren Sie uns:

BAUERFEIND AG

Triebeser Straße 16 07937 Zeulenroda-Triebes Germany

T +49 (0) 800 0 01 05 20

F +49 (0) 800 0 01 05 25

E info@bauerfeind.com

